

Генеральный директор
ООО «Медресурс»

«20» сентября 2010 г.



Зажим для пуповины одноразовый SUYUN

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Зажим для пуповины одноразовый SUYUN (далее – зажим) производства Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd, No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China, предназначен для зажима пуповины сразу же после рождения ребенка.

Предполагаемый класс потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000: 1.

2. Основные технические характеристики.

Зажим легок в применении, имеет гладкую поверхность без зазубрин и шероховатостей, что позволяет избежать случай травм у новорожденного.

Специальный замок с затвором предотвращает преждевременное раскрытие зажима.

Насечки вдоль всего зажима с его внутренней стороны удерживают пуповину в одном положении.

Зажим производится из ABS, изготовлен методом термообработки под высоким давлением из гранул с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса ABS под давлением поступает в форму – матрицу.

Длина зажима 50 мм.

3. Противопоказания к применению.

Недопустимо использование зажимов при повреждении упаковки.

4. Подготовка изделия к работе.

- Вскройте упаковку.
- С соблюдением правил асептики достаньте зажим.
- Используйте зажим по назначению.

5. Правила хранения и использования.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Вскрывать упаковку зажима непосредственно перед использованием, чтобы избежать загрязнения.

Следует обращать внимание на дату истечения срока годности, указанную на упаковке, и целостность упаковки.

Срок годности зажима для пуповины одноразового SUYUN 5 лет с даты стерилизации.

Сшито и заверено печатью 2
(9.11.18 лист 18)
Лисвин Д.О.

