

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Медресурс»


Литвин Д. О.
«01» августа 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструменты и принадлежности для новорожденных

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральный директор
ООО «Медресурс»



Литвин Д.О.



JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO.,LTD

No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China

<http://www.suyunmedical.com>

TEL: 86-518-85476682,85608151


E-mail: export@suyunmedical.com

FAX: 86-518-85451119, 85466033

Техническое описание Зажим для пуповины одноразовый стерильный.


Зажим для пуповины предназначен для пережатия пуповины при рождении ребенка.

Зажим для пуповины произведён из ABS .

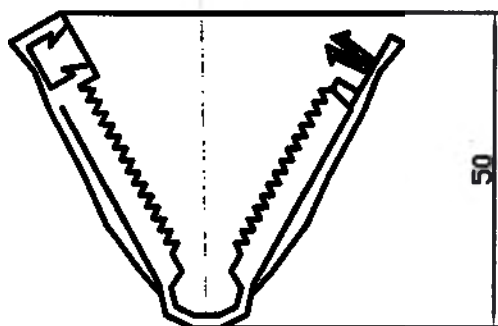

Зажим для пуповины изготовлен методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса ABS под давлением поступает в форму-матрицу. Далее с помощью конвейера готовые Зажимы для пуповины поступают на рабочий стол упаковочной машины, где происходит упаковка Зажима для пуповины в индивидуальные целлофановые пакеты, далее упакованные Зажимы для пуповины укладываются в небольшие бумажные ящики. После укладки ящиков в картонные коробки, коробки поступают в специальные стерилизационные камеры, где проходят стерилизацию под давлением этилен оксидом.

После стерилизации коробки укладываются в транспортную тару и отправляются потребителю.

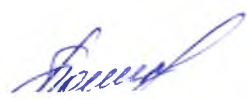

JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO.,LTD


No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
<http://www.suyunmedical.com> TEL: 86-518-85476682, 85608151
E-mail: export@suyunmedical.com FAX: 86-518-85451119, 85466033

Техническое описание Амниотом одноразовый стерильный.

Амниотом применяется в акушерстве для вскрытия плодного пузыря во время родов.

Инструмент позволяет вскрыть оболочки плодного пузыря при помощи острого крючка, находящегося на закругленном конце. Инструмент атравматичен для шейки матки и плода.

Амниотом произведён из ABS (ручка и основа рабочей части),

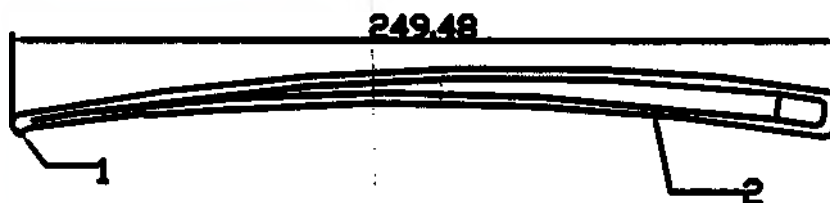

1-Рабочая часть 2-Ручка

Амниотом изготовлен методом термообработки под высоким давлением из гранул ABS с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса ABS под давлением поступает в форму-матрицу. Далее с помощью конвейера готовые Амниотомы поступают на рабочий стол упаковочной машины, где происходит упаковка Амниотома в индивидуальные целлофановые пакеты, далее упакованные Амниотомы укладываются в небольшие бумажные ящики. После укладки ящиков в картонные коробки коробки поступают в специальные стерилизационные камеры, где проходят стерилизацию под давлением этилен оксидом.

После стерилизации коробки укладываются в транспортную тару и отправляются потребителю.




JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO.,LTD

No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
<http://www.suyunmedical.com> TEL: 86-518-85476682, 85608151
E-mail: export@suyunmedical.com FAX: 86-518-85451119, 85466033

Техническое описание Браслет с идентификатором одноразовый стерильный.

Браслет с идентификатором предназначен для идентификации новорожденных.

Браслет с идентификатором произведён из поливинилхлорида(PVC) (Ленточка и основа рабочей части),

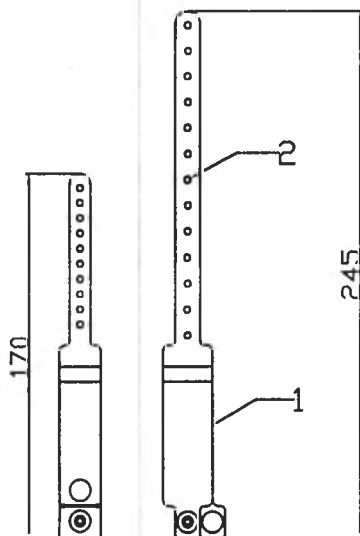

1-Рабочая часть 2-Ленточка

Браслет с идентификатором изготовлен методом термообработки под высоким давлением из гранул с помощью термопластавтомата. Из контейнера с гранулами нагретая до технологической температуры масса PVC под давлением поступает в форму-матрицу. Далее с помощью конвейера готовый Браслет с идентификатором поступают на рабочий стол упаковочной машины, где происходит упаковка Браслета с идентификатором в индивидуальные целлофановые пакеты, далее упакованный Браслет с идентификатором укладывается в небольшие бумажные ящики. После укладки ящиков в картонные коробки, коробки поступают в специальные стерилизационные камеры, где проходят стерилизацию под давлением этилен оксидом.

После стерилизации коробки укладываются в транспортную тару и отправляются потребителю.