

Инструкция к применению
устройства для подключения кровеносной системы пациента к аппарату
сердце-легкие для выполнения операций на открытом сердце

1. Перед установлением, необходимо убедиться в полном отсутствии воздуха в каналах устройства.
2. Внимательно осмотрите наконечник, с целью убедиться, что он не изогнут или не поврежден.
3. Снимите и удалите протектор.
4. Нанесите кисетный шов у избранного места для введения устройства.
5. Проколите ткань в центре нанесенного кисетного шва.
6. Рукой установите устройство в проколотом отверстии и проведите его внутрь. Ваша рука почувствует, когда кончик устройства достигнет цели.
7. Затяните и завяжите концы шва, чтобы укрепить устройство в необходимой позиции.
8. Проверьте правильно ли установлены подсоединения к каналам устройства и откройте задвижки.
 - При использовании версии с баллоном, перед тем как удалить устройство, убедитесь, что из баллона выкачен весь воздух.

Данное описание процедуры имеет информационный характер.

Действия хирургов должны быть основаны, прежде всего, на личном опыте в таких операциях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Не используйте устройство, если его упаковка уже вскрыта или повреждена.
- Не используйте устройство, если у какой-либо из его частей имеются признаки повреждения: перегиб, зазубрена, трещина, разрез или перелом.