

Министерство приборостроения, средств автоматизации и
систем управления

ОКП 94 3375

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

З.а. Директор ВНИИИМТ

Минздрава СССР

Б.И. Леонов

8.07 1987 г.

Генеральный директор
НПО "Медицинstrument"

В.Х. Сабитов

10.09 1987 г.

ДИСКИ

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДАС- "КМИЗ"

Э т и к е т к а

0802.8.892.000 ЭТ

Главный инженер Казанского
медико-инструментального
завода

Р.А. Уметбаев

10.06 1987 г.



В.Х. Сабитов
В.Х. Сабитов
В.Х. Сабитов

№ п.п.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № докум.	Подпись и дата
2280	20.03.88			

Диски

стоматологической помощи ДАС-КМНЗ

Кружки алмазные для ортопедической стоматологии (в дальнейшем -
Диски кружки) предназначены для препарирования твердых тканей зуба и для обработки поверхностей металлических и металлокерамических протезов.

Диски

Кружки предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ 4.2).

Диски

Кружки предназначены для применения в ортопедической стоматологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диски

Кружки изготавливаются восьми типов.

Дисков 12X18H9T, 12X18H10T или

Материал кружков - сталь 65X13 ТУ 14-1-3236-81 или 30X13

ГОСТ 5632-72

ГОСТ 4986-79, латунь Л62 или ЛС 59-1 ГОСТ 2060-79, нейзильбер ММЦ 15-20 ГОСТ 5187-70.

Дисков

Покрывание рабочих поверхностей кружков алмазное из порошков марок А или АСВ ГОСТ 9206-80.

Установленный ресурс кружков

должен быть не менее

30 мин.

Дисков

Средний ресурс кружков до списания должен быть не менее 60 минут машинного времени.

Дисков

Количество кружков в одной упаковке - 10 шт.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Диски

Кружки дезинфицируются сухим горячим воздухом при температуре $(120 \pm 4)^\circ\text{C}$, время выдержки (45 ± 5) .

Дисков

Предстерилизационная очистка кружков проводится ополаскиванием проточной водой в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин, замачиванием в моющем растворе "Биолот" при температуре $(40 \pm 5)^\circ\text{C}$, время выдержки $(15 \pm 1,0)$ мин, мойкой в растворе "Биолот" в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин, ополаскиванием проточной водой в течение $(3 \pm 1,0)$ мин, ополаскиванием дистиллированной водой в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин, сушкой горячим воздухом

0802.8.892.000 ЭТ

Галина

Утяшев

Чикишев

Лебедева

Диски

КРУЖКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ОРТОПЕ

ДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

С- кой помощи ДАС-КМНЗ

Этикетка

Диски

А

1

2

4

Подпись и дата

Число, дата

Взам. инв. №

Число, дата

Инв. № инв.

при температуре (85_{-10}^{+2})

до полного исчезновения влаги.

~~Диски~~
~~Круги~~ стерилизуются сухим горячим воздухом при температуре $(180_{-10}^{+2})^{\circ}\text{C}$, время выдержки (60_{-10}^{+5}) мин.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

~~Диски~~
~~Круги~~ применяются при работе на высокооборотных машинах и шлифмашинах с числом оборотов не менее 10000 об/мин при прерывистом цикле работы.

В целях обеспечения безопасной работы при препарировании зубов ~~Диски~~ ~~Круги~~ применяются с механизированным инструментом для препарирования зубов МУП-30 ТУ 64-1-3128-80.

~~Диски~~
~~Круги~~ при эксплуатации периодически очищают жесткой зубной щеткой с последующей выдержкой и промывкой в жидкости для очистки алмазных инструментов.

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Срок защиты без переконсервации - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА И КОНСЕРВАЦИИ

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

~~Диски~~
~~Круги~~ в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 80 % при 25°C . Воздух не должен содержать коррозионноактивных примесей.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

~~Диски~~
~~Круги~~ соответствуют техническим условиям ТУ 64-1-3730-83 и признаны годными для эксплуатации.

ТУ 9433-079-05519988-2002

ОТК

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением этикетки по адресу: 420022, Казань, С.Сайдашева, 12, Казанский медико-инструментальный завод.

Взам. инв. №	Инв. №	Дата
2280	428-97	2002.03.28

4	37-02	0.01.02
3	428-97	2002.03.28

0802.8.892.000 ЭТ

Лист

3

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № покл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № ввбл.	Подпись и дата
000 9921	Подп. 11.03.88			

0802.8.892.000 ET

Лист

4

Data

Копировал

формат А4