



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Гелиокс»

Юмашев А.В.
«25» января 2019 г.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на медицинские изделия

Кушетки медицинские «Гелиокс»

ТУ 32.50.30-001-86677278-2017 в следующих исполнениях

производства ООО «Гелиокс», 141013, Россия, Московская область, г. Мытищи, 1-ый Силикатный пер., стр 14Б/4, каб 13

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

C01 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» C01 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**2.1 Основные параметры и размеры**

- 2.1.1 Габаритные размеры C01 (205x75x65) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 25 кг.

2.2 Характеристики:

- 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 250 кг
- 2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов
- 2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, пенополиуретана эластичного блочного и облицованы искусственной кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
- 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
- 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Кушетки состоят из цельносварного каркаса, ложа и подголовника
- 4.2. Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения
- 4.3. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее instruction, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1. После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3. Проверить комплектность
- 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1. Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 8.2. Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.

8.3. Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

8.4. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

8.6. Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1. Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

10.3. Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

10.4. Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

10.5. Гарантия утрачивает силу, если:

поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта неуполномоченной стороной

10.6. При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

10.7. Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

10.8. Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС» С01, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»
С011ZM ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 - 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» С011ZM (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
 - 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°С и относительной влажности от 45% до 75%
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - 2.1 Основные параметры и размеры
 - 2.1.1 Габаритные размеры С011ZM (205x75x70) мм, ±10 мм.
 - 2.1.2 Масса не более 30 кг.
 - 2.2 Характеристики:
 - 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 250 кг
 - 2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов
 - 2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы виниловой кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
 - 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
 - 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
 - 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
 - 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
 - 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
 - 3.1 В комплект поставки входит:
 - Заглушка прорези для лица
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
 - 4.1 Кушетки состоят из цельносварного каркаса, ложа и подголовника, с возможностью регулировки высоты кушетки от 65 см до 90 см
 - 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб круглого и прямоугольного сечения.
 - 4.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°
5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
 - 5.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации
6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 - 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
 - 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
 - 6.3 Проверить комплектность
 - 6.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 - 7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

г. Мытищи, 1-ый Силикатный пер., стр 14Б/4, каб 13

тел. +7(495)786-01-76, 211 41 41

- 8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 10.3 Расчетный срок службы изделия – 10 лет.
- 10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 10.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной
- 10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» C01IZM, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

C02 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» C02 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
- 2.1.1 Габаритные размеры C02 (205x75x65) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 30 кг.
- 2.2 Характеристики:
- 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 250 кг
- 2.2.2 Кушетка состоит из трех секций – подголовника, ложа и ножной секции. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов. Угол наклона ножной части относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 50 градусов
- 2.2.3 Подголовник, ложе и ножная секция изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винилкожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
- 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитно покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
- 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания - 10 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из цельносварного каркаса, ложа, подголовника и ножной части
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения
- 4.3 Угол наклона ножной части относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 50 градусов
- 4.4 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35 до 35 градусов.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее instruction, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3 Проверить комплектность
- 6.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и

хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.

- 8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 10.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.
- 10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 10.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной
- 10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» C02, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

СОЗ ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» СОЗ (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**2.1 Основные параметры и размеры**

- 2.1.1 Габаритные размеры СОЗ (205x75x70) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 25 кг.

2.1 Характеристики:

- 2.1.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 250 кг
- 2.1.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от 0 до 35 градусов
- 2.1.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винилкожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
- 2.1.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.1.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
- 2.1.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.1.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.1.8 Средний срок службы кушетки до списания - 10 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из цельносварного каркаса, ложа и подголовника
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб круглого и прямоугольного сечения.
- 4.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0 до 35°

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К эксплуатации кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее instruction, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3 Проверить комплектность
- 6.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.

8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

10.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

10.5 Гарантия утрачивает силу, если:

поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» С03, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

FISIO1 TY 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» FISIO1 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10 °С до +35 °С и относительной влажности 80% при температуре +25 °С

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
- 2.1.1 Габаритные размеры FISIO1 (190x57x75) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 60 кг.
- 2.2 Характеристики:
- 2.2.1 Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 250 кг
- 2.2.2 Кушетка имеет одну секцию
- 2.2.3 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.4 Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком Hesse Solvent Stain CL 3-5012, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 2.2.5 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.6 Поверхность кушетки к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.7 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
- 2.2.8 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1 Кушетки состоят из каркаса, ложа, подголовника
- 3.2 Каркас кушетки изготовлен из бруса бука прямоугольного и квадратного сечения, без использования металлических элементов
- 3.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0° до 40°

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 К эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 7.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 7.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 7.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

7.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

8 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящей инструкции

9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня поставки потребителю.

9.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет. Фактический срок службы зависит от характера и интенсивности использования изделия и определяется предельным состоянием. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления работоспособного состояния, несоответствие установленным техническим требованиям

9.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износу, затвердение и появление трещин на поверхности.

9.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

9.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

9.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

10

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» FISIO1, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»
FISIO2 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» FISIO2 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.1 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**2.1 Основные параметры и размеры**

2.1.1 Габаритные размеры FISIO2 (190x70x75) мм, ±10 мм.

2.1.2 Масса не более 60 кг.

2.2 Характеристики:

- 2.2.1 Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 250 кг
- 2.2.2 Кушетка имеет одну секцию
- 2.2.3 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.4 Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком Hesse Solvent Stain CL 3-5012, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 2.2.5 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.6 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.7 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
- 2.2.8 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1 Кушетки состоят из каркаса, ложа, подголовника
- 3.2 Каркас кушетки изготовлен из бруса бука прямоугольного и квадратного сечения, без использования металлических элементов
- 3.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0° до 40°

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1. После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1. Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 7.2. Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 7.3. Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 7.4. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

7.6. Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

8 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3. Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

9.4. Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

9.5. Гарантия утрачивает силу, если:

поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

9.6. При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

9.7. Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.8. Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

10 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» FISIO2, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

KM02 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» KM02 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.

1.1 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры

2.1.1 Габаритные размеры KM02 (205x52x65) мм, ±10 мм.

2.1.2 Масса не более 18 кг.

2.2 Характеристики:

2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг

2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов

2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованные винил кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.

2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм

2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания

2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки изделия:

Подголовник	1 шт
Ложе	1 шт
Каркас подголовника	1 шт
Опора 1	1 шт
Опора 2	1 шт
Стяжка нижняя	1 шт
Стяжка верхняя	2 шт
Растомат	2 шт
Имбус M10x50	6 шт
Имбус M8x50	2 шт
Имбус M8x45	2 шт
Гайка M8	4 шт
Шайба 10	6 шт
Шайба 8	6 шт
Шайба пластиковая	2 шт
Саморез 4,2x16	22 шт
Заглушка 30x15	4 шт
Заглушка 25x25	4 шт
Заглушка прорези для лица	1 шт

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из каркаса, ложа и подголовника
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения
- 4.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.2 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.3 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.4 Проверить комплектность
- 6.5 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящей инструкции
- 7.2 Осуществить сборку согласно инструкции

8 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 8.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 10.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 10.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 10.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 10.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 10.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 10.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 11.3 Расчетный срок службы изделия – 10 лет.
- 11.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 11.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной
- 11.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 11.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 11.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

КМ03 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» КМ03(далее по тексту-кушетка)) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**2.1 Основные параметры и размеры**

2.1.1 Габаритные размеры КМ03 (200x74x65) мм, ±10 мм.

2.1.2 Масса не более 18 кг.

2.2 Характеристики:

2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг

2.2.2 Кушетка состоит из двух секций – подголовника и ложа. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости изменяется от -35 до 35 градусов

2.2.3 Подголовник и ложе изготовлены из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винил-кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.

2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм

2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания

2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**3.1. Комплект поставки изделия:**

Подголовник	1 шт
Ложе	1 шт
Каркас подголовника	1 шт
Опора 1	1 шт
Опора 2	1 шт
Стяжка нижняя	1 шт
Стяжка верхняя	2 шт
Растомат	2 шт
Имбус М10х50	6 шт
Имбус М8х50	2 шт
Имбус М8х45	2 шт
Гайка М8	4 шт
Шайба 10	6 шт
Шайба 8	6 шт
Шайба пластиковая	2 шт
Саморез 4,2х16	22 шт
Заглушка 30х15	4 шт
Заглушка 25х25	4 шт
Заглушка прорези для лица	1 шт

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Кушетки состоят из каркаса, лежа и подголовника
- 4.2. Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения
- 4.4. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от -35° до 35°

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3. Проверить комплектность
- 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7 ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящей инструкции
- 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции

8 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 8.1. Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 10.1. Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 10.2. Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 10.3. Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 10.4. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 10.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 10.6. Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 11.3. Расчётный срок службы изделия – 10 лет.
- 11.4. Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 11.5. Гарантия утрачивает силу, если:
 - поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
 - повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
 - неуполномоченной стороной
- 11.6. При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 11.7. Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 11.8. Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

12

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» КМ03, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

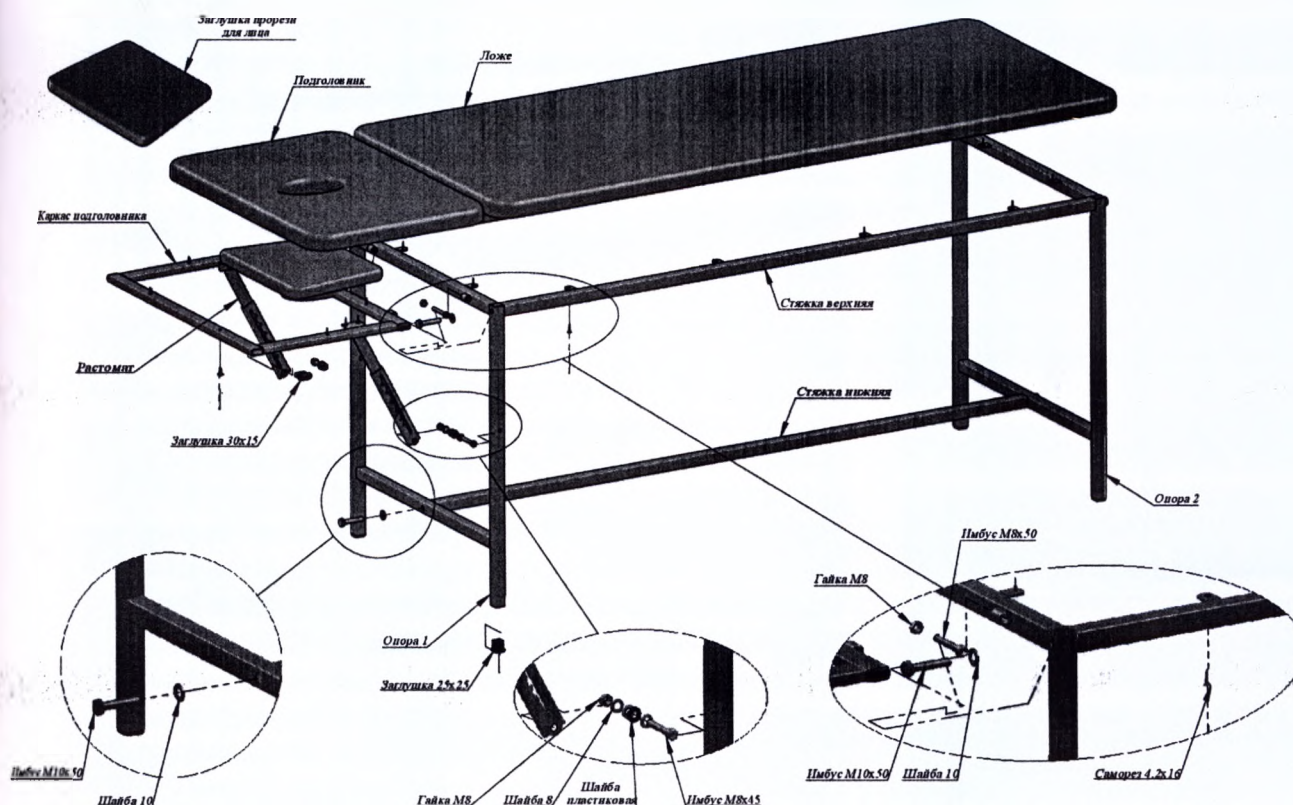
Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

13

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУШЕТКИ :**КУШЕТКА КМ-02, КМ-03
инструкция по сборке**

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

ТМ01 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» ТМ01(далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**2.1 Основные параметры и размеры**

- 2.1.1 Габаритные размеры ТМ01 (200x75x70) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 18 кг.

2.2 Характеристики:

- 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг
- 2.2.2 Кушетка состоит из одной секции
- 2.2.3 Ложё изготовлено из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы виниловой кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
- 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
- 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания не менее 6 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из каркаса и ложа
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.2 К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее instruction, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

10. **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

10.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

10.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

11. **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» ТМ01, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Подпись _____

Заказчик

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

ТМ02 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» ТМ02(далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
- 2.1.1 Габаритные размеры ТМ02 (205x75x100) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 18 кг.
- 2.2 Характеристики:
- 2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг
- 2.2.2 Кушетка состоит из одной секции
- 2.2.3 Ложة изготовлено из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винилкожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.
- 2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания
- 2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кушетки состоят из каркаса и ложа
- 4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее instruction, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдерживать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

- 8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- 9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 10.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.
- 10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.
- 10.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной
- 10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.
- 10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- 10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» ТМ02, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

ТМ03 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» ТМ03(далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.

1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры

2.1.1 Габаритные размеры ТМ03 (200x75x100) мм, ±10 мм.

2.1.2 Масса не более 18 кг.

2.2 Характеристики:

2.2.1 Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг

2.2.2 Кушетка состоит из одной секции

2.2.3 Ложё изготовлено из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы виниловой кожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.

2.2.4 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм

2.2.5 Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания

2.2.6 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

2.2.7 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

2.2.8 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кушетки состоят из каркаса и ложа

4.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее instruction, конструкцию изделия и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов

6.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия

6.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.

8.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.

8.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

8.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

8.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

10.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

10.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

10.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

10.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

10.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

10.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» ТМ03, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " ____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

WCO TY 32.50.30-001-86677278-2017

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO (далее по тексту-кушетка предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
 - 2.1.1 Габаритные размеры WCO (200x80x70) мм, ±10 мм.
 - 2.1.2 Масса не более 80 кг.
- 2.2 Характеристики:
 - 2.2.1 Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 250 кг
 - 2.2.2 Кушетка имеет одну секцию
 - 2.2.3 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
 - 2.2.4 Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком Hesse Solvent Stain CL 3-5012, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания
 - 2.2.5 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
 - 2.2.6 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
 - 2.2.7 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
 - 2.2.8 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1 Кушетки состоят из каркаса, полки для принадлежностей, ложа
- 3.2 Каркас кушетки изготовлен из бруса бука прямоугольного и квадратного сечения

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящую инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1. После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.3 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1. Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 7.2. Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 7.3. Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 7.4. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 7.5. Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 7.6. Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3. Расчетный срок службы изделия – 10 лет.

9.4. Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

9.5. Гарантия утрачивает силу, если:

поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

9.6. При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

9.7. Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.8. Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

WCO2 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO (далее по тексту-кушетка предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
- 2.1.1 Габаритные размеры WCO (200x80x70) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 80 кг.
- 2.2 Характеристики:
- 2.2.1 Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 250 кг
- 2.2.2 Кушетка имеет одну секцию
- 2.2.3 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.4 Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком Hesse Solvent Stain CL 3-5012, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 2.2.5 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.6 Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.7 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
- 2.2.8 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.3 Кушетки состоят из каркаса, полки для принадлежностей, ложа
- 3.4 Каркас кушетки изготовлен из бруса бука прямоугольного и квадратного сечения

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 К эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящую инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 7.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 7.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 7.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 7.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.
- 7.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

9.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

9.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

9.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

9.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»
WCO3 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO3 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
- 2.1.1 Габаритные размеры WCO3 (200x80x70) мм, ±10 мм.
- 2.1.2 Масса не более 80 кг.
- 2.2 Характеристики:
- 2.2.1 Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 250 кг
- 2.2.2 Кушетка имеет две секции- подголовник и ложе. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0° до 40°
- 2.2.3 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
- 2.2.4 Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком Hesse Solvent Stain CL 3-5012, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 2.2.5 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
- 2.2.6 Поверхность кушетки к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
- 2.2.7 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
- 2.2.8 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1 Кушетки состоят из каркаса, ложа, подголовника, полки для принадлежностей
- 3.2 Каркас кушетки изготовлен из бруса бука прямоугольного и квадратного сечения
- 3.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0° до 40°

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 К эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящую инструкцию и конструкцию изделия

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1. После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.2. Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 7.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 7.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 7.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на

7.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

7.6 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

9.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

9.5 Гарантия утрачивает силу, если:
поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

9.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

9.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO3, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

WCO4 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO4 (далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.
- 1.2 Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°C и относительной влажности от 45% до 75%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Основные параметры и размеры
 - 2.1.1 Габаритные размеры WCO4 (200x80x70) мм, ±10 мм.
 - 2.1.2 Масса не более 80 кг.
- 2.2 Характеристики:
 - 2.2.1 Кушетка выдерживает равномерно распределенную по ложу нагрузку массой не более 250 кг
 - 2.2.2 Кушетка имеет две секции-подголовник и ложе. Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0° до 40°
 - 2.2.3 Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм
 - 2.2.4 Каркас кушетки имеет защитно-декоративное покрытие лаком Hesse Solvent Stain CL 3-5012, нетоксичным, устойчивым к средствам дезинфекционной обработки способом протирания
 - 2.2.5 Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2
 - 2.2.6 Поверхность кушетки к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.
 - 2.2.7 Средний срок службы кушетки до списания -10 лет
 - 2.2.8 За критерий предельного состояния кушеток принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 3.1 Кушетки состоят из каркаса, ложа, подголовника, полки для принадлежностей
- 3.2 Каркас кушетки изготовлен из бруса бука прямоугольного и квадратного сечения
- 3.3 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной плоскости плавно изменяется от 0° до 40°

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 К эксплуатации кушеток допускаются лица, внимательно изучившие настоящую инструкцию и конструкцию изделия

5. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 5.1 После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов
- 5.2 Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия
- 5.3 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.
- 7.2 Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.
- 7.3 Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий. В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.
- 7.4 Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.5 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

7.7 Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

8 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9.3 Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

9.4 Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин на поверхности.

9.5 Гарантия утрачивает силу, если:

поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения
повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта
неуполномоченной стороной

9.6 При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

9.7 Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.8 Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

10 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» WCO4, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " ____ " _____ 20__ г.

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

Дата ремонтных работ(замены) _____

Производитель

Заказчик

Подпись _____

Подпись _____

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

33 листов

ООО «Гелиокс»

Юмашев А.В.

«25»

2019 год