

«УТВЕРЖДАЮ»



ИНСТРУКЦИЯ по применению:

Манжеты медицинские для системы импульсной компрессии A-V Impulse

Производства Covidien Llc , USA; 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA.

Москва 2012

Манжеты медицинские для системы импульсной компрессии A-V Impulse:

1. Манжеты для ступни – малые, большие, очень большие.

Предназначены для обеспечения функционирования системы A-V Impulse.

Система импульсной компрессии A-V Impulse предназначена для создания прерывистой пневматической компрессии стоп, стимулируя вены венозного синуса стопы, ускоряя циркуляцию крови, тем самым уменьшая риск возникновения тромбозов глубоких вен, периферических отеков, уменьшая последствия травм, у лежачих пациентов уменьшает возникновения пролежней. Механизм действия импульсной компрессии состоит в том, что устраняется венозный застой, снижается фильтрация тканевой жидкости, улучшается насыщение тканей кислородом, стимуляция оттока лимфы и венозной крови, повышается фибринолитическая активность крови.



Показания:

1. Усиление циркуляции крови.
2. Профилактика тромбоза глубоких вен.
3. Отек – острый.
4. Отек – хронический.
5. Боли в конечностях травматического или хирургического происхождения
6. Язвы бедра и голени.
7. Венозный стаз/венозная недостаточность.

Противопоказания:

1. Любые локальные состояния, при которых невозможно использование манжеты: а) дерматит, б) перевязка сосуда (послеоперационная), в) гангрена или г) недавняя пересадка кожи.
2. Тяжелый атеросклероз или иная ишемическая болезнь сосудов.

3. Обширный отек ног или отек легких, вызванный застойной сердечной недостаточностью.
4. Выраженная деформация нижней конечности.
5. Подозрение на ранее существовавший тромбоз глубоких вен.
6. Тяжелая застойная сердечная недостаточность
7. Условия, при которых увеличение притока жидкости к сердцу может быть нежелательным.
8. Тромбофлебит или легочная эмболия.




Компрессионная система для стоп A-V Impulse

1. Перед процедурой для повышения эффективности воздействия наденьте противоэмболические чулки T.E.D.TM. Следите, чтобы не оставалось морщин.



2. Выберите необходимый размер манжеты. На картинке на внутренней стороне манжеты показана правильная позиция для установки ноги. Красным цветом обозначена левая манжета, синим цветом - правая. Камера манжеты должна находиться строго под сводом стопы.

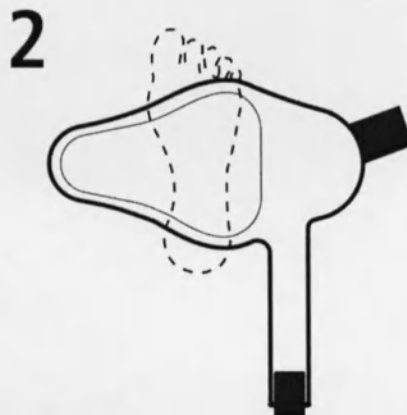

2. Оберните вокруг верхней части ступни края манжеты. Зафиксируйте крепления в соответствующих местах. Закрепите ремешок крепления вокруг пятки. Убедитесь, что манжета плотно зафиксирована и нет ощущения неудобств.

3



Правильная установка стопы

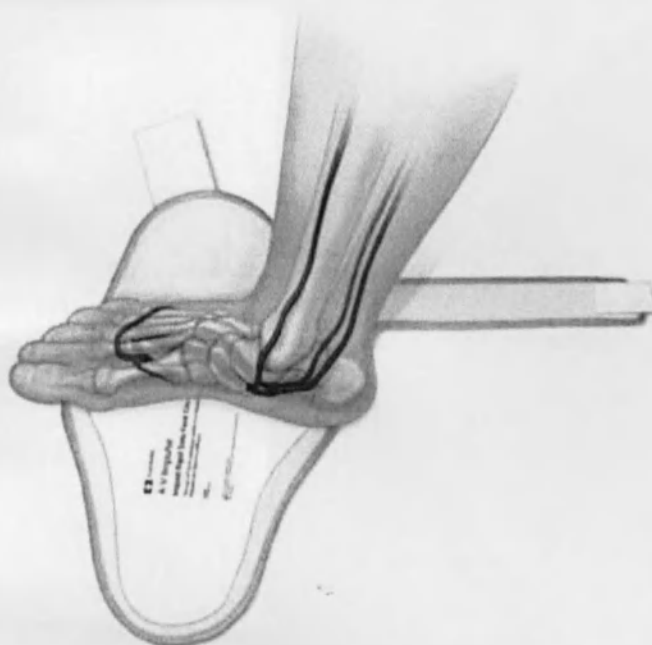


Таблица соответствия размеров манжет для ступней

Женские размеры обуви	Мужские размеры обуви	Размер манжеты	Идентификационный код	Окружность стопы
5 ¹ / ₂ - 9	4 ¹ / ₂ - 8	Малые	5065	до 12"
9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂ - 12 ¹ / ₂	Большие	5075	до 13"
9 ¹ / ₂ - 12 ¹ / ₂	8 ¹ / ₂ - 13 ¹ / ₂	Очень большие	5107	13 - 18"

