

ООО НПО «СМТ»

Россия, 633011, Новосибирская область, пер. Промышленный, дом 2а
ИНН / КПП 5445253301 / 544501001, ОКПО 81136323


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО НПО «СМТ»

Б.А.Дербичев

2011 г.

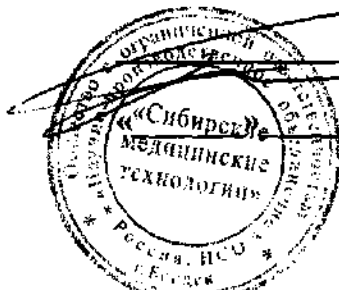

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)

Настоящая инструкция регламентирует порядок применения медицинских изделий – Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные типа «Луер» в комплекте с иглой инъекционной, стерильные согласно ТУ 9398-010-81136323-2011 в следующих исполнениях:

1. - двухдетальный 2А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
2. - двухдетальный 5А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
3. - двухдетальный 5Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
4. - двухдетальный 10А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
5. - двухдетальный 10Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
6. - двухдетальный 20А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
7. - двухдетальный 20Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
8. - двухдетальный 50А "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.
9. - двухдетальный 50Б "Луер" в комплекте с иглой инъекционной.

1. Техническое описание

Шприц инъекционный, предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения.

Шприц является неактивным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения.

Шприц применяется только для медицинских целей.

Шприц выпускается номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20 и 50 куб.см. , укомплектованный иглой однократного применения.

Шприц поставляется в герметичной потребительской упаковке.

На потребительской упаковке указано

- наименование шприца;
- номинальная вместимость;
- размер инъекционной иглы;
- номер партии и срок годности шприца.

Шприц стерилизован окисью этилена и поставляется стерильным, антропогенным и нетоксичным.

3. Меры безопасности

1. Запрещается использовать шприц из поврежденной потребительской упаковки или с просроченным сроком годности, он подлежит уничтожению. Повторная стерилизация шприца не допустима.
2. Не допускается производить инъекцию одним и тем же шприцем нескольким пациентам, меняя только иглы, а также повторно использовать шприц.
3. Производить инъекции только согласно указаниям врача.
4. Строго соблюдать инструкцию Минздрава по утилизации шприцев.

Внимание! остерегайтесь травмирования использованным инструментом.

4.Порядок применения

- 1.Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки.
- 2.Убедиться в действии срока годности шприца.
- 3.Вскрыть потребительскую упаковку, извлечь шприц.
- 4.Плотно надеть на конус шприца иглу, если она не надета.
- 5.Снять с иглы предохранительный колпачок.
- 6.Набрать в шприц лекарственный препарат согласно указаниям врача.
7. Расположить шприц вертикально , иглой вверх, и выдавить нажимая на шток-поршень, пузыри воздуха.
8. После проведения инъекции шприц уничтожить согласно инструкции Минздрава по утилизации.

Внимание при необходимости используйте дополнительную иглу, имеющую присоединительный конус «Луер».

5. Хранения

1. Хранить шприц в отапливаемых, вентилируемых помещениях с температурой воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.
2. Срок хранения не выше срока годности, указанного на упаковке.

Стерильность шприца гарантируется предприятием – изготовителем в течение 3 лет со дня стерилизации, при сохранении целостности потребительской упаковки и соблюдений условий хранения по разделу.

Порядок предъявления рекламации

Рекламация, приложением упаковочного листа, в установленном порядке предъявляется по адресам:

Предприятию-изготовителю –

ООО НПО «СМТ»

Юр. Россия, 633011, Новосибирская область, пер. Промышленный, дом 2а

Факт. Россия, 633011, Новосибирская область, пер. Промышленный, дом 2а

Тел.: (383)238-09-16, факс: (383)238-09-15