

Утверждена
Приказом Росздравнадзора
от _____ 2008 г. № _____



«Утверждаю»

Шемяковский С.Г.
_____ 2008г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
устройства комплектного инфузионного
однократного применения, стерильного, ПР 23-05
ТУ 9398-003-81136323-2008

Устройство комплектное инфузионное однократного применения предназначено для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов.

Устройство стерильное, апиrogenное, нетоксичное.

Способ стерилизации – газовый, стерилизовано этиленоксидом.

Устройство состоит из 12 деталей: совмещенной иглы с воздушным фильтром и предохранительным колпачком, капельницы, поливинилхлоридной трубки, зажима, ролика, соединителя инъекционного узла, сетчатого фильтра, соединительного латексного устройства, головки с конусом «Луер».

Устройство комплектуется иглой инъекционной размером 1,2х38 или 0,8х38 – 1 шт.

Устройство упаковано в потребительскую тару.

Перед использованием устройства визуальным осмотром определить целостность потребительской тары.

Устройство из поврежденной потребительской тары использовать запрещается.

Вскрыть потребительскую упаковку, извлечь устройство.

Закрывать зажим до упора

Снять защитный колпачок с иглы для инъекций, держать ее вертикально вверх.

Открыть зажим и удалить воздух из трубки и иглы, закрыть зажим.

Произвести пункцию вены.

Отрегулировать скорость вливания, медленно открывая зажим.

Использованное устройство утилизировать, как бытовые отходы.

Устройство в упаковке завода-изготовителя хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности 40-60 %.

Срок хранения устройства – 3 года со дня изготовления (дата изготовления приведена на потребительской таре).

Завод-изготовитель гарантирует соответствие устройства инфузионного требованиям ТУ 9398-003-81136323-2008 «Устройства комплектные инфузионные и трансфузионные однократного применения, стерильные» при соблюдении условий хранения.

Устройство имеет сертификат соответствия.

Изготовитель:

ООО НПО «СМТ», Россия, г. Бердск, Новосибирской области,
пер. Промышленный 2а
телефон/факс (383) 238-09-15, email: info@nposmt.ru

Главный технолог

Бреславская И.А.

Утверждена
Приказом Росздравнадзора
от _____ 2008 г. № _____



«Утверждаю»

Шемяковский С.Г.
_____ 2008г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
устройства комплектного трансфузионного
однократного применения, стерильного, ИК 22-02
ТУ 9398-003-81136323-2008**

Устройство комплектное трансфузионное однократного применения предназначено для переливания крови и компонентов крови из контейнеров.

Устройство стерильное, апиrogenное, нетоксичное.

Способ стерилизации – газовый, стерилизовано этиленоксидом.

Устройство состоит из 10 деталей: совмещенной иглы с предохранительным колпачком, камеры с сетчатым фильтром, капельницы, поливинилхлоридной трубки, зажима, ролика, соединительного латексного устройства, головки с конусом «Луер».

Устройство комплектуется иглой инъекционной размером 1,2х38 – 1 шт.

Устройство упаковано в потребительскую тару.

Перед использованием устройства визуальным осмотром определить целостность потребительской тары.

Устройство из поврежденной потребительской тары использовать запрещается.

Вскрыть потребительскую упаковку, извлечь устройство.

Закреть зажим до упора

Снять защитный колпачок с совмещенной иглы и ввести ее в выходное отверстие контейнера с раствором.

Закрепить флакон на штативе и 2-3 раза мягко надавить на капельницу, чтобы она заполнилась наполовину.

Снять защитный колпачок с иглы для инъекций, держать ее вертикально вверх.

Открыть зажим и удалить воздух из трубки и иглы, закрыть зажим.

Произвести пункцию вены.

Отрегулировать скорость вливания, медленно открывая зажим.

Использованное устройство утилизировать, как бытовые отходы.

Устройство в упаковке завода-изготовителя хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности 40-60 %.

Срок хранения устройства – 3 года со дня изготовления (дата изготовления приведена на потребительской таре).

Завод-изготовитель гарантирует соответствие устройства трансфузионного требованиям ТУ 9398-003-81136323-2008 «Устройства комплектные инфузионные и трансфузионные однократного применения, стерильные» при соблюдении условий хранения.

Устройство имеет сертификат соответствия.

Изготовитель:

ООО НПО «СМТ», Россия, г. Бердск, Новосибирской области,
пер. Промышленный 2а
телефон/факс (383) 238-09-15, email: info@nposmt.ru

Главный технолог

Бреславская И.А.