


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

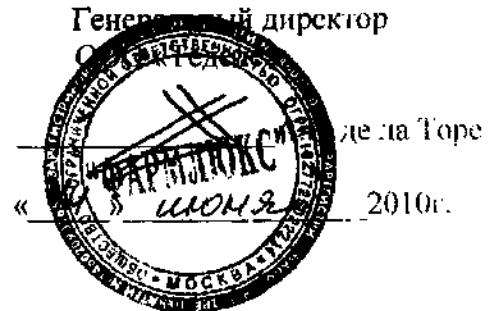

де ла Торе

2010г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения  
раствор вязкоэластичный для внутрисуставного введения ATRI Inj в шприце  
производства Yoo-Young Pharmaceutical Co., Ltd., Korea.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

**ATRI Inj.** предназначен для купирования болевого синдрома и тугоподвижности коленного и других крупных синовиальных суставов у пациентов с дегенеративными и травматическими изменениями.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

**ATRI Inj.** представляет собой прозрачный вязкоэластичный раствор для однократной инъекции. Выпускается готовым к употреблению – в стерильном шприце для однократного применения со специальным защитным резиновым колпачком и резьбой для плотного соединения с муфтой инъекционной иглы, что исключает утечку препарата в момент введения в полость сустава.

2.5 мл. раствора **ATRI Inj.** помещено в стеклянный шприц. Каждый шприц упакован в блистер. Каждый блистер вместе с инструкцией по применению упакован в картонную коробку.

2.5 мл. **ATRI Inj.** содержит:

Гиалуронат натрия: 25 мг.

### 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Гиперчувствительность к компонентам **ATRI Inj.**

Наличие инфекционных или кожных заболеваний в области введения инъекции.

Пациенты с печеночной недостаточностью.

Беременным и кормящим женщинам применять с осторожностью, только после консультации со специалистом.

Не применять детям.

### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Введение инъекции должно осуществляться в условиях строгой стерильности.

Не предназначен для внутривенного введения.

Инъекция предназначена для однократного введения. Содержимое шприца должно быть введено сразу после вскрытия упаковки.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

**ATRI Inj.** – вязкоэластичный раствор, применяемый в виде инъекций в синовиальное пространство суставов при остеоартрозе. **ATRI Inj.** является аналогом (протезом) синовиальной жидкости человека. Восполняет гиалуронан синовии, поврежденный дегенеративными или травматическими изменениями в суставе. Действие **ATRI Inj.** обусловлено биосовместимостью и физико-химическими свойствами. **ATRI Inj.** содержит эквивалентный естественному человеческому гиалуронан – полисахарид с высоким молекулярным весом. Гиалуронан выполняет функции амортизатора при прямых нагрузках на сустав и lubricанта (смазки) при боковых нагрузках. Стимулирует клетки синовии, осуществляет функцию фильтра, задерживающего клетки и молекулы, повреждающие хрящ.

**ATRI Inj.** воздействует на причину прогрессивного артроза. Восстанавливает вязкоэластичные и защитные свойства суставной жидкости, уменьшает воспалительные реакции в суставе, защищает суставной хрящ, восстанавливает гомеостаз в хряще, стимулирует синтез собственного гиалуронана (гиалуроновой кислоты). Устраняет болевой синдром и тугоподвижность коленного и других крупных синовиальных суставов.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Инъекция должна проводиться врачом в условиях полной стерильности. Дозировка и режим введения зависит от тяжести дегенеративных или травматических изменений в суставе и определяется индивидуально лечащим врачом.

Рекомендуется вводить от одной до пяти инъекций один раз в неделю в синовиальное пространство сустава.

Не примсплять в случае повреждения упаковки.


Хранить в прохладном защищенном от света месте при температуре от 1-15°C. Не замораживать.

Стерильный продукт – только для одноразового использования.


Не применять по истечению срока годности.

Срок годности продукта составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты производства.

Главный врач ГКБ №40

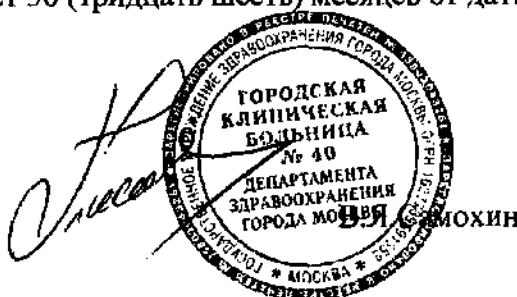

Начальник производства

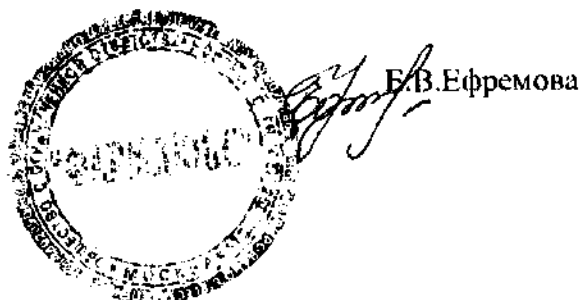

Всего пришло

и сего

по

листа

