

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор
ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

2019 г.

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КМД-ТС
по ТУ 32.50.30-011-14692415-2018 В ИСПОЛНЕНИЯХ**

**Кровать медицинская детская
КМД-ТС 01**

Руководство по эксплуатации

2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская детская КМД-ТС 01 (далее – кровать) предназначена для кратковременного или длительного размещения детей в возрасте до 3 лет в педиатрических отделениях лечебных учреждений.

Область применения – вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Кровать применяется в условиях лечебных медицинских учреждений по назначению и под наблюдением врача.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания отсутствуют.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технические характеристики	
Размер кровати (Д*Ш*В), мм	1326*716*1320 (± 4)
Размер ложе (Д*Ш), мм	1200*570 (± 4)
Высота лежания, мм	628 (± 4)
Размер матраца со съемным чехлом (Д*Ш*В), мм	1200*600*80 (± 4), или 1200*600*100 (± 4)
Масса, кг	50 (± 5)
Количество секций ложе, шт.	1 неподвижная секция
Диапазон регулировки наклона секции	отсутствует
Трансформация в положение Тренделенбург	отсутствует
Трансформация в положение Анти-Тренделенбурга	отсутствует

Каркас кровати.

Упорная рамка выполнена из стальной трубы круглого сечения, диаметром 16*1,5 мм и стальных крючков, выполненных из проволоки диаметром 6 мм.

Торцы-спинки.

Торцы-спинки выполнены из стальной трубы круглого сечения 18*1,5 мм. Заполнение торца выполнено из стальных труб круглого сечения, диаметром 10*1,5 мм. Расстояние между заполнением 90 мм.

Боковые ограждения.

Боковые ограждения выполнены из стальной трубы круглого сечения 18*1,5 мм, по краям расположены втулки, выполненные из трубы круглого сечения 28 мм. Заполнение

боковых ограждений выполнено из стальных труб круглого сечения, диаметром 10*1,5мм. Расстояние между заполнением 90 мм.

Характеристика бокового ограждения	
Размер (Д*В), мм	1256*772 (± 4) мм
Регулировка по высоте	min 890 (± 4) мм max 1215 (± 4) мм

Ложе кровати.

Ложе кровати изготовлено из профильной трубы 20*20*1,5 мм.

Матрацное основание.

Сварная сетка из проволоки, диаметром 4 (или 5, или 6) мм, ячейкой 50*50 мм или 100*50 мм. Спальное ложе кровати состоит из одной неподвижной секции.

Матрац.

Наполнение матраца выполнено из пенополиуретана эластичного (ST 2236, марка А). Съемный чехол на молнии выполнен из винилискожи ТР (55-84-2580) или клеенки подкладной ПВХ, устойчивых к многократной обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Категории мягкости для мягких элементов детской мебели не устанавливаются.

Механизм крепления спинки, бокового ограждения и ложе.

Торцы-спинки – сварные. Выполняются из сочетания круглой трубы разного сечения. Соединяются с каркасом посредством распорной царги и винтового соединения. Ложе фиксируется и скрепляется с каркасом винтовым соединением.

Боковые ограждения соединяются со спинками с помощью втулок. Внешняя втулка выполнена из трубы круглого сечения, внутренняя – из пенопропилена.

Боковое ограждение регулируется по высоте в двух положениях.

Первое положение (нижнее): боковое ограждение опускается до уровня бампера. Второе положение (верхнее): боковое ограждение поднимается до максимальной высоты и фиксируется с помощью крючка-клавиши с той и другой стороны. Регулировка боковых ограждений у кроватей КМД-ТС 01 происходит посредством втулок, расположенных на спинках.

Колёса.

К ножкам кровати крепятся при помощи болтов 4 самоориентирующихся колеса, диаметром 75 мм. Два колеса, расположенные по диагонали (одно заднее и одно переднее), снабжены индивидуальным тормозом.

Примечание: по желанию заказчика, колёса могут быть изготовлены диаметром 100 или 125 мм.

Также кровать имеет четыре угловых бампера, круглого сечения диаметром 100 мм. Примечание: по желанию заказчика, бамперы могут быть изготовлены диаметром 125 или 150 мм.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Кровать медицинская детская КМД-ТС 01	1
Матрац с пенополиуретановым наполнителем в чехле	1
Самоориентирующиеся колёса, диаметром 75, 100 или 125 мм*	4 (2 – с тормозом)
Защитные бамперы, диаметром 100, 125 или 150 мм*	4
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1

*) включение в комплект поставки колес и защитных бамперов сечением определенного диаметра определяется потребителем.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования кроватей убедитесь, что в результате транспортировки

упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- 1) распаковать кровать (поставляется в сборном виде),
- 2) зафиксировать (закрепить) колесные опоры (4 шт.) и защитные бамперы (4 шт.);
- 3) выполнить санитарную обработку изделия.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния кроватей, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации, проводится путем сверки технических характеристик и комплектности паспорта и руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования – при температуре от -50 ⁰С до +50 ⁰С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность кроватей от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 ⁰С до +40 ⁰С, влажности – не более 75 %.

Кровать предназначена для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 ⁰С до +40 ⁰С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Наружные поверхности кроватей и комплектующих необходимо протирать салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением любого универсального чистящего средства (например, 0,5 % моющего средства типа «Лотос»), салфетку предварительно отжать.

10. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления кроватей для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды выполняются требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаются нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования кроватей не происходит разложения и выделения вредных веществ, а также выполняются требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении кроватей (при наличии) проводят в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы кровати утилизируются в соответствии с классом А СанПиН 2.1.7.2790-10.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ 32.50.30-011-14692415-2018 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кроватей составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Минимальный срок службы 10 лет со дня продажи. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений кроватей, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская детская КМД-ТС 01

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК _____

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе,

д.1. Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) л.

Директор ООО «Техстрой»
А.Н. Кабикин
« 14 » 02 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»



Директор
ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

2019 г.

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КМД-ТС
по ТУ 32.50.30-011-14692415-2018 В ИСПОЛНЕНИЯХ**

**Кровать медицинская детская
КМД-ТС 02**

Руководство по эксплуатации

2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская детская КМД-ТС 02 (далее – кровать) предназначена для кратковременного или длительного размещения детей в возрасте до 3 лет в педиатрических отделениях лечебных учреждений.

Область применения – вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Кровать применяется в условиях лечебных медицинских учреждений по назначению и под наблюдением врача.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания отсутствуют.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технические характеристики	
Размер кровати (Д*Ш*В), мм	1326*716*1320 (± 4)
Размер ложе (Д*Ш), мм	1170*570 (± 4)
Высота лежания, мм	648 (± 4)
Размер матраца со съемным чехлом (Д*Ш*В), мм	1200*600*80 (± 4), или 1200*600*100 (± 4)
Масса, кг	50 (± 5)
Количество секций ложе, шт.	1 подвижная секция
Диапазон регулировки наклона секции	от 0° до 10° ступенчато, шаг 2°
Трансформация в положение Тренделенбург	отсутствует
Трансформация в положение Анти-Тренделенбурга	отсутствует

Каркас кровати.

Каркас кровати выполнен из стальных труб квадратного сечения 20*20*1,5 мм. По краям расположены втулки, выполненные из трубы круглого сечения 28 мм. И упорной рамки, выполненной из стальной трубы круглого сечения, диаметром 16*1,5 мм и стальных крючков, выполненных из проволоки диаметром 6 мм.

Торцы-спинки.

Торцы-спинки выполнены из стальной трубы круглого сечения 18*1,5 мм. Заполнение торца выполнено из стальных труб круглого сечения, диаметром 10*1,5 мм. Расстояние между заполнением 90 мм.

Боковые ограждения.

Боковые ограждения выполнены из стальной трубы круглого сечения 18*1,5 мм, по

краям расположены втулки, выполненные из трубы круглого сечения 28 мм. Заполнение боковых ограждений выполнено из стальных труб круглого сечения, диаметром 10*1,5 мм. Расстояние между заполнением 90 мм.

Характеристика бокового ограждения	
Размер (Д*В), мм	1256*772 (+ 4) мм
Регулировка по высоте	min 890 (+ 4) мм, max 1215 (+ 4) мм

Ложе кровати.

Ложе кровати изготовлено из профильной трубы 20*20*1,5 мм.

Матрацное основание.

Сварная сетка из проволоки, диаметром 4 (или 5, или 6) мм, ячейкой 50*50 мм или 100*50 мм.

Спальное ложе кровати состоит из одной подвижной секции, регулируемой по углу наклона относительно горизонтальной плоскости. Регулирование угла наклона секции кровати медицинской детской КМД-ТС 02 осуществляется вручную с помощью 6-ти позиционного растомата. Диапазон регулировки наклона секции: от 0° до 10° ступенчато с шагом 2°.

Матрац.

Наполнение матраца выполнено из пенополиуретана эластичного (ST 2236, марка А). Съёмный чехол на молнии выполнен из винилискожи ТР (55-84-2580) или клеенки подкладной ПВХ, устойчивых к многократной обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Категории мягкости для мягких элементов детской мебели не устанавливаются.

Механизм крепления спинки, бокового ограждения и ложе.

Торцы-спинки – сварные. Выполняются из сочетания круглой трубы разного сечения. Соединяются с каркасом посредством распорной царги и винтового соединения. Боковые ограждения соединяются со спинками с помощью втулок. Внешняя втулка выполнена из трубы круглого сечения, внутренняя – из пенопропилена. Ложе фиксируется и скрепляется с каркасом винтовым соединением.

Боковое ограждение регулируется по высоте в двух положениях.

Первое положение (нижнее): боковое ограждение опускается до уровня бампера. Второе положение (верхнее): боковое ограждение поднимается до максимальной высоты и фиксируется с помощью крючка-клавиши с той и другой стороны. Регулировка боковых ограждений у кроватей КМД-ТС 02 происходит посредством втулок, расположенных на спинках.

Колёса.

К ножкам кровати крепятся при помощи болтов 4 самоориентирующихся колеса, диаметром 75 мм. Два колеса, расположенные по диагонали (одно заднее и одно переднее), снабжены индивидуальным тормозом.

Примечание: по желанию заказчика, колёса могут быть изготовлены диаметром 100 или 125 мм.

Также кровать имеет четыре угловых бампера, круглого сечения диаметром 100 мм. Примечание: по желанию заказчика, бамперы могут быть изготовлены диаметром 125 или 150 мм.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Кровать медицинская детская КМД-ТС 02	1
Матрац с пенополиуретановым наполнителем в чехле	1
Самоориентирующиеся колёса, диаметром 75, 100 или 125 мм*	4 (2 – с тормозом)
Защитные бамперы, диаметром 100, 125 или 150 мм*	4
Руководство по эксплуатации	1

Паспорт	1
---------	---

*) включение в комплект поставки колес и защитных бамперов сечением определенного диаметра определяется потребителем.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования кроватей убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- 1) распаковать кровать (поставляется в сборном виде),
- 2) зафиксировать (закрепить) колесные опоры (4 шт.) и защитные бамперы (4 шт.);
- 3) выполнить санитарную обработку изделия.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния кроватей, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации, проводится путем сверки технических характеристик и комплектности паспорта и руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования – при температуре от -50 ⁰С до +50 ⁰С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность кроватей от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 ⁰С до +40 ⁰С, влажности – не более 75 %.

Кровать предназначена для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10 ⁰С до +40 ⁰С, относительной влажности воздуха – не более 75%.

9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Наружные поверхности кроватей и комплектующих необходимо протирать салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с

добавлением любого универсального чистящего средства (например, 0,5 % моющего средства типа «Лотос»), салфетку предварительно отжать.

10. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления кроватей для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды выполняются требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаются нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования кроватей не происходит разложения и выделения вредных веществ, а также выполняются требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении кроватей (при наличии) проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы кровати утилизируются в соответствии с классом А СанПиН 2.1.7.2790-10.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ 32.50.30-011-14692415-2018 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кроватей составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Минимальный срок службы 10 лет со дня продажи. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений кроватей, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская детская КМД-ТС 02

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,
603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36,
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе,
д.1.
Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36,
E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

(исполн) л.



Директор ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

2019 г.



**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КМД-ТС
по ТУ 32.50.30-011-14692415-2018 В ИСПОЛНЕНИЯХ**

**Кровать медицинская детская
КМД-ТС 03**

Руководство по эксплуатации

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
ИЗДАТЕЛЬСТВО

2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кровать медицинская детская КМД-ТС 03 (далее – кровать) предназначена для кратковременного или длительного размещения детей в возрасте до 3 лет в педиатрических отделениях лечебных учреждений.

Область применения – вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Кровать применяется в условиях лечебных медицинских учреждений по назначению и под наблюдением врача.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания отсутствуют.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технические характеристики	
Размер кровати (Д*Ш*В), мм	1605*872*1505 (± 4)
Размер ложе (Д*Ш), мм	1340*610 (± 4)
Высота лежания, мм	770 - 1010 (± 4)
Размер матраца со съемным чехлом (Д*Ш*В), мм	1400*680*80 (± 4) мм 1400*680*100 (± 4) мм
Масса, кг	50 (± 5)
Количество секций ложе, шт.	1 подвижная секция
Диапазон регулировки наклона секции	от 0° до 10° ступенчато, шаг 2°
Трансформация в положение Тренделенбург	+12° при помощи растомата
Трансформация в положение Анти-Тренделенбурга	-12° при помощи растомата

Каркас кровати.

Каркас кровати выполнен из сочетания стальной трубы профильного сечения 40*25*1,5, квадратного сечения 25*25*1,5 мм и стальной трубы круглого сечения, диаметром 28*1,5 мм. Рамка каркаса выполнена из сочетания стальных труб квадратного сечения 25*25*1,5 мм и трубы круглого сечения диаметром 16*1,5 мм.

Боковые ограждения.

Боковые ограждения выполнены из стальной трубы круглого сечения 22*1,5 мм, по краям расположены втулки, выполненные из трубы круглого сечения 28 мм. Заполнение боковых ограждений выполнено из стальных труб круглого сечения, диаметром 10*1,5 мм. Расстояние между заполнением 95 мм.

Характеристика бокового ограждения	
Размер (Д*Ш*В), мм	1454*268*776 (± 4) мм
Регулировка по высоте	min 990 (± 4) мм max 1400 (± 4) мм

Ложе кровати.

Ложе выполнено из сочетания стальной трубы круглого сечения 22*1,5 мм, 16*1,5 мм и стальной трубы квадратного сечения 20*20*1,5 мм. Заполнение боковых ограждений выполнено из стальных труб круглого сечения, диаметром 10*1,5 мм. Расстояние между заполнением 95 мм.

Характеристика ложе	
Размер (Д*Ш), мм	1340*610 (± 4) мм
Регулировка по высоте	770-1010 (± 4) мм

Механизм крепления спинок, бокового ограждения и ложе.

Каркас – сварной. Выполнен из сочетания или профильной, или круглой, или квадратной трубы разного сечения. Соединение каркаса с ложе происходит посредством направляющих и винтового соединения. Боковые ограждения соединяются с каркасом с помощью втулок, которые располагаются на направляющих каркаса. Внешняя втулка выполнена из трубы круглого сечения, внутренняя – из пенопропилена.

Боковое ограждение регулируется по высоте в двух положениях.

Первое положение (нижнее): боковое ограждение опускается до нижнего каркаса. Второе положение (верхнее): боковое ограждение поднимается до максимальной высоты и фиксируется с помощью накладных зацепов с той и другой стороны. Регулировка боковых ограждений у кроватей КМД-ТС 03 происходит посредством втулок, расположенных на торцевом каркасе кроватей (направляющих).

Матрацное основание.

Сварная сетка из проволоки, диаметром 4 (или 5 или 6) мм, ячейкой 50*50 мм или 100*50 мм.

Спальное ложе кровати состоит из одной подвижной секции, регулируемой по углу наклона относительно горизонтальной плоскости. Регулирование угла наклона секции кровати медицинской детской КМД-ТС 03 осуществляется вручную с помощью двух 6-ти позиционных растоматов. Диапазон регулировки наклона секции: от 0° до 10° ступенчато с шагом 2°. Кровать имеет два дополнительных 6-ти позиционных растомата, с помощью которых может трансформироваться в положение Тренделенбурга (+12°) и Анти-Тренделенбурга (-12°).

Матрац.

Наполнение матраца выполнено из пенополиуретана эластичного (ST 2236, марка А). Съёмный чехол на молнии выполнен из винилискожи ТР (55-84-2580) или клеенки подкладной ПВХ, устойчивых к многократной обработке всеми видами дезинфицирующих средств. Категории мягкости для мягких элементов детской мебели не устанавливаются.

Колёса.

К спаренным ножкам кровати крепятся при помощи болтов 4 самоориентирующихся колеса, диаметром 125 мм. Два колеса, расположенные по диагонали (одно заднее и одно переднее), снабжены индивидуальным тормозом.

Примечание: по желанию заказчика, колёса могут быть изготовлены диаметром 75 или 100 мм.

Также кровать имеет четыре угловых бампера, круглого сечения диаметром 100 мм. Примечание: по желанию заказчика, бамперы могут быть изготовлены диаметром 125 или 150 мм.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Кровать медицинская детская КМД-ТС 03	1
Матрац с пенополиуретановым наполнителем в чехле	1
Самоориентирующиеся колёса, диаметром 75, 100 или 125 мм*	4 (2 – с тормозом)
Защитные бамперы, диаметром 100, 125 или 150 мм*	4
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1

*) включение в комплект поставки колес и защитных бамперов сечением определенного диаметра определяется потребителем.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования кроватей убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения.

После транспортирования продукции в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать её при комнатной температуре (+15⁰С до +25⁰С) не менее 2 часов.

Убедитесь, что комплект поставки соответствует заявленному в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста, обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

Подготовка к эксплуатации изделия:

- 1) распаковать кровать (поставляется в сборном виде),
- 2) зафиксировать (закрепить) колесные опоры (4 шт.) и защитные бамперы (4 шт.);
- 3) выполнить санитарную обработку изделия.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание перед вводом и при эксплуатации, с периодичностью раз в год, заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене при необходимости поломанных или изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется лицами из числа технического персонала с соблюдением правил техники безопасности.

Проверка технического состояния кроватей, с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации, проводится путем сверки технических характеристик и комплектности паспорта и руководства по эксплуатации, при этом проверяется отсутствие изношенных деталей, вмятин, коррозии металла.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется любым видом транспорта крытого исполнения в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования – при температуре от -50 °С до +50 °С, влажность не более 75 %.

При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность кроватей от механических повреждений и загрязнения.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться на складах поставщика, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упакованном виде в горизонтальном положении при температуре от -50 С° до +40 С°, влажности – не более 75 %.

Кровать предназначена для использования в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха при температуре от +10С° до +40С°,

относительной влажности воздуха – не более 75%.

9. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Очищение производить посредством влажной тряпки (салфетки) и любого универсального чистящего средства. Наружные поверхности кроватей и комплектующих необходимо протирать салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением любого универсального чистящего средства (например, 0,5 % моющего средства типа «Лотос»), салфетку предварительно отжать.

10. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе изготовления кроватей для предотвращения загрязнения атмосферы и охраны окружающей среды выполняются требования ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02, а также соблюдаются нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07.

В процессе изготовления, хранения и использования кроватей не происходит разложения и выделения вредных веществ, а также выполняются требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

Утилизацию материалов при изготовлении кроватей (при наличии) проводить в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.7.1322-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10 по классу А.

По окончании срока службы кровати утилизируются в соответствии с классом А СанПиН 2.1.7.2790-10.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ 32.50.30-011-14692415-2018 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кроватей составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Минимальный срок службы 10 лет со дня продажи. За критерий предельного состояния кроватей принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание при наличии механических повреждений кроватей, появившихся после ввода в эксплуатацию.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые изделия бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие, полученное в результате ремонта, переходит в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: ООО «Техстрой», 603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10 (Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36, E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru).

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская детская КМД-ТС 03

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия _____

Упаковщик _____

Отметка ОТК

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Техстрой»,

603163, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, П10.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36,

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Место производства:

ООО «Техстрой», 606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д.1.

Тел.: (83159) 2-11-71, 2-20-36,

E-mail: tehstroj-nn@tehstroj-nn.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (всего) л.



Директор ООО «Техстрой»

А.Н. Кабикин

2019 г.