

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 20 ____ г. № _____



Директор НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи
РАМН (Филиал «Медгамал»
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)

А.Л. Гинцбург

12

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Агара Сабуро, питательного агара для культивирования грибов,
готового к применению.**

Агар Сабуро, питательный агар для культивирования грибов, готовый к применению (далее Агар Сабуро) представляет собой непрозрачный студень светло-коричневого цвета, стерильный.

Состав:

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	10,0 г
Глюкоза	40,0 г
Диализат хлебопекарных дрожжей	0,1 л
Агар микробиологический	(15±3,0) г
Вода дистиллированная	до 1 л
pH от 5,4 до 5,8	

Назначение. Агар Сабуро предназначен для культивирования дрожжевых и плесневых грибов.

Способ применения. Перед использованием с бутылки с агаром Сабуро снимают алюминиевый колпачок с соблюдением правил асептики, заменяют резиновую пробку стерильной ватно-марлевой. Выдерживают бутылку с агаром в кипящей водяной бане до полного расплавления студня, охлаждают до температуры 45-50 °С и разливают в стерильные чашки Петри слоем 4-5 мм. После застывания чашки с агаром подсушивают закрытыми, вверх дном при температуре (37±1) °С в течение 20-24 ч. В таком виде Агар Сабуро можно ис-



пользовать в течение 10 сут при условии хранения при температуре от 2 до 8 °С.

Агар Сабуро обеспечивает через 72 ч инкубации при температуре от 20 до 25 °С визуально обнаруживаемый рост дрожжеподобных грибов в виде гладких выпуклых колоний белого цвета с ровным краем, диаметром 2,0-3,0 мм и плесневых грибов в виде характерного роста мицелия.

Для подсчёта общего числа грибов при определении микробной загрязнённости отбор проб, посев и интерпретацию результатов проводят в соответствии с ГФ XII.

Форма выпуска. По 100, 200, 300, 400 мл в стеклянных бутылках.


Транспортирование. При температуре от 2 до 25 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

Хранение. В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

Срок годности 1 год. Агар Сабуро с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Рекламации на качество препарата в течение срока годности следует направлять в ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, г. Москва, пер. Сивцев-Вражек, д.41, тел. (499) 241-39-22 и в адрес предприятия изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18; тел. (499)193-30-50, (499)190-44-59; факс (499)190-66-71.

Заместитель директора Филиала «Медгамал»
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

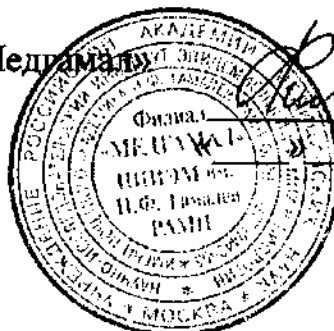

Филиппова Н.Е.
20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

« 15 » 01 2010 г.
№ 01-11/9-10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Агара Сабуро, питательного агара для культивирования грибов,
готового к применению.**

Агар Сабуро, питательный агар для культивирования грибов, готовый к применению (далее Агар Сабуро) представляет собой непрозрачный студень светло-коричневого цвета, стерильный.

Состав:

Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	10,0 г
Глюкоза	40,0 г
Диализат хлебопекарных дрожжей	0,1 л
Агар микробиологический	(15±3,0) г
Вода дистиллированная	до 1 л
pH от 5,4 до 5,8	

Назначение. Агар Сабуро предназначен для культивирования дрожжевых и плесневых грибов.


Способ применения. Перед использованием с бутылки с агаром Сабуро снимают алюминиевый колпачок с соблюдением правил асептики, заменяют резиновую пробку стерильной ватно-марлевой. Выдерживают бутылку с агаром в кипящей водяной бане до полного расплавления студня, охлаждают до температуры 45-50 °С и разливают в стерильные чашки Петри слоем 4-5 мм. После застывания чашки с агаром подсушивают закрытыми, вverting в течение 10 мин.



СОГЛАСОВАНО

И.о. директора ФГУП ГИСК

им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора

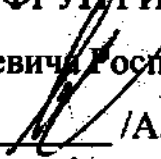 /А.А. Мовсисянц/

«18» 12 2019 г.

температуре $(37 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 20-24 ч. В таком виде Агар Сабуро можно использовать в течение 10 сут при условии хранения при температуре от 2 до 8°C .

Агар Сабуро обеспечивает через 72 ч инкубации при температуре от 20 до 25°C визуально обнаруживаемый рост дрожжеподобных грибов в виде гладких выпуклых колоний белого цвета с ровным краем, диаметром 2,0-3,0 мм и плесневых грибов в виде характерного роста мицелия.

Для подсчёта общего числа грибов при определении микробной загрязнённости отбор проб, посев и интерпретацию результатов проводят в соответствии с ГФ XII.

Форма выпуска. По 100, 200, 300, 400 мл в стеклянных бутылках.

Транспортирование. При температуре от 2 до 25°C в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

Хранение. В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

Срок годности 1 год. Агар Сабуро с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Рекламации на качество препарата в течение срока годности следует направлять в ФГУН ГИСК им. Л.А. Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, г. Москва, пер. Сивцев-Вражек, д.41, тел. (499) 241-39-22 и в адрес предприятия изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН (филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18; тел. (499)193-30-50, (499)190-44-59; факс (499)190-66-71.

Директор НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН
(Филиал «Медгамал» НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)

