

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
изделия медицинского назначения
Гель-лубрикант О'кей® для двоих
по ТУ 21.20.23-003-25074123-2018, варианты исполнения

Регистрационное удостоверение: № _____ от _____

Назначение изделия

Гель-лубрикант восполняет недостаток естественной смазки, дополнительно увлажняет, смазывает при ощущениях дискомфорта в начале и в ходе полового акта, вызванного вагинальной сухостью.

Описание

Изделие представляет собой нестерильную водорастворимую густую вязкую массу (гель) без цвета и запаха, которая помещена в тубу или пакет-саше.

Состав 1 г геля: глицерин – 150,0 мг, полиэтиленгликоль – 50,0 мг, гидроксизтилцеллюлоза – 11,0 мг, консервант (раствор метилпарабена, пропилпарабена, диазолидинил мочевины в пропиленгликоле) – 10,0 мг, вода – 779,0 мг.

Принцип действия и свойства

Эффективность изделия обусловлена его характеристиками и свойствами входящих в состав геля веществ.

В состав геля входят вода, водоудерживающие, ингредиенты (глицерин, полиэтиленгликоль) и загуститель (гидроксиэтилцеллюлоза). При половом акте гель восполняет недостаток естественной смазки, оказывает увлажняющее действие на слизистую половых органов, его вязкоупругие свойства улучшают скольжение и уменьшают трение. Он способствует осуществлению полового акта при возникновении проблем, связанных с сухостью влагалища: дискомфорт, затруднение проникновения во влагалище при половом акте, напряжения, неприятные болезненные ощущения. Применение геля повышает качество интимных отношений. Консервирующая композиция поддерживает необходимую микробиологическую чистоту геля в первичной упаковке.

Показания к применению

Ощущения дискомфорта в начале и в ходе полового акта вызванные вагинальной сухостью, появления которой могут быть связаны с целым рядом причин:

- наступление менопаузы, изменение гормонального фона;
- приём оральных контрацептивов;
- стрессовые состояния;
- хронические заболевания (сахарный диабет, анемия);
- частые спринцевания;
- восстановление после терапии антибиотиками и противогрибковыми препаратами;
- после оперативных вмешательств (удаление яичников, матки);
- физиологические состояния, которые требуют дополнительного увлажнения.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов геля.

Дата издания 09 января 2019 г.

Побочные эффекты

При индивидуальной непереносимости компонентов геля возможны местные аллергические реакции.

Предостережения

Прекратите использование при появлении раздражения.

Гель не является контрацептивом и лекарственным средством.

Запрещается применять гель:

- хранившийся без накрученного на тубу колпачка;
- из поврежденной первичной упаковки;
- после истечения срока годности изделия, указанного на упаковке.


Способ применения

Гель рекомендуется применять после проведения водных гигиенических процедур. Перед нанесением геля вымойте руки с мылом.

Перед первым применением геля в тубе открутите колпачок тубы (рис.1), снимите защитную мембрану с горла тубы (рис.2). Закрутите колпачок (рис.3). Откройте крышку колпачка и выдавите необходимое количество геля. (рис.4)

Для вскрытия пакета-саше используйте насечку на боковом шве (рис.5). Выдавите из пакета необходимое количество геля (рис.6). После вскрытия пакет-саше подлежит утилизации.

Нанесите гель перед половым актом на преддверие влагалища и/или на половой член партнера, и/или на используемый презерватив с внешней стороны.

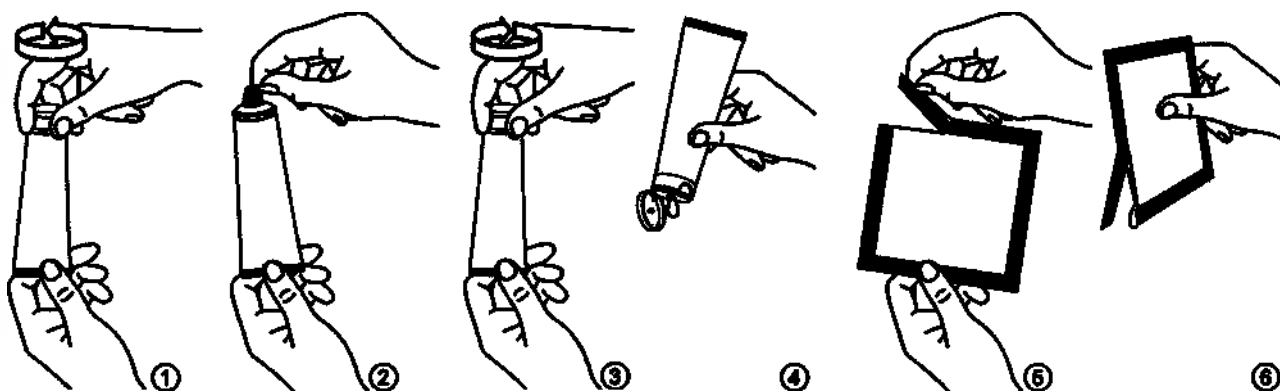

Условия и особенности применения

Изделие отпускается без рецепта врача, применяется в домашних условиях. Извлеченный из первичной упаковки гель применяется однократно.

Комплектность поставки вариантов исполнения изделия:

1. Туба, содержащая 100 г геля, инструкция по применению, картонная пачка;
2. Туба, содержащая 50 г геля, инструкция по применению, картонная пачка;
3. Туба, содержащая 25 г геля, инструкция по применению, картонная пачка;
4. 25 шт. пакетов-саше, содержащие по 4 г геля, инструкция по применению, картонная пачка.

Срок годности - 24 месяца (номер партии и годен до см. на шве тубы или пакета-саше). После снятия защитной мембраны с горла тубы гель можно использовать в течении 6 месяцев.

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 25 °С до плюс 25 °С.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Инструкция по утилизации


После использования геля тубу/ пакет-саше, пачку выбросить в мусорное ведро. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Применению не подлежат и считаются пришедшими в негодность:

- изделия, которые хранились с нарушением условий хранения;
- изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Вышеперечисленные изделия подлежат утилизации в составе бытового мусора.

Символы на упаковке:

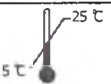Символ	Описание символа
	Символ указывает температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	Символ указывает, что перед применением изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
	Символ содержит информацию для идентификации материала упаковки и возможности её утилизации
	Символ указывает срок эксплуатации изделия после вскрытия тубы

Производитель:

Российская Федерация,
ООО Лаборатория «Биоритм»
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, д. 19, оф. 235
Тел. (343) 214-80-50

Директор



Ж.И. Пашкевич



Дата издания 09 января 2019 г.

Прошито и пронумеровано и
скреплено
печатью 3 листа(ов).
Директор
ООО Лаборатория «Биоритм»
Пашкевич Казимир Иосифович
«25» апреля 2019 года

