

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»



М.Л. Бокова
2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трубки медицинские для обеспечения доставки питательных смесей.

Производства: Ковидиен Ллс, США

2011

Для постановки трубки необходимо подготовить зонд, стетоскоп, шприц 30 мл. Произведите расчет длины введения трубки:

- 1. Для размещения трубки внутрижелудочно необходимо рассчитать ее вводимую длину, которая будет равна сумме расстояния от кончика носа больного до мочки уха и от мочки уха до верхней части эпигастральной области.
- 2. При размещении трубки в кишечнике к полученной величине необходимо прибавить 23 см.
- 3. Необходимо приподнять головной конец больного или посадить его.
- 4. Для облегчения введения трубки она снабжена специальным стилетом. Наберите в шприц около 10 мл стерильного физиологического раствора и введите его в трубку. Произойдет активация гидромерного смазывающего покрытия трубки, что облегчит введение стилета. После введения стилета зафиксируйте его в порте трубки.
- 5. Опустите конец трубки с утяжелителем в емкость с раствором для активации гидромерной смазки снаружи трубки.
- 6. Введите трубку через ноздрю больного до носоглотки, после появления рвотного рефлекса попросите больного делать глотательные движения. Для облегчения прохождения трубки можно дать больному выпить воды или проглотить кусочки льда.
- 7. После установки трубки необходимо убедиться в правильном ее размещении. С этой целью введите небольшое количество воздуха при помощи приготовленного шприца и проведите аускультацию желудка. Возможно произвести частичное отсасывание желудочного содержимого. Осторожно извлеките стилет. Повторное введение стилета в трубку, установленный больному, недопустимо.
- 8. Для пассажа трубки с утяжелителем в кишечник необходимо около 24 часов. Для более быстрого размещения трубки целесообразно положить больного на правый бок с согнутыми в коленях ногами.
- 9. Для того чтобы убедиться в правильном размещении трубки, целесообразно выполнить рентгенологическое исследование: и трубку, и стилет рентгенконтрастны.
- 10. При уходе за зондом необходимо помнить следующее: после завершения питания больного трубку необходимо промыть физиологическим раствором, трубку необходимо промывать после каждой остановки помпы, не используйте стилет для восстановления проходимости трубки, не используйте помпы для питания, развивающие более 40 ПСИ, т. к. они могут разорвать трубку, при введении через трубку лекарственных препаратов необходимо тщательно измельчать таблетки и полученную взвесь вводить шприцем или посредством помпы, при использовании трубки более 30 суток у одного больного целесообразно его заменить.
- 11. Стерилизация. Используйте газовую стерилизацию

Всего прошито
и скреплено
2 листа

