

Программное обеспечение «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix) к Системе для управления диабетом «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix)

Акку-Чек Клуб

Горячая линия 24/7
8-800-200-88-99

Введите код с упаковки

Здравствуйте, Иван Иванов
У Вас 510 баллов [Списать](#)

[Выйти](#)

[МАГАЗИН](#) [ПОДАРКИ](#) [БЛОГ](#) [ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ](#)

АККУ-ЧЕК СМАРТ ПИКС

Версию программы, предназначенную для тестирования, можно скачать по этой ссылке

БУДЬТЕ С НАМИ НА СВЯЗИ В СОЦСЕТЯХ

f vk o

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 24 ЧАСА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ


ЗАДАТЬ ВОПРОС ОНЛАЙН

Вы хотите открыть или сохранить Software.zip из uc93d92140799788906aa9ed147b4d.dropboxusercontent.com?

Открыть Сохранить Отмена


Страница загрузки Программного обеспечения Акку-Чек Смарт Пикс (Accu-Chek Smart Pix Software) (далее – ПО Смарт Пикс) из личного кабинета пользователя продукции Акку-Чек (на сайте <https://www.accu-chek.ru/>)

Программное обеспечение «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix) к Системе для управления диабетом «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix)

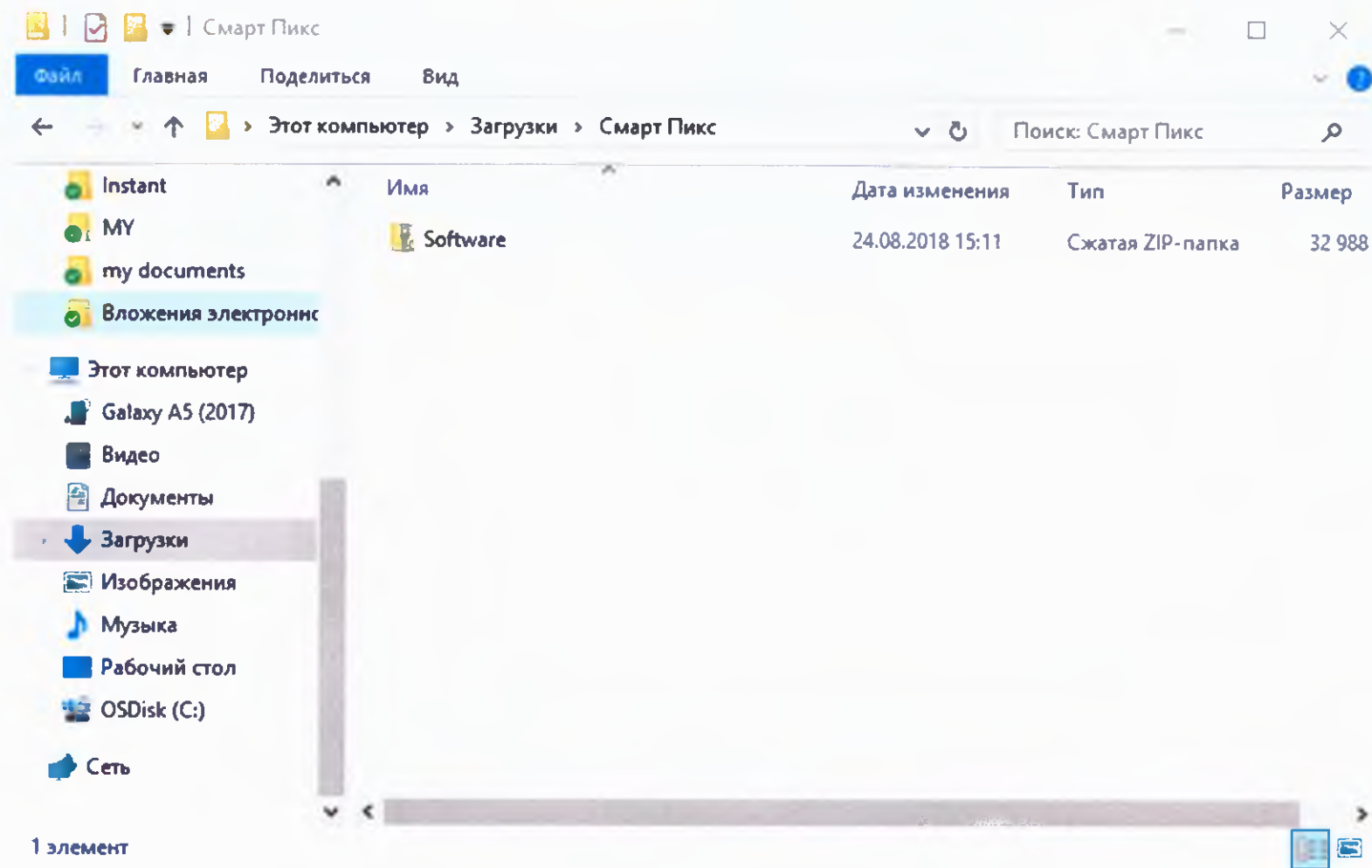


Скачивание и сохранение загруженного ПО Смарт Пикс на компьютер Пользователя

Программное обеспечение «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix) к Системе для управления диабетом «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix)

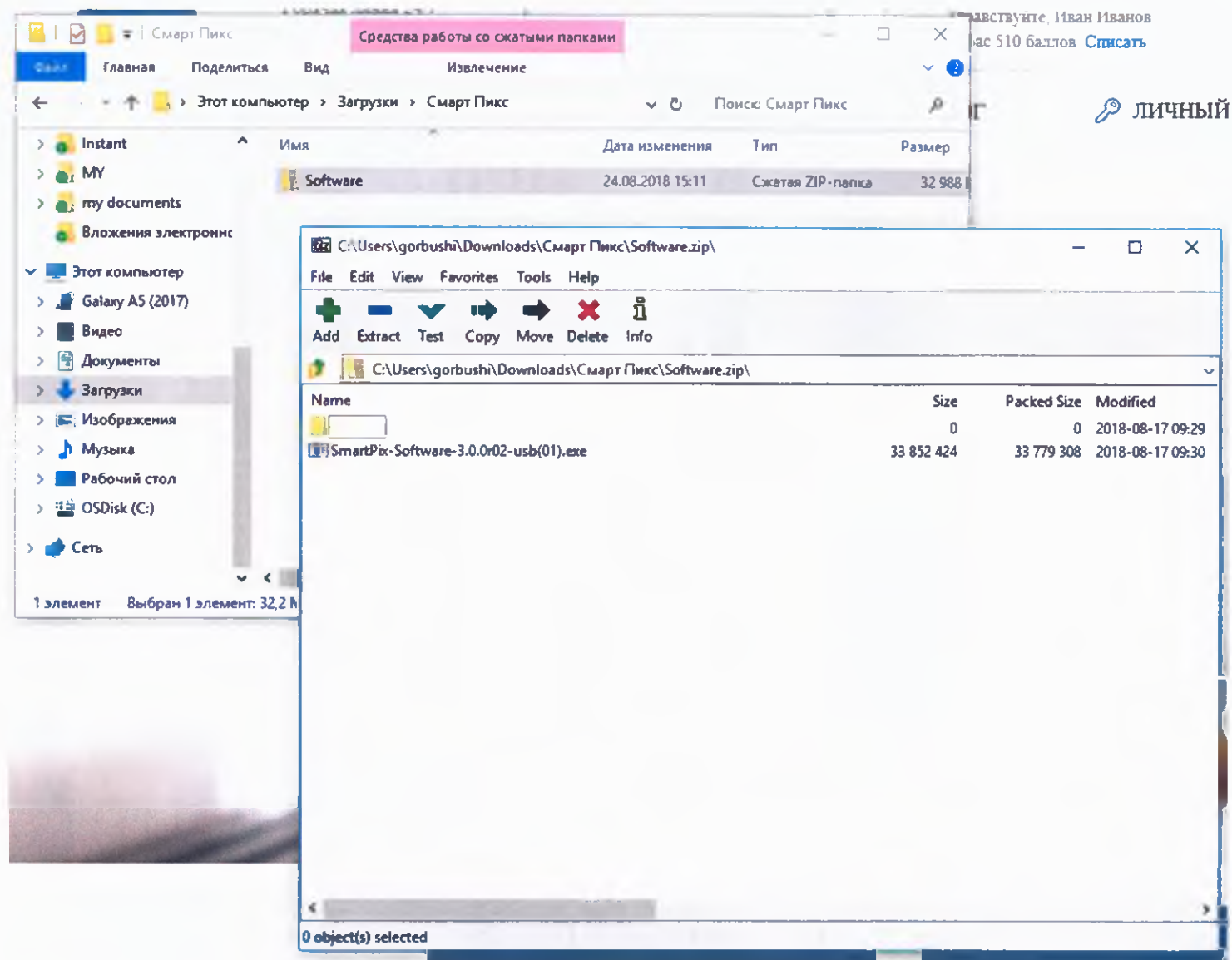


Распаковка архивного файла с ПО Смарт Пикс

Программное обеспечение «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix) к Системе для управления диабетом «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix)

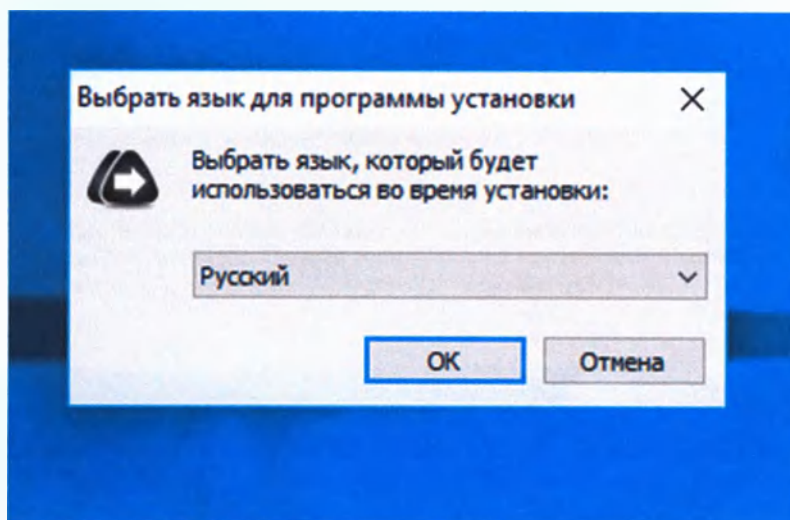


Выбор языка ПО Смарт Пикс при установке

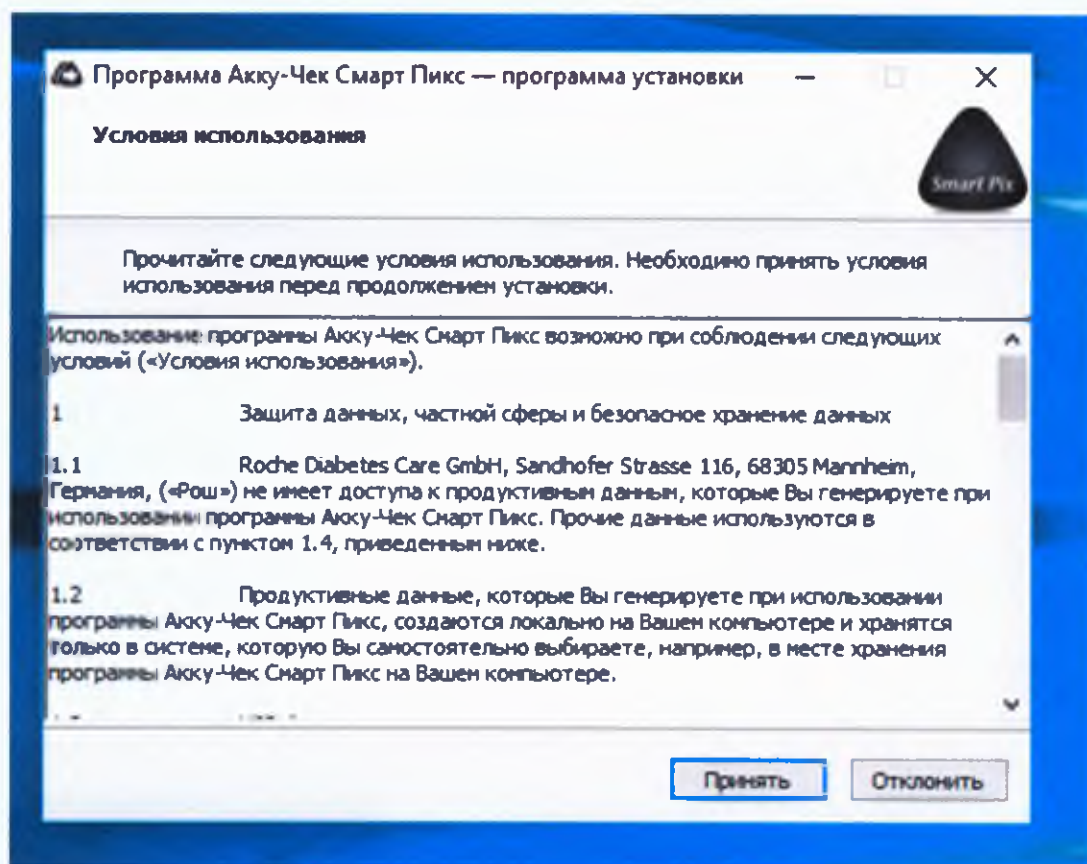


Запуск установки ПО Смарт Пикс на компьютер Пользователя: условия использования

Программное обеспечение «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix) к Системе для управления диабетом «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix)

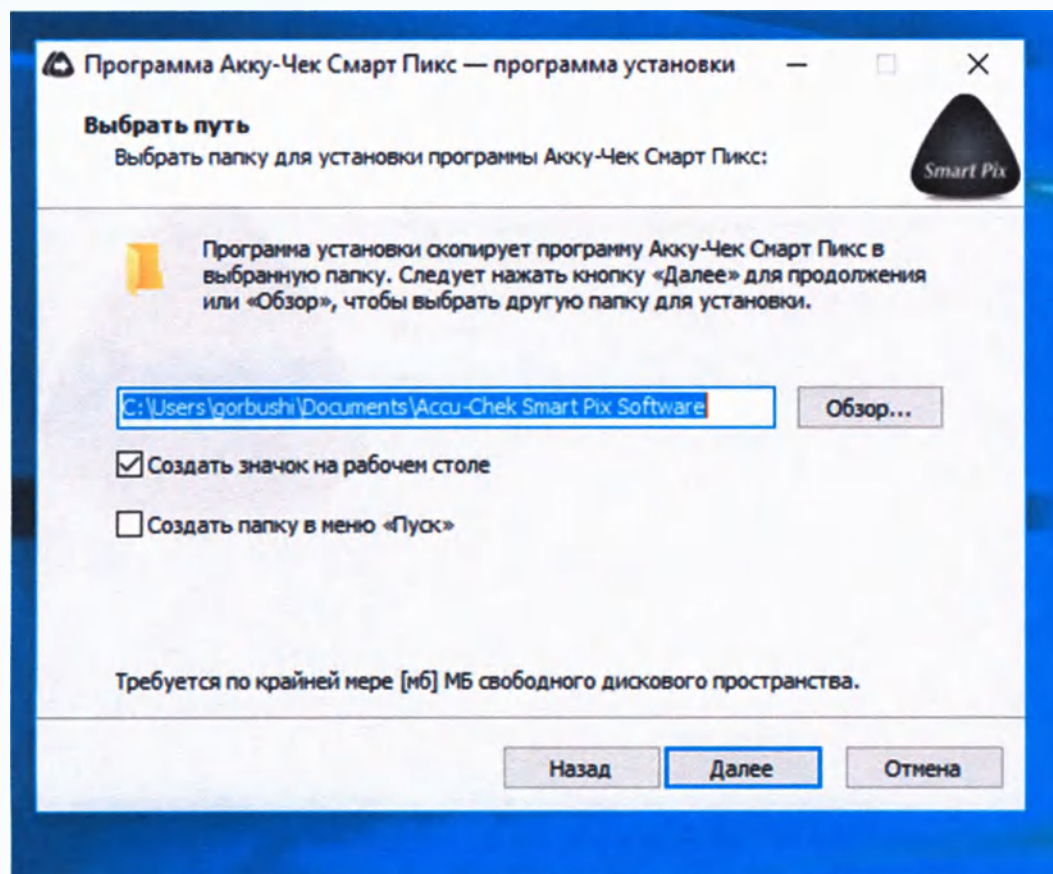


Выбор места установки ПО Смарт Пикс


Программное обеспечение «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix) к Системе для управления диабетом «Акку-Чек® Смарт Пикс» (Accu-Chek® Smart Pix)

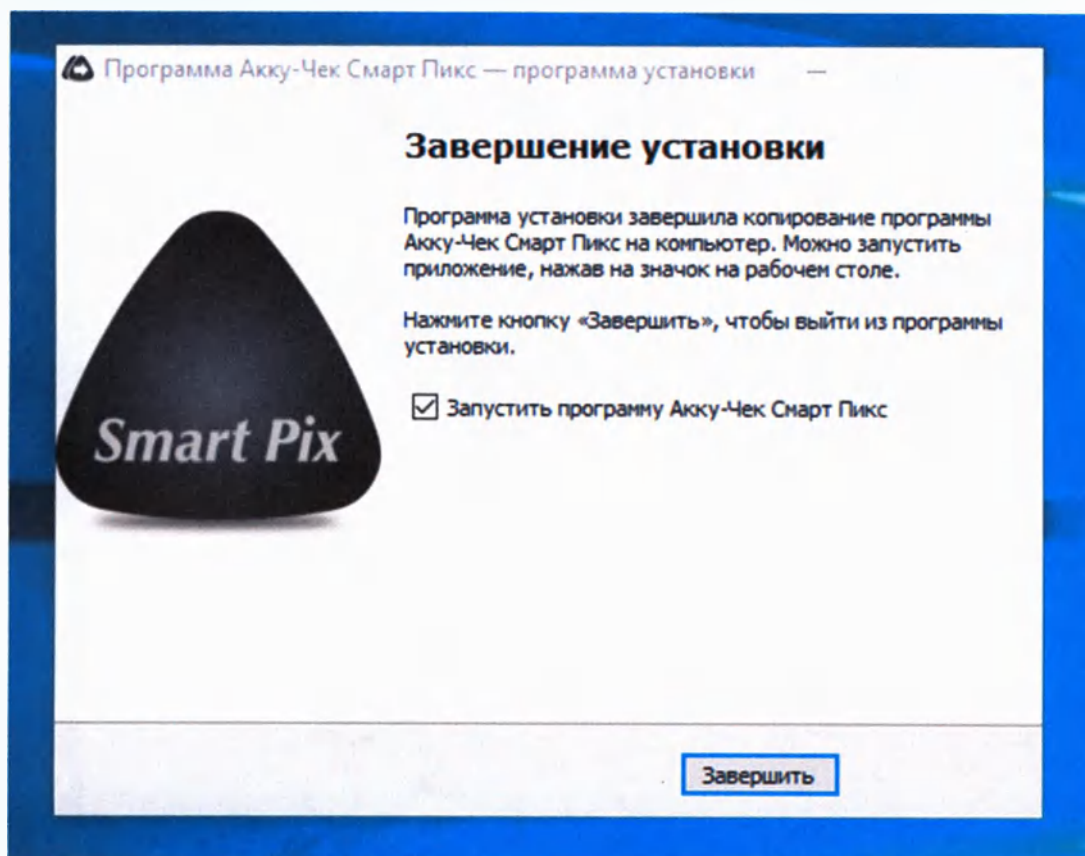


Завершение установки ПО Смарт Пикс

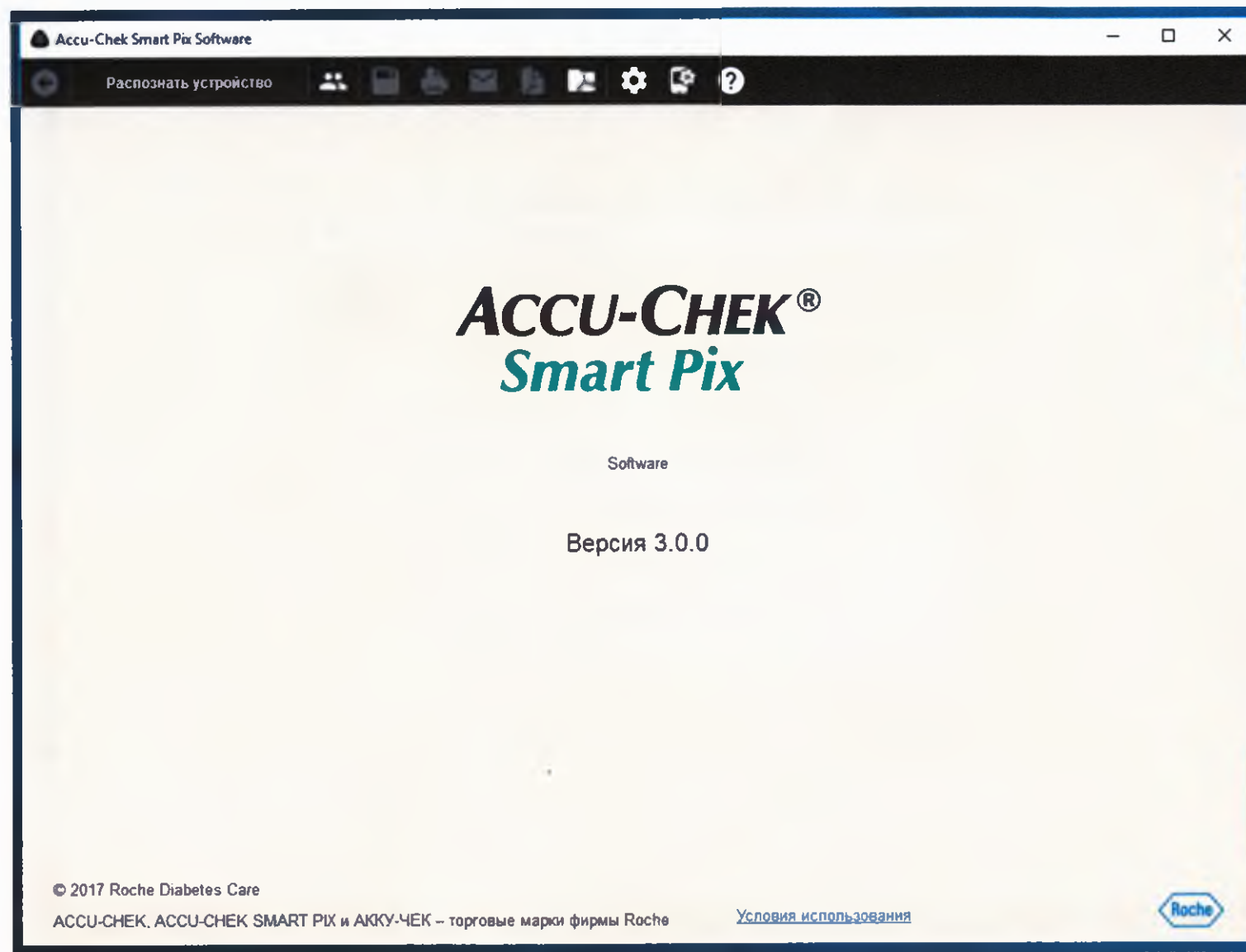

Интерфейс ПО Смарт Пикс, установленного на компьютер Пользователя: стартовая страница

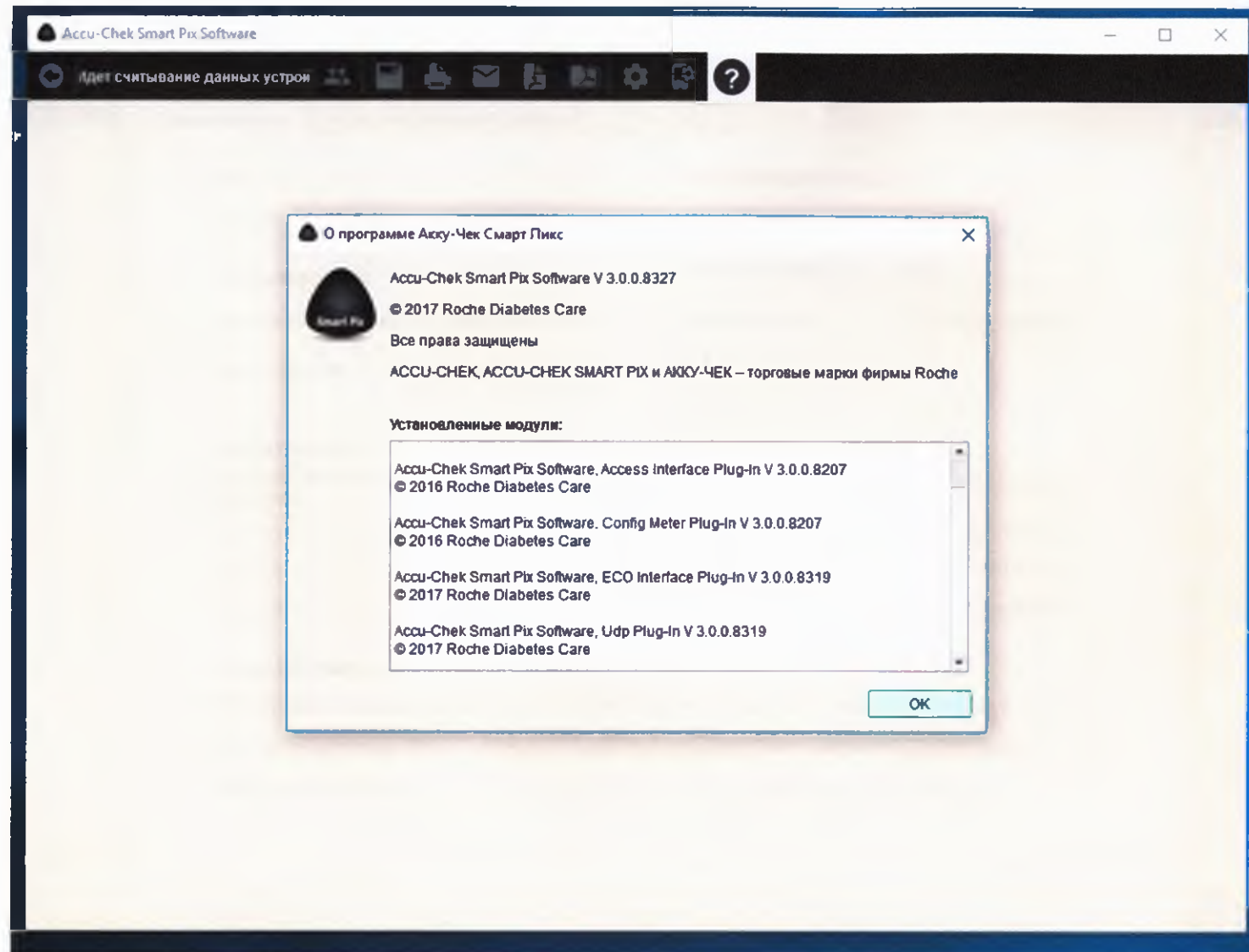

ПО Смарт Пикс: сведения о программе

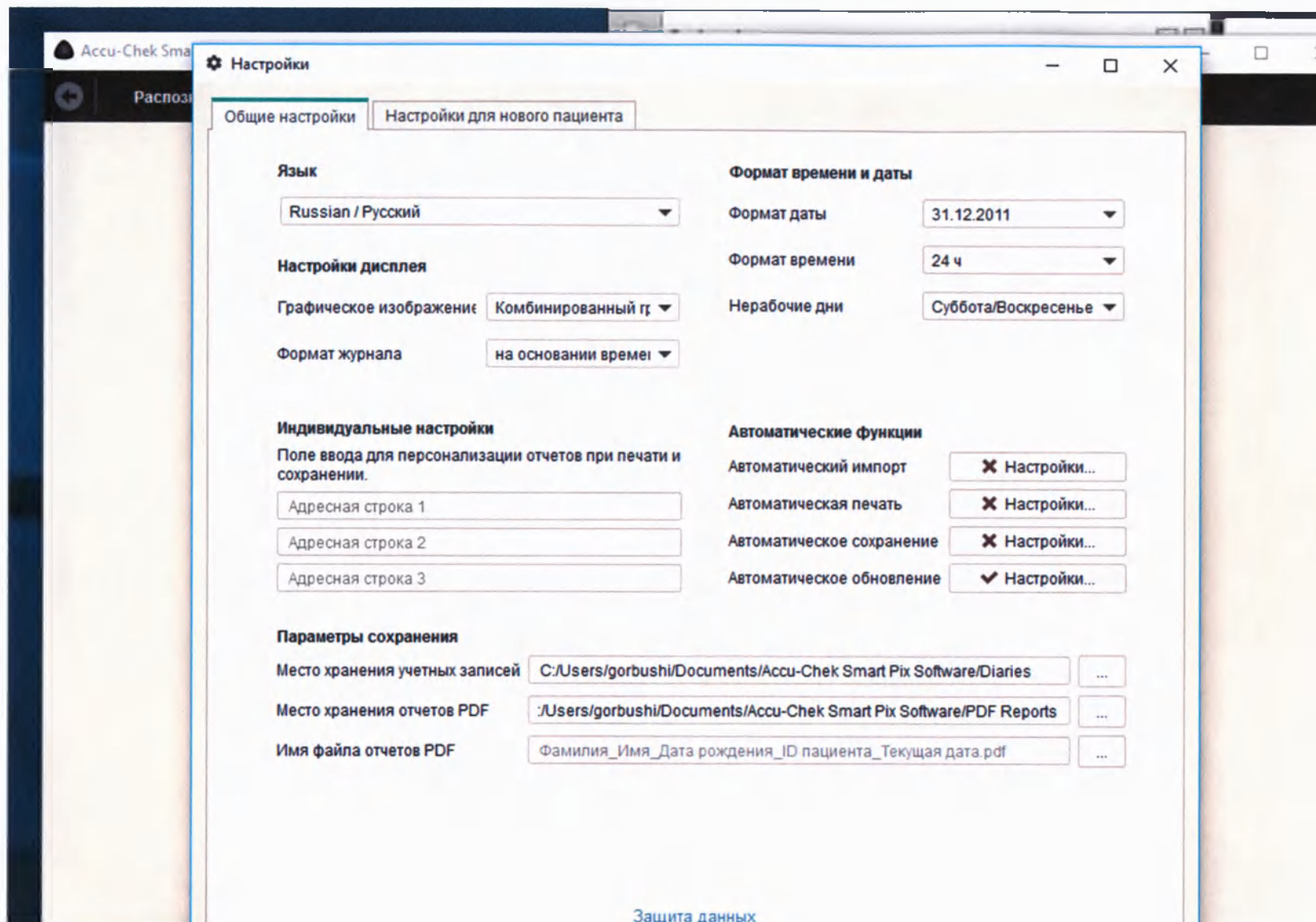

ПО Смарт Пикс, меню настроек: общие настройки ПО

Accu-Chek Sma

Распо

Настройки

Общие настройки

Настройки для нового пациента

Настройка времени

Интервалы времени

Интервалы считывания

Период времени

4 нед

Блоки времени

изменить...

Измерения ГК

2

Максимальная базальная скорость

5,0 МЕ/ч

Углеводная единица

г

Единица ГК

мг/дл

Статус ГК и CGM

ГК – риск гипогликемии

ГК – вариабельность глюкозы крови

ГК и CGM – целевой диапазон

Продолжительность гипогликемии (CGM)

CGM – вариабельность CGM

Целевой диапазон ГК и CGM относится как к результатам измерения глюкозы крови, так и к показателям CGM. В случае с результатами измерения глюкозы крови рассчитывается среднее арифметическое значение всех результатов измерений (средний уровень ГК). В случае с показателями CGM рассчитывается центральное значение всех показателей CGM (медиана данных CGM). Отображение статуса определяется заданными пороговыми значениями. Данные значения используются также для отображения целевого диапазона и границы гипогликемии в отчетах об уровне глюкозы крови.

400 мг/дл

250 мг/дл

160 мг/дл

70 мг/дл

70 мг/дл

0 мг/дл

Целевой диапазон

Граница гипогликемии

Сбросить настройки


Отмена

© 2017 Roche

ACCUCHEK. A

Roche

ПО Смарт Пикс, меню настроек: пользовательские настройки ПО

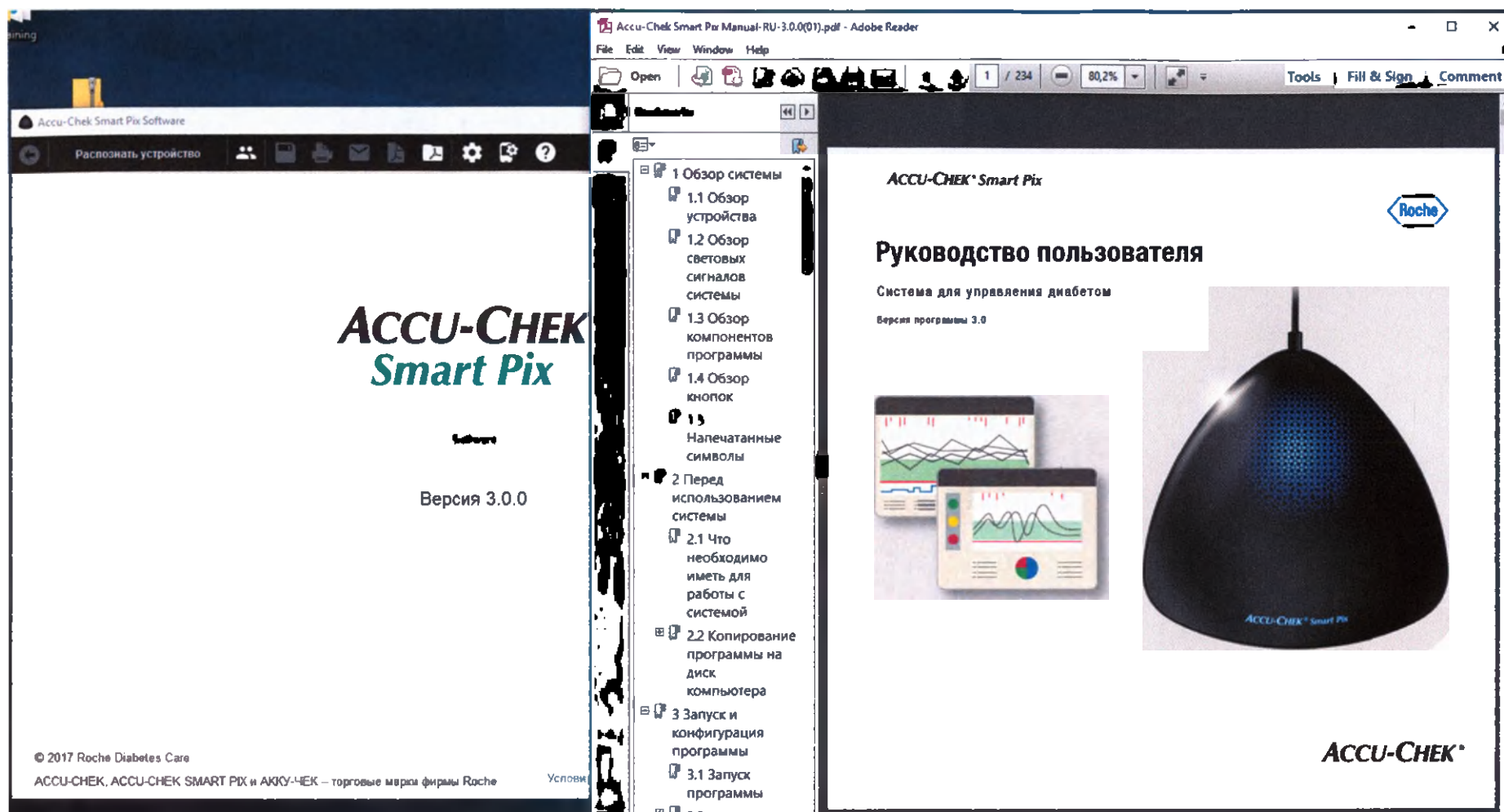

ПО Смарт Пикс: опция открытия руководства пользователя



Крыленко М. И.
Менеджер по регуляторным
вопросам
по доверенности
№ 77AB 9831495 от 15.05.2019

17
ПОШТО
ЗАПЕЧАТЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТОВ