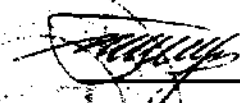


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Фармпласт"

 С.Ю.Грязнов
" " 2008 г.

Крышки для укупорки банок и флаконов с
лекарственными средствами.
Этикетка.

2008

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взм. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Разработал

Проверил

Н.контроль

Утвердил

Гуськов В.П.

Грязнов Ю.А.

Муравьев Л.Ю.

Грязнов С.Ю.

Подп.

Дата

1. Наименование изделия.

Крышки для укупорки банок и флаконов с лекарственными средствами.

Крышка полиэтиленовая навинчиваемая, тип 1.1.20;

Крышка полиэтиленовая навинчиваемая, тип 1.1.28-У;

Крышка полиэтиленовая натягиваемая, тип 1.2.27,5;

Крышка полиэтиленовая навинчиваемая, тип КПр-16.

2. Обозначение изделия.

КОД 94 6700.

3. Технические данные.

3.1. Предназначены для укупорки банок и флаконов с лекарственными средствами.

3.2. Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2а по ГОСТ 15150.

3.3. Изготавливаются из смеси материалов, разрешённых к применению МЗ РФ - полиэтилена низкого давления ГОСТ 16338 марок 277-73, 20808-024; полиэтилена высокого давления ГОСТ 16337 марок 10803-020, 15803-020, 15813-020.

3.4. Средний срок годности не менее 3-х лет.

3.5. Должны выдерживать вакуумметрическое давление:

№№ п.п.	Наименование и обозначение изделия.	Вакуумметрическое давление, не менее.	
		кПа	мм рт ст.
1	2	3	4
1	Крышка полиэтиленовая навинчиваемая, тип 1.1.20, в комплекте с пробкой ППВ-12.	20,1	150
2	Крышка полиэтиленовая навинчиваемая, тип 1.1.20, в комплекте с пробкой ППВ-13.	20,1	150
3	Крышка полиэтиленовая навинчиваемая, тип КПр-16 в комплекте с пробкой-капельницей, тип ПКП-8.	20,1	150
4	Крышка полиэтиленовая резьбовая с уплотняющим элементом, тип 1.1.28-У.	20,1	150
	Крышка полиэтиленовая натягиваемая, тип 1.2.27,5.	6,7	50

Изм.

лист

№ докум.

Подп.

Дата

Крышки для укупорки банок и флаконов с лекарственными средствами.

Этикетка.

Лит.

Лист

Листов

000 "Фармпласт"

4. Указания по применению.

4.1. После мойки и сушки изделий на предприятии потребителя, изделия поступают на автоматические линии по фасовке и при помощи автоматов устанавливаются и укупоривают стеклотару с лекарственными средствами.

5. Транспортирование и хранение.

5.1. Изделия транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования – по условиям хранения 5, ГОСТ 15150.

5.2. Хранения изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и без воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.3. Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом, или храниться в таре, защищённой от воздействия этих паров.

6. Гарантии поставщика.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок годности – 1 год со дня отгрузки.

7. Обозначение технических условий.

ТУ 9467-001-54607141-2008.

8. Сведения о качестве изделий.

Изделия соответствуют техническим условиям ТУ 9467-001-54607141-2008.

9. Сведения о приёмке ОТК.

Ставится штамп ОТК.

10. Дата выпуска изделий.

Указывается дата выпуска.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Ипорт

7