

УТВЕРЖДАЮ
 Глава представительства
 «Агфа ХелсКеа Н.В.» в Москве
 Рубцов Р.В.
 2009 г.



Руководство по эксплуатации

Кассета медицинская рентгеновская CPG 400, Curix Ortho Medium

Соответствует требованиям национальных стандартов:
 ГОСТ Р 51529-99, ГОСТ Р 26145-84, ГОСТ Р ИСО 4090-2006
 и технической документации изготовителя

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дуб.	Подп. и дата

АГФА ГЕФАЕРТ Н.В.
Представительство в Москве
Россия
115477 Москва
ул. Кантемировская, д.58
Тел.: (495) 234 21 01
Факс: (495) 234 21 12

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

Медицинская рентгеновская кассета CPG 400, Curix Ortho Medium,
Медицинские синечувствительные рентгеновские кассеты **CPG 400, Curix Ortho Medium**, предназначены для получения медицинских диагностических изображений на зеленочувствительных рентгеновских пленках.

Чувствительность экранов приходится на пик 450 нм. Благодаря техническим особенностям зеленочувствительных экранов возможно получение изображения высокого качества при снижении лучевой нагрузки на пациентов.

Медицинская рентгеновская кассета **Curix Ortho Medium, CPG 400** используется в отделениях лучевой диагностики лечебных учреждений для получения высококачественных рентгеновских изображений.

Кассеты **Curix Ortho Medium, CPG 400** разработаны таким образом, чтобы обеспечивать максимально плотный контакт экран-пленка. Благодаря этому решению расстояние между пленочным краем и грудной стенкой может составлять менее 2 мм.

Можно полностью раскрыть кассеты **Curix Ortho Medium, CPG 400** на 180°, это облегчает процесс загрузки и выгрузки пленки. Идентификационное окно позволяет при дневном освещении впечатать на содержащуюся внутри кассеты пленку данные о пациенте, используя идентификационную камеру AGFA Digid 3000. Специальная рельефная метка слева от идентификационного окна позволяет легко определить наличие пленки внутри кассеты, не раскрывая ее, или на ощупь в полной темноте, что по достоинству оценят рентгенолаборанты. Если метка располагается заподлицо с поверхностью кассеты, значит данная кассета содержит пленку. Кассеты имеют 2 удобных замка, позволяющих легким и простым движением открывать и закрывать кассеты в полной темноте.

Пленка заряжается в кассету в условиях фотолаборатории в кассеты в темноте или при неактивном освещении (красный фотофонарь, фильтр №104, №107, или подобные). Сторона, обращенная к излучателю, имеет соответствующую маркировку.

Для обеспечения необходимого в медицине качества изображения рентгеновские экраны не должны иметь механических повреждений: царапин, трещин, надломов, а также других дефектов, отображающихся на снимках. При появлении в процессе эксплуатации таких дефектов необходимо заменить экраны на новые. Обращаться с экранами следует очень аккуратно. По мере загрязнения рабочие поверхности усиливающих экранов следует протирать ватным тампоном, смоченным в специальном моющем средстве или слабом мыльном растворе. Применение для этой цели спирта, ацетона или других органических растворителей не допускается.

Глава Представительства
АК "Агфа ХэлсКеа Н.В."
08. 06. 09 г.
Р.В.



РЫЖКОВ