

ОКП 943210

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Маркет ПС»

 Е.А. Дороеева

07 сентября 2011 г.

Иглы для акупунктуры с покрытием или без покрытия «Дорива».

Эксплуатационная документация.

ИА 9432-002-000 Э

2011

Иглы для акупунктуры с покрытием или без покрытия «Дорива», далее акупунктурные иглы «Дорива», предназначены для лечения методом иглоукалывания (рефлексотерапия). Иглы поставляются в районы с умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Технические характеристики.

Иглы для акупунктуры «Дорива» изготовлены из медицинского сплава 40КХНМ, ГОСТ 14118. Ассортимент поставляемых игл Дорива представлен в нижеприведенной таблице.

Наименование	Обозначение	Основные размеры: диаметр рабочей части (мм) X длина рабочей части (мм).	
Иглы корпоральные	Д(65)	0.3 x 65	
	Д(50)	0.3 x 50	
	Д(30)	0.3 x 30	
	Д(15)	0.3 x 15	
Иглы корпоральные позолоченные	Д(65) позолоченная	0.3 x 65	
	Д(50) позолоченная	0.3 x 50	
	Д(30) позолоченная	0.3 x 30	
	Д(15) позолоченная	0.3 x 15	
Иглы корпоральные посеребренные	Д(65) посеребренная	0.3 x 65	
	Д(50) посеребренная	0.3 x 50	
	Д(30) посеребренная	0.3 x 30	
	Д(15) посеребренная	0.3 x 15	
Микроиглы	М(15)	0.25 x 15	
	М(13)	0.25 x 13	
	М(10)	0.25 x 10	
	М(6)	0.25 x 6	
	М(5)	0.25 x 5	
	М(4)	0.25 x 4	
	М(3)	0.25 x 3	
	М(2)	0.25 x 2	
Микроиглы позолоченные	М(15) позолоченная	0.25 x 15	
	М(13) позолоченная	0.25 x 13	
	М(10) позолоченная	0.25 x 10	
	М(6) позолоченная	0.25 x 6	
	М(5) позолоченная	0.25 x 5	
	М(4) позолоченная	0.25 x 4	
	М(3) позолоченная	0.25 x 3	
	М(2) позолоченная	0.25 x 2	
Микроиглы посеребренные	М(15) посеребренная	0.25 x 15	
	М(13) посеребренная	0.25 x 13	
	М(10) посеребренная	0.25 x 10	

	M(6) посеребренная	0.25 x 6	
	M(5) посеребренная	0.25 x 5	
	M(4) посеребренная	0.25 x 4	
	M(3) посеребренная	0.25 x 3	
	M(2) посеребренная	0.25 x 2	
Иглы-кнопки	K(2.5)	0.3 x 2.5	
	K(2.0)	0.3 x 2.0	
	K(1.5)	0.3 x 1.5	
Иглы-кнопки позолоченные	K(2.5) позолоченная	0.3 x 2.5	
	K(2.0) позолоченная	0.3 x 2.0	
	K(1.5) позолоченная	0.3 x 1.5	
Иглы-кнопки посеребренные	K(2.5) посеребренная	0.3 x 2.5	
	K(2.0) посеребренная	0.3 x 2.0	
	K(1.5) посеребренная	0.3 x 1.5	

Дезинфекция и стерилизация.

Иглы акупунктурные «Дорива» подвергаются обработке, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации по МУ-287-113-98.

Дезинфекцию проводить протираанием спиртом этиловым 96- градусным.

Предстерилизационную очистку проводить в следующей последовательности: предварительное ополаскивание под проточной водой в течение 1 минуты, замачивание в моющем растворе «Биолот» при температуре 40С в течение 15 минут, мойка в моющем растворе «Биолот» в течение 1 минуты, ополаскивание под проточной водой в течение 3 минут, сушка горячим воздухом при температуре 80С до полного исчезновения влаги. Стерилизацию проводить сухим горячим воздухом при температуре 180 С в течение 60 минут в воздушном стерилизаторе.

Хранение и транспортировка.

Хранение по ГОСТ 19126.

Иглы в упаковке предприятия- изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от 5 до 40 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С.

Воздух в помещении не должен содержать коррозионно-активных примесей.

Сведения о приемке.

Иглы для акупунктуры «Дорива», ТУ 9432-002-11597662-2011 признаны одними для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие акупунктурных игл «Дорива» ТУ 9432-002-11597662-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.

Гарантийный срок хранения – 3 года

Гарантийный срок эксплуатации – 1 месяц со дня продажи.

Порядок утилизации.

Отработанные и пришедшие в негодность иглы собираются в специальные контейнеры для сбора острых отходов и далее передаются на утилизацию в плазменных печах.