

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для приготовления 3-х готовых сред 3 основы питательной среды по 30±2 г внести раздельно в 3 стеклянные колбы вместимостью 2 л с 1 л дистиллированной воды в каждой. Смеси размешать, довести до кипения и кипятить в течение 2-3 мин при периодическом помешивании до полного расплавления, признаком которого является появление крупнопузырчатой пены. Расплавы охладить до 45-50 °С.

Для приготовления 2-х вариантов среды с селективной и идентифицирующей добавками в каждую из 2-х колб с охлажденным расплавом основы внести при перемешивании по 2,0±2 мл селективной добавки и по 30,0±0,2 г идентифицирующей добавки.

Для приготовления 1-го варианта среды с селективной без идентифицирующей добавки в колбу с 1 л охлажденного расплава основы внести при перемешивании только 2,0±2 мл селективной добавки.

Среды разливать в чашки Петри по 25 мл, поджечь на рабочем столе в стерильности. Чашки со срезами можно хранить в полиэтиленовом пакете при температуре -2...-8 °С в течение 20 суток.

ФГУП «Ростовский-на-Дону производственный институт Роспотребнадзора»
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 117-40
тел./факс (863) 246-27-03 E-mail: rpi@rostov.ru

Набор реагентов для приготовления питательной среды для выделения и первичной идентификации паразитических вибрионов (Набор ПГВС)

Только для диагностических целей

Серия 01-19

Годен до 05.2019

ИУ № 20.19.32-001-01/00114-2018

Рег. уд. №


СОСТАВ НАБОРА

Основа питательной среды - 3 фл.

Селективная добавка - 1 фл. на 3 л
Идентифицирующая добавка - 2 фл.

Для приготовления 3-х вариантов готовой среды в 2-х вариантах

Хранить в герметично закрытом пакете в защищенном от света месте с относительной влажностью не более 60%, и при T от -2 до +8 °С.

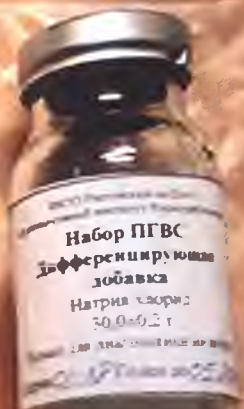

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противотуманный
Роспотребнадзора

Набор ПГВС

Основа питательной среды

Масса $50 \pm 2,0$ г

Только для диагностики in vitro

Серия № 01-18 Годен до 05-2019

№ 20.59.52-001-01898316-2018

Хранить в сухом защищённом от света месте
температуре от $+ 2$ до $+ 8$ °C.

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный центр
Роспотребнадзора

Набор ПГВС

Основа питательной среды

Масса $50 \pm 2,0$ г

Только для диагностики in vitro

Серия № 01-18 Годен до 05.2019

№ 20.59.52-001-01898316-2018

Хранить в сухом защищённом от света месте
температуре от $+2$ до $+8$ °C.

ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противоочумный институт Роспотребнадзора

Набор ПГВС
Дифференцирующая
добавка

Натрия хлорид
 $30,0 \pm 0,2$ г

Только для диагностики in vitro

01-18 олен до 05.28

ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противоочумный институт Роспотребнадзора

Набор ПГВС
Нективная добавка
алкилсульфатов

$6,0 \pm 0,2$ мл

для диагностики in vitro

01-18 олен до 05.28

ФКУЗ Ростовский
научный институт

Набор ШУ
Селективная
содержит алкилсульфат
 $6,0 \pm 0,2$ мл
для диагностики

01-18 Годен до

ФКУЗ Ростовский-на-Дону
Федеральный институт Роспотребнадзора

Набор ПГВС

Селективная добавка

алкилсульфатов

$6,0 \pm 0,2$ мл

для диагностики

01-18 Годен до 05



Всего приложено и скреплено _____ ЛИСТОВ