

г. Ярославль № 25538
от 26.06.18

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Вектор М»



/Мальков А.А./

« 10 » сентября 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки

медицинских отходов классов "А, Б, В, Г"

по ТУ 22.22.19-001-49417504-2017

г. Ярославль
2018 г.

Содержание

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	стр.4
II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	стр.4
III. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	стр.4
IV. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	стр.13
V. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	стр.14
VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	стр.14
VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	стр.15
VIII. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.....	стр.15
IX. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	стр.15
X. УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ.....	стр.15
XI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	стр.15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

благодарим Вас за приобретение продукции, изготовленной нашим предприятием!

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей Инструкцией по применению, проверить целостность упаковки и самих Пакетов, обеспечив их применение в соответствии с целевым назначением и установленными требованиями.

Ваши замечания по улучшению конструкции и удобству использования просим присылать на адрес предприятия-изготовителя.

Наименование изготовителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор М»

Юридический адрес:

150044, г. Ярославль, Ленинградский пр. д.29, стр.2

Тел./факс.: (4852) 676-888, 8(800)77-00-977

эл. почта: vektor-m06@mail.ru

Сертификат (декларация) соответствия №,

срок действия с по, выдан(а) органом

.....

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Настоящая Инструкция по применению (далее – Инструкция) содержит техническое описание Пакетов одноразовых для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов «А, Б, В, Г» (далее — Пакеты), правила и указания по их применению и другие сведения, которые необходимо знать медицинскому персоналу.
- 1.2 Настоящая Инструкция распространяется на все виды и типоразмеры (артикулы) Пакетов, выпускаемых по ТУ 22.22.19–001–49417504–2017. При необходимости, для того или иного исполнения Пакетов выпускается Дополнение к настоящей Инструкции, отражающее их специфику.
- 1.3 Класс в зависимости от степени потенциального риска применения – 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н).
- 1.4 Тип пакетов I-3 согласно ГОСТ 12302-2013.
- 1.5 Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией – 336200 согласно Приказу Минздрава России №4н.
Пример условного обозначения пакета при заказе и/или в других документах:
«Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов "А, Б, В, Г" по ТУ 22.22.19–001–49417504–2017, артикул Б-2-20,
где «Б» - наименование пакета - «пакет для медицинских отходов класс «Б»,
«2» - параметры пакета (габаритные размеры 330*600мм), «20» - толщина пакета 20 мкм.
- 1.6 Пакеты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12302 (раздел 4, 5), ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ Р 50444-92, «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» от 28 мая 2010 г. № 299 (глава II, раздел 18), СанПиН 2.1.7.2790, Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и техническим условиям ТУ 22.22.19–001–64796195– 2017.
- 1.7 Термины и определения - по ГОСТ 24888-81 и ГОСТ 31508-2012.
- 1.8 Настоящая Инструкция выполнена с учётом указаний ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ IEC 82079-1-2014, ГОСТ Р 56018-2014/ISO/IEC Guide 37:2012.

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пакеты предназначены для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов «А, Б, В, Г» медицинскими работниками, ответственными за сбор отходов в организациях, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

III. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пакет представляет собой одноразовую емкость без ручек установленного размера и цвета, устойчивую к климатическим и механическим воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации и транспортировки медицинских отходов, герметичную после закрытия при помощи стяжки. Информационное окно на пакет нанесено флексографическим способом и расположено по центру пакета.

Для изготовления пакетов применяют:

-ПНД толщиной 20, 25, 30, 35, 40 мкм. марки РЕ 6148С производства ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» по ТУ 2211-145-05766801-2008;

-ПНД толщиной 20, 25, 30, 35, 40 мкм. марки PE 6948С производства ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» по ТУ 2211-145-05766801-2008.

-краситель белый: BLEND WHITE марки 6Н производитель ООО "БИНА КЕМИКАЛ";

-краситель желтый: марки MB 3053/NEW YELLOW производитель ООО "ПОЛИЭКСИМ";

- краситель красный: марки MB 5400 RED производитель ООО «ПОЛИЭКСИМ»;

-краситель черный: марки MB 2109 BLACK производитель ООО «ПОЛИЭКСИМ».

Пакеты изготавливаются путем термического сваривания и имеют спайку на дне.

Пакеты отличаются по:

- габаритным размерам (Д*Ш от 330*300 мм до 700*1100мм);

- плотности (от 20 до 40 мкм);

- емкости (от 6 л до 120 л);

- цвету в зависимости от класса медицинских отходов (белый, желтый, красный, черный).

В зависимости от класса, медицинские отходы должны помещаться в пакеты соответствующего цвета:

Класс отхода «А» (белый цвет) - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (ТБО).

Класс отхода «Б» (желтый цвет) - эпидемиологически опасные отходы.

Класс отхода «В» (красный цвет) - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс отхода «Г» (черный цвет) - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности.

Пакеты предназначены для однократного использования.

Основные технические характеристики пакетов представлены в таблице №1.

Таблица №1.

Класс пакета (цвет)	Габаритные размеры пакета	Толщина пакета, мм*	Емкость пакета	Макс. масса загрузки пакета, кг	Материал	Кол-во пакетов в упаковке	Масса пакета не более, гр.
А БЕЛЫЙ	330*300	20	6	15	ПНД марки РЕ 6148С производства ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» по ТУ 2211-145-05766801-2008, ПНД марки РЕ 6948С производства ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» по ТУ 2211-145-05766801-2008	10;20;30;50;100	10
	330*300	25	6	15		10;20;30;50;100	10
	330*300	30	6	15		10;20;30;50;100	10
	330*300	35	6	15		10;20;30;50;100	10
	330*300	40	6	15		10;20;30;50;100	10
	330*600	20	10	15		10;20;30;50;100	20
	330*600	25	10	15		10;20;30;50;100	20
	330*600	30	10	15		10;20;30;50;100	20
	330*600	35	10	15		10;20;30;50;100	20
	330*600	40	10	15		10;20;30;50;100	20
500*600	20	30	15	10;20;30;50;100		25	
500*600	25	30	15	10;20;30;50;100		25	
500*600	30	30	15	10;20;30;50;100		25	
500*600	35	30	15	10;20;30;50;100		25	
500*600	40	30	15	10;20;30;50;100		25	
600*1000	20	90	15	10;20;30;50;100		45	
600*1000	25	90	15	10;20;30;50;100		45	
600*1000	30	90	15	10;20;30;50;100		45	
600*1000	35	90	15	10;20;30;50;100		45	
600*1000	40	90	15	10;20;30;50;100		45	
600*800	20	50	15	10;20;30;50;100		40	
600*800	25	50	15	10;20;30;50;100		40	
600*800	30	50	15	10;20;30;50;100	40		

[illegible]

500*600	20	30	10	10,20,30,50,100	25
500*600	25	30	10	10,20,30,50,100	25
500*600	30	30	10	10,20,30,50,100	25
500*600	35	30	10	10,20,30,50,100	25
500*600	40	30	10	10,20,30,50,100	25
600*1000	20	90	10	10,20,30,50,100	45
600*1000	25	90	10	10,20,30,50,100	45
600*1000	30	90	10	10,20,30,50,100	45
600*1000	35	90	10	10,20,30,50,100	45
600*1000	40	90	10	10,20,30,50,100	45
600*800	20	50	10	10,20,30,50,100	40
600*800	25	50	10	10,20,30,50,100	40
600*800	30	50	10	10,20,30,50,100	40
600*800	35	50	10	10,20,30,50,100	40
600*800	40	50	10	10,20,30,50,100	40
700*800	20	60	10	10,20,30,50,100	45
700*800	25	60	10	10,20,30,50,100	45
700*800	30	60	10	10,20,30,50,100	45
700*800	35	60	10	10,20,30,50,100	45
700*800	40	60	10	10,20,30,50,100	45
700*1100	20	120	10	10,20,30,50,100	60
700*1100	25	120	10	10,20,30,50,100	60
700*1100	30	120	10	10,20,30,50,100	60
700*1100	35	120	10	10,20,30,50,100	60
700*1100	40	120	10	10,20,30,50,100	60
800*900	20	100	10	10,20,30,50,100	55
800*900	25	100	10	10,20,30,50,100	55

8-30	800*900	30	100	10	10,20,30,50,100	55
8-35	800*900	35	100	10	10,20,30,50,100	55
8-40	800*900	40	100	10	10,20,30,50,100	55
1-20	330*300	20	6	10	10,20,30,50,100	10
1-25	330*300	25	6	10	10,20,30,50,100	10
1-30	330*300	30	6	10	10,20,30,50,100	10
1-35	330*300	35	6	10	10,20,30,50,100	10
1-40	330*300	40	6	10	10,20,30,50,100	10
2-20	330*600	20	10	10	10,20,30,50,100	20
2-25	330*600	25	10	10	10,20,30,50,100	20
2-30	330*600	30	10	10	10,20,30,50,100	20
2-35	330*600	35	10	10	10,20,30,50,100	20
2-40	330*600	40	10	10	10,20,30,50,100	20
3-20	500*600	20	30	10	10,20,30,50,100	25
3-25	500*600	25	30	10	10,20,30,50,100	25
3-30	500*600	30	30	10	10,20,30,50,100	25
3-35	500*600	35	30	10	10,20,30,50,100	25
3-40	500*600	40	30	10	10,20,30,50,100	25
4-20	600*1000	20	90	10	10,20,30,50,100	45
4-25	600*1000	25	90	10	10,20,30,50,100	45
4-30	600*1000	30	90	10	10,20,30,50,100	45
4-35	600*1000	35	90	10	10,20,30,50,100	45
4-40	600*1000	40	90	10	10,20,30,50,100	45
5-20	600*800	20	50	10	10,20,30,50,100	40
5-25	600*800	25	50	10	10,20,30,50,100	40
5-30	600*800	30	50	10	10,20,30,50,100	40
5-35	600*800	35	50	10	10,20,30,50,100	40

6-40	600*800	40	50	10	10,20,30,50,100	40
6-20	700*800	20	60	10	10,20,30,50,100	45
6-25	700*800	25	60	10	10,20,30,50,100	45
6-30	700*800	30	60	10	10,20,30,50,100	45
6-35	700*800	35	60	10	10,20,30,50,100	45
6-40	700*800	40	60	10	10,20,30,50,100	45
7-20	700*1100	20	120	10	10,20,30,50,100	60
7-25	700*1100	25	120	10	10,20,30,50,100	60
7-30	700*1100	30	120	10	10,20,30,50,100	60
7-35	700*1100	35	120	10	10,20,30,50,100	60
7-40	700*1100	40	120	10	10,20,30,50,100	60
8-20	800*900	20	100	10	10,20,30,50,100	55
8-25	800*900	25	100	10	10,20,30,50,100	55
8-30	800*900	30	100	10	10,20,30,50,100	55
8-35	800*900	35	100	10	10,20,30,50,100	55
8-40	800*900	40	100	10	10,20,30,50,100	55
1-20	330*300	20	6	15	10,20,30,50,100	10
1-25	330*300	25	6	15	10,20,30,50,100	10
1-30	330*300	30	6	15	10,20,30,50,100	10
1-35	330*300	25	6	15	10,20,30,50,100	10
1-40	330*300	40	6	15	10,20,30,50,100	10
2-20	330*600	20	10	15	10,20,30,50,100	20
2-25	330*600	25	10	15	10,20,30,50,100	20
2-30	330*600	30	10	15	10,20,30,50,100	20
2-35	330*600	35	10	15	10,20,30,50,100	20
2-40	330*600	40	10	15	10,20,30,50,100	20
3-20	500*600	20	30	15	10,20,30,50,100	25

10,20,30,50,100	25	30	15	500*600	25	30	15	500*600	25	30	15	10,20,30,50,100	25
10,20,30,50,100	25	30	15	500*600	30	30	15	500*600	30	30	15	10,20,30,50,100	25
10,20,30,50,100	25	35	15	500*600	40	30	15	500*600	40	30	15	10,20,30,50,100	25
10,20,30,50,100	25	40	15	500*600	40	30	15	500*600	40	30	15	10,20,30,50,100	25
10,20,30,50,100	25	40	15	600*1000	40	90	15	600*1000	40	90	15	10,20,30,50,100	45
10,20,30,50,100	45	40	15	600*1000	20	90	15	600*1000	20	90	15	10,20,30,50,100	45
10,20,30,50,100	45	25	15	600*1000	25	90	15	600*1000	25	90	15	10,20,30,50,100	45
10,20,30,50,100	45	30	15	600*1000	30	90	15	600*1000	30	90	15	10,20,30,50,100	45
10,20,30,50,100	45	35	15	600*1000	35	90	15	600*1000	35	90	15	10,20,30,50,100	45
10,20,30,50,100	45	40	15	600*800	20	50	15	600*800	20	50	15	10,20,30,50,100	40
10,20,30,50,100	40	40	15	600*800	25	50	15	600*800	25	50	15	10,20,30,50,100	40
10,20,30,50,100	40	30	15	600*800	30	50	15	600*800	30	50	15	10,20,30,50,100	40
10,20,30,50,100	40	35	15	600*800	35	50	15	600*800	35	50	15	10,20,30,50,100	40
10,20,30,50,100	40	40	15	600*800	40	50	15	600*800	40	50	15	10,20,30,50,100	40
10,20,30,50,100	45	60	15	700*800	40	60	15	700*800	40	60	15	10,20,30,50,100	45
10,20,30,50,100	60	20	15	700*1100	20	120	15	700*1100	20	120	15	10,20,30,50,100	60
10,20,30,50,100	60	25	15	700*1100	25	120	15	700*1100	25	120	15	10,20,30,50,100	60
10,20,30,50,100	60	30	15	700*1100	30	120	15	700*1100	30	120	15	10,20,30,50,100	60
10,20,30,50,100	60	35	15	700*1100	35	120	15	700*1100	35	120	15	10,20,30,50,100	60
10,20,30,50,100	60	40	15	700*1100	40	120	15	700*1100	40	120	15	10,20,30,50,100	60
10,20,30,50,100	55	20	15	800*900	20	100	15	800*900	20	100	15	10,20,30,50,100	55
10,20,30,50,100	55	25	15	800*900	25	100	15	800*900	25	100	15	10,20,30,50,100	55
10,20,30,50,100	55	30	15	800*900	30	100	15	800*900	30	100	15	10,20,30,50,100	55

35	800*900	35	100	15	10;20;30;50;100	55
40	800*900	40	100	15	10;20;30;50;100	55

* Толщина пакета соответствует толщине пленки, допустимое отклонение толщины плёнки пакетов $\pm 20\%$.

** Допустимое отклонение по емкости $\pm 5\%$.

*** Предельные отклонения от размеров пакетов ± 10 мм – по длине и ширине пакета.

3.1 Упаковка

Пакеты одного артикула укладываются в стопы в количестве 10; 20; 30; 50; 100 шт. в зависимости от класса и размера пакета.

Стопы пакетов должны формироваться в кипы, упаковываться в мешки из полимерных материалов по ГОСТ 12302, которые заваривают и/или заклеивают лентой с липким слоем или укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Масса кипы, мешка или ящика не должна превышать 20 кг.

Кипы и ящики должны укладываться в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

По согласованию с потребителем (заказчиком) допускаются другие способы упаковывания пакетов, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании и хранении.

3.2 Комплектность

Состав поставки должен соответствовать таблице №2.

Таблица №2.

	Наименование	Количество, шт.
1	Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. А (белый) по ТУ 22.22.19-001-49417504-2017	10;20;30;50;100 шт.
	Инструкция по применению	1
	Потребительская упаковка	1
2	Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. Б (желтый) по ТУ 22.22.19-001-49417504-2017	10;20;30;50;100 шт.
	Потребительская упаковка	1
	Инструкция по применению	1
3	Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. В (красный) по ТУ 22.22.19-001-49417504-2017	10;20;30;50;100 шт.
	Потребительская упаковка	1
	Инструкция по применению	1
4	Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов Кл. Г (черный) по ТУ 22.22.19-001-49417504-2017	10;20;30;50;100 шт.
	Потребительская упаковка	1
	Инструкция по применению	1

Допускается передача заказчику Инструкции в электронном виде для дальнейшего самостоятельного тиражирования.

3.3 Маркировка

На каждую потребительскую упаковку Пакетов должна быть нанесена маркировка с указанием:

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- наименование изделия, артикул;
- размер, цвет, толщина, емкость;
- максимальная нагрузка, кг;
- наименование и марка материала;
- количество изделий в упаковке;
- дата изготовления медицинского изделия (месяц, год);
- гарантийный срок годности медицинского изделия (месяц, год включительно);
- маркировка класса отходов;
- указание, что данное медицинское изделие предназначено для однократного применения;
- обозначение технических условий;
- серийный номер медицинского изделия;
- знак обращения на рынке (при наличии);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- условия хранения;
- условия утилизации;
- предупреждения и меры предосторожности, которые необходимо исполнять в отношении медицинского изделия.

Каждый пакет должен содержать маркировку:

- наименование и назначение пакета;
- класс отходов;
- надписи: «Название ЛПУ», «Подразделение ЛПУ»; «Ответственное лицо»; «Дата сбора»;
- «Не превышать нагрузку 10 кг» (для классов «Б» и «В», для других классов согласно Приложению Б);
- «Не предназначено для острых и режущих предметов»;
- «Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты» (для классов Б и В);
- «Не уграмбовывать отходы» (для классов Б и В);
- «После заполнения пакета не более чем на $\frac{3}{4}$ завязать пакет с использованием стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов».

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием надписи, соответствующей манипуляционному знаку «Беречь от влаги», «Крюками не брать», «Беречь от солнечных лучей».

IV ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Пакеты предназначены для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов «А, Б, В, Г» медицинскими работниками, ответственными за сбор отходов в организациях, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

V ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Пакеты не имеют медицинских противопоказаний к применению.

VI ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

6.1 Эксплуатационные ограничения

Не подлежат использованию пакеты с нарушенной герметичностью.

Не превышать нагрузку 10 кг (для классов Б и В, для других классов согласно Таблице № 1).

Недопустимо использовать пакеты для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты (для классов Б и В).

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Не утрамбовывать отходы (для классов Б и В).

После заполнения пакета, не более чем на $\frac{3}{4}$, завязать пакет с использованием стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов.

6.2 Подготовка изделия к использованию

- извлечь пакет из упаковки, расправить,
- визуально проверить целостность/герметичность пакета
- при необходимости закрепить на контейнере, либо на специализированных стойках.

При размещении пакетов строго следовать маркировке класса отходов.

6.3 Использование изделия

-поместить отходы соответствующего класса в пакет;

-строго следовать нормативам заполнения и смены пакетов, установленных СанПиН 2.1.7.2790.

После заполнения пакета, завершения операции, либо смены, сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с помощью стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов.

Перемещение отходов за пределами подразделения в открытых емкостях не допускается.

Содержимое пакетов Б и В подлежит обязательному обеззараживанию. Обеззараживание должно осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7-2790 и внутренними нормативами медицинской организации.

При окончательной упаковке отходов класса Б и В для удаления их из подразделения (организации) пакеты с отходами классов Б и В маркируются надписью «Отходы. Класс Б», либо «Отходы. Класс В» с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Сбор и временное хранение отходов класса «Г» осуществляется в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7-2790 в зависимости от класса опасности отходов. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

VII ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пакеты являются одноразовыми изделиями и технического обслуживания не требуют.

VIII УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пакеты хранят в условиях, установленных для хранения полимерных изделий.

Кипы и ящики хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение пакетов, содержащих медицинские отходы, должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790.

IX ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пакеты транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования — по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Мешки, кипы, ящики с пакетами формируют в транспортные пакеты и транспортируют по ГОСТ 26663.

Транспортирование пакетов, содержащих медицинские отходы, должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

X УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ

Пакеты, не подвергшиеся использованию по назначению, утилизируются вместе с бытовым мусором.

Утилизация и уничтожение пакетов, содержащих медицинские отходы, должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790.

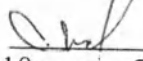
XI ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие пакетов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Средний срок хранения 2 года с даты изготовления.

Гарантийные сроки хранения пакетов устанавливают в технической документации на пакеты. Гарантийный срок хранения пакетов - 6 месяцев с даты изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения допускается проводить контрольные испытания по основным показателям на соответствие требованиям настоящего стандарта. При получении положительных результатов испытаний пакеты могут быть допущены для применения и использованы по назначению.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Вектор М»

 Мальков А.А..
«10» сентября 2018 г.



**ИЗВЕЩЕНИЕ 01-2018 ОБ ИЗМЕНЕНИИ №1
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**«Пакеты одноразовые для сбора, временного хранения и транспортировки
медицинских отходов классов «А, Б, В, Г»»**

по ТУ 22.22.19-001-49417504-2017

г.Ярославль
2018 г.

1. На стр. 6-12 в таблице №1 добавить колонку «масса пакета не более., гр»;
2. Стр 13 в п. 3.3 заменить текст «срок годности медицинского изделия» на «гарантийный срок годности медицинского изделия»;
3. На стр.13 п. 3.3 удалить пункт «- надпись: «для медицинских отходов», «наименование и марка материала»;
4. На стр. 15 в разделе VIII Условия хранения заменить текст «условиям хранения 1 по ГОСТ 15150» на «условиям хранения 5 по ГОСТ 15150»
5. На стр.15 в разделе XI Гарантийные обязательства в абзац 1 добавить текст «Средний срок хранения 2 года с даты изготовления».