



Общество с ограниченной ответственностью

г.Москва, ул. Вольная, д. 25, корпус 3
КБ "ЛОКО-банк" (ЗАО), г.Москва.
Р/счет 40702810700090572002
БИК 0445855151
ИНН 7719178003

тел.: 8 (495) 365 41 74

Руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения вкладыши ортопедические корректирующие ОВ-1:

1. Рекомендации по эксплуатации

Подбор размера вкладышей проводится строго по размеру стопы. Длительное ношение вкладышей большего или меньшего размера может отрицательно сказаться на работе сводов и привести к ухудшению состояния стопы.

Для того чтобы ортопедические вкладыши долго не изнашивались, не утрачивали своих изначальных свойств, не распространяли неприятного запаха и не становились скопищем болезнетворных грибков и бактерий соблюдайте следующие несложные правила ухода за ними:

- Необходимо ежедневно после носки вынимать вкладыши из обуви и тщательно просушивать их в темном месте на ровной поверхности вдали от центральной отопительной системы и нагревательных электроприборов.
- Если для верхнего покрытия вкладышей используется натуральная кожа, при появлении на их поверхности загрязнений немедленно удаляйте данные загрязнения ваткой, смоченной слабым спиртовым раствором. Затем тщательно просушите.
- Если для верхнего покрытия вкладышей используется текстиль, при появлении на их поверхности загрязнений удалите загрязнения при помощи ватки, смоченной слабым мыльным раствором. Затем тщательно просушите.

1.

2. Требования охраны окружающей среды

Изделие не подлежит обязательной утилизации