



HOSPITEX DIAGNOSTICS

лабораторное оборудование и реагенты

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20 г. № _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный Директор ООО «Хоспитекс Диагностика»

К.А. Константинов

3 августа 2009 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению раствора для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов

СОСТАВ НАБОРА

Реагент R1: (1x0,5 л; 1x1 л)

Деионизованная вода.....97%

Na₂HPO₄.....0,1%

KH₂PO₄.....0,02%

NaCl.....0,9%

ПАВ и Дeterгенты.....2%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с раствором для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов следует соблюдать осторожность и не допускать попадания на кожу или слизистые; при попадании немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. Не пипетировать ртом; при проглатывании следует выпить 0,5 л теплой воды и вызвать рвоту.

При работе с раствором для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

Реагент готов к использованию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Хранение раствором для промывки гидравлической системы гематологических анализаторов должно производиться при температуре + 15 – 25 °С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.

Срок годности набора – 18 месяцев.

Раствор после вскрытия флакона должен храниться при температуре + 15 – 25 °С в течение всего срока годности при условии достаточной герметичности. Не допускайте контаминации.

По всем вопросам, касающимся набора, следует обращаться в ООО «Хоспитекс Диагностика» по адресу: 121552, г. Москва, а/я 43, тел/факс (495) 646-0505

Начальник производства

Главный врач ФГУ РКНПК Росмедтехнологий



А.А.Борисова

В.К.Ситина