

LOGOS управляется при помощи сенсорного терминала на базе Windows.




Это **ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА**, которая может нагреть реагенты для проводки при помощи микроволн (МВ) или с помощью электрического нагрева, а также сочетая электрический и МВ нагрев.

Способ нагрева контролируется автоматически при помощи ПИР (Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор), который позволяет оператору настроить желаемые параметры (Время и Температуру) простым изменением кривой. Если используются предустановленные программы, необходимо настроить только время процедуры в зависимости от остальных характеристик.

Благодаря настройкам **ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ**, LOGOS позволяет получать результаты высокого качества.

Прибор всегда будет воспроизводить заданные условия температуры и времени, автоматически регулируя уровень МВ/электрического нагревания.

Прибор включает в себя две реторты: **основную** (микроволновую, слева) и **парафиновую** (справа). Основная реторта используется для гистологической проводки, декальцинации и инфильтрации парафином. В парафиновой реторте — только инфильтрация парафином.

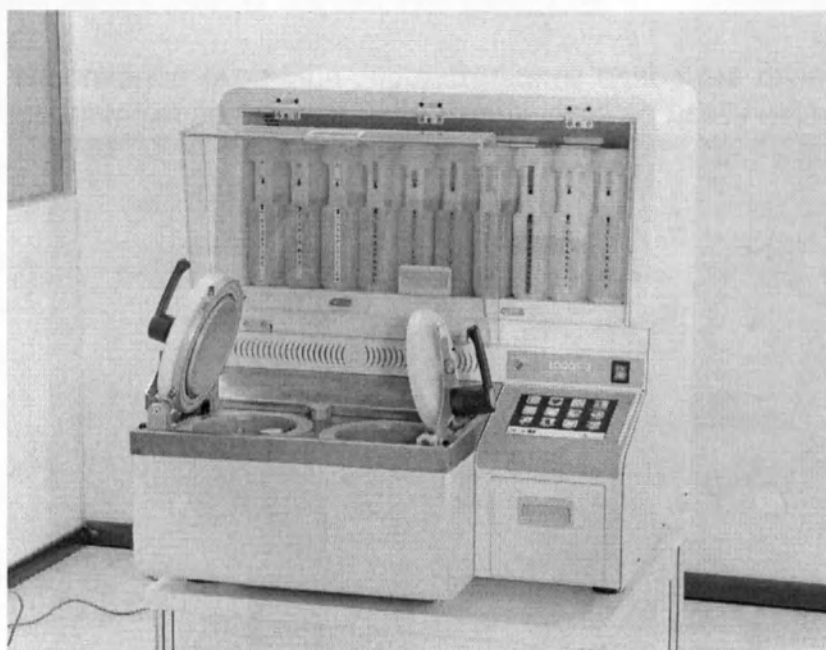

LOGOS J