

Код ОКП 94 3630

5
«Утверждаю»
Генеральный директор ЗАО «Даниес»



Л.А. Ведерникова

20.04.09

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Катетеры для кардиохирургии

Производитель: California Medical Laboratories Inc., (США)
1570 Sunland Lane
Costa Mesa, California 92626, USA

ВНИМАНИЕ:

Только для одноразового использования.
Не использовать повторно. Не стерилизовать повторно.
Не используйте, если упаковка повреждена или открыта.
Стерилизовано этиленоксидом. Апирогенно.
Хранить в прохладном, сухом месте.
Внимание: Прочитайте внимательно инструкцию перед использованием изделия.

ОПИСАНИЕ

Катетеры предназначены для использования во время искусственного кровообращения при операциях на сердце для дренирования (отсоса) оперируемой области или полостей вены. Катетер представляет собой полую трубку из поливинилхлорида различного диаметра и различной длины, с армированием или без армирования (гибкую), с наконечником различной конфигурации.

ПОКАЗАНИЯ

Катетеры предназначены во время искусственного кровообращения при операциях на сердце.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данные катетеры не предназначена для использования в других областях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Проверьте упаковку на повреждения.
2. Извлеките канюлю из упаковки с использованием асептической техники.
3. После извлечения канюли из упаковки, проверьте изделие на повреждение.

ВНИМАНИЕ: если упаковка повреждена, изделие не может быть использовано как стерильное.

ВНИМАНИЕ: тщательно проверьте изделие перед использованием на наличие повреждений. Использование поврежденного изделия может привести к обструкции или срыву потока в процессе использования и может привести к негативным последствиям.

ВНИМАНИЕ: Правильность хирургической процедуры и техники использования катетера является ответственностью оперирующего хирурга.

4. Заполните канюлю.
5. Используя соответствующую хирургическую технику, разместите катетер дистальным концом в месте катетеризации и закрепите его.
6. Используйте obturator чтобы минимизировать потери крови в момент введения катетера. Удалите obturator, установите и закрепите катетер.
7. Заполните катетер, чтобы удалить из него воздух
8. Прикрепите проксимальный конец катетера к венозной дренажной линии экстракорпорального кровообращения. Будьте осторожны, чтобы избежать попадания воздуха и образования воздушной пробки.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что катетер надежно прикреплен к венозной дренажной линии чтобы предотвратить попадание воздуха в линию экстракорпорального кровообращения.

9. Во время процедуры, следите за тем, чтобы не возникло перегиба перфузионного контура.

ВНИМАНИЕ: Избегайте острых изгибов, чрезмерного давления на катетер и подсоединенных магистралей, т.к. это может привести к перфорации оперируемой области или полый вены.

ВНИМАНИЕ: Не пережимайте армированный катетер, т.к. это может привести к его повреждению. Пережимайте катетер только в той части, где нет армирования.

10. Для завершения процедуры, удалите катетер, используя соответствующую хирургическую технику, и ушейте место канюляции. Утилизируйте катетер надлежащим образом.

ВНИМАНИЕ: Не используйте армированный катетер при МРТ исследованиях.

ВНИМАНИЕ: Данные изделия предназначены только для одноразового использования. Не используйте данное изделие повторно.



