



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СТИЛЬБ»

Н.А. Балыков

«25» января 2019г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Халат медицинский многоразового использования
по ТУ 14.12.30 – 001 – 22816995 – 2017**

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Халат медицинский многоразового использования по ТУ 14.12.30 – 001 – 22816995 – 2017 (далее по тексту «халат», «изделия»).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

См. Приложение №1 настоящей инструкции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Халат медицинский многоразового использования, предназначен для работников медицинских, санитарных, лечебно-профилактических и других организаций или учреждений здравоохранения с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм, при оказании лечебно-профилактической помощи, в качестве барьера для снижения риска перекрестного инфицирования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинские, санитарные, лечебно-профилактические и другие организаций или учреждения здравоохранения.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Халат относится к изделиям многократного применения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Высший, средний и младший медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, акушеры, техники, лаборанты, массажисты, фармацевты, сиделки, санитарки и т.д.).

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия изготавливаются в нестерильном виде.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания к применению медицинского изделия: снижение риска инфицирования медицинского персонала, в процессе повседневной трудовой деятельности, и пациентов; в т.ч. для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Провести визуальный осмотр потребительской упаковки.
- Освободить изделие от потребительской упаковки.
- Проверить целостность изделия, методом визуального осмотра.
- Использовать изделие в соответствии с наименованием и функциональным назначением в каждом конкретном случае, исходя из ситуации и необходимости.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- халат медицинский многоразового использования одной модели и аразмера в потребительской упаковке с маркировкой - 1 уп.
- инструкция по применению.

ПОРЯДОК ПОДБОРА ТИПОРАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ

Порядок подбора типоразмера изделий представлен в таблицах №1-2.

Таблица 1.

Рост типовой фигуры человека	Интервал роста человека, см
164	Св. 161 по 167
170	Св. 167 по 173
176	Св. 173 по 179
182	Св. 179 по 185

Таблица 2.

Размер типовой фигуры человека	Интервал обхвата груди человека, см
80	От 78 по 82 включительно
84	Св. 82 по 86
88	Св. 86 по 90
92	Св. 90 по 94
96	Св. 94 по 98
100	Св. 98 по 102
104	Св. 102 по 106
108	Св. 106 по 110
112	Св. 112 по 114
116	Св. 114 по 118
120	Св. 118 по 122
124	Св. 122 по 126
128	Св. 126 по 130

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Изделия применяются в соответствии с их наименованием и функциональным назначением, исходя из ситуации и необходимости.
- Изделия должны одеваться поверх нижнего белья или одежды.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**Описание внешнего вида**

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 20 изготовлен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: голубой (№11) или светло-бирюзовый (№2))

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц. Полочки с рельефами, выходящими из плечевых швов. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман. Нижние карманы накладные, боковые стороны карманов втачаны в рельефы и боковые швы.

Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов.

Рукав втачной одношовный 3/4.

Воротник пиджачного типа.

Выпуск 2

В боковых швах халата на уровне талии – хлястик из 2-х частей, скрепленный 2 пуговицами. В низу боковых швов разрезы.

На воротник, низ рукавов, на нагрудный и боковые карманы настрачивается полоса ткани отделочного цвета шириной 2,0 см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 32 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого или темно-бирюзового №12 или василькового №13 или сиреневого №15 или брусничного №16 цвета.

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 6 петель и пуговиц. Полочка с рельефами, выходящими из пройм, с накладными карманами, боковые стороны которых втачаны в рельефы.

Спинка со средним швом и рельефами, выходящими из пройм.

Рукав втачной одношовный короткий, в нижней части притачана отделочная пуговица. По низу рукава втачан кант.

По горловине полочки и по борту правой полочки втачан кант.

В области талии в боковые швы втачан хлястик, скрепленный двумя пуговицами.

По борту, горловине полочек, низу рукава, входу в карман проложена отделочная строчка ш 0,1см. По горловине спинки проложена отделочная строчка ш 0,5см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 38 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочка с рельефными швами, выходящими из пройм.

Спинка со средним швом и рельефными швами, выходящими из пройм.

В области талии в боковые швы втачан хлястик, скрепленный двумя пуговицами.

Рукав втачной одношовный 3/4, с манжетой.

Карманы накладные, боковые стороны которых втачаны в рельефы.

Горловина имеет фигурную форму, обработана обтачкой.

По краю горловины и краю борта проложена отделочная строчка на 0,1см от края.

В боковых швах обработаны разрезы.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 40 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на тесьму «молния».

Полочки с рельефами, начинающимися от пройм. На горловину полочки настрачивается фигурная обтачка с отделочным кантом.

Карманы накладные, боковые стороны которых втачаны в рельефы и боковые швы. На карманах цельнокроеная фигурная деталь с притачным отделочным кантом.

Спинка со средним швом, с рельефами начинающимися от пройм.

Рукав втачной одношовный 3/4 с манжетой.

Ширина спинки регулируется завязывающимися хлястиками выходящими из боковых швов.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 49 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Боковая часть полочки с кокеткой с двумя нагрудными карманами и двумя нижними накладными карманами.

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. В боковых швах халата – хлястик из 2-х частей, скрепленный пуговицей.

Выпуск 2

Рукав втачной одношовный длинный.

Воротник втачной - отложной.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 78 изготовлен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: розовый (№20)) и основного (цвет: «пепельной розы» (№42)) и отделочного (цвет: белый).

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 6 петель и пуговиц. Полочки с рельефами, выходящими из проймы, низ кармана входит в рельефные швы.

Спинка с рельефами, выходящими из проймы. В рельефные швы спинки втачаны хлястики, концы которых скреплены пуговицей.

Рукав втачной одношовный короткий.

Горловина, карман, манжет обтачиваются контрастной тканью.

По бортам, по горловине, хлясту, по рельефам полочки, по низу рукава проложена отделочная строчка ш.0,1см.

Халат имеет поролоновые подплечники

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 84 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Карманы накладные, между обтачкой и нижней частью кармана настрачивается кружево.

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Пояс втачивается в рельефные швы спинки.

Воротник пиджачный, концы воротника и лацканы скругленной формы.

Рукав втачной одношовный 3/4. Между обтачкой и верхней частью рукава настрачивается кружево.

По бортам, воротнику, хлясту, по швам притачивания кружева, проложена отделочная строчка ш.0,1см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 85 изготовлен из тканей с маркировкой "ТиСи" трех цветов: основного (цвет: белый) и двух отделочных (цвет: серый (№30) и персиковый (№26) или розовый (№20) и холодный голубой (№71)).

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц. Полочки с рельефами, выходящими из плечевых швов. Между кокеткой и нижней частью полочки настрочена отделка состоящая из двух цветов. Нижние карманы накладные, боковые стороны карманов втачаны в рельефы и боковые швы. На карманах настрочена отделка из двух цветов.

Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов. В рельефные швы спинки втачаны хлястики, концы которых скреплены пуговицей.

Рукав втачной одношовный 3/4. По низу рукава настрочена отделка из двух цветов.

Воротник пиджачного типа.

По бортам, воротнику, хлясту, по швам притачивания отделки, проложена отделочная строчка ш.0,1см.

Халат имеет поролоновые подплечники

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 92 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Боковая часть полочки с кокеткой и двумя нижними накладными карманами. Средняя часть бочка с защипами, отстроченными на 0,1см.

Выпуск 2

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. На средней части спинки – хлястики, выходящие из рельефных швов и скрепленные пуговицей.

Рукав втачной одношовный 3/4 с манжетой.

Воротник втачной - отложной.

По бортам, воротнику, верхнему краю бокового кармана, по швам притачивания кокеток, низу кармана проложена отделочная строчка ш.0,1см

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования. модель 93 изготовлен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: персиковый (№26) или голубой (№11) или светло-бирюзовый (№2)).

Халат прилегающего силуэта с центральной застежкой на 6 петель и пуговиц.

Полочка с рельефными швами из проймы, двумя нижними накладными карманами.

Спинка с рельефными швами, выходящими из проймы.

Линия талии занижена, подчеркивается втачным поясом с широкими шлевками отделочного цвета.

Рукав втачной одношовный короткий.

По плечевому шву и центру рукава настрачивается отделочная лента.

По краю горловины, краю борта, по низу рукавов, по швам притачивания пояса проложена отделочная строчка на 0,1см от края.

Халат медицинский женский многоразового использования. модель 102 изготовлен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: голубой (№11) или светло-бирюзовый (№2))

Халат прилегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Низ рельефных швов на полочке и спинке переходит в небольшие шлицы. Карманы накладные, боковые стороны которых втачаны в рельефы и боковые швы. По верху карманов паты из отделочной ткани и декоративной пуговицей.

Спинка с рельефными швами, выходящими из плечевых швов.

Рукав втачной одношовный 3/4 с манжетой и патой. Пата из отделочной ткани с декоративной пуговицей.

Горловина V-образная с отложным воротником и стойкой из отделочной ткани. По горловине фигурная вставка из отделочной ткани.

По краю борта, воротнику, верха карманов, по манжете проложена отделочная строчка на 0,1см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования. модель 103 изготовлен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: фуксии (№56)).

Халат прилегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой 5 петель и пуговиц.

Полочка с рельефными швами, выходящими из плечевого шва. На полочке имеется два нижних накладных кармана прямоугольной формы с цветной декоративной отделкой по верхнему краю. На левой полочке нагрудный карман с цветной декоративной отделкой.

Спинка с рельефными швами, выходящими из плечевого шва. В рельефные швы спинки втачаны хлястики, концы которых скреплены пуговицей.

Рукав втачной одношовный 3/4. По низу рукава манжета с разрезом.

Воротник втачной, с цветной декоративной отделкой на уголках.

В боковых швах обработаны разрезы.

Отделочная строчка 0,1см от края по борту и швам притачивания манжет.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования. модель 109 изготовлен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета.

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц. Полочка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман. Нижние карманы накладные, боковые стороны карманов втачаны в рельефы и боковые швы.

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. В боковых швах обработаны шлицы со скругленными углами. Шлицы скреплены двумя пуговицами.

Рукав втачной одношовный 3/4 с фигурной манжетой.

Воротник пиджачный, концы воротника и лацканы скругленной формы.

По бортам, воротнику, манжетам, швам притачивания манжет, верхнему краю бокового кармана, шлицам, низу кармана проложена отделочная строчка ш.0,1см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 122 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета или из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: голубой №11) или светло-бирюзовый (№2)) или из тканей с маркировкой "Сатори" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: холодный голубой № 112) или светло-бирюзовый (№140).

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на тесьму «молния».

Полочки с кокетками, с отрезной нижней частью. Верхняя часть полочки с рельефами, начинающимися от кокетки, с накладными карманами, настроенными двойной строчкой на 0,1 и 0,6см от края. Нижние части полочки с отрезной планкой с патой, застегивающейся на кнопку (кнопка рубашечная 10,1 мм).

На нижних частях обработаны внутренние карманы с косым входом.

Спинка с кокеткой, с отрезной нижней частью. Верхняя часть с рельефами, начинающимися от кокетки. Нижняя часть с отрезной планкой.

Рукав втачной одношовный короткий.

По шву притачивания кокетки, входу нижних карманов, низу рукавов, пате, швам притачивания планки проложена двойная отделочная строчка ш 0,1 и 0,6см. По шву втачивания «молнии», горловине проложена отделочная строчка ш0,5см. В верхних углах накладных карманов и концах входа в нижний карман установлены хольнитены.

Верхняя часть полочки выполняется из ткани белого цвета. Кокетки, рукава, нижние части полочек и спинки, планки нижних частей, пата могут быть выполнены из отделочной ткани.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 129 выполнен из тканей с маркировкой "ТиСи" трех цветов: основного (цвет: белый) и двух отделочных (цвет: светло-бирюзовый (№2) / серый (№30) или персиковый (№26) / сиреневый (№15)) или из ткани с маркировкой "Сатори" трех цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: холодный голубой № 112)/светло-бирюзовый (№140).

Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок (кнопка рубашечная 10,1 мм).

Полочки с рельефами, начинающимися от плечевых швов. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман, в боковых частях полочек обработаны карманы «в рамку», обтачки рамки из отделочной ткани.

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевого шва. На средней части спинки – хлястик с цветной отделкой.

Рукав втачной одношовный 3/4 с манжетой. Манжета с разрезом, края манжеты обработаны цветными обтачками.

Горловина халата круглой формы с планками, планки с цветной подкладкой из которой сформирован кант.

В боковых швах халата – разрезы.

По швам притачивания планок горловины, манжет, обтачек карманов, борту, горловине, хлястикам проложена отделочная строчка на 0.1см.

Подкладка планки горловины, обтачка горловины, нижняя обтачка кармана, задняя обтачка манжеты, подкладка хлястика выполнена из отделочной ткани № 1. Верхняя обтачка кармана, передняя обтачка манжеты выполнена из отделочной ткани № 2.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 132 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета.

Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 6 пуговиц.

Полочки с отрезным лифом с завышенной линией талии, лиф с рельефами, начинающимися от плечевых швов и переходящие в рельефы нижних частей полочек. На правом борте 3 навесные петли, на нижней правой части – супатная застежка. На бочках нижних частей халата накладные карманы.

Спинка с отрезной верхней частью, верхняя часть с рельефами, начинающимися от плечевого шва и переходящими в рельефы нижней части полочки.

Рукав втачной одношовный 3/4 с манжетой. Манжета из двух частей, застегивающихся на навесную петлю и пуговицу.

Горловина халата V-образной формы, воротник стойка.

В боковых швах халата – разрезы.

По швам стачивания лифа и нижних частей, притачивания манжет и краю манжет, верху карманов, горловине и краю борта проложена отделочная строчка на 0,1 см.

Халат имеет поролоновые подплечники

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 136 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета или из двух цветов: основного (цвет: белый) с маркировкой "ТиСи" и отделочного (цвет: персиковый (№26) или сиреневый (№15)) с маркировкой "ТиСи".

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочки отрезные по линии талии. Верхняя часть с рельефами, начинающимися от пройм, юбка расклешенная. На юбке накладные карманы с косым входом, с клапанами. Передняя и нижняя части клапана с отделкой шириной 1 см.

Спинка отрезная по линии талии. Верхняя часть с рельефами, юбка со средним швом, заканчивающимся шлицей. На уровне талии – хлястик с отделкой по долевым сторонам.

Рукав втачной трехшовный ¾, центральная часть рукава короче боковых на 1 см.

Воротник - стойка, боковые и верхняя стороны стойки могут быть выполнены с отделкой.

По рельефам полочек и спинки, по линии талии, по бортам и шву втачивания воротника проложена отделочная строчка на 0,1 см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 138 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 7 кнопок (4 кнопки диаметром 12,0 мм и 3 кнопки диаметром 15,2 мм).

Полочки с рельефами, начинающимися от пройм. Бочок отрезной по линии талии, в нижней части бочка обработаны вертикальные карманы «в листочку», верхний конец листочки втачан в шов по линии талии. Центральные части полочки с планкой от плеча до низа. На уровне груди сборка по шву притачивания планки.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, с рельефами, начинающимися от пройм.

Рукав втачной одношовный 3/4, с манжетой. Концы манжеты притачаны внахлест по центру рукава.

Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой. Вырез горловины V-образный.

По рельефам полочек и спинки, по линии талии, по бортам и шву притачивания планки, по шву притачивания манжет, по шву притачивания стойки проложена отделочная строчка на 0,1 см. По воротнику и шву втачивания листочки проложена двойная отделочная строчка на 0,1 и 0,6 см

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 139 выполнен из двух цветов: основного (цвет: белый) ткани с маркировкой "ТиСи" и отделочного (цвет: светло-бирюзовый № 2 или персиковый № 26) с маркировкой "ТиСи" или основного (цвет: сиреневый № 15) с маркировкой "ТиСи" и отделочного (цвет: белый) с маркировкой "ТиСи".

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 9 кнопок (4 кнопки диаметром 12,0 мм и 5 кнопки рубашечной диаметр 10,1 мм).

Полочка состоит из верхней и нижней части. По борту верхней части располагаются 4 кнопки, в нижней части борта супатная застежка на 5 кнопок.

Полочки с рельефами, начинающимися от пройм. Выше линии талии втачана планка. В верхней части полочки вдоль борта – планка из ткани отделочного цвета, горловина также обработана планкой отделочного цвета. Карманы внутренние, в боковых швах.

Спинка с рельефами, начинающимися от пройм, горловина обработана планкой отделочного цвета.

Рукав втачной одношовный 3/4, с манжетой из отделочного цвета.

Вырез горловины круглый.

В боковых швах халата – разрезы.

По швам притачивания планок полочки и спинки, втачивания манжет, по горловине и борту проложена отделочная строчка на 0,1см.

Халат изготавливается белого цвета с цветной отделкой и в цветном варианте с белой отделкой.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 140 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочки с кокетками в верхней части, с рельефами, начинающимися от кокеток. На полочках боковые карманы с фигурным отворотом, на котором располагается декоративная пуговица. На левой полочке накладной нагрудный карман. Лацканы халата фигурной формы, верхняя часть которых втачана в кокетку. На лацкане имеется декоративная пуговица.

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов.

Рукав втачной одношовный 3/4, с настрочной планкой.

Вырез горловины V-образный.

В боковых швах халата – хлястик из 2-х частей, скрепленных пуговицей.

По швам притачивания кокетки, по отворотам карманов, по борту проложена отделочная строчка на 0,1см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 146 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из тканей двух цветов: основного (цвет: белый) с маркировкой "ТиСи" и отделочного (цвет: розовый №20 или сиреневый №15) с маркировкой "ТиСи".

Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок (кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм).

Полочки с рельефами, начинающимися от плечевых швов до низа. На полочках накладные боковые карманы, втачанные боковыми сторонами в шов рельефа и боковой шов. На левой полочке накладной нагрудный карман, одной стороной втачанный в шов рельефа.

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов до низа. В рельефные швы втачан хлястик из двух частей, скрепленных пуговицей.

Рукав втачной одношовный, с цельнокроеной планкой.

Воротник стояче – отложной, переходящий в отложные лацканы. На концах стойки декоративные хольнитены.

В боковых швах халата обработаны разрезы.

По краю борта, горловине, патам, стойке, хлястику проложена отделочная строчка на 0,1 см. Стойка, верхний хлястик спинки, паты карманов могут быть выполнены из отделочных тканей. Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 149 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи": белого цвета или кораллового цвета (№32) или цвета фуксии (№56).

Халат прилегающего силуэта со смещенной бортовой застежкой на 8 кнопок (кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм).

Полочки с рельефами, начинающимися от плечевых швов, между рельефами и боковыми швами накладные карманы со скошенным входом. В левом рельефе обработана супатная застежка на 6 кнопок, 2 верхние кнопки открытые. В правом рельефе сверху обработана застежка на 2 кнопки. Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. В рельефные швы втачаны 4 петли со шнуровкой.

Рукав цельнокроеный короткий с отворотом.

Вырез горловины - лодочка.

По горловине, краям застежки проложена отделочная строчка на 0,1 см.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 151 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из тканей двух цветов с маркировкой "ТиСи": основного (цвет: белый) и отделочного (цвет: сиреневый №15 или коралловый №32).

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок со шляпкой из белого пластика (диаметр 12 мм).

Полочки с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Полочка состоит из трех частей – верхней, средней и нижней. Средняя часть может быть выполнена из цветной ткани. В шве соединения средней и нижней частей обработан карман «листочка».

Спинка с рельефами, начинающимися от плечевых швов. Спинка состоит из трех частей – верхней, средней и нижней. Средняя часть из отделочной ткани.

Рукав втачной одношовный 3/4 с цветной патой по низу рукава, застегивающейся на кнопку (диаметр 12 мм).

Вырез горловины – V-образный.

В боковых швах халата обработаны разрезы.

По горловине, бортам, рельефам на цветной части, швам стачивания частей полочки и спинки проложена отделочная строчка на 0,1 см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 152 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета или из ткани цвета «пепельной розы» (№42) с маркировкой "ТиСи".

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 8 кнопок (диаметр 12,0 мм "Бублик" или пластиковые кнопки, рубашечная диаметр 10,1 мм).

Полочки отрезные по линии талии, с втачным поясом. Лиф с рельефами, выходящими из плечевых швов. Центральная часть лифа с застроченными горизонтальными складками. Юбка расклешенная, с двумя мягкими складками по линии талии, с косыми карманами с закругленным входом. На поясе правой полочки на уровне входа в карман настрочена фирменная лента.

Спинка отрезная по линии талии, с втачным поясом. Верхняя часть с рельефами, юбка расклешенная с четырьмя мягкими складками на уровне талии.

Рукав втачной двухшовный 3/4 с манжетой, застегивающейся на кнопку, с разрезом в локтевом шве.

Воротник стояче-отложной с отрезной стойкой, с прямыми концами.

По воротнику, швам втачивания пояса, бортам юбки, манжетам проложена отделочная строчка на 0,1 см.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 154 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (ткань с рисунком с маркировкой "ТиСи")

Халат прилегающего силуэта с супатной бортовой застежкой на 6 кнопок (кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм).

Лиф отрезной по линии талии. На верхней части полочки рельефы, которые начинаются от кокеток полочек и переходят в вытачки нижней части юбки. На левой полочке вдоль борта настрочена полоска из отделочной ткани. На правой полочке в нижнем углу боковой части настрочена фирменная лента.

На верхней части спинки двойная кокетка, переходящая на полочку. Внутренняя кокетка выполнена из отделочной ткани. Спинка с рельефами от кокетки. Нижняя часть спинки со средним швом и шлицей. Рельефы верхней части спинки переходят в вытачки нижней части спинки.

Рукав втачной одношовный 3/4 с отворотом из отделочной ткани.

Вырез горловины круглый.

В боковых швах халата обработаны внутренние карманы.

По рельефам полочек и спинки, вытачкам, кокетке полочки, талии, горловине, борту левой полочки в нижней части проложена отделочная строчка на 0,1 см. По низу кокетки спинки, по низу отворота рукава проложена двойная отделочная строчка на 0,1 см и 0,6 см.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 155 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета или из ткани с маркировкой "Сатори" белого цвета или из ткани цвета «пепельной розы» (№42) с маркировкой "ТиСи".

Халат прилегающего силуэта с застежкой на декоративную тесьму «молния».

Полочки с рельефами, начинающимися от плечевых швов до низа. На уровне талии втачной пояс с тремя застроченными горизонтальными складками. На левой полочке у пояса настрочена фирменная лента.

Спинка, с рельефами, начинающимися от плечевых швов до низа. На уровне талии широкий втачной пояс с тремя застроченными горизонтальными складками.

Рукав втачной одношовный с притачной манжетой. Манжета с двумя застроченными горизонтальными складками и с отделочной строчкой по низу на ширину складки.

Вырез V-образный с отворотами.

В боковых швах халата обработаны внутренние карманы и разрезы.

По рельефам полочек и спинки, по швам втачивания пояса и манжет, по горловине и шву втачивания молнии проложена отделочная строчка на 0,1 см от края.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 157 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок с пластиковой шляпкой (диаметр 12,0 мм).

Полочки с рельефами, выходящими из плечевых швов. Между боковым и швом рельефа расположены нижние боковые карманы с притачной планкой.

Спинка с рельефами, выходящими из плечевых швов. В боковых швах халата хлястики, застегивающиеся на две кнопки. Внизу боковых швов разрезы.

Рукав втачной одношовный 3/4 с притачной манжетой.

Воротник пиджачного типа.

По рельефам полочек и спинки проложена отделочная строчка на 0,1 см. По воротнику, бортам, шву притачивания планки кармана и манжеты, сторонам разрезов, хлястикам прокладывается двойная отделочная строчка на 0,1 см и 0,6 см.

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 159 выполнен из тканей с маркировкой "ТиСи" трех цветов: основного (цвет: белый), отделочного №1 (розовый (№20) или чернильный (№19)) и отделочного №2 (фисташковый (№34) или персиковый (№26)).

Халат прилегающего силуэта. Застежка бортовая в верхней части полочки асимметричная, переходящая в центральную, на 8 кнопок (диаметр 15,2 мм).

Лиф отрезной по линии талии, с втачным поясом из отделочной ткани №1. Полочка с рельефами от плечевого шва до пояса. Центральная часть полочки состоит из основной ткани и обтачки из отделочной ткани №1.

Спинка с рельефами от плечевого шва до пояса.

Юбка расширенная, на передних и заднем полотнищах по две мягкие складки с каждой стороны по линии талии. Переднее полотнище с внутренним карманом с закругленным входом.

Рукав втачной одношовный 2/4 с манжетой из отделочной ткани №1.

По нижнему срезу обтачек полочек, верхнему срезу пояса, верхнему срезу манжет рукавов притачивается кант шириной 1,5 см (в готовом виде), выполненный из отделочной ткани №2.

В боковых швах халата обработаны разрезы.

По швам втачивания пояса сверху и снизу, по бортам полочек, рельефам, швам притачивания манжет проложена отделочная строчка на 0,1 см.

Халат имеет поролоновые подплечники

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 163 выполнен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет красный №83 или холодный голубой №71).

Халат прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на 7 кнопок (кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм).

Полочки отрезные по линии талии, с втачным поясом. Лиф с рельефами, выходящими из плечевых швов. На поясе настроены декоративные элементы из отделочной ткани. Центральные части полочек с планкой от горловины до низа. Планка выполнена из отделочной ткани. Нижняя часть полочки состоит из трех частей центральной средней и боковой. В рельефном шве расположен внутренний карман.

Спинка отрезная по линии талии, с рельефами выходящими из боковых швов и втачным поясом. Рельефы на нижней части переходят в шлицы. На поясе спинки настроен декоративный элемент из отделочной ткани.

Рукав втачной одношовный 3/4, с манжетой из отделочной ткани.

Вырез горловины круглый.

По рельефам полочек и спинки, по швам втачивания пояса, по шву притачивания планки, по шву втачивания манжет, по горловине проложена отделочная строчка на 0,1 см. На отделочных деталях пояса полочки и спинки установлены кнопки.

Халат имеет поролоновые подплечники.

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 9 выполнен из тканей с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц.

На левой полочке расположен нагрудный карман. Внизу располагаются боковые накладные карманы.

Спинка прямая со средним швом и шлицей.

Рукав втачной одношовный длинный с цельнокроеной манжетой.

Воротник втачной пиджачного типа.

Ширина спинки регулируется хлястами, скрепленными двумя пуговицами.

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 10 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прямого силуэта, с застежкой на спинке в виде 5 пар завязок.

Выпуск 2

Полочка прямая с двумя боковыми накладными карманами и одним нагрудным с правой стороны. Одна сторона боковых карманов втачана в боковой шов. По центру полочки на уровне талии притачан пояс, завязывающийся на спинке.

Спинка прямая.

Рукав втачной одношовный длинный с завязками по низу.

Вырез горловины круглый.

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 51 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат прямого силуэта, с центральной супатной застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочки с боковыми накладными карманами со скошенными углами. Под карманом на правой полочке настроен карман меньшего размера с клапаном. На левой полочке расположен нагрудный карман со скошенными углами.

Спинка прямая.

Рукав втачной одношовный длинный с притачной манжетой, застегивающейся на пуговицу.

Воротник пиджачного типа с острыми концами.

По низу боковых швов обработаны разрезы, в боковые швы втачаны хлястики, скрепленные двумя пуговицами.

По бортам, воротнику, манжетам, клапану проложена отделочная строчка ш.0,5см.

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 68 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" белого цвета.

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 6 петель и пуговиц.

Полочки с боковыми накладными карманами со скошенными углами. На левой полочке расположен нагрудный карман со скошенными углами.

Спинка прямая со средним швом, в конце шва- шлица.

Рукав втачной одношовный длинный с притачной манжетой, застегивающейся на пуговицу.

Воротник – стойка.

На уровне боковых карманов в боковых швах обработаны разрезы. В боковые швы втачаны хлястики, скрепленные двумя пуговицами.

По бортам, воротнику, манжетам проложена отделочная строчка ш.0,5см.

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 160 выполнен из ткани с маркировкой "ТиСи" трех цветов: основного (цвет: белый) и двух отделочных (цвет белый и цвет: серый № 30 или бордовый № 23 или голубой № 71 или холодный голубой № 112).

Халат прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок (кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм).

На левой полочке расположен нагрудный карман с разделительной строчкой на два отдела. Внизу располагаются боковые накладные карманы с наклонным входом. На всех карманах выполнены обтачки из отделочной ткани. В углах карманов хольнитены.

Спинка прямая, состоящая из центральной части и двух боковых. Спинка с двумя шлицами. В верхней части спинки кокетка, переходящая на полочку. В боковые швы втачаны хлястики, скрепленные двумя кнопками.

Рукав длинный втачной прямой одношовный.

Воротник втачной пиджачного типа с внутренней стойкой из отделочной ткани.

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 165 выполнен из тканей с маркировкой "ТиСи" двух цветов: основного (цвет: белый) и отделочного (цвет чернильный №19 или василек №13).

Халат прямой, с центральной супатной застежкой на 6 кнопок (кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм).

Полочки с кокетками и боковыми накладными карманами. На левой полочке расположен нагрудный карман, верхняя внутренняя часть супаты выполнена из отделочной ткани.

Спинка с кокеткой и средним швом, в конце шва- шлица.

Выпуск 2

Рукав втачной одношовный длинный с притачной манжетой, застегивающейся на кнопку. Внутренняя часть манжеты выполнена из отделочной ткани.

Воротник – стойка. Внутренняя стойка из отделочной ткани.

На уровне боковых карманов в боковых швах обработаны разрезы. В боковые швы втачаны хлястики, скрепленные двумя кнопками.

По стойке, по кокетки проложена отделочная строчка на 0,1 см. По манжетам отделочная строчка проложена на 0,5 см.

Методы обработки изделий, размеры и расположение допускаемых надставок в деталях изделий устанавливаются в соответствии с основами промышленной технологии поузловой обработки.

Виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12807-2003.

Частота стежков, способы закрепления концов ниток, параметры швов, виды и номера (линейная плотность) ниток, способы крепления фурнитуры и отделок, цвет отделочных материалов, наличие, расположение и способ крепления лейбл с товарным знаком в изделии должны соответствовать требованиям, указанным в техническом описании на модель и должны соответствовать контрольному образцу.

Строчки на изделии должны быть прочными ровными без пропусков стежков и обрывов. Начало и конец строчки должны быть закреплены и обрезаны. Изделия не должны иметь не обрезанных ниток, не обработанных швов и краев изделия, посторонних включений на поверхности изделия. В изделиях обработка полочек, бортов, воротников, низа рукавов, шлиц, поясов, краев карманов и застежек, петель и отделочных деталей должна обеспечивать сохранение их формы, предусмотренной образцом-эталоном.

Общий вид изделий

См. приложение 2 настоящей инструкции.

Технические характеристики

№	Наименование показателя	Величина показателя			
		Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», отбеленная	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная	Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» отбеленная	Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» гладкоокрашенная
1	Поверхностная плотность, г/м ² ,	120,0 ± 5,0	120,0 ± 5,0	145,0 ± 5,0	145,0 ± 5,0
2	Разрывная нагрузка по основе, Н, не менее	400,0	400,0	700,0	700,0
3	Разрывная нагрузка по утку, Н, не менее	250,0	250,0	500,0	500,0
4	Разрывная нагрузка швов, Н, не менее	250,0	250,0	300,0	300,0
5	Устойчивость окраски к стиркам, балл, не менее	5	5	5/5	5/5
6	Устойчивость окраски к поту, балл, не менее	5	5	5/5	5/5
7	Изменение размеров после мокрых обработок (усадка), %, не более				
	- по основе	- 3,5	- 3,5	± 2,0	± 2,0
	- по утку	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0

8	Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² *с, не менее	71,3	71,3	60,6	60,6
9	Разрывная нагрузка по основе после санитарно-гигиенической обработки, Н, не менее	400,0	400,0	700,0	700,0
10	Разрывная нагрузка по утку после санитарно-гигиенической обработки, Н, не менее	250,0	250,0	500,0	500,0
11	Разрывная нагрузка швов после санитарно-гигиенической обработки, Н, не менее	250,0	250,0	300,0	300,0

Сырье и материалы

- Материалы и сырье, применяемые при изготовлении одежды - см. приложение 3 настоящей инструкции.
- Изделия, изготовленные из смесовых тканей «Сатори», должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке и выдерживать не менее 20 стирок нейтральными растворами моющих средств по ГОСТ 25644-96 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546-2002 при температуре, не превышающей 75°C - для белых тканей, 60°C - для цветных и сушке в естественных условиях (возможна барабанная сушка с максимальной температурой на выходе до 60°C).
- Изделия, изготовленные из смесовых тканей «Ти Си», должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке и выдерживать не менее 20 стирок нейтральными растворами моющих средств по ГОСТ 25644-96 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546-2002 при температуре, не превышающей 40°C - для белых тканей, 40°C - для цветных и сушке в естественных условиях (возможна барабанная сушка с максимальной температурой на выходе до 60°C);
- Изделия должны быть устойчивы к стирке и дезинфекции по МУ 3.5.736-99.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ (ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЕГО ПОТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

- По мере загрязнения необходимо проводить санитарно-гигиеническую обработку (стирку) халата.
- Одежду из цветных тканей рекомендуется стирать без замачивания, отдельно от изделий белого цвета, предварительно вывернув на изнаночную сторону.
- Перед стиркой одежды необходимо удостовериться в том, что фурнитура надежно закреплена и не повредилась при носке. Если есть молнии, пуговицы, кнопки – застегнуть.
- Изделия, изготовленные из смесовых тканей «Сатори», устойчивы стирать нейтральными растворами моющих средств по ГОСТ 25644-96 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546-2002 при температуре, не превышающей 75°C - для белых тканей, 60°C - для цветных и сушке в естественных условиях, изделия из смесовых тканей допускается сушить при низких температурах.
- Изделия, изготовленные из смесовых тканей «Тиси», стирать нейтральными растворами моющих средств по ГОСТ 25644-96 или раствором детского мыла по ГОСТ 28546-2002 при температуре, не превышающей 40°C - для белых тканей, 40°C - для цветных и сушке в естественных условиях, изделия из смесовых тканей допускается сушить при низких температурах.
- Отбеливание одежды из цветных тканей – запрещено (за исключением одежды из белой ткани).

Выпуск 2

- Сушить одежду рекомендуется в расправленном виде, расположив на вешалке и застегнув все пуговицы, кнопки и молнии. НЕ сушить в стиральной машине.
- Гладить с изнанки при температуре не более 150°C, с использованием пара.

КРИТЕРИИ НЕПРИГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- нарушение целостности изделия
- видимый брак материалов и отсутствие возможности их замены
- количество стирок не менее 20

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ и ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Транспортирование

Транспортирование по ГОСТ 10581-91 любым видом транспорта, крытого типа, в условиях, обеспечивающих сохранность тары и продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования изделий по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Хранение

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий и перепадов влажности, при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажности воздуха 50-60%.

Расстояние от пола и от внутренних стен до изделий – не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий – не менее 1,0 м, между стеллажами – не менее 0,7 м.

Эксплуатация

Температура от +1 до +40 °C. Относительная влажность: 50– 60%.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок хранения изделий - 2 года с даты выпуска.
- Гарантийный срок эксплуатации – 60 дней с даты продажи в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении рекомендаций по уходу, хранению, а также использования по назначению

УТИЛИЗАЦИЯ

- Использованные изделия относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).
- Допускается утилизировать изделия, утратившие товарный вид, вместе с бытовым мусором.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛЬБ» (ООО «СТИЛЬБ»)

153511, Россия, Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. Ивановская, 15а
(ИНН 3731020375)

Телефон: (4932) 55-12-55

Адрес электронной почты: stilb94@mail.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в:

Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛЬБ» (ООО «СТИЛЬБ»)

153511, Россия, Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. Ивановская, 15а.

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ



Максимальная температура стирки



Не отбеливать (кроме белого)



Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 150 °C



Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене и во всех растворителях, перечисленных для символа F, обычный режим



Возможна барабанная сушка, сушка при более низкой температуре

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ОПАСНОСТЬ	ПРИЧИНА	ПОСЛЕДСТВИЯ	Уровень риска		
			P	S	R
Несоответствующее качество материалов	Отсутствие контроля используемых материалов на производстве	Невозможность применения изделия по назначению.	1	2	2
Эксплуатация изделия после истечения срока годности	Ухудшение потребительских свойств	Невозможность применения изделия по назначению.	1	2	2
Нарушение условий хранения и транспортирования изделий	Повреждение упаковки и ухудшение потребительских свойств	Невозможность применения изделия по назначению.	2	2	4
Нарушение условий эксплуатации изделий	Ухудшение потребительских свойств	Невозможность применения изделия по назначению.	2	2	4
Несоответствие размера и параметров изделия потребностям потребителя	Недостаточные знания потребителя о подборе размера и характеристиках изделия	Ухудшение комфорта применения изделия	2	1	2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение документа	Название документа
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные. Технические условия.
ГОСТ 8.423 – 81	Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.
ГОСТ 3811-72	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 3813-72	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 4233-77	Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.
ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 9733.4-83	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.6-83	Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"
ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 12088-77	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ 12302-2013	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 12807-2003	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ 13514-93	Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16958-71	Изделия текстильные. Символы по уходу
ГОСТ 21239 – 93	Инструменты хирургические. Ножницы. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ 21241 – 89	Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 23932-90	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 25336 – 82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 28546-2002	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ 28073-89	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
ГОСТ 28965-91	Застежка-молния. Методы контроля
ГОСТ 30157.0-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
ГОСТ 30157.1-95	Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения.
ГОСТ Р 50444 – 92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГН 2.1.6.1338-03	Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Виды

СанПиН 2.1.6.1032-01	Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-2008	Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция 2007 г. с изменением № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-2008)
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).
СТО 22701849-019-2015	
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»,	
Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ « Об охране атмосферного воздуха»,	
МУ 3.5.736-99	Технология обработки белья в медицинских учреждениях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Халат медицинский многоразового использования по ТУ 14.12.30 – 001 – 22816995 – 2017

Варианты исполнения:

I. Халат медицинский женский многоразового использования:

- 1.1. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.2. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.3. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.4. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.5. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.6. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.7. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 104, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.8. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 108, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.9. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 112, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.10. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 116, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.11. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 120, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.12. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.13. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.14. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.15. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.16. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.17. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.18. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 104, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.19. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 108, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.20. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 112, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.21. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 116, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.22. модель 20, полнота 2, рост 164, размер 120, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.23. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 80, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.24. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 84, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.25. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 88, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.26. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 92, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.27. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 96, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.28. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 100, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.29. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 104, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.30. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 108, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.31. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 112, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.32. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 116, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.33. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 120, цвет белый с отделкой голубой;
- 1.34. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 80, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.35. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 84, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.36. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 88, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.37. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 92, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.38. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 96, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.39. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 100, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.40. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 104, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.41. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 108, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.42. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 112, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.43. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 116, цвет белый с отделкой светло-голубой;
- 1.44. модель 20, полнота 2, рост 170, размер 120, цвет белый с отделкой светло-голубой;

- [illegible]

- [illegible]

Выпуск 2

- 5.1. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет белый;
- 5.2. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет белый;
- 5.3. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет белый;
- 5.4. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет белый;
- 5.5. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет белый;
- 5.6. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 104, цвет белый;
- 5.7. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 108, цвет белый;
- 5.8. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 112, цвет белый;
- 5.9. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 116, цвет белый;
- 5.10. модель 49, полнота 2, рост 164, размер 120, цвет белый;
- 5.11. модель 49, полнота 2, рост 170, размер 84, цвет белый;
- 5.12. модель 49, полнота 2, рост 170, размер 88, цвет белый;
- 5.13. модель 49, полнота 2, рост 170, размер 92, цвет белый;
- 5.14. модель 49, полнота 2, рост 170, размер 96, цвет белый;
- 5.15. модель 49, полнота 2, рост 170, размер 100, цвет белый;
- 5.16. модель 49, полнота 2, рост 170, размер 104, цвет белый;

- [illegible]

- [illegible]

- ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- 18.1. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет белый;
- 18.2. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет белый;
- 18.3. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет белый;
- 18.4. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет белый;
- 18.5. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет белый;
- 18.6. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет белый;
- 18.7. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 104, цвет белый;
- 18.8. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 108, цвет белый;
- 18.9. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 112, цвет белый;
- 18.10. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 116, цвет белый;
- 18.11. модель 138, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет белый;
- 18.12. модель 138, полнота 2, рост 170, размер 84, цвет белый;
- 18.13. модель 138, полнота 2, рост 170, размер 88, цвет белый;
- 18.14. модель 138, полнота 2, рост 170, размер 92, цвет белый;

- [illegible]

- 22.1.** модель 149, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет белый;
22.2. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет белый;
22.3. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет белый;
22.4. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет белый;
22.5. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет белый;
22.6. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет белый;
22.7. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет коралловый;
22.8. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет коралловый;
22.9. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет коралловый;
22.10. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет коралловый;
22.11. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет коралловый;
22.12. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет коралловый;
22.13. модель 149, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет фуксия;

- [illegible]

- [illegible]

- 24.1. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет белый;
24.2. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет белый;
24.3. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет белый;
24.4. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет белый;
24.5. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет белый;
24.6. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет белый;
24.7. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 104, цвет белый;
24.8. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 108, цвет белый;
24.9. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 112, цвет белый;
24.10. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 80, цвет пепельная роза;
24.11. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 84, цвет пепельная роза;
24.12. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 88, цвет пепельная роза;
24.13. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 92, цвет пепельная роза;
24.14. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 96, цвет пепельная роза;
24.15. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 100, цвет пепельная роза;
24.16. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 104, цвет пепельная роза;
24.17. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 108, цвет пепельная роза;
24.18. модель 152, полнота 2, рост 164, размер 112, цвет пепельная роза;
24.19. модель 152, полнота 2, рост 170, размер 80, цвет белый;
24.20. модель 152, полнота 2, рост 170, размер 84, цвет белый;
24.21. модель 152, полнота 2, рост 170, размер 88, цвет белый;

- [illegible]

- [illegible]

- 28.24. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 108, цвет белый с отделкой розовый/фисташковый;
28.25. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 80, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.26. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 84, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.27. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 88, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.28. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 92, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.29. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 96, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.30. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 100, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.31. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 104, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;
28.32. модель 159, полнота 2, рост 170, размер 108, цвет белый с отделкой чернильный/ персиковый;

- [illegible]

II. Халат медицинский мужской многоразового использования:

- 1.1. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 88, цвет белый;
- 1.2. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 92, цвет белый;
- 1.3. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 96, цвет белый;
- 1.4. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 100, цвет белый;
- 1.5. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 104, цвет белый;
- 1.6. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 108, цвет белый;
- 1.7. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 112, цвет белый;
- 1.8. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 116, цвет белый;
- 1.9. модель 9, полнота 2, рост 176, размер 120, цвет белый;

Выпуск 2

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 20

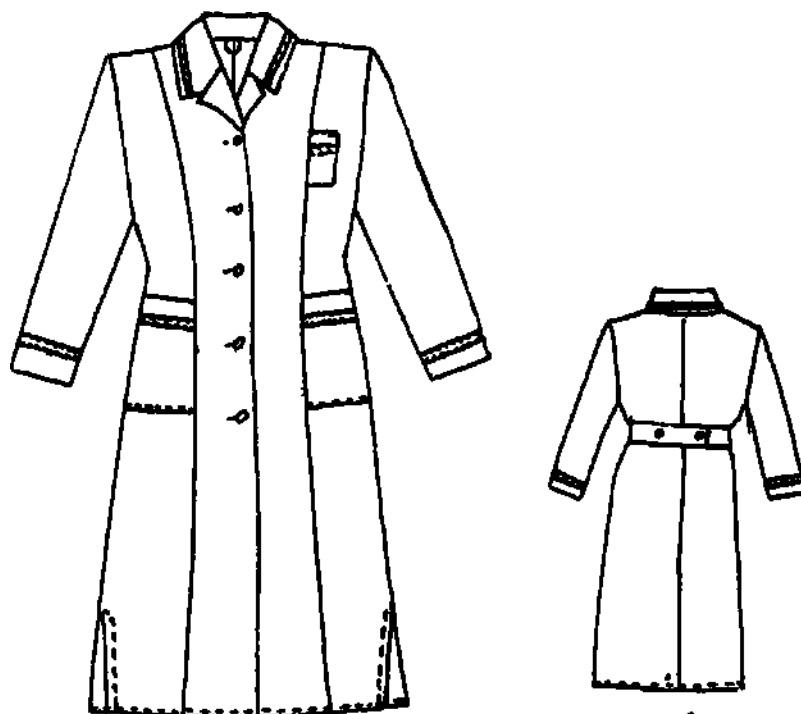


Рисунок А.1.

Таблица А.1.

в сантиметрах

Таблица 11.1.														
№	Наименование измерений	Рост *	Размер**											Предельно е отклонени е от номиналь ного размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	± 1,0
		170	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	± 1,0
		170	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	± 1,0
		170	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 32



Рисунок А.2.

Таблица А.2.

сантиметрах

	Наименование измерений	Рост *	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	94,0	94,0	97,0	97,0	97,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	± 1,0
		170	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	98,0	98,5	102,0	102,5	103,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	± 1,0
		170	101,0	101,5	105,0	105,5	106,0	111,5	112,0	112,5	113,0	113,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	± 1,0
		170	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 38



Рисунок А.3.

Таблица А.3.
сантиметрах

N	Наименование измерений	Рост r*	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	± 1,0
		170	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	96,5	97,0	97,5	98	98,5	99,0	99,5	100	100,5	101,0	± 1,0
		170	99,5	100,0	100,5	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	± 1,0
		170	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 40



Рисунок А.4.

Таблица А.4.

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост Т*	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	± 1,0
		170	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	103,0	103,0	103,0	103,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	108,5	109,0	109,5	110,0	± 1,0
		170	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	111,5	112,0	112,5	113,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде), см	164-170	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	63,5	65,5	67,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	± 1,0
		170	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 49



Рисунок А.5.

Таблица А.5.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	± 1,0	
		170	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0		
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	115,0	± 1,0
		170	113,5	113,0	114,5	114,0	115,5	116,0	116,5	117,0	117,5	118,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	± 1,0
		170	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»



Рисунок А.6.

Таблица А.6.

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост* Т*	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, СМ	164	91,0	91,0	94,0	94,0	94,0	94,0	101,0	101,0	101,0	101,0	± 1,0
		170	94,0	94,0	97,0	97,0	97,0	97,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, СМ	164	97,0	97,5	100,0	100,5	101,0	101,5	107,5	108,0	108,5	109,0	± 1,0
		170	99,0	99,5	103,0	103,5	104,0	104,5	110,5	111,0	111,5	112,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, СМ	164-170	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, СМ	164	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	± 1,0
		170	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 84



Рисунок А.7.

Таблица А.7.

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост •	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	93,0	93,0	96,0	96,0	96,0	96,0	102,0	102,0	102,0	102,0	± 1,0
		170	96,0	96,0	99,0	99,0	99,0	99,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	97,5	98,0	101,5	102,0	102,5	103,0	110,5	111,0	111,5	112,0	± 1,0
		170	100,5	101,0	104,5	105,0	105,5	106,0	113,5	114,0	114,5	115,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 85



Рисунок А.8.

Таблица А.8.
сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, СМ	164	93,0	93,0	96,0	96,0	96,0	96,0	102,0	102,0	102,0	102,0	± 1,0
		170	96,0	96,0	99,0	99,0	99,0	99,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, СМ	164	97,5	98,0	101,5	102,0	102,5	103,0	110,5	111,0	111,5	112,0	± 1,0
		170	100,5	101,0	104,5	105,0	105,5	106,0	113,5	114,0	114,5	115,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, СМ	164-170	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, СМ	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 92



Рисунок А.9.

Таблица А.9.
сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	112	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	92,0	92,0	95,0	95,0	95,0	95,0	102,0	102,0	± 1,0
		170	95,0	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0	105,0	105,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	97,5	98,0	101,5	102,0	102,5	103,0	110,5	111,0	± 1,0
		170	100,5	101,0	104,5	105,0	105,5	106,0	113,5	114,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	45,0	47,0	47,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 93

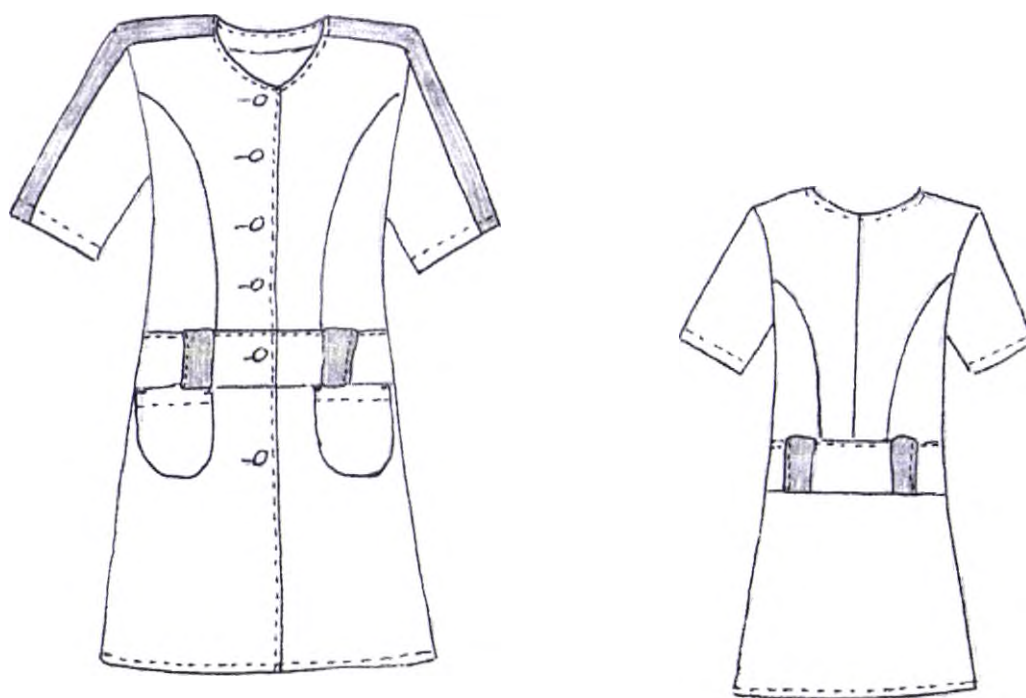


Рисунок А.10.

Таблица А.10.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**							Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота							
			2							
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	± 1,0	
		170	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0		
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	± 1,0
		170	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	± 1,0
		170	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 102



Рисунок А.11.

Таблица А.11.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**							Предельное отклонение от номинального размера, см
			84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота							
			2							
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	87,0	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	± 1,0
		170	90,0	90,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	92,0	92,5	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	± 1,0
		170	95,0	95,5	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»



Рисунок А.12.

Таблица А.12.

■ сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**												Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		
			Полнота												
			2												
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	± 1,0	
		170	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0		
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	± 1,0	
		170	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0		
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	± 1,0	
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	± 1,0	
		170	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0		

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 109



Рисунок А.13.

Таблица А.13.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	± 1,0
		170	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	± 1,0
		170	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 122



Рисунок А.14.

Таблица А.14.
сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	± 1,0
		170	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	± 1,0
		170	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	45,0	47,0	49,0	51,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	61,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	± 1,0
		170	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 129



Рисунок А.15.

Таблица А.15.

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**										Предельно е отклоне е от номинальн ого размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	± 1,0
		170	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	± 1,0
		170	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164 170	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 132



Рисунок А.16.

Таблица А.16.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	± 1,0
		170	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	± 1,0
		170	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164									± 1,0
		170	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	± 1,0
		170	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 136



Рисунок А.17.

Таблица А.17.

■ сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	± 1,0
		170	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	± 1,0
		170	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164 - 170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	± 1,0
		170	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 138



Рисунок А.18.

Таблица А.18.

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	± 1,0
		170	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	± 1,0
		170	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	± 1,0
		170	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 139



Рисунок А.19.

Таблица А.19.
сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	± 1,0
		170	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	± 1,0
		170	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	± 1,0
		170									
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	± 1,0
		170	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 140



Рисунок А.20.

Таблица А.20.
сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост	Размер**											Предельно е отклоне е от номиналь ного размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	± 1,0
		170	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	± 1,0
		170	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	62,5	64,5	66,5	68,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 146

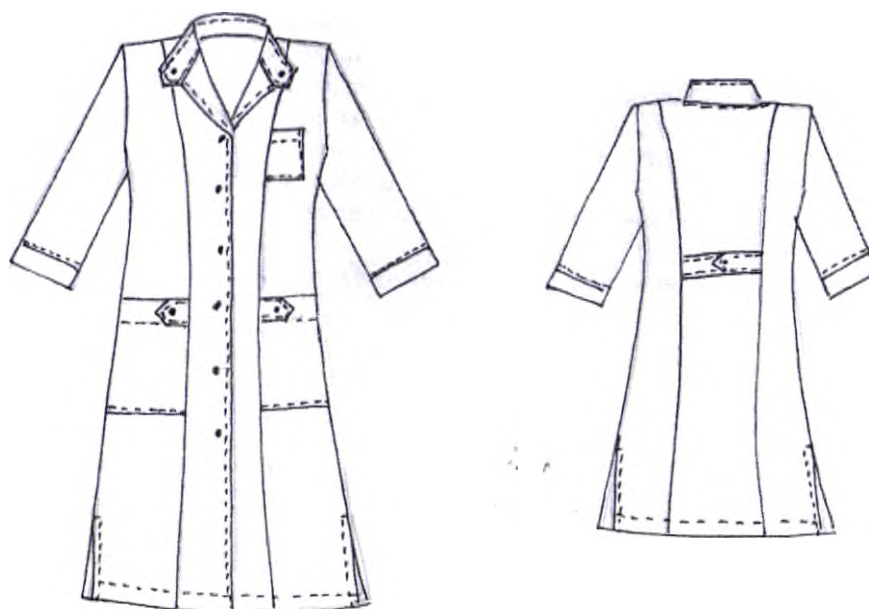


Рисунок А.21

Таблица А.21.

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**											Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	± 1,0
		170	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	± 1,0
		170	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 149

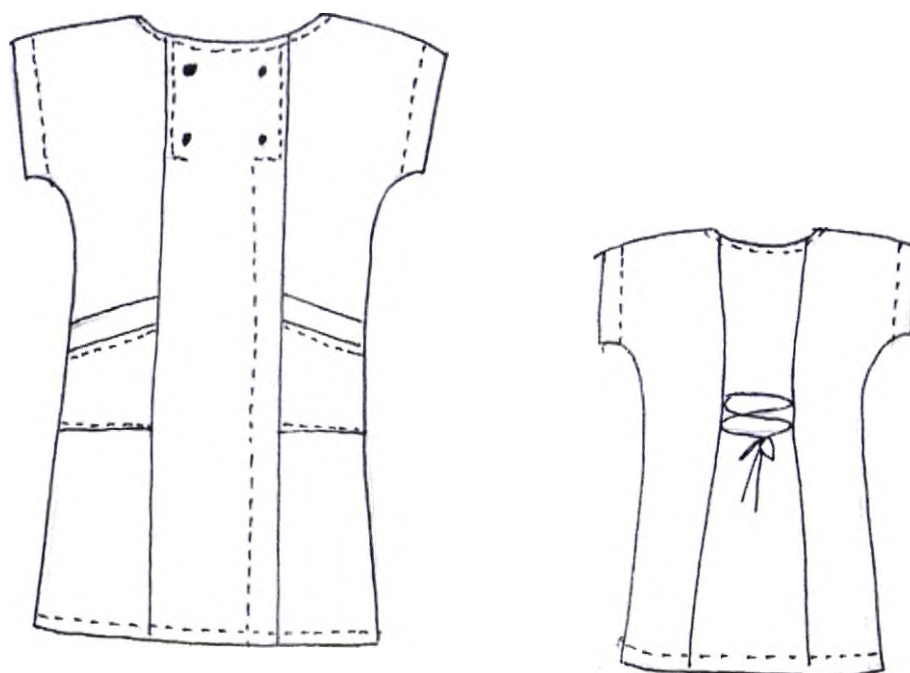


Рисунок А.22.

Таблица А.22.

в

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**						Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	
			Полнота						
			2						
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	± 1,0
		170	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	89,0	89,5	90,0	90,5	91,0	91,5	± 1,0
		170	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164							± 1,0
		170	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	± 1,0
		170	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»



Рисунок А.23.

Таблица А.23.
сантиметрах

Наименование измерений		Рост*	Размер**										Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	
			Полнота										
			2										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	± 1,0
		170	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	± 1,0
		170	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	± 1,0
		170	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 152

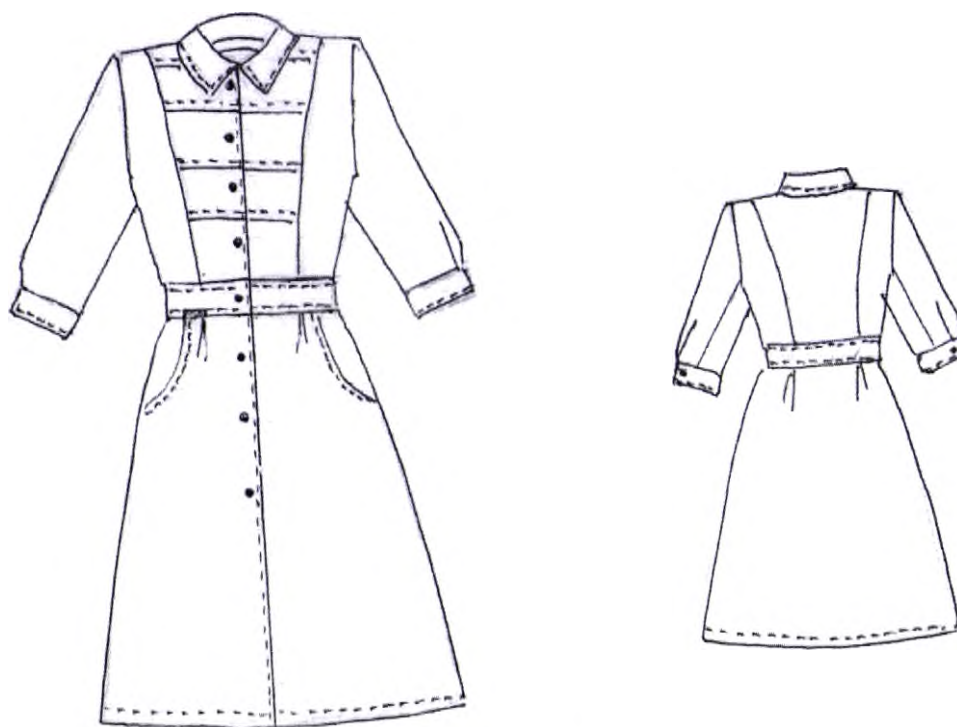


Рисунок А.24.

Таблица А.24.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**									Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	112	
			Полнота									
			2									
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	± 1,0
		170	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	± 1,0
		170	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	± 1,0
		170	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 154

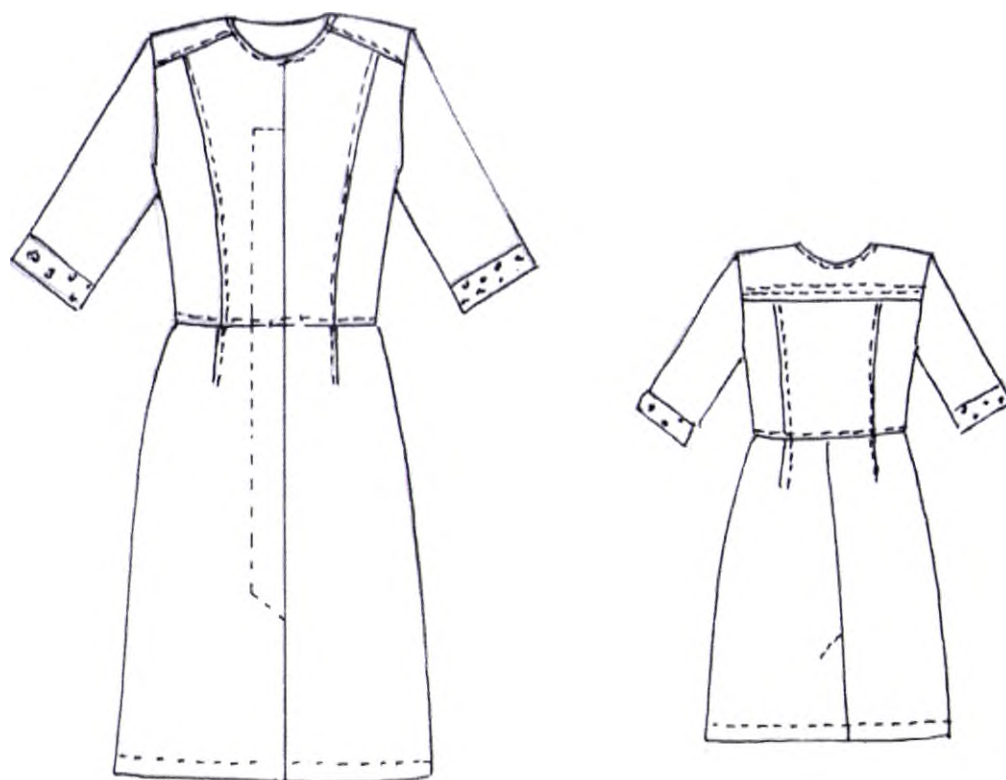


Рисунок А.25

Таблица А.25.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	± 1,0
		170	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	± 1,0
		170	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	46,0	4,08	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	± 1,0
		170	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 155

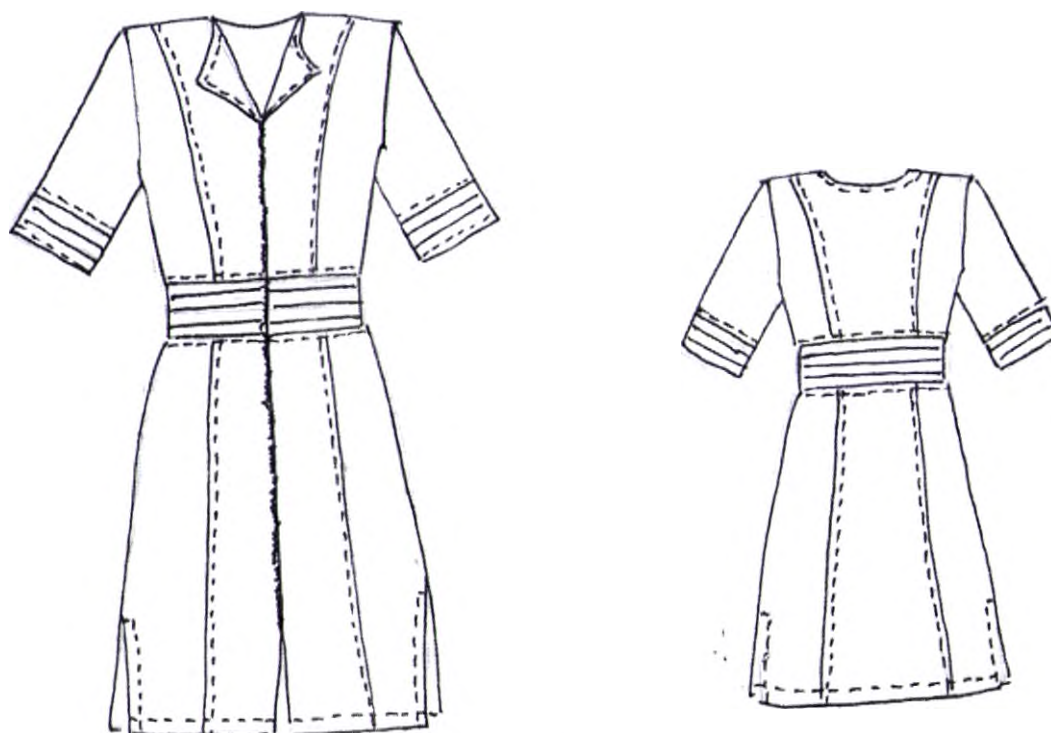


Рисунок А.26.

Таблица А.26.

■ сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	± 1,0
		170	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	± 1,0
		170	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы в расстегнутом виде, см	164-170	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	± 1,0
		170	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 157



Рисунок А.27.

Таблица А.27.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	± 1,0
		170	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	± 1,0
		170	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164-170	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	± 1,0
		170	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 159

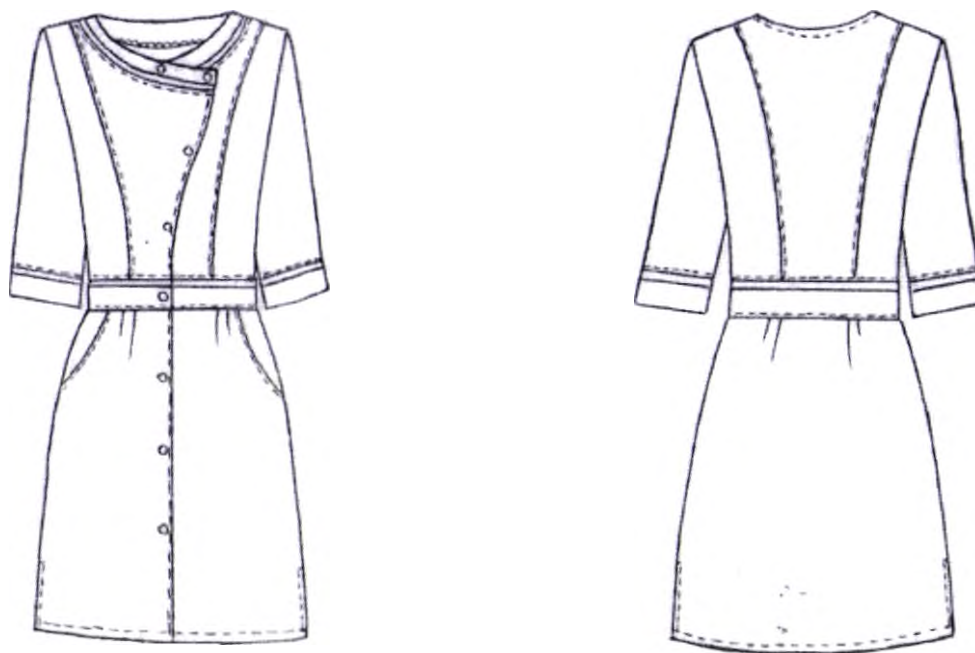


Рисунок А.28.

Таблица А.28.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	± 1,0
		170	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	± 1,0
		170	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	
3	Ширина изделия на уровне проймы /в застегнутом виде/, см	164 - 170	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	± 1,0
		170									

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский женский многоразового использования, модель 163



Рисунок А29.

Таблица А.29.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**								Предельное отклонение от номинального размера, см
			80	84	88	92	96	100	104	108	
			Полнота								
			2								
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	164	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	± 1,0
		170	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	164	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	94,5	± 1,0
		170	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	164	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	± 1,0
		170									
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	164	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	± 1,0
		170	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 9

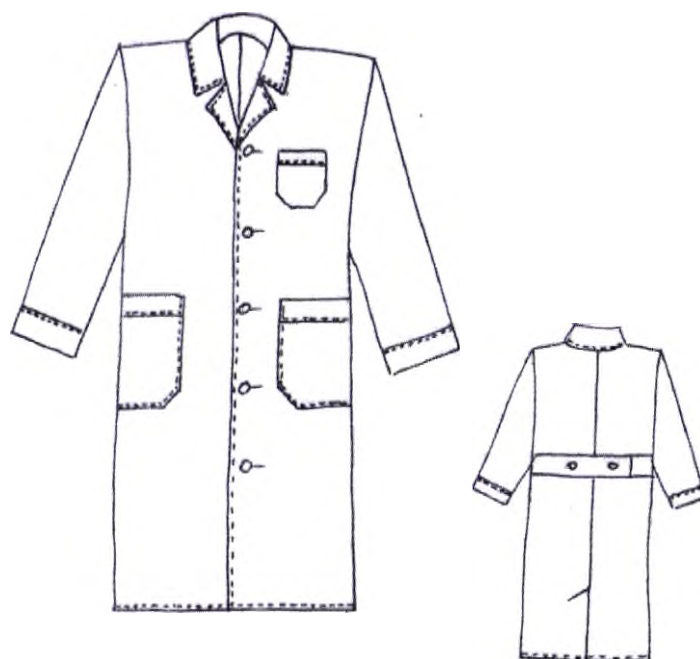


Рисунок А.30.

Таблица А.30.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**											Предельное отклонение от номинального размера, см
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	176	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	± 1,0
		182	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	176	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5	± 1,0
		182	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	115,0	115,5	
3	Ширина изделия на уровне глубины проймы до края борта (в расстегнутом виде) , см	176-182	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	176	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	± 1,0
		182	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 10

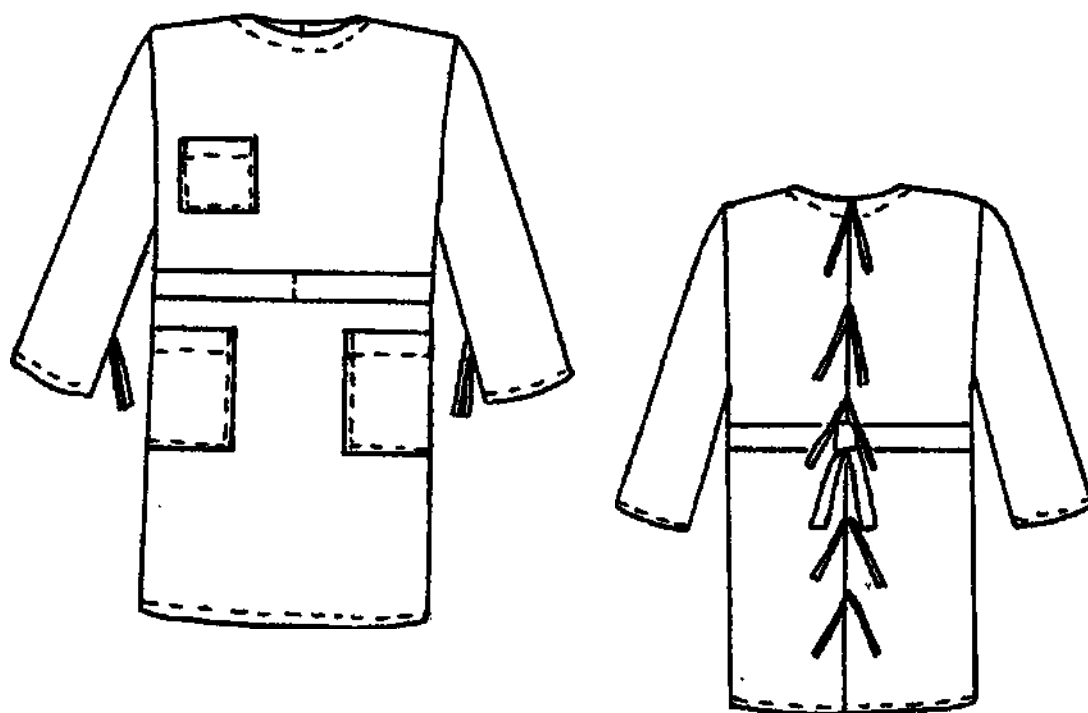


Рисунок А.31.

Таблица А.31.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост*	Размер**				Предельное отклонение от номинального размера, см
			88-92	96-100	104-108	112-116	
			Полнота				
			2				
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	176	107,0	107,0	107,0	107,0	± 1,0
		182	111,0	111,0	111,0	111,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	176	109,0	109,5	110,0	110,5	± 1,0
		182	113,0	113,5	114,0	114,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	176-182	60,0	64,0	68,0	72,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	176	66,0	66,0	66,0	66,0	± 1,0
		182	68,0	68,0	68,0	68,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 51

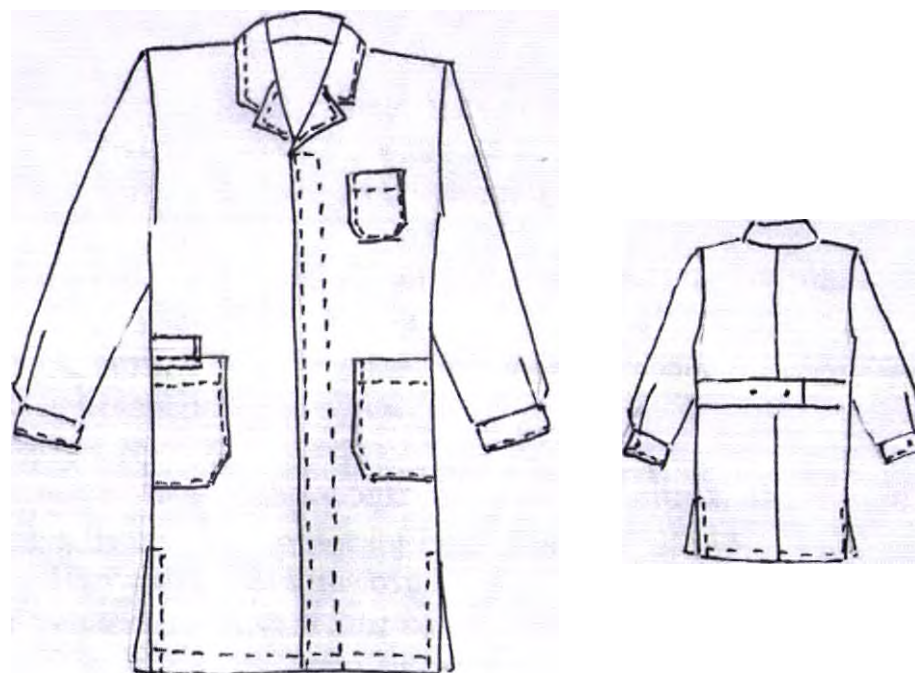


Рисунок А.32.

Таблица А.32.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**												Предельное отклонение от номинального размера, см
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128		
			Полнота												
			2												
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	176	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	± 1,0	
		182	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0		
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	176	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	± 1,0	
		182	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0		
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	176 182	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	± 1,0	
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	176	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	± 1,0	
		182	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0		

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 68

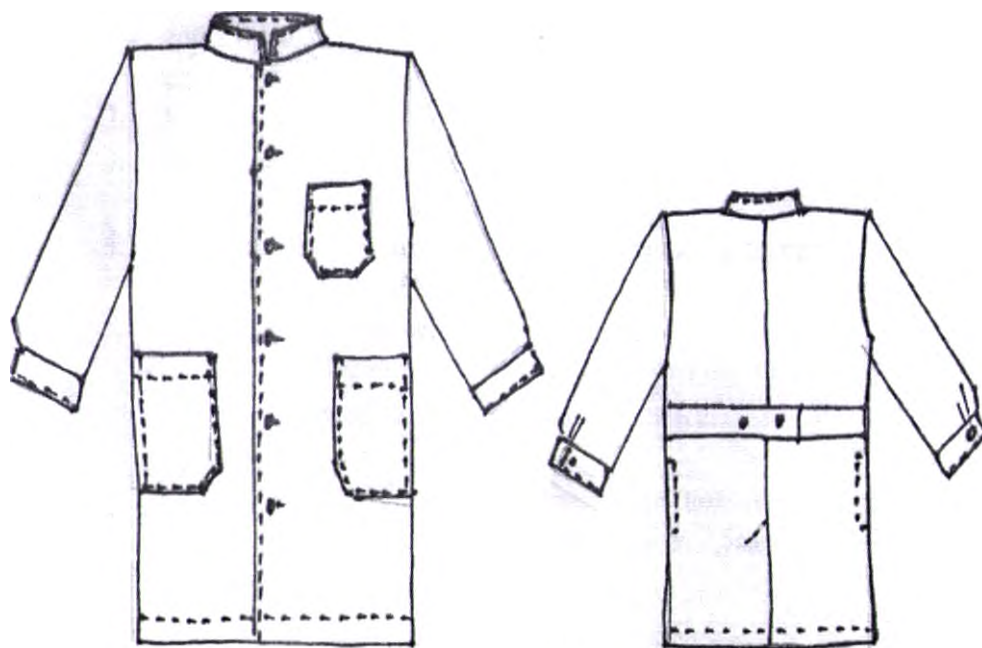


Рисунок А.33.

Таблица А.33.
в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**											Предельное отклонение от номинального размера, см
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	176	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	± 1,0
		182	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	176	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	± 1,0
		182	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	
3	Ширина изделия на уровне проймы \в расстегнутом виде\, см	176 182	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа , см	176	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	± 1,0
		182	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»



Рисунок А.34.

Таблица А.34.

в сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**											Предельное отклонение от номинального размера, см
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	176	101,8	101,9	102,0	102,1	102,2	102,3	102,4	102,5	102,6	102,7	102,8	± 1,0
		182	104,8	104,9	105,0	105,1	105,2	105,3	105,4	105,5	105,6	105,7	105,8	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	176	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	± 1,0
		182	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	
3	Ширина на уровне глубины проймы до края борта (в расстегнутом виде) , см	176-182	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	± 1,0
		182	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

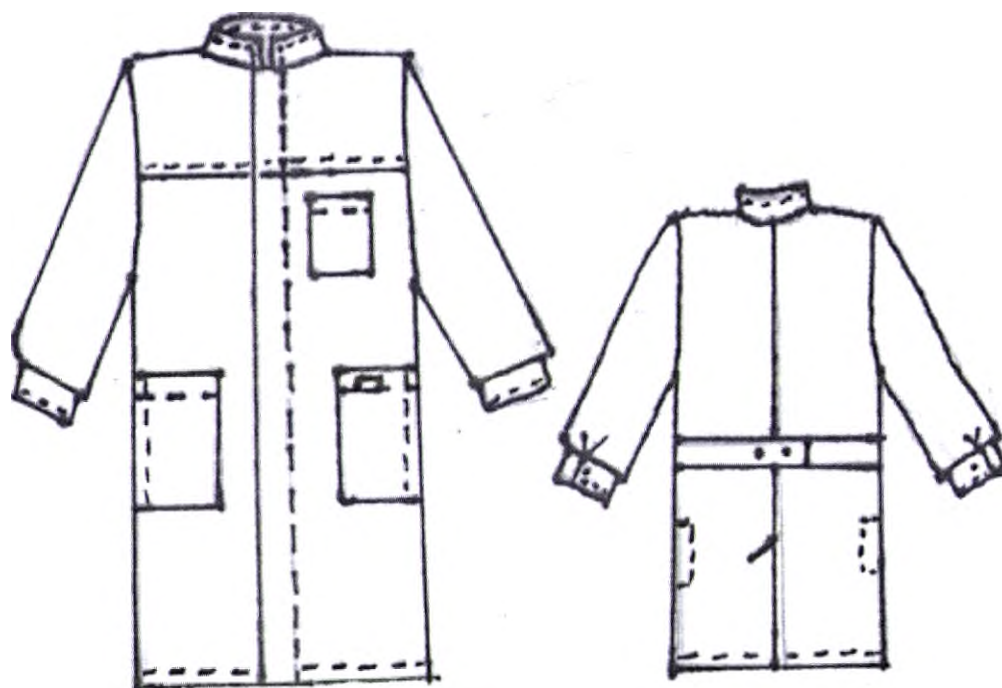


Рисунок А.35.

Таблица А.35.

8

сантиметрах

№	Наименование измерений	Рост *	Размер**											Предельное отклонение от номинального размера, см
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
			Полнота											
			2											
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа, см	176	96,5	96,6	96,7	96,8	96,9	97,0	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	± 1,0
		182	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100,0	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	
2	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа, см	176	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	± 1,0
		182	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	
3	Ширина на уровне глубины проймы до края борта (в расстегнутом виде), см	176-182	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	± 1,0
4	Длина рукава от плечевого шва до низа, см	176	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	± 1,0
		182	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6	

* Рост – «рост типовой фигуры человека»

** Размер – «размер типовой фигуры человека»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МАТЕРИАЛЫ И СЫРЬЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ

№ пп	Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий
1	2	3	4
Основные материалы.			
1	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», отбеленная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок плотность 120 г/м ² цвет: белый 00. Оптический отбеливатель:С.І. FB N0.113, изготовитель: Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, по ТР TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 20, 32, 38, 40, 49,78, 84, 85, 92, 93, 102, 103, 109, 122, 129, 132, 136, 138, 139, 140, 146, 149, 151, 152, 154,155, 157, 159,163 Халат медицинский мужской многоразового использования, модель: 9, 10, 51, 68, 160, 165.
2	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² цвет: светло-бирюзовый № 2. Краситель: RUBINE SE-GFL 200%-Е изготовитель: Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по ТР TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 20, 93, 102, 122, 129, 139.
3	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ(полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² цвет: голубой № 11. Краситель: BLUE SE-2R 200% изготовитель : Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China., Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по ТР TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 20, 93, 102, 122.
4	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay	Халат медицинский женский многоразового использования, модель 32.

	Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: темно-бирюзовый № 12 Краситель: Turquoise Blue S-GL (Blue 60), изготовитель : Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	
5	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: василек № 13 Краситель: BLUE EXNSF 150% Liquid изготовитель : Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China., Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель 32. Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 165.
6	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: сиреневый № 15. Краситель: Violet HFRL 100% изготовитель: Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 32, 129, 136, 146, 151.
7	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: брусничный № 16. Краситель: Rubine S-2GFL (Red 167), изготовитель: Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель 32.
8	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья:	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм	Халат медицинский женский многоразового использования, модель 159. Халат медицинский мужской многоразового использования,

	65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² цвет: чернильный № 19. Краситель: Navy blue HGL (Blue 79), изготовитель: Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй- Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	модель 165.
Ч	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м ² Цвет: розовый № 20. Краситель: Basic Pink FG изготовитель : Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян . Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй- Бэй в Гонконге, Китай по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 78, 85, 146,159.
10	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² Цвет: бордовый № 23. Краситель: Ruby SR 200%,изготовитель:Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян . Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй- Бэй в Гонконге, Китай. Китай) по TP TC 017/2011	Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 160.
11	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² цвет: персиковый № 26. Краситель: Disperse peach S изготовитель: Чжэцзян Runtu Co.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China., Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй- Бэй в Гонконге, Китай по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 85, 93,129, 136, 139,159.
12	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ²	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 85, 129. Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 160.

	цвет: серый № 30. Краситель: Grey HBL, изготовитель = Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортунa Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	Бэй в Гонконге, Китай по TP TC 017/2011	
13	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир 100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² цвет: коралловый № 32. Краситель: Red FB 60 изготовитель: Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортунa Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China., Хм одежды группа ЛТД, 15\F "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоцветного использования, модель: 149,151.
14	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир 100%, марка А), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² цвет: фисташковый № 34. Краситель: Green D6B изготовитель: Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортунa Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\F "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай.	Халат медицинский женский многоцветного использования, модель 159.
15	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир 100%, марка.), 35% хлопок; плотность 120 г/м ² Цвет: пепельная роза № 42. Краситель: Grey N100% Е изготовитель: Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортунa Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\F "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоцветного использования, модель: 78, 152, 155.
16	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир 100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м ² Цвет: фуксия № 56. Краситель: <u>DISP RED SP-B 200%</u> изготовитель: Чжэцзян Runtu Co., Лимитед. Runtu Строите, Фортунa Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй,	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\F "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоцветного использования, модель: 103, 149.

	Чжэцзян, Китай		
17	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: холодный голубой № 71. Краситель:BLUE SE-2R 200% изготовитель: Чжэцзян Runtu Со.,Лимитед. Runtu Строите. Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 85,163. Халат медицинский мужской многоразового использования, модель 160.
18	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: красный № 83. Краситель: REDN100%Е изготовитель: Чжэцзян Runtu Со.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 163.
19	Ткань швейная из хлопчатобумажных, синтетических и смешанных волокон с маркировкой «ТиСи», гладкоокрашенная Состав сырья: 65% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 35% хлопок; плотность 120 г/м² цвет: с рисунком. Краситель:рисунок (огурцы,подарки) trichromatic shades ,Чжэцзян Runtu Со.,Лимитед. Runtu Строите, Фортуна Плаза 1, Шимин Дороге 1009, Шанюй, Чжэцзян, Китай	XM GARMENT GROUP LTD, 15\F Radio City Hennessy RD Causeway bay Hongkong, China. Хм одежды группа ЛТД, 15\Ф "Радио-Сити" Хеннесси РД Козуэй-Бэй в Гонконге, Китай. по TP TC 017/2011	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 154
20	Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» отбеленная Состав сырья: 50% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 50% хлопок; плотность 145г/м² Цвет: белый 00. Краситель: Принтекс белый ВС ТУ № 2463-002-26321322-2013 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экохим» Россия.	СТО 22701849-019-2015 ООО «Адвентум Технолоджис», Россия	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 109, 122, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 152, 155.
21	Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» гладкокрашенная Состав сырья: 50% ПЭ (полиэфир100%, марка А)	СТО 22701849-019-2015 ООО «Адвентум Технолоджис», Россия	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 122, 129.

	50% хлопок; плотность 145г/м ² цвет: светло-бирюзовый № 140. Краситель: Принтекс бирюзовый (марка: 4G), изготовитель ООО «Экохим», Россия ТУ 2463-002-26321322-2013		
22	Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» гладкокрашеная Состав сырья: 50% ПЭ (полиэфир100%, марка А) 50% хлопок; плотность 145г/м ² цвет: холодный голубой № 112. Краситель: Принтекс голубой (марка: RS), изготовитель ООО «Экохим», Россия ТУ 2463-002-26321322-2013	СТО 22701849-019- 2015 ООО «Адвентум Технолоджис», Россия	Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 84, 92,122, 129 Халат медицинский мужской многоразового использования, модель: 160.
Отделочные материалы.			
23	Кружево 2,5 см. Состав: 100% ПЭ (полиэстер класса А) Цвет: белый.	«SEZGI BRODE TEKSTIL SAN. TIC.LCD.STI,адрес: Турция,Kucuk Yildiz Han Sok.Eda Han D:27. Fatin/Istanbul, Турция	Халат медицинский женский многоразового использования, модель 84
Вспомогательные материалы и фурнитура.			
24	Кнопка рубашечная диаметр 10,1 мм Цвет: металлический. Латунь CuZn36: Cu 63,5-65,5%; AL 0,02% max; Fe 0,05% max; Ni 0,3% max; Pb 0,009% max; Sn 0,1% max; остальное Zn (примерно 36%)	Prym Fashion GmbH, Прима Фэшн ГмбХ, Прима мода Азиатско- Тихоокеанском регионе&ко, Zweifaller штрассе 130,д-52224 штольберг. Германия	Для застегивания . Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 122, 129, 139, 146, 149, 152, 154, 163. Халат медицинский мужской многоразового использования, модель: 160, 165.
25	Кнопки пластиковые диаметр 15,2 мм. Цвет: белый Состав: PP марка 5060	Prym Fashion GmbH, Прима Фэшн ГмбХ, Прима мода Азиатско- Тихоокеанском регионе&ко, Zweifaller штрассе 130,д-52224 штольберг. Германия	Для застегивания. Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 138, 159.
26	Кнопки пластиковые диаметр 12,0 мм. Цвет: белый Состав: PP марка 5060	Prym Fashion GmbH, Прима Фэшн ГмбХ, Прима мода Азиатско- Тихоокеанском регионе&ко, Zweifaller штрассе 130,д-52224 штольберг. Германия	Для застегивания. Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 138, 139, 151, 152,157.
27	Молния 70см спиральная разъемная Т- 5 ГОСТ 28965-91 Состав: лента - 100% хлопок, звенья - полиэстер класс А, замок - алюминиевый сплав (AlZn)	ООО «Молния-Спб» инн7802122366 ул.Колонтай, 41. К1 лит В.	Для застегивания. Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 40, 122, 155.
28	Пуговицы 18мм. Цвет: белый. Состав: PP марка 5060	Prym Fashion GmbH, Прима Фэшн ГмбХ, Прима мода Азиатско- Тихоокеанском	Для застегивания. Халат медицинский женский многоразового использования, модель: 20, 32, 38, 49, 78,85,84,

		регионе&ко, Zweifaller штрассе 130,д-52224 штольберг. Германия	92, 93, 102,103, 109, 132, 136, 140. Халат медицинский мужской многоцветного использования, модель: 9, 51, 68.
29	Хольнитены 7*7мм. Состав: латунь CuZn36 Цвет: никель	Prym Fashion GmbH Прима Фэшн ГмбХ, Прима мода Азиатско- Тихоокеанском регионе&ко, Zweifaller штрассе 130,д-52224 штольберг.Германия	Декоративная отделка халатов: Халат медицинский женский многоцветного использования, модель: 122, 146, 163. Халат медицинский мужской многоцветного использования, модель: 160.
30	Нитки швейные артикул 40/2 и 50/2 ТМ «Красная нить» Состав: 100% ПЭ марки 35Л 29,4 текс х 2. Цвет: белый Краситель: белый ВС ТУ № 2463-002- 26321322-2013 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Экохим» Россия.	ОАО«Прядильно- ниточный комбинат»Красная нить» С-Петербург улГельсиндорфская д.3. Производство:Россия	Все модели
31	Подплечники поролоновые 10*10 см Состав: пенополиуретан ППУ-22.40.	ИП Коблев А.В.	Халат медицинский женский многоцветного использования, модель: 20, 32, 38, 40, 49, 78,85,92,84, 102,103, 109, 129, 132, 136, 138, 139, 140, 146, 151, 152, 155,159,163.

Сшито и заверено печатью 86
(*дополнительно лист 86*)

Генеральный директор
ООО «СТИЛЬ»
Н.А. Балысов *[Signature]*