

M.8402**Шина поддержки руки.**

Для использования при лопаточно-плечевых патологиях.

Инструкции по использованию:

1. Установите ручной изгиб под углом к ремню, вставьте, если необходимо, большой палец в соответствующее для него отверстие.
2. Пропустите натяжное устройство к противоположному плечу, к шее приложите защитную подушку.
3. Введите натяжное устройство в автоблокирующийся ремень и потяните до его полного закрепления.

Предостережения:

Напряжение, создаваемое изделием не должно сдавливать поврежденные участки кожи или опухоли.

Не подходить к изделию к открытому пламени.

Уход:

Инструкции по мойке повязки: мыть в мягкой 30 градусной воде нейтральным мылом. Не сушить вблизи от огня.

Предупреждение:

Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом и наложено ортопедом. Ортопед является вашим техником, который профессионально сможет наложить вам изделие и дать информацию по правильному использованию шины, учитывая все ваши особенности и индивидуальные нужды. Все изменения конструкции должны быть назначены врачом и выполнены техником-ортопедом. По всем возникающим вопросам обращайтесь к ортопеду. Шина была выполнена для максимального комфорта в использовании.



Васильцова Е.В.