



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «Колетекс»

Н.Д. Олтаржевская

2011 г.

ЭТИКЕТКА

**«Салфетка гемостатическая на текстильной основе с альгинатом
натрия и ε-аминокапроновой кислотой, стерильная,
«Колетекс-АК»**

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2 тел/факс, (495) 730-56-45
(многоканальный)

www.coletex.ru

Салфетка гемостатическая из текстильного полотна с альгинатом натрия и
ε-аминокапроновой кислотой, стерильная, «Колетекс-АК».

Размер 6х10 см.

ТУ 9393-019-58223785-2011.

Регистрационное удостоверение №
«СТЕРИЛЬНО».

Для местного применения.

Пария №

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

В качестве гемостатического средства

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Салфетку наложить на рану стороной с лекарственным средством и
прижать на 30-40 сек.
2. После полной остановки кровотечения салфетку удалить

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте при
температуре от +5 до + 40 °С.

Марка: Колетекс-АК.

Препарат: ε-аминокапроновая кислота.

Противопоказания: аллергическая реакция на препарат.

Знак Ростеста.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Колетекс»


2011 г.



ЭТИКЕТКА

«Салфетка гемостатическая из текстильного полотна с альгинатом
натрия и ϵ -аминокапроновой кислотой, стерильная,
с липкими краями «Колетекс-АК»

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2, тел/факс, (495) 730-56-45
(многоканальный)

www.coletex.ru

Салфетка гемостатическая из текстильного полотна с альгинатом натрия и ϵ -аминокапроновой кислотой, стерильная, с липкими краями «Колетекс-АК».

Размер 10x14 см

ТУ 9393-019-58223785-2011.

Регистрационное удостоверение №
«СТЕРИЛЬНО».

Для местного применения.

Пария №

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

В качестве гемостатического средства

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Удалить антиадгезионное покрытие с салфетки, наложить ее на рану стороной с лекарственным средством и прижать на 30-40 сек.
- После полной остановки кровотечения салфетку можно удалить или продолжать ее использовать, не удаляя с раны до 3-х суток.
- Для удаления с поверхности – смочить водой с наружной стороны

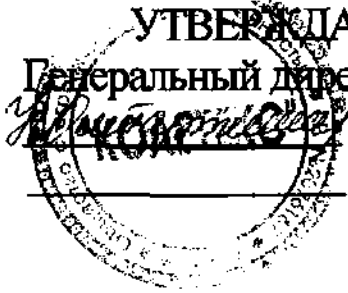
Условия хранения: в сухом защищенном от света месте при температуре от + 5 до + 40°C.

Марка: Колетекс-АК.

Препарат: ϵ -аминокапроновая кислота.

Противопоказания: аллергическая реакция на препарат.

Знак Ростеста.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Колетекс»
 Н.Д. Олтаржевская
2011 г.

ЭТИКЕТКА

«Салфетка гемостатическая на текстильной основе с альгинатом
натрия, ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином стерильная,
«Колетекс-АКЛ»

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2 тел/факс, (495) 730-56-45
(многоканальный)

www.coletex.ru

Салфетка гемостатическая из текстильного полотна с альгинатом натрия,
ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином, стерильная, «Колетекс-АКЛ».

Размер 6х10 см.

ТУ 9393-019-58223785-2011.

Регистрационное удостоверение №
«СТЕРИЛЬНО».

Для местного применения.

Пария №

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

В качестве гемостатического средства

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Салфетку наложить на рану стороной с лекарственным средством и прижать на 30-40 сек.
2. После полной остановки кровотечения салфетку удалить

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте при температуре от +5 до + 40 °С.

Марка: Колетекс-АКЛ.

Препарат: ε-аминокапроновая кислота, лидокаин.

Противопоказания: аллергическая реакция на препарат.

Знак Ростеста.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Колетекс»

Н.Д. Олтаржевская
2011 г.



ЭТИКЕТКА

«Салфетка гемостатическая из текстильного полотна с альгинатом натрия, ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином, стерильная, с липкими краями «Колетекс-АКЛ»

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2, тел/факс, (495) 730-56-45
(многоканальный)

www.coletex.ru

Салфетка гемостатическая из текстильного полотна с альгинатом натрия, ϵ -аминокапроновой кислотой и лидокаином, стерильная, с липкими краями «Колетекс-АКЛ».

Размер 10x14 см

ТУ 9393-019-58223785-2011.

Регистрационное удостоверение №
«СТЕРИЛЬНО».

Для местного применения.

Пария №

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

В качестве гемостатического средства

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Удалить антиадгезионное покрытие с салфетки, наложить ее на рану стороной с лекарственным средством и прижать на 30-40 сек.
- После полной остановки кровотечения салфетку можно удалить или продолжать ее использовать не удаляя с раны до 3-х суток.
- Для удаления с поверхности – смочить водой с наружной стороны

Условия хранения: в сухом защищенном от света месте при температуре от + 5 до + 40°C.

Марка: Колетекс-АКЛ.

Препарат: ϵ -аминокапроновая кислота, лидокаин.

Противопоказания: аллергическая реакция на препарат.

Знак Ростеста.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Колетекс»

И.Д. Олтаржевская
2011 г.

ЭТИКЕТКА

«Салфетка гемостатическая гидрогелевая с альгинатом натрия,
ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ»

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2, тел/факс, (495) 730-56-45
(многоканальный)

www.coletex.ru

«Салфетка гемостатическая гидрогелевая с альгинатом натрия,
ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ»

ТУ 9393-019- 58223785 – 2011.

Регистрационное удостоверение №

«СТЕРИЛЬНО».

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетка гидрогелевая предназначена в качестве местного гемостатического средства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Произвести стандартный туалет обрабатываемой полости (слизистой, кожи).

Вскрыть упаковку, необходимое количество геля ввести в полость (на слизистую, кожу), при необходимости сверху закрыть тампоном.

Условия хранения: хранение в прохладном защищенном от света месте.

Марка: Колетекс-АКЛ.

Препарат:ε-аминокапроновая кислота, лидокаин.

Противопоказания: аллергическая реакция на препарат.

Знак Ростеста

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 листов
Подпись: И. КОЛ