

«Утверждаю»

On behalf of «DTS MG Co., LTD», Korea
(От имени «ДТС МГ Ко, ЛТД», Корея)



General Director

Kisoo Han Kisoo Han
Генеральный директор, Кису Хан)

«28» декабря 2015 г.

**Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по
микронидлингу**

Инструкция по применению

Настоятельно рекомендуем прочесть данную инструкцию перед применением!

Производитель:

«ДТС МГ Ко, ЛТД» (DTS MG Co., LTD), Корея
#401, 402, 14, Yeonmujang 17-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea.
Tel/Fax. + 82-2-558-5480/+ 82-2-558-5482
E-mail: info@dtsmg.com

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «МИТРИДАТ», Россия,
109125, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10. Тел: +7 (495) 502-54-97

Оглавление

1. Наименование.....	3
2. Варианты исполнения.....	3
3. Назначение.....	4
4. Показания к применению.....	5
5. Противопоказания к применению.....	5
6. Возможные побочные действия.....	5
7. Преимущества.....	5
8. Описание.....	6
9. Механизм действия.....	6
10. Состав.....	6
11. Характеристики:.....	8
12. Информация о материалах, видах контакта.....	14
13. Применение.....	19
14. Продукты, которые рекомендуется использовать в сочетании с мезороллером марки «Genosys»:.....	21
15. Предупреждения о продуктах, применения которых следует избегать с мезороллером марки «Genosys».....	21
16. Меры предосторожности.....	21
17. Хранение и утилизация.....	22
18. Маркировка.....	22
19. Безопасность.....	22
20. Гарантийные обязательства.....	22
21. Производитель.....	22
22. Уполномоченный представитель производителя:.....	22

1. Наименование

Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями:

1. Варианты исполнения:

- Мезороллер MEDI одноразовый, в упаковке 1 шт.;
- Мезороллер-штемпель ST одноразовый, в упаковке 1 шт.;
- Мезороллер EYE одноразовый, в упаковке 2 шт.
- Мезороллер FB со сменным одноразовым стерильным роллером, в упаковке 1 шт.;
- Мезороллер Body Roller со сменным одноразовым стерильным роллером, в упаковке 1 шт.;

2. Принадлежности:

- Роллер для мезороллера FB, одноразовый стерильный;
- Роллер для мезороллера Body Roller, одноразовый стерильный.

2. Варианты исполнения

Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями:

1. Варианты исполнения:

- Мезороллер MEDI одноразовый

Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

- Мезороллер-штемпель ST одноразовый

Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

- Мезороллер EYE одноразовый

Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

- Мезороллер FB со сменным одноразовым стерильным роллером

Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

- Мезороллер Body Roller со сменным одноразовым стерильным роллером


Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

2. Принадлежности:

- Роллер для мезороллера FB, одноразовый стерильный

Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

- Роллер для мезороллера Body Roller, одноразовый стерильный

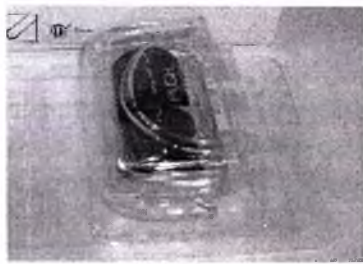Модель / тип	Игла (мм) $\pm 0,01$
	0,25
	0,50
	1,00
	1,50

3. Назначение

Мезороллеры марки «Genosys» предназначены для процедуры микроигольчатой терапии на всех частях тела и лица. Качественная проработанная линия средств дает высокий результат уже после первых процедур, позволяя удалить большинство эстетических недостатков кожи, начиная с возрастных изменений, шрамов и рубцов и заканчивая лечением аллопеции (облысения).

Эффективность Мезороллера заключается в омоложении и увлажнении кожи, профилактике образования морщин, минимизирует послеугревые шрамы, уменьшении пигментации кожи. Эффективно используется для стимуляции роста волос на голове.

Процедура с использованием Мезороллеров проста, эффективна, может использоваться как профессиональным косметологом, так и для домашнего индивидуального использования.

4. Показания к применению

Мезороллеры доказали свою высокую эффективность при многих эстетических недостатках

- Возрастные изменения кожи лица, шеи, декольте, морщины, сниженный тонус и тургор, нарушение четкости контуров овала лица, гравитационный птоз и проблема «второго подбородка»
- Морщины, отеки, темные круги и гиперпигментация в периорбитальной области
- Изменение цвета кожи и кожного рельефа, тусклый и неровный цвет и тон кожи, расширенные поры, пигментация различного происхождения, состояние постакне, атрофические рубцы, застойные пятна и инфильтраты
- Весьма эффективно использование при стрессовом состоянии кожи, для уставшей и атоничной кожи в любом возрасте
- Дряблость, сниженный тонус, тургор и эластичность кожи тела, рубцы и шрамы различной локализации и происхождения, растяжки, целлюлит
- Проблема замедления роста волос, алопеция различного генеза, как у мужчин, так и у женщин.

5. Противопоказания к применению

- Избегайте применения сосудосуживающих средств;
- Избегайте применения любых продуктов, которые могут привести к повреждению клеток или тканей;
- Старайтесь избегать употребления химических добавок, в том числе консервантов;
- Избегайте применения материалов, вызывающих аллергию;
- Старайтесь избегать применения парфюмерии и искусственных красителей.

6. Возможные побочные действия

- Высыпание;
- Воспаление;
- Разъедание.

7. Преимущества

Использование роллера имеет существенные плюсы по сравнению с пилингами и лазерными методиками. Мезороллер стимулирует естественный защитный механизм и принуждает кожные покровы к самовосстановлению. 200 тончайших микроигл толщиной с человеческий волос кратковременно прокалывают кожу, стимулируя ее к выработке собственного коллагена, эластина, регенерации. Плотность кожи повышается на 8%, У мезороллеров GENOSYS не пластиковый корпус, в который внедрены иголки, а цельнолитой стальной диск, формованный лазерной гравировкой, иглы имеют одинаковый угол наклона и расположены таким образом, что травматичность снижена до минимума. Иглы в мезороллере Genosys выполнены в форме ромба, что обеспечивает оптимальное и безболезненное вхождение в кожу.

Благодаря десяткам тысяч микроканалов, создаваемых во время процедуры тонкими иглолочками, косметические препараты легко проникают в кожу, достигая необходимой глубины, чего не могут обеспечить неинвазивные аппаратные методы воздействия. По эффективности и стойкости результатов, роллеры и космецевтика GENOSYS не уступают микродермабразии, лазерному омоложению, мезотрепии и другим профессиональным процедурам, но обходится на несколько порядков дешевле практикующим врачам и пациентам;

8. Описание

Достаточно простой по своей конструкции, мезороллер представляет собой подвижный крутящийся миниатюрный валик с тончайшими иголочками, закрепленный на удобной ручке. Количество игл и их длина отличаются в зависимости от модели мезороллера и его назначения.

В ходе процедуры микроиглы воздействуют на кожу, проникая в эпидермис и дермальные слои, при этом глубина воздействия напрямую зависит от длины иглы.

Независимо от того, в какой области используется мезороллер для лица или применяется для тела, эффекты его воздействия на кожу неизменны:

Основным отличием является алмазная заточка игл, которая обеспечивает практически безболезненное и легкое проникновение в кожу, также достижению минимальной болезненности способствует четко рассчитанное расположение каждой иглы под углом 6 градусов к поверхности кожи.

9. Механизм действия

Иглы мезороллера создают в коже до полумиллиона микроканалов. Такое количество микроповреждений требуют слаженной работы всех клеток, которые немедленно начинают «ремонтную» деятельность: активно восстанавливают структуру кожи и максимально интенсивно вырабатывают собственный коллаген и эластин – белки, отвечающие за гладкость и упругость кожи.

Кроме того, через образовавшиеся каналы, косметические средства транспортируются глубоко в кожу, целенаправленно туда, где они необходимы. Это в десятки раз более эффективно, чем традиционное нанесение косметики на поверхность кожи. В результате после процедуры кожа лица и области вокруг глаз вновь обретает молодость, яркость, здоровье и тонус.

Так же в результате воздействия мезороллера происходит подкожная стимуляция дермальных фибробластов, синтеза собственного коллагена, создаваемые микроканалы облегчают трансдермальное проникновение активных молекул специально созданной космецевтики Genosys для микроднилинговой терапии.

10. Состав

Сочетание стимулирующего действия микроигл и активных компонентов косметических средств, обеспечивают максимальный положительный результат при коррекции различных эстетических недостатков и дефектов. При проведении процедур специалисты используют как мезороллер для лица, так и мезороллер для тела. Также, созданы специальные мезороллеры для деликатной периорбитальной области.

Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения:

Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями:

1. Варианты исполнения:

- Мезороллер MEDI одноразовый, в упаковке 1 шт.;
- Мезороллер-штемпель ST одноразовый, в упаковке 1 шт.;
- Мезороллер EYE одноразовый, в упаковке 2 шт.
- Мезороллер FB со сменным одноразовым стерильным роллером, в упаковке 1 шт.;
- Мезороллер Body Roller со сменным одноразовым стерильным роллером, в упаковке 1 шт.;


2. Принадлежности:

- Роллер для мезороллера FB, одноразовый стерильный;
- Роллер для мезороллера Body Roller, одноразовый стерильный.


Вариант исполнения: Мезороллер MEDI



Вариант исполнения: Мезороллер-штампель ST

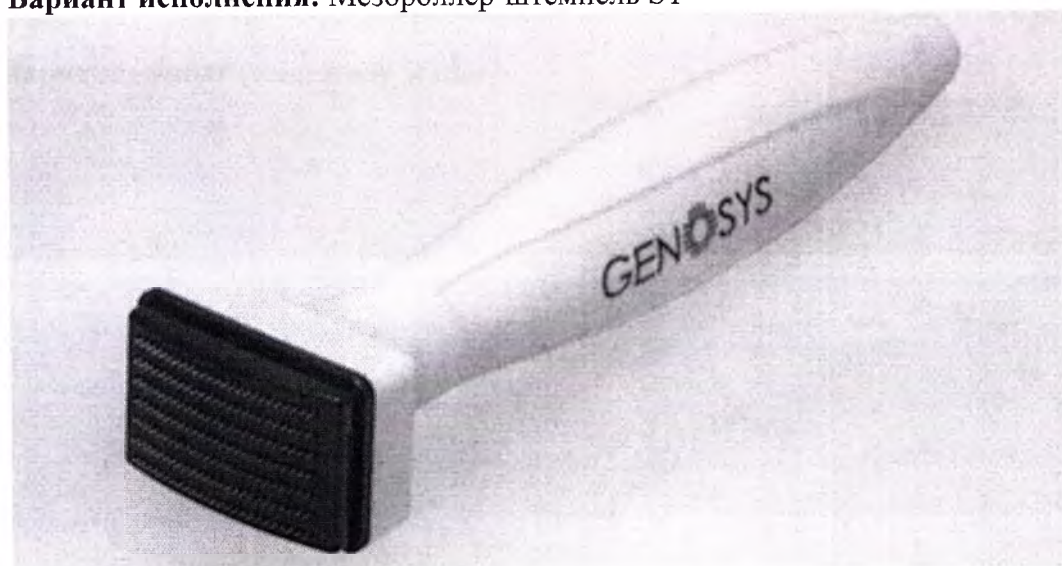


Вариант исполнения: EYE

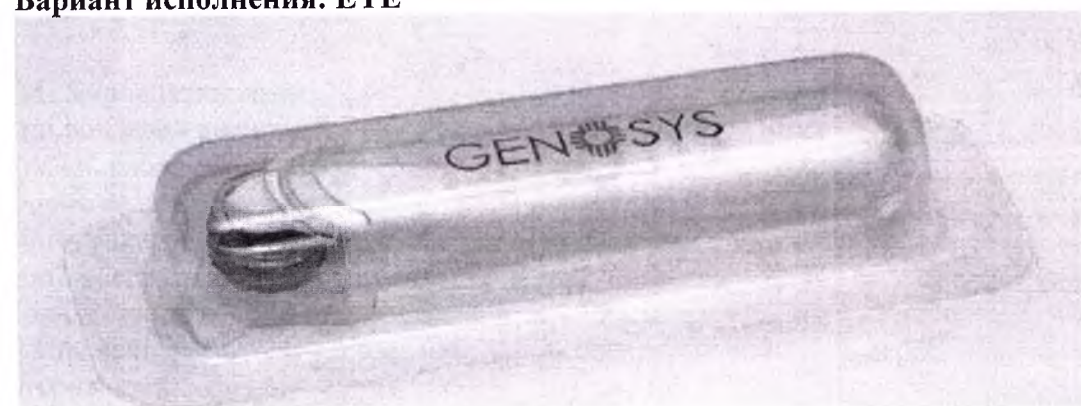

Вариант исполнения: FB



Вариант исполнения: Body Roller

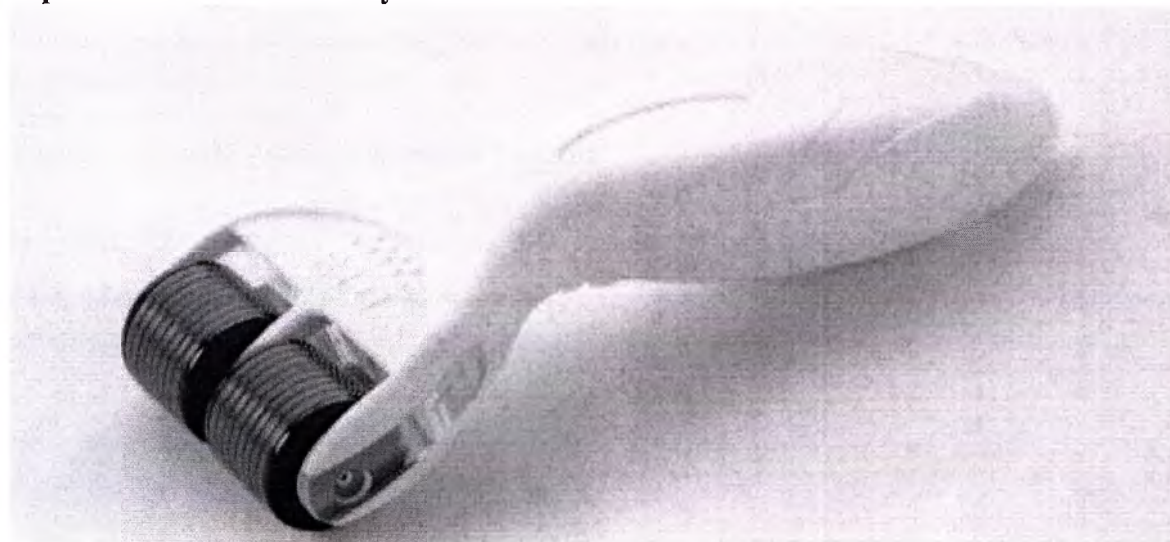

11. Характеристики:

Тип роллера - дисковый

Угол наклона игл - 6 градусов

Форма иглы - алмазная заточка

Материал игл – высококачественная нержавеющая сталь

Материал ручки – высокопрочный пластик

Количество игл ~ 540 игл, толщина игл – 0,2 мм



Длина игл: от 0,25 до 1,5 мм

Стерильный.

Вид спереди



Вид сбоку

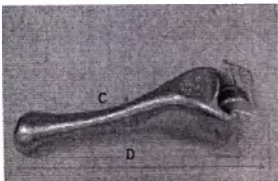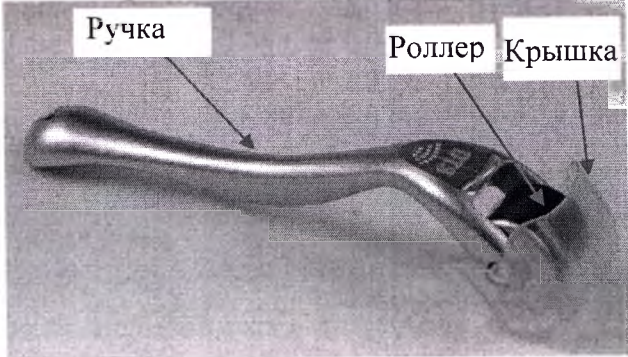

Изображение 1: Схематичное изображение мезороллера

Характеристика иглы

- Форма резки иглы: шестигранник
- Угол наклона игл - 6 градусов
- Форма иглы - алмазная заточка
- Материал игл - изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304

- Количество игл ~ 540 игл, толщина игл – 0,2 мм
- Длина игл: от 0,25 до 1,5 мм
- Тип роллера - дисковый
- Материал ручки – высокопрочный пластик

Стерильный.

11.1. Мезороллер MEDI одноразовый



- Роллер: диск с иглами, выполненными из нержавеющей стали
- Ручка: захватное устройство
- Крышка: колпачок для иглол


1) Размеры:

	Артикул	Длина иглы (мм) ±0,01	Наименование элемента	(мм)
	M025	0,25	А. Длина головки	26,3
	M050	0,50	В. Ширина роллера	18,2
	M100	1,00	С. Диаметр ручки	8,8
	M150	1,50	Д. Длина	135,0
				Отклонение от размеров не более 2 %

2) Масса: не более 30гр

11.2. Мезороллер-штампель ST одноразовый


Головка

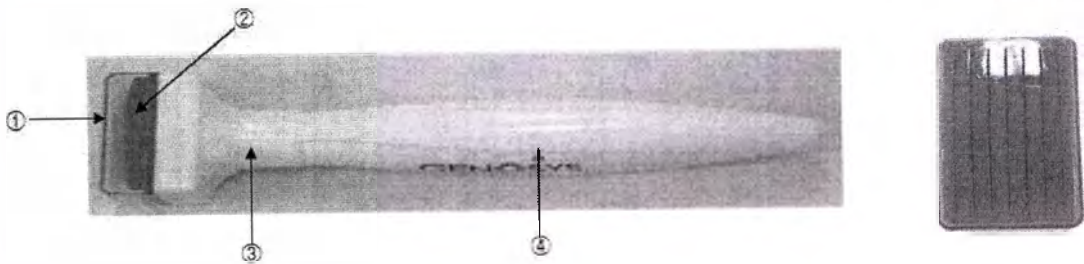

Изображение 3: Схематичное изображение мезороллера

- 1. Крышка для защиты головки
- 2. Головка
- 3. Крепление головки
- 4. Ручка


1) Размеры

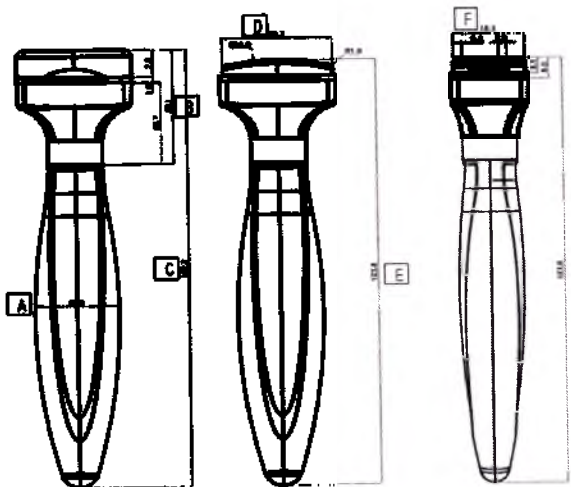

Артикул	Длина иглы (мм) ±0,01	Наименование элемента	(мм)
ST025	0,25	A.	22,0
ST050	0,50	B.	33,1
ST100	1,00	C	127,2
ST150	1,50	D	28,2
		E	123,8
		F	18,2
			Отклонение от размеров не более 2 %


2) Масса: корпус не более 30гр/ головка не более 11,5гр

11.3. Мезороллер EYE одноразовый.

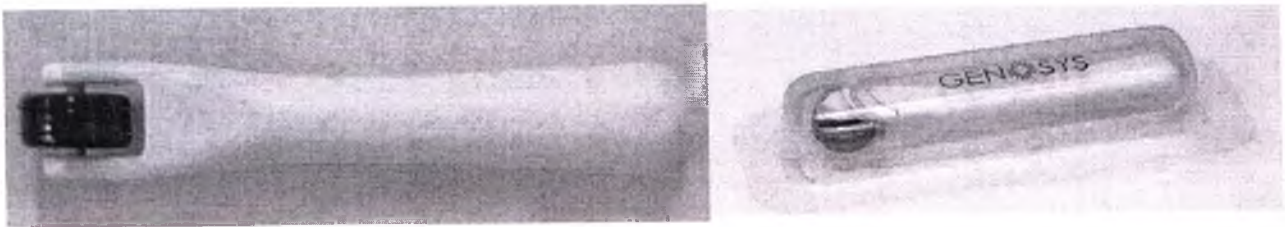


Изображение 4: Схематичное изображение мезороллера

1) Размеры - Ручка

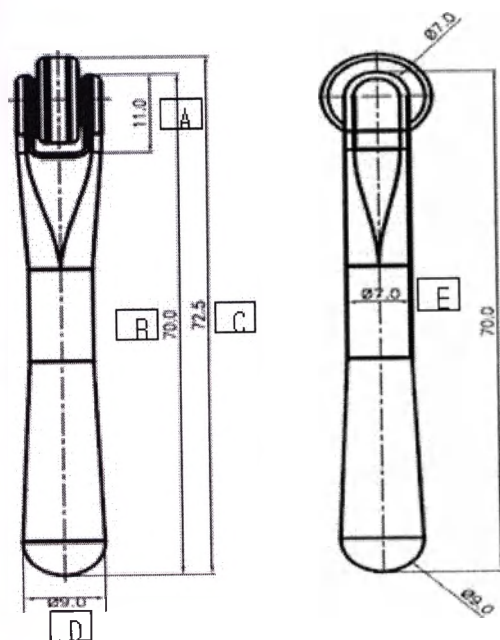


Деталь	Размер (мм)
A	11,0
B	70,0
C	72,5
D	Ø 9,0
E	Ø 7,0

2) Размеры – Колпачок

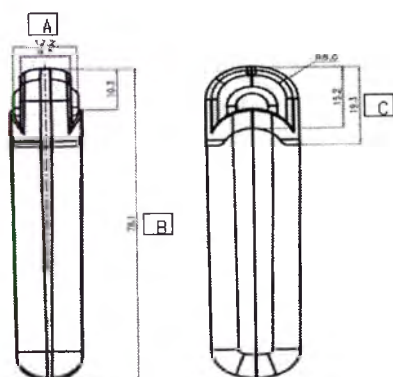

Деталь	Размер (мм)
A	11.0
B	70.0
C	72.5
D	Ø 9.0
E	Ø 7.0


3) Размеры - Головка

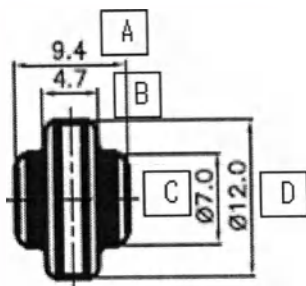

Деталь	Размер (мм)
A	9.4
B	4.7
C	Ø 7.0
D	Ø 12.0

4) Масса: не более 10,0 гр.

11.4. Мезороллер FB со сменным одноразовым стерильным роллером

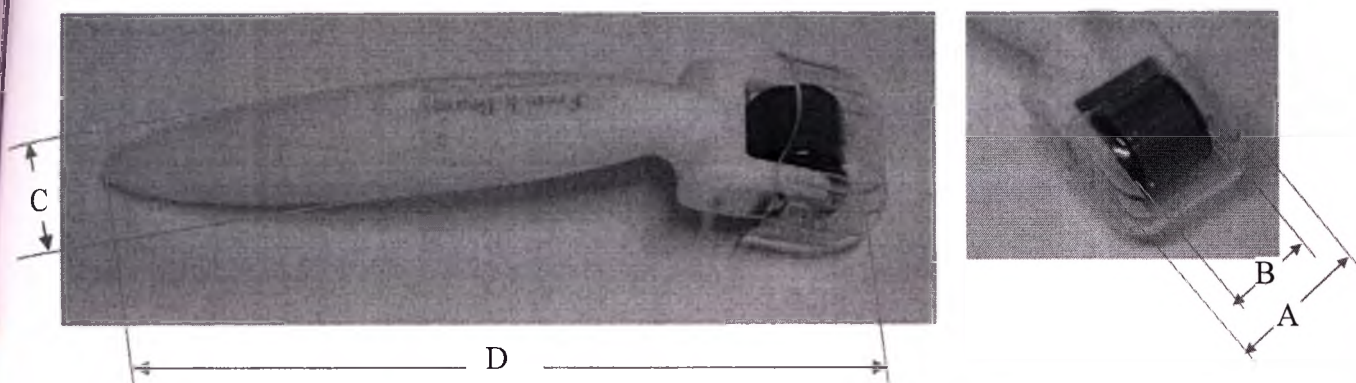


Изображение 2: Схематичное изображение мезороллера

1) Размеры:

Артикул	Длина иглы (мм) $\pm 0,01$	Наименование элемента	(мм)
FM025	0,25	А. Длина головки	29,20
FM050	0,50	В. Ширина роллера	41,50
FM100	1,00	С. Диаметр ручки	24,12
FM150	1,50	Д. Длина	128,86
			Отклонение от размеров не более 2 %

2) Масса: не более 95 гр.

11.5. Мезороллер Body Roller со сменным одноразовым стерильным роллером

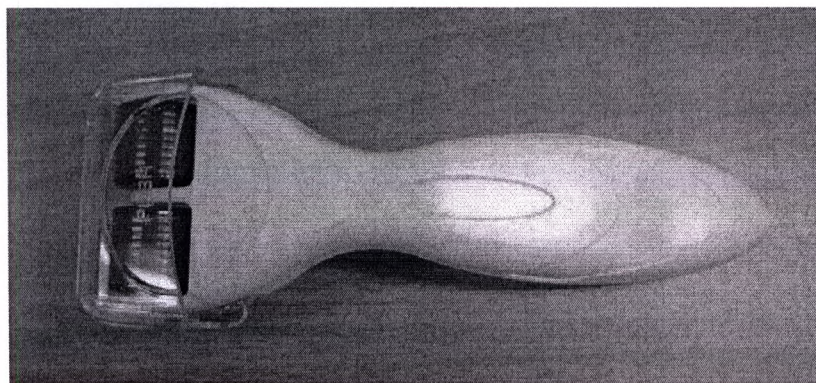


- Роллер: диск с иглами, выполненными из нержавеющей стали
- Ручка: захватное устройство
- Крышка: колпак для иглол

2) Размеры

Артикул	Длина иглы (мм) $\pm 0,01$	Наименование элемента	(мм)
B025	0,25	A. Ширина головки	49,40
B050	0,50	B. Ширина роллера	38,40
B100	1,00	C. Диаметр ручки	31,80
B150	1,50	D. Длина	142,90
Отклонение от размеров не более 2 %			

3) Масса: не более 73.8гр.


11.6. Роллер для мезороллера FB, одноразовый стерильный

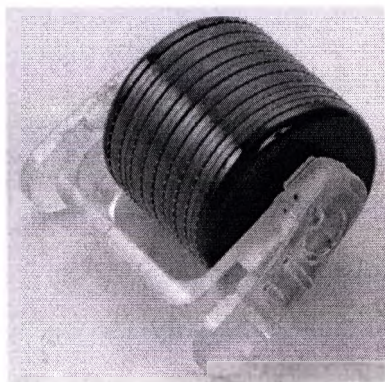

Артикул	Длина иглы (мм) $\pm 0,01$	Наименование элемента	(мм)
H025	0,25	B. Ширина роллера	41,5
H050	0,50	Отклонение от размеров не более 2 %	
H100	1,00		
H150	1,50		

1) Масса: не более 20гр.

11.7. Роллер для мезороллера Body Roller, одноразовый стерильный

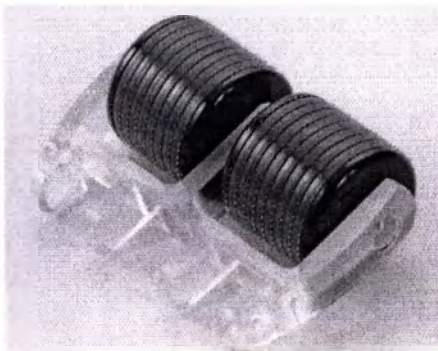

Артикул	Длина иглы (мм) $\pm 0,01$	Наименование элемента	(мм)
H025SBL	0,25	B. Ширина роллера	38,40
H050SBL	0,50	Отклонение от размеров не более 2 %	
H100SBL	1,00		
H150SBL	1,50		

2) Масса: не более 20гр.

Для периорбитальной области, принимая во внимание чувствительность и тонкую кожу, специалисты предпочитают использовать самые короткие иглы 0,25 мм, которых вполне достаточно для коррекции недостатков и возрастных изменений вокруг глаз. Как правило, для коррекции возрастных изменений кожи лица, шеи и декольте, используются иглы длиной от 0,5 до 1,5 мм, но, как правило, профессионалы предпочитают подбирать длину непосредственно.

12. Информация о материалах, видах контакта

Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность	Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности	Контакт с организмом	Вид стерилизации
Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями: - Мезороллер <i>MEDI</i> одноразовый	1. Роллер для мезороллера <i>MEDI</i> Цельнолитой диск с иглами толщиной 0,2 мм, длиной, мм: 0,25; 0,50; 1,00; 1,50 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304 Fe Balance Cr 10~28% Si 0~2% Cu 0~2% Mn 0~2% Ni 0~1% Ti 0~1% C 0~0.4% P 0~0.1% 2. Ручка: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2 3. Крышка защитная для роллера: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2	Изделие, кратковременно контактирующее с кожным покровом (неповреждённым) Мед. персонал работает в перчатках!	Метод стерилизации - радиационный. Изделие поставляется стерильным. 1) Источник излучения: Co-60 2) Доза: 25~40 КГр (килогрей) 3) Стерилизатор: GREENPIA TECH INC. 4) Уровень гарантированной стерильности: 10 ⁻⁶ 5) Метод проверки: метод 1 в соответствии с ISO 11137:2006

Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность	Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности	Контакт с организмом	Вид стерилизации
Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями: - Мезороллер-штемпель ST одноразовый	1. Роллер для мезороллера-штемпель ST Цельнолитой диск с иглами толщиной 0,2 мм, длиной, мм: 0,25; 0,50; 1,00; 1,50 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304 Fe Balance Cr 10~28% Si 0~2% Cu 0~2% Mn 0~2% Ni 0~1% Ti 0~1% C 0~0.4% P 0~0.1% 2. Ручка: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2 3. Крышка защитная для роллера: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2	Изделие, кратковременно контактирующее с кожным покровом (неповреждённым) Мед. персонал работает в перчатках!	Метод стерилизации - радиационный. Изделие поставляется стерильным. 1) Источник излучения: Co-60 2) Доза: 25~40 КГр (килогрей) 3) Стерилизатор: GREENPIA TECH INC. 4) Уровень гарантированной стерильности: 10⁻⁶ 5) Метод проверки: метод 1 в соответствии с ISO 11137:2006

Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность	Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности	Контакт с организмом	Вид стерилизации
Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями: - Мезороллер EYE одноразовый	1. Роллер для мезороллера EYE Цельнолитой диск с иглами толщиной 0,2 мм, длиной, мм: 0,25; 0,50; 1,00; 1,50 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304 Fe Balance Cr 10~28% Si 0~2% Cu 0~2% Mn 0~2% Ni 0~1% Ti 0~1% C 0~0.4% P 0~0.1% 2. Ручка: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2 3. Крышка защитная для роллера: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2	Изделие, кратковременно контактирующее с кожным покровом (неповреждённым) Мед. персонал работает в перчатках!	Метод стерилизации - радиационный. Изделие поставляется стерильным. 1) Источник излучения: Co-60 2) Доза: 25~40 КГр (килогрей) 3) Стерилизатор: GREENPIA TECH INC. 4) Уровень гарантированной стерильности: 10 ⁻⁶ 5) Метод проверки: метод 1 в соответствии с ISO 11137:2006

Полное наименование изделия: <i>конкретная позиция изделия или его принадлежность</i>	Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности	Контакт с организмом	Вид стерилизации
Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями: <i>- Мезороллер FB со сменным одноразовым стерильным роллером</i>	1. Роллер для мезороллера FB Цельнолитой диск с иглами толщиной 0,2 мм, длиной, мм: 0,25; 0,50; 1,00; 1,50 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304 Fe Balance Cr 10~28% Si 0~2% Cu 0~2% Mn 0~2% Ni 0~1% Ti 0~1% C 0~0.4% P 0~0.1% 2. Ручка: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2 3. Крышка защитная для роллера: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2	Изделие, кратковременно контактирующее с кожным покровом (неповреждённым) Мед. персонал работает в перчатках!	Метод стерилизации - радиационный. Изделие поставляется стерильным. 1) Источник излучения: Co-60 2) Доза: 25~40 КГр (килогрей) 3) Стерилизатор: GREENPIA TECH INC. 4) Уровень гарантированной стерильности: 10⁻⁶ 5) Метод проверки: метод 1 в соответствии с ISO 11137:2006

Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность	Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности	Контакт с организмом	Вид стерилизации
Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями: - Мезороллер Body Roller со сменным одноразовым стерильным роллером	1. Роллер для мезороллера Body Roller Цельнолитой диск с иглами толщиной 0,2 мм, длиной, мм: 0,25; 0,50; 1,00; 1,50 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304 Fe Balance Cr 10~28% Si 0~2% Cu 0~2% Mn 0~2% Ni 0~1% Ti 0~1% C 0~0.4% P 0~0.1% 2. Ручка: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2 3. Крышка защитная для роллера: Изготовлена из поликарбоната CAS № 103598-77-2	Изделие, кратковременно контактирующее с кожным покровом (неповреждённым) Мед. персонал работает в перчатках!	Метод стерилизации - радиационный. Изделие поставляется стерильным. 1) Источник излучения: Co-60 2) Доза: 25~40 КГр (килогрей) 3) Стерилизатор: GREENPIA TECH INC. 4) Уровень гарантированной стерильности: 10⁻⁶ 5) Метод проверки: метод 1 в соответствии с ISO 11137:2006

Полное наименование изделия: конкретная позиция изделия или его принадлежность	Материал конкретной позиции изделия или его принадлежности	Контакт с организмом	Вид стерилизации
Мезороллер марки «Genosys» стерильный для проведения процедур по микронидлингу в вариантах исполнения с принадлежностями: - Роллер для мезороллера FB, одноразовый стерильный; - Роллер для мезороллера Body Roller, одноразовый стерильный.	Цельнолитой диск с иглами толщиной 0,2 мм, длиной, мм: 0,25; 0,50; 1,00; 1,50 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки STS 304 Fe Balance Cr 10~28% Si 0~2% Cu 0~2% Mn 0~2% Ni 0~1% Ti 0~1% C 0~0.4% P 0~0.1%	Изделие, кратковременно контактирующее с кожным покровом (неповреждённым) Мед. персонал работает в перчатках!	Метод стерилизации - радиационный. Изделие поставляется стерильным. 1) Источник излучения: Co-60 2) Доза: 25~40 КГр (килогрей) 3) Стерилизатор: GREENPIA TECH INC. 4) Уровень гарантированной стерильности: 10 ⁻⁶ 5) Метод проверки: метод 1 в соответствии с ISO 11137:2006

13. Применение

13.1 Подготовка к использованию

- Проверьте продукт перед вскрытием упаковки.
- При наличии повреждений упаковки, проверьте, нет ли недостающих компонентов.
- Продукт является стерильным и предназначен для одноразового использования.

13.2 Процедура

Шаг 1. Подготовка

Тщательно обрабатывайте кожный покров соответствующим очищающим средством, адаптированным к типу кожи. Идеальным способом является очищение с помощью кислородного очистителя Genosys, который подготовит кожу и насытит ее кислородом.

* Совет. Для достижения оптимального эффекта, рекомендуется удалить загрязнения, макияж, мертвые клетки рогового слоя скрабом или с помощью ультразвука (скраббера) перед обработкой мезороллером марки «Genosys».

* Совет. В случае если мезороллер марки «Genosys» используется для лечения выпадения волос, сначала необходимо удалить омертвевшие клетки рогового слоя, используя «HR3 MATRIX SCALP PEELING» или скраб. Затем промойте волосы соответствующим очищающим продуктом. Убедитесь, что на волосистой части головы не осталось очищающего продукта. Эти шаги по подготовке имеют большое значение перед началом лечения для оптимизации проникновения активных ингредиентов и эффекты игл.

Шаг 2. Нанесение обезболивающего крема

Нанесите обезболивающий крем на область обработки и удалите его по прошествии 15-20 минут. Убедитесь, что остатков крема не осталось на коже. Важно прочитать инструкцию по применению в отношении обезболивающего крема.


Не наносите крема сразу под оба глаза, сначала обработайте одну зону, потом другую

Шаг 3. Применение активных ингредиентов

Примените мезороллер марки «Genosys» к обрабатываемой области. Многочисленные микро каналы, образовавшиеся под воздействием иголок, способствуют глубокому проникновению активных компонентов в кожу.

Шаг 4. Обработка мезороллером марки «Genosys»

Направление движения роллера

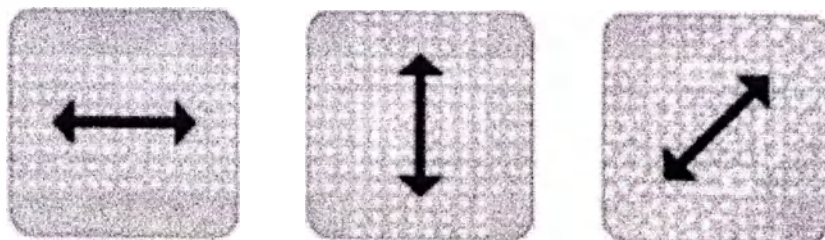

Выберите тип мезороллер марки «Genosys», который соответствует цели обработки. Аккуратно, не надавливая на роллер, начните движение в одном направлении по горизонтали слева направо, затем по вертикали сверху вниз и по диагонали, при этом постоянно прикладывайте одинаковое усилие, осторожно натягивая кожу свободной рукой, как показано на фотографии ниже. Не прикладывайте слишком больших усилий и избегайте обработки очень чувствительных участков, таких как контуры глаз и скулы.

Мезороллер марки «Genosys»



Подберите правильную длину мезороллера, которая соответствует цели обработки. Свободной рукой слегка натяните кожу. Другой рукой начните штамповать мезороллером в направлении по вертикали, но, поскольку его поверхность выпуклая, одно из ребер должно первым соприкоснуться с кожным покровом, а на остальную поверхность следует приложить усилие по направлению к противоположному ребру. Не прикладывайте слишком больших усилий и избегайте обработки очень чувствительных участков, таких как контуры глаз и скулы.

Общее время процедуры использования роллера не более 10 минут.

Шаг 5. Увлажнение и успокоение

Нанесите успокаивающую и увлажняющую маску для лица на обработанную и покрасневшую область.

Для устранения покраснения и успокаивающего действия на кожу, а также для усиления эффекта процедуры, рекомендуется использовать смягчающую успокаивающую пептидную гелевую маску PGM Genosys.

Шаг 6. Послеоперационная обработка

После обработки рекомендуется воспользоваться смягчающим успокаивающим посткремом. В период солнечной активности в течение первой недели после процедуры рекомендуется использовать Защитный крем от солнца. Также необходимо нанести увлажняющий, восстанавливающий и питательный продукт на обработанную область.

14. Продукты, которые рекомендуется использовать в сочетании с мезороллером марки «Genosys»:

- Продукты, стимулирующие кровообращение.
- Продукты, стимулирующие регенерацию клеток.
- Продукты, стимулирующие иммунную систему кожи.
- Продукты, содержащие необходимые питательные вещества для эпидермиса и дермы.

15. Предупреждения о продуктах, применения которых следует избегать с мезороллером марки «Genosys»

- Избегайте применения сосудосуживающих средств.
- Избегайте применения любых продуктов, которые могут привести к повреждению клеток или тканей.
- Старайтесь избегать употребления химических добавок, в том числе консервантов.
- Избегайте применения материалов, вызывающих аллергию.
- Старайтесь избегать применения парфюмерии и искусственных красителей.

16. Меры предосторожности

- Распакуйте продукцию только перед обработкой и убедитесь, что устройство не соприкасается с другими объектами (чтобы избежать инфицирования).
- Осмотрите кожу пациента перед обработкой. Продукция может спровоцировать побочные эффекты, если работает непрофессионал.
- Не используйте продукцию по истечении срока действия (может вызвать инфицирование).
- Продукт должен использоваться опытными врачами, которые способны оценить подходит ли лечение под физическое состояние кожи пациента. Они должны быть в состоянии принять решение об использовании обезболивающего крема и подобрать подходящий продукт для использования в сочетании с мезороллером марки «Genosys».
- Мезороллер марки «Genosys» продается исключительно для медицинского профессионального использования (продажа в открытом доступе запрещена). Мезороллер марки «Genosys» представляет собой устройство для одноразового использования, которое затем подлежит утилизации.
- Не прилагайте слишком больших усилий при использовании мезороллера марки «Genosys».
- Прилагайте минимальные усилия при движении вокруг губ и глаз, поскольку кожный покров в этих областях гораздо тоньше. Не используйте роллер для движения по глазным векам.
- Не используйте изделие на детях и животных.
- В случае высыпания, аллергических реакций или любого другого нежелательного явления следует немедленно прекратить использование продукта.
- Не забудьте проверить целостность упаковки, наличие повреждений или срок годности продукции перед использованием.

Не используйте мезороллер при наличии аллергии на металл.

Если у вас есть прогрессирующая угревая сыпь, используйте продукт только после консультации с врачом, поскольку существует риск распространения угрей.

17. Хранение и утилизация

- Храните изделие в хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Мезороллер марки «Genosys» представляет собой стерильное медицинское изделие одноразового использования.
- После применения мезороллер подлежит утилизации как бытовые отходы.

18. Маркировка

На упаковке нанесены следующие данные и указания:



19. Безопасность

Безопасность роллеров и космецевтики GENOSYS подтверждена многочисленными клиническими испытаниями и международными сертификатами ISO 13485, ISO 9001, CE: Directive 93/42/EEC, GMP

20. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует качество мезороллера в течение 3 лет с даты изготовления при условии соблюдения условий хранения, если он используется в соответствии с инструкцией по применению, при соблюдении целостности упаковки, без повреждений и соблюдения срока годности изделия перед использованием.

21. Производитель

«ДТС МГ Ко, ЛТД» (DTS MG Co., LTD), Корея
 #402, 14, Yeonmujang 17-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea.
 Tel/Fax. + 82-2-558-5480/+ 82-2-558-5482
 E-mail: info@dtsmg.com

22. Уполномоченный представитель производителя:

ООО «МИТРИДАТ», Россия,
 109125, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10. Тел: +7 (495) 502-54-97



DTS MG Co., Ltd.

www.dtsmg.com / www.genosys.info
Head office #402, 14, Yeonmujang
17-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea
Tel. 82-2-558-5480 Fax. 82-2-558-5482

Hanki

Перевод с английского языка на русский язык

Штамп: От имени «ДТС МГ Ко, ЛТД», Корея
Генеральный директор, Кису Хан

#402, 14, Yeonmujiang 17-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea
Tel/Fax. + 82-2-558-5480/+ 82-2-558-5482

Перевод выполнен дипломированным переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Город Москва.

Четвертого марта две тысячи шестнадцатого года.

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Фроловой Мариной Михайловной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 13-7219
Взыскано по тарифу: 300 руб., в том числе п.т.р. 200 руб.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 23 лист(-а, -ов).

ВРИО нотариуса

