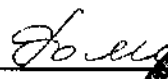


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ТОНУС ЭЛАСТ»


«»  2009г.
М.П. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Повязка медицинская эластичная с жесткой вставкой для фиксации
лучезапястного сустава**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязка предназначена для использования в качестве лечебно-профилактического средства для жесткой фиксации и стабилизации лучезапястного сустава, защиты и поддержания в состоянии покоя связочного (костного) аппарата и мягких тканей. Оказывает микромассажное и тепловое воздействие.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязка медицинская эластичная лучезапястная, с жесткой вставкой, модель *ELAST 0210*, изготавливается следующих типоразмеров:

Модель	Размер	Обхват лучезапястного сустава, см
<i>ELAST 0210</i>	1	12,0-15,0
	2	15,0-17,5
	3	17,5-20,0
	4	20,0-23,0

Повязка медицинская эластичная лучезапястная, с жесткой вставкой, модель *ELAST 0210*, линейные измерения должны соответствовать требованиям:

Наименование линейных измерений		Типоразмеры				Допустимые отклонения, см
		1	2	3	4	
A	Высота, см	17,0	17,5	18,0	18,5	$\pm 0,5$
B	Длина, см	15,0	17,5	20,0	23,0	$\pm 0,5$

На одном изделии не должно быть более двух дефектов:

- утонение или утолщение нити не более чем на толщину двухслойной нити, в общей сложности не более 2 см в длину.
- гофристость одного края по отношению к другому, длиной не более 2-х см.

Эксплуатационные характеристики.

- Изменение линейных измерений изделий после первой стирки (усадка) должно быть не более 20 % их линейных измерений до стирки.
- Значения остаточной деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10 %.
- Значение разрывной нагрузки, растяжимости, рабочей растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных ГОСТ Р 51219-98.
- Значение разрывного удлинения изделий должно быть не менее значения растяжимости.
- Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки должно быть не более 20 % их разрывного удлинения до стирки.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья изделия, выраженные местные заболевания кожи.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Повязку положить на горизонтальную поверхность в развернутом виде. Затем положить на поверхность повязки руку и зафиксировать ее с помощью застежек-«липучек».

Изделия обрабатывают в мыльном растворе при температуре + 30°C - 40°C, предварительно вынув металлические пластины. Рекомендовано аккуратное отжимание без

выкручивания, сушка вдали от обогревательных приборов. Не применять чистку с химическими препаратами и машинную стирку. Не подвергать глажению.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +3 до +25 °С, в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей (в защищенном от света месте). Влажность (60-65)%.

Сшито и заверено печатью 3
(М/с) лист 12
О.В. Романова
