

Генеральный директор
ООО «ТОНУС ЭЛАСТ»

Романова О.В.

«*10*» *августа* 200 *8* г.



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**«Трусы медицинские эластичные ELAST
послеродовые»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Романова

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Трусы медицинские эластичные дородовые
Модели ELAST 9902 «Nera», 9902** «Nera Lux»,
0111 «Donna», 0113 «Eva», 0500 «Marta»*

Назначение

Трусы дородовые предназначены для женщин в период беременности — они поддерживают живот и предохраняют кожу от растяжек.

Медицинские показания

При лечении различных заболеваний: для предохранения от преждевременного (патологического) опускания живота, для уменьшения нагрузки на органы малого таза и нижней части спины.

В до и послеоперационный периоды: для скорейшей реабилитации после травм и операций в брюшной полости.

В профилактических целях: для предотвращения возможности растягивания и разрывов кожи живота; для обеспечения максимального комфорта в период беременности, не ограничивая развитие плода.

Состав сырья

Хлопок — 90%, полиамид — 10%

Хлопок — 48%, полиамид — 40%, лайкра — 12% (модель ELAST 9902** «Nera Lux»)

Методика применения

Трусы дородовые одевают утром на весь день, снимают в течение дня на время проведения процедур, и полностью снимают на ночь. Подбирать размер необходимо непосредственно по окружности бедер под животом согласно шкале, указанной на упаковке. При ношении изделие должно плотно прилегать к телу и не сковывать движений. Малейшие признаки неудобства являются показателем того, что был неверно подобран размер. Если последующая носка изделия все же вызывает дискомфорт, необходимо проконсультироваться у лечащего врача. Трусы рекомендуется надевать непосредственно на тело. Удобно надетое изделие поддерживает живот, предотвращает усталость в спине. Вставка на животе в модели ELAST 9902** «Nera Lux» изготовлена из микрофибры — ткани нового поколения. Она обладает всеми достоинствами натурального хлопка: очень тонкая, мягкая и прочная ткань, превосходно сохраняет тепло, не задерживает влагу, обеспечивает свободный доступ воздуха к коже. Декоративная деталь в модели ELAST 0500 не только украшает изделие, но и принимает на себя вертикальную нагрузку и тем самым дополнительно разгружает позвоночник. Трусы дородовые обеспечивают нормальное развитие беременности, создают у женщины чувство комфорта при постоянном ношении. Трусы медицинские эластичные дородовые удобны при каждодневной носке, легки и не заметны под одеждой. Все изделия легко стираются, быстро сохнут, их не надо гладить.

Срок годности изделия указан на упаковке.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

Санитарно-гигиеническая обработка

Трусы медицинские эластичные дородовые следует обрабатывать ручной стиркой в мыльном растворе при температуре от +35°C до +40°C и не использовать отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Запрещены отжим и сушка в стиральной машине. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде. Разрешено гладить при максимальной температуре 110°C.

Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре.

Упаковка: 1 штука.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу производителя.

Производитель

ООО «ТОНУС ЭЛАСТ»

«Пилскални», Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия

Тел.: +371 34 31547, факс: +371 34 31280

E-mail: info@tonus.lv, <http://www.tonus.lv>