


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ТОНУС ЭЛАСТ»


«27» _____ 2009 г.
М.П. _____

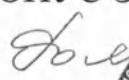

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка поддерживающая медицинская для фиксации руки

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязка предназначена для надежной и удобной фиксации в период реабилитации после переломов, растяжений и хирургического вмешательства

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязка поддерживающая медицинская для фиксации руки, модель *ELAST 0110*, изготавливается следующих типоразмеров:

Модель	Типоразмер	Длина предплечья от латерального надмыщелка плечевой кости до III пястно-фалангового сустава, см
<i>ELAST 0110</i>	1	26-32
	2	30-38
	3	36-44
	4	42-50

Повязка поддерживающая медицинская для фиксации руки, модель *ELAST 0110*, линейные измерения должны соответствовать требованиям:

Наименование линейных измерений, см		Типоразмеры				Допустимые отклонения, см
		1	2	3	4	
A	Длина нижнего среза основной детали	45,0	52,5	60,0	67,5	$\pm 1,0$
B	Высота основной детали	12,5	14,5	16,5	18,5	$\pm 1,0$
C	Длина готового ремня	73,0	83,0	93,0	103,0	$\pm 2,0$
D	Длина вспомогательных ремневых лент	4,0	4,0	4,0	4,0	$\pm 1,0$

Повязка изготавливается согласно таблице:

Повязка поддерживающая медицинская для фиксации руки, модель <i>ELAST 0110</i>	Полиамид
---	----------

На одном изделии не должно быть более двух дефектов:

- утонение или утолщение нити не более чем на толщину двухслойной нити, в общей сложности не более 2 см в длину.
- гофристость одного края по отношению к другому, длиной не более 2-х см.

Эксплуатационные характеристики.

- Изменение линейных измерений изделий после первой стирки (усадка) должно быть не более 20 % их линейных измерений до стирки.
- Значения остаточной деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10 %.
- Значение разрывной нагрузки, растяжимости, рабочей растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных ГОСТ Р 51219-98.
- Значение разрывного удлинения изделий должно быть не менее значения растяжимости.
- Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки должно быть не более 20 % их разрывного удлинения до стирки.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка надевается непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье. Специальные застежки-регуляторы позволяют подобрать максимально удобную длину плечевой ленты и закрепить повязку в нужном положении. Зона ремешка на плече снабжена подвижным мягким валиком. Если иное не рекомендовано врачом, то повязку рекомендовано носить 21 день, снимая ее на ночь. При длительном сроке ношения следует обратить внимание на цвет кончиков пальцев. При малейших признаках нарушения их кровообращения и в случае резкого изменения их цвета необходимо обратиться к лечащему врачу. Во время использования повязки с рекомендации лечащего врача желательно выполнять упражнения для скорейшего восстановления двигательных функций сустава

Индивидуальная непереносимость компонентов сырья изделия, выраженные контрактуры локтевого сустава.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Изделия обрабатывают в мыльном растворе при температуре + 30°C - 40°C. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания, сушка вдали от обогревательных приборов. Не применять чистку с химическими препаратами и машинную стирку. Не подвергать глажению.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +3 до +25°C, в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей (в защищенном от света месте). Влажность (60-65)%.

Сшито и заверено печатью

О.В. Романова

