

УТВЕРЖДЕНО

Технолог швейного производства
Ж. Балычева

В. Дюндик

Брач

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРУСЫ и ПОЯСА ПОСЛЕРОДОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ
Модели Elast 9906 «Lilit», Elast 0104 «Agata», Elast 9907 «Sabina»,
Elast 0103 «Jana», Elast 0106 «Rita», Elast 9908 «Beata», Elast 9905
«Evelina»

Назначение

Трусы и пояса послеродовые медицинские эластичные Модели Elast 9906 «Lilit», Elast 0104 «Agata», Elast 9907 «Sabina», Elast 0103 «Jana», Elast 0106 «Rita», Elast 9908 «Beata», Elast 9905 «Evelina» предназначены женщинам для поддержания брюшного пресса после родов, а также в реабилитационный период после различного рода травм и операций.

Медицинские показания

При лечении различных заболеваний: для восстановления тонуса мышц брюшной стенки живота после родов; для фиксации поясничной области.

В до и послеоперационный периоды: для скорейшей реабилитации после травм и операций в брюшной полости.

В профилактических целях: для предотвращения возможности растягивания кожи и отвисания живота, профилактики, сохранения и скорейшего восстановления физиологически нормальной формы после родов.

Состав сырья, %:

полиамид - 84, эластан - 16;

полиамид - 75, эластан - 25

(Elast 9908 «Beata»);

полиэстер - 44,5, хлопок - 30, латекс - 25,5

(Elast 9906 «Evelina»).

Методика применения

Трусы и пояса послеродовые медицинские эластичные предназначены для ношения после родов для восстановления тонуса брюшных мышц, а также после «Кесарева» сечения для поддержки нижней части брюшной стенки. Рекомендуется одевать лежа. Подбирать размер необходимо непосредственно по окружности бедер и талии согласно шкале, указанной на упаковке. При ношении изделие должно плотно прилегать к телу и не сковывать движений. Малейшие признаки неудобства являются показателем того, что был неверно подобран размер. Если последующая носка изделия все же вызывает дискомфорт, необходимо проконсультироваться у лечащего врача. Пояс Elast 9905 «Evelina» оборачивается вокруг талии и фиксируется в районе брюшной полости контактной лентой с застежкой «вилькро». Модели Elast 9907 «Sabina», Elast 0106 «Rita» дополнительно снабжены для удобства застежкой «молния», которая публикуется ленточными крючками во избежание преждевременной поломки и значительно облегчает надевание бандажа. Модель Elast 0104 «Agata» отличается наличием эластичных фиксаторов вшитых по бокам изделия с застежкой «вилькро», которые дают возможность регулировать

степень утяжки фигуры индивидуально. Удобная нижняя застежка на крючках в моделях Elast 9907 «Sabina» и Elast 0104 «Agata» позволяет при необходимости не снимать бандаж. Благодаря перераспределенному давлению на проблемные зоны в модели Elast 9908 «Beata» происходит утяжка живота, округление зоны ягодиц и формирование красивой линии бедра. Оказывают микромассажное воздействие на кожу, что при использовании мягко стимулирует кровообращение тканей. Трусы медицинские эластичные незаметны под одеждой - хорошо облегают фигуру, создавая эффект «второй кожи». В изделии присутствует хлопчатобумажная ластовица, что позволяет сохранять гигиеничность белья. Изделия изготовленные из эластичного полотна - полиамида, не вызывающего потливости и раздражения кожи. Все изделия легко стираются, быстро сохнут, их не надо гладить.

Срок годности изделия указан на упаковке.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделий, выраженные местные заболевания кожи.

Санитарно-гигиеническая обработка

Трусы и пояса послеродовые медицинские эластичные обрабатывают ручной стиркой в мыльном растворе при температуре от - 35 до +40°C. Не применять чистку с химическими препаратами. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде. Разрешено гладить при максимальной температуре 110°C. Модель 9908 «Beata» - глажение запрещено.



Хранение В сухом помещении, при комнатной температуре.

Упаковка 1 штука.

Трусы и пояса послеродовые медицинские эластичные прошли клинические испытания, и зарегистрированы на территории Балтии, России, в странах СНГ, регионах Средней Азии и в странах Западной Европы.

Производитель

SIA "Tonus Elast"	„Pilskalni", Pērkone, Liepāja, LV-3416, Latvija
ООО «Тонус Эласт»	«Пилскални», Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия

Качество изделий "TONUS ELAST" подтверждено международным сертификатом качества СЕ.

"TONUS ELAST" сертифицирован по международному стандарту ISO 9001.


Справка

Пояс послеродовой медицинский эластичный Elast 9905 "Evelina".

Пояс послеродовой Elast 9905 "Evelina" предназначены женщинам для поддержания брюшного пресса после родов, а также в реабилитационный период после различного рода травм и операций, как и для коррекции фигуры. Обеспечивают максимальный комфорт и возможность вести активный образ жизни при повседневном ношении.

Модель Elast 9905 "Evelina" - с хлопковой вставкой в области живота; степень натяжения пояса регулируется застежкой «вилькро». Высота изделия - 30 см.

Технолог швейного
Производства

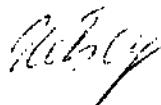

Балычева Ж.