

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ТД Тонус Эласт»

 О.В. Романова
« 14 » _____ 2010г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Медицинские фиксирующие изделия: бинты эластичные голеностопные
ELAST, пояса при травмах ребер ELAST, пояса послеоперационные
ELAST**

ПОЯС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ

Модели *ELAST 9901, 9901 Comfort*

Назначение

Пояс послеоперационный предназначен для поддержания мышц брюшного пресса после операций, при грыжах, опущениях почек, а также – женщинам после родов.

Медицинские показания:

При лечении различных заболеваний: травмы и повреждения мышц брюшного пресса, грыжи белой линии живота, грыжи послеоперационные, опущение органов брюшной полости и почек, атония мышц брюшной полости.

В до и послеоперационный периоды: для сокращения сроков реабилитации после полостных и иных операций, после родов.

В профилактических целях: подчеркивает достоинства фигуры, препятствует образованию послеоперационных грыж.

Состав сырья:

Полиэстер – 45%, хлопок – 28%, латекс – 27% *(ELAST 9901);*

Полиэстер – 66%, латекс – 34% *(ELAST 9901 Comfort).*

Методика применения

Пояс может использоваться как в условиях стационара, поликлиники, так и на дому. Подбирать размер необходимо по окружности талии, согласно шкале, указанной на упаковке. Носят пояс, надевая непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье. Благодаря застежке *velcro* пояс можно самостоятельно регулировать, учитывая особенности фигуры. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности. Пояс должен плотно прилегать к телу и в таком положении его необходимо зафиксировать с помощью застежки *velcro*. При ношении пояс вызывает легкое ощущение подтянутости в области живота. Следует обратить внимание на хорошее кровоснабжение мягких тканей. Время использования пояса от 2 до 24 часов в сутки в зависимости рекомендаций лечащего врача.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия, выраженные местные заболевания кожи.

Санитарно-гигиеническая обработка

Пояс послеоперационный следует обрабатывать ручной стиркой в мыльном растворе при температуре от +35°C до +40°C без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания и сушка в расправленном виде. Запрещено глажение.

Правила хранения: Изделия хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от +3°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60-65%.

Срок годности – 5 лет.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу производителя:

Производитель

TONUS ELAST «Пилскални», Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЯС МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРИ ТРАВМАХ РЕБЕР
Модель ELAST 9902**

Назначение:

Пояс предназначен для эластичной фиксации грудной клетки, поддержания внутренних органов в до- и послеоперационный периоды, а также для снижения болевого синдрома.

Медицинские показания

При лечении различных заболеваний: закрытых травмах грудной клетки, переломах или ушибах ребер.

В до- и послеоперационный периоды: для сокращения сроков реабилитации после операций на грудной клетке.

В профилактических целях: для снижения болевого синдрома и увеличения экскурсии грудной клетки, для профилактики эмфиземы, пневмосклероза и различных патологий грудной клетки.

Состав сырья:

Полиэстер – 55%, латекс – 45%.

Методика применения:

Поясом, предназначенным для пользования при травмах ребер, можно пользоваться в стационарах, в процессе амбулаторного лечения и в домашних условиях. Подбирать размер необходимо по окружности груди на уровне ее середины, согласно шкале, указанной на упаковке. Носят пояс, надевая на хлопчатобумажное белье. Изделие дополнительно снабжено застежкой *velcro*, позволяющей индивидуально подобрать силу компрессии пояса. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине, на ровной жесткой или полужесткой поверхности. На полном выдохе необходимо затянуть пояс до плотного прилегания к телу и зафиксировать в таком положении с помощью застежки *velcro*. При ношении пояс вызывает ощущение легкого сдавливания и защиты. Время использования пояса – от двух до 24 часов в сутки, в зависимости от рекомендаций врача и состояния здоровья пациента. Рекомендовано следить за хорошим кровоснабжением мягких тканей. Если использование пояса вызывает дискомфорт или боль, следует проконсультироваться у врача-специалиста.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия, выраженные местные заболевания кожи, открытые травмы ребер.

Санитарно-гигиеническая обработка:

Пояс следует стирать руками, в мыльном растворе, при температуре от +35°C до +40°C, без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания и сушка в расправленном виде. Запрещено глажение.

Правила хранения: Изделия хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от +3°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60-65%.

Срок годности – 5 лет.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу производителя.

Производитель

TONUS ELAST «Пилскални», Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ

Модели ELAST 9610, 0005

Назначение:

Бинт предназначен для лечения и профилактики травм, вывихов, растяжений, отеков, а также для защиты и эластичной фиксации голеностопного сустава.

Медицинские показания

При лечении различных заболеваний: межмышечных гематом, частичных повреждений мышц, связок, сухожилий, а также при заболеваниях с трофическими осложнениями, при послефлебитных синдромах и излечимых лимфоотеках.

В до- и послеоперационный периоды: для скорейшей реабилитации после травм и операций, для предотвращения отечности и уменьшения воспалительного процесса, для улучшения кровообращения в нижних конечностях.

В профилактических целях: для защиты и поддержки связочного аппарата голеностопного сустава, для профилактики от перегрузки и переутомления при длительных физических нагрузках, во время занятий физическими упражнениями и спортом.

Состав сырья:

Хлопок – 63%, латекс – 25%, полиэстер – 12% (ELAST 9610).

Полиэстер – 45%, нейлон – 35%, латекс – 20% (ELAST 0005).

Методика применения:

Голеностопный бинт модели ELAST 9610 является готовой повязкой для фиксации сустава. Бинт надевают непосредственно на тело или надетый предварительно хлопчатобумажный чулок. В течение первых несколько минут возможны ощущения легкой компрессии. При правильном подборе размера бинта кончики пальцев ноги в состоянии покоя слегка синеют, а после начала движений их цвет нормализуется. Если использование изделия все же вызывает дискомфорт, то необходимо снять бинт, помассировать икроножную мышцу, зону пятки, стопы и ахиллова сухожилия. Если ощущение тяжести не проходит, необходима дополнительная консультация врача. Голеностопный бинт модели ELAST 0005 – ленточная повязка с застежкой *velcro*. Использование данной модели позволяет пациенту самостоятельно отрегулировать степень компрессии.

Техника бинтования изделия.

Способ 1: бинт накладывают на стопу при ее тыльном сгибании, предупреждая образование складок, травмирующих кожу во время ходьбы. Потом обматывают круг, делают оборот по диагонали вокруг сустава, ахиллова сухожилия и закрепляют застежкой *velcro* в наиболее удобном месте.

Способ 2: бинт накладывают на стопу в положении легкого упора, затем накладывают на голень, обматывая полный круг «восьмеркой», потом обматывают стопу и закрепляют бинт застежкой. Применение бинта возможно также для фиксации других суставов.

После первого наложения эластичного голеностопного бинта модели ELAST 9610 или модели ELAST 0005 пациенту рекомендуется тренировочная ходьба в течение 20–30 минут.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

Санитарно-гигиеническая обработка:

Голеностопный бинт следует стирать руками, в мыльном растворе, в воде, температура которой приблизительно от +35°C до +40°C, без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Бинт рекомендуется аккуратно отжать без выкручивания и сушить в расправленном виде. Запрещено глажение.

Правила хранения: Изделия хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от +3°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60–65%.

Срок годности изделия – 5 лет.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу производителя.

Производитель

TONUS ELAST, «Пилскални», Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия