

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИКСАТОР-ОРТОЗ МЕДИЦИНСКИЙ для шейного отдела позвоночника Модели TONUS 0411, 0406, 0406-01, 0406-02

Назначение

Фиксаторы-ортозы для шейного отдела позвоночника используются как средства для фиксации шейного отдела позвоночника в период лечения и реабилитации после травм и ушибов, а также рекомендуются для удержания головы в заданном положении.

Медицинские показания

При лечении различных заболеваний: травмы шейного отдела позвоночника (повреждение межпозвоночных суставов, межпозвоночных дисков, мышц, связок и позвонков). При дорсопатии (радикулопатии и миалгии), атонии мышц шейного отдела позвоночника, при остеохондрозе, остеоартрозе шейного отдела позвоночника, хлыстовых травм шеи при автомобильных авариях. Фиксатор рекомендован также для оказания первой медицинской помощи, как иммобилизирующее средство.

В до и после операционный период: для сокращения сроков реабилитации после дискэктомии, операциях шейного отдела позвоночника и нижней челюсти, с наложением трахеостомы.

В профилактических целях: для защиты мышц шеи от перенапряжения, для стабилизации шейного отдела позвоночника.

Методика применения

Фиксаторы-ортозы для шейного отдела позвоночника могут использоваться как в условиях стационара, поликлиники, так и на дому. Модель 0411 – воротник типа «Шанца» обеспечивает мягкую фиксацию шеи. Фиксатор-ортоз рекомендуется при лечении различных заболеваний шейного отдела позвоночника и головы: умеренных нарушениях функций мышц и связочного аппарата шейного отдела позвоночника; остеохондрозе, спондилоартрозе; легкой нестабильности шейного отдела позвоночника; мышечном дисбалансе «кривошеи» у детей и подростков; миалгиях (миозитах) мышц шеи; невралгиях и неврологических болях различной этиологии в области шеи. Рекомендуется также на этапе укрепления мышечного корсета после снятия длительной, жесткой иммобилизации при травмах шейного отдела позвоночника. Изделие устанавливается на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком, затем охватывают ортозом шею и застегивают его сзади застежкой «вилкром», отрегулировав длину по объему шеи. В комплекте имеется дополнительный хлопчатобумажный чехол, улучшающий гигиеническую эксплуатацию изделия. Размер подбирается по высоте шеи, согласно шкале, указанной на упаковке.

Модель 0406 обеспечивает жесткую иммобилизацию шейного отдела позвоночника. Фиксатор-ортоз рекомендуется для поддержания шейного отдела позвоночника после травм и ушибов, при грыжах межпозвоночных дисков и операций в области шейного отдела позвоночника, а также для удержания головы в заданном положении. Натуральный состав в данной модели облегчает пациентам более длительное и комфортное использование. Изделие состоит из двух деталей – подчелюстной и затылочной. Надевать изделие рекомендуется в положении лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности: фиксатор утягивается до плотного прилегания к шее и фиксируется в таком положении с помощью застежки «вилкром». При ношении Фиксатор вызывает легкое ощущение стабильности и защищенности в области шеи. Размер подбирается по объему шеи, согласно шкале, указанной на упаковке. Модель 0406-01 обеспечивает жесткую иммобилизацию шейного отдела позвоночника. Имеет отверстие для трахеостомы. Отверстие в передней части изделия позволяет проводить трахеотомические процедуры, облегчает гигиенический уход за трахеостомой. Методика наделения аналогична модели 0406. Наличие отверстия для вентиляции и открытая конструкция позволяют сохранять шею сухой и прохладной. Отформованная зона подбородка поверхности ортоза обеспечивает дополнительную фиксацию. Размер подбирается по объему шеи, согласно шкале, указанной на упаковке.

Модель 0406-02 обеспечивает жесткую иммобилизацию шейного отдела позвоночника. Регулируемый. Имеет три вертикальные застежки «вилкром», с помощью которых можно последовательно регулировать ширину ортоза, обеспечивая постепенное вытяжение шейного отдела позвоночника. Фиксатор состоит из двух деталей – верхней и нижней, которые соединены между собой застежкой «вилкром». Перед надеванием необходимо разъединить детали, подобрать необходимую высоту изделия и затем соединить при помощи застежки «вилкром». Размер подбирается по объему шеи, согласно шкале, указанной на упаковке. После наделения ортозов следует обратить внимание на хорошее кровоснабжение мягких тканей шеи и свободное дыхание. Время ношения составляет от 2 до 24 часов в сутки в зависимости от рекомендаций лечащего врача и от состояния здоровья пациента. Время использования – до трех месяцев.

Состав сырья

Модель 0411: пенополиуретан – 90%, хлопок – 10%

Модель 0406: натуральная пробка – 100%

Модель 0406-02: полиэтилен – 43,3%, ламинированный винил – 32%, полиамид – 9,2%, этилен – 8,3%, полиэстер – 7,2%

Модель 0406-01: этилен – 61%, полипропилен – 29%, полиамид – 10%

Срок годности изделия указан на упаковке.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия, выраженные местные заболевания кожи.

Санитарно-гигиеническая обработка

Модель 0411 следует обрабатывать ручной стиркой в мыльном растворе при температуре от +35°C до +40°C без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами; ручной отжим и сушка в расправленном виде при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов до эксплуатационного состояния.

Модели 0406, 0406-01, 0406-02 следует обрабатывать в мыльном растворе при температуре от +35°C до +40°C без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами.

Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре.

Упаковка: 1 штука.

Производитель

ООО «ТОНУС ЭЛАСТ»

«Пилскални», Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия
Тел.: +371 34 31547, факс: +371 34 31280
E-mail: info@tonus.lv, <http://www.tonus.lv>

Импортёр в РФ

ООО «ПАРАСОН ТРЕЙД КОМПАНИ»

109548 РФ, г. Москва, ул. Гриворонская, д. 9, стр. 7