

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «ТОНУС ЭЛАСТ»



 О.В. Романова

2009г.

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

***Бюстгальтер* лечебно-реабилитационный медицинский эластичный
"ELAST"**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
3. СОСТАВ СЫРЬЯ
4. МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
8. СРОК ГОДНОСТИ

Назначение

Бюстгальтер предназначен женщинам в реабилитационный период после операций на молочной железе и для совместного применения с протезом молочной железы. Рекомендован в период кормления для предупреждения и уменьшения воспалительных процессов в молочных железах, а также для профилактики лактостаза. Может использоваться для фиксации лекарственных препаратов.

Медицинские показания

При лечении различных заболеваний: лактостаза, мастита, мастоэктомии, в том числе секторальной резекции, маммопластики.

В послеоперационный период: для эффективного решения задач реабилитации после операций и травм, фиксации лекарственных препаратов по рекомендации врача, а также протезов молочной железы. Использование бюстгальтера рекомендуется в раннем послеоперационном периоде с целью фиксации молочной железы и улучшения заживления операционных швов.


В профилактических целях: для предупреждения и уменьшения воспалительных процессов в молочных железах, профилактики лактостаза, для предупреждения перенапряжения групп мышц плечевого пояса и позвоночника, а также для предупреждения заболеваний позвоночника, связанных с перераспределением нагрузки, для восстановления симметрии фигуры, приобретения комфорта и уверенности.

Состав сырья:

хлопок – 80%, полиамид – 10%, эластан – 10%.

Методика применения

Бюстгальтер рекомендуется надевать утром на весь день, снимать в течение дня на время проведения процедур и полностью снимать на ночь. Подбирать размер необходимо непосредственно по окружности под грудью согласно шкале, указанной на упаковке. При ношении изделие должно плотно прилегать к телу и не сковывать движений. Малейшие признаки неудобства являются показателем того, что был неверно подобран размер. Если последующее использование изделия другого размера все же вызывает дискомфорт, необходимо проконсультироваться у лечащего врача. Изящная высокая линия декольте позволяет удобно фиксировать лекарственные препараты, скрыть следы оперативного вмешательства. Верхние детали чашечек выполнены из эластичных кружев с высоким содержанием хлопка: очень тонкий, мягкий, прочный материал превосходно сохраняет тепло, не задерживает влагу, обеспечивает свободный доступ воздуха к коже. Бюстгальтер выполнен из эластичного полотна. Тщательная обработка швов обеспечивает надежность и свободу движения. В обеих чашечках закреплены удобные хлопковые карманы для фиксирования лекарственных препаратов и протеза молочной железы. В зависимости от необходимости женщина может оставить для использования либо оба, либо один карман.

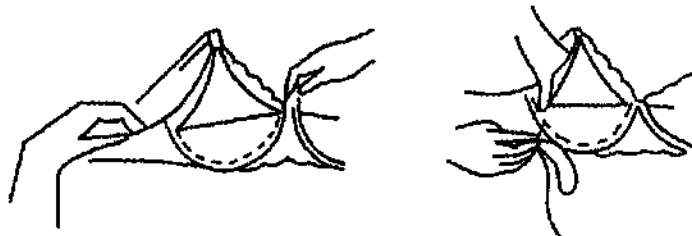

Комфортные бретели выполнены из эластичных кружев и дублированы тонким трикотажным полотном. Они не врезаются в тело и снабжены специальными регуляторами, благодаря которым каждая женщина может индивидуально изменить высоту бюстгальтера. Широкая эластичная спинка и легко регулируемые бретели обеспечивают максимальное удобство при ношении. Объем бюстгальтера регулируется многоуровневой застежкой на спине. Изделия имеют чашечку хорошей формы, поддерживающую грудь по всему периметру и полностью повторяющую контуры фигуры. Лечебно-реабилитационный бюстгальтер удобен при каждодневной носке, легок и незаметен под одеждой. Изделие легко стирается, быстро сохнет. При покупке бюстгальтера обратите внимание на то, чтобы он облегал тело плотно и мягко для того, чтобы Вы ощущали его поддерживающее и фиксирующее действие.

Срок годности – 5 лет.

Противопоказания: индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

Санитарно-гигиеническая обработка

Бюстгальтер следует стирать руками, в мыльном растворе, при температуре от +35°C до +40°C, без использования средств, содержащих отбеливатели. Не применять чистку с химическими препаратами. Запрещены отжим и сушка в стиральной машине. Рекомендовано аккуратное отжимание без выкручивания, сушка в расправленном виде. Разрешено гладить при максимальной температуре 110°C.

Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре.

Упаковка: 1 штука.

Ваши замечания и предложения направляйте по адресу производителя.

Производитель

TONUS ELAST "Пилскални", Перконе, Лиепая, LV-3416, Латвия

Спито и заверено печатью 2
(200) лист а

Романова О.В.

