

Инструкция по эксплуатации (применению) медицинских изделий.

1. Корректоры осанки:

Модель 0004 – эластичный корректор – полуграция. Идеально облегает и утягивает фигуру, формируя элегантный силуэт. Двойной слой плотного высокоэластичного материала, жесткие «косточки» - вставки и крестообразные поддерживающие ленты на спине создают безупречную осанку. Благодаря особому крою сохраняются комфорт и свобода движения. Полуграция застегивается на крючки, скрытые в планке на передней части изделия. Ограничений в носке нет. Возможна эксплуатация, как нижнего белья.

Модель 0108 – эластичный корректор осанки со съемными металлическими пластинами разгружают среднегрудной, нижнегрудной и верхнепоясничный отдел позвоночника.

Модель 0109 - эластичный корректор осанки со съемными металлическими пластинами разгружают нижнегрудной и поясничный отдел позвоночника. Обе модели обеспечивают надежную жесткую фиксацию. Способствуют восстановлению мышечного корсета, снимают нагрузку с позвонков, устраняют дефекты осанки. Рекомендуются для ношения при начальных формах кифоза, сколиоза; при остеохондрозе; в послеоперационный период. Корректоры плотно облегают тело, не стесняют свободу движения. Специальная застежки «вилькро», расположенные под грудью, позволяют регулировать натяжение. Две мягкие регулируемые прокладки с отделкой из хлопка фиксируются на ремешках корсета в любом удобном для Вас месте.

Модель 0303 – эластичный корректор осанки (с двумя застежками «вилькро»). Предназначен для формирования и исправления осанки, профилактики и лечения остеохондроза, остеомиелита. Выработывает и закрепляет навык правильной осанки, снимает нагрузку с верхнегрудного отдела позвоночника, распрямляет плечи. Застежки «вилькро» расположенные под грудью и на спине позволяют регулировать натяжение. Корректор плотно прилегает к телу, не стесняя свободу движений.

Модель 0107 – эластичный корректор осанки (крестообразный, без застежки). Облегченная модель для детей и подростков. Рекомендуются для формирования и исправления осанки при первых признаках сутулости. Мягко фиксирует верхнюю часть позвоночника, распрямляет плечи. Плотно прилегает к телу, не стесняя свободу движений. Выработывает и закрепляет навык правильной осанки.

Применение корректоров осанки (модели 0108; 0109; 0303; 0107)

Эластичный корректор осанки – прекрасный помощник на каждый день. Корректор – это легкая и удобная система эластичных готовых ремешков, одеваемая на тонкое хлопчатобумажное белье или непосредственно на тело. Современный корректор не причиняет неудобств и совершенно незаметен под одеждой. Лечебное действие корректора TONUS ELAST обусловлено эффектом «запоминания» правильного положения позвоночника. Спустя 2-3 месяца регулярного ношения изделия начинает вырабатываться стереотип правильной осанки.

2. Бюстгалтеры до и после родовые:

Модели 0011; 0302; 0010 – Бюстгальтер для кормящих матерей с «чашечками» из чистого хлопка; С эластичной внутренней вкладкой для специальной поддержки груди и защиты кожи от растяжек. Модель 0010 с мягкой кружевной вставкой, модель 0011 – без кружевной отделки, 0302 – с фактурной отделкой.

Модель 0301 – бюстгальтер для беременных из высококачественного хлопка на широких лямках.

3. Пояса для беременных женщин:

Модель 0009 – укрепленный пояс – бандаж на застежках – «вилькро», необходимый на последних месяцах беременности; высокая спинка обеспечит комфорт поясничного отдела при больших нагрузках; мягкий ремень – подушка поддерживает живот снизу. Удобнее всего одевать бандаж лежа на спине, с небольшим преподнятием

Модель 0008 – широкий облегающий пояс – бандаж; трикотажная хлопковая ткань облегает живот, мягко адаптируясь с его увеличением, прочный эластичный пояс поддерживает живот снизу; застежка «вилькро» фиксируется на поясице.

4. Трусы до и после родовые:

Модель 0111 – низкие трусики из чистого хлопка для ранних сроков беременности.

Модель 0113 – высокие трусики из чистого хлопка для поздних сроков беременности; хорошо облегает растущий живот.

Модель 0104 – утягивающие трусики с укрепленной зоной в передней части живота; степень утяжки регулируется широкими лентами – захватами на «липучке» по бокам фигуры; застежка в нижней части трусиков позволяет расстегнуть их, не снимая; высота изделия – до талии.

Модель 0106 – с молнией. Элегантные, утягивающие штанишки с боковой застежкой, особый крой с укрепленными зонами в передней части живота и на внешней стороне бедер; кружевные отделки. (**Модель 0103** – без молнии)

4. Изделия из неопрена:

Модель 0003 – неопреновые шорты

Благодаря тепловому и микромассажному воздействию, фиксации и умеренной компрессии, стимулируются обменные процессы. При занятии физическими упражнениями – способствуют похудению в области бедер, ягодиц и живота. Эффективное средство в профилактике и лечении целлюлита. Максимальный эффект достигается во время движений, при занятии спортом и гимнастики.

Модель 9909 – пояс из неопрена

Ношение пояса перераспределяет нагрузку на позвоночник, уменьшает боли в нижней части спины, ногах и общее чувство тяжести. Пояса моделируют физиологический изгиб позвоночника, сохраняя комфорт движений. Застежкой «вилькро» можно регулировать степень утяжки и дозированно распределять необходимую фиксацию.

Модель 0001 – неопреновая повязка для фиксации лучезапястного сустава.

Повязка необходима для решения проблем, возникающих при повышенной физической нагрузке на лучезапястный сустав: для профилактики растяжений, вывихов, а также для фиксации при травмах и в период реабилитации.

Модель 0001- неопреновая повязка для фиксации лучезапястного сустава

Повязка необходима для решения проблем, возникающих при повышенной нагрузке на лучезапястный сустав: для профилактики растяжений, вывихов, а также для фиксации при травмах и в период реабилитации.

Модель 0002 - неопреновая повязка для фиксации голеностопного сустава

Фиксирует сустав, оказывает микромассажное и тепловое воздействие. Улучшает кровообращение, стимулирует лимфоотток. Препятствует застою в микрокапиллярах. Предотвращает возможность травмы и снижает боль в её результате. Уменьшает отёк, замедляет воспаление. Восстанавливает связочный аппарат, нормализует двигательные функции. Ускоряет реабилитацию.

Модель 9903 - неопреновая повязка для фиксации коленного сустава (с открытой чашечкой)

Открытая коленная чашечка модели, снабжённая дополнительной кольцевой прокладкой по контуру прорези, фиксирует и стабилизирует коленный сустав во фронтальной плоскости, обеспечивает равномерную и дозированную компрессию, тепловое и микромассажное воздействие, необходимое после травм и операций.

Особый крой наколенника обеспечивает усиленную фиксацию сустава в местах анатомического сочленения сухожилий и связок колена. Рекомендуются в

восстановительный период после травм и операций; для профилактики повреждений коленного сустава при занятиях спортом, физических нагрузок.

Модель 9911 - неопреновая повязка для фиксации коленного сустава

Строение повторяет линию колена. Растяжимость во всех направлениях обеспечивает удобную опору и сдавливание. Идеально подходит для фиксации коленного сустава после лёгких ушибов и при других травмах колена. Является наиболее универсальной моделью среди наколенников. Оказывает фиксирующие и согревающие действие на коленный сустав.

Модель 9910 - неопреновая повязка для фиксации мышц бедра

Эффективное лечебное - профилактическое средство для фиксации и защиты мышц и связок в области бедра. Обладает компрессионным, тепловым и микромассажным воздействием. Легко моделируется. Применяется при ушибах, межмышечных гематомах, различных повреждениях мышц, а также в период реабилитации после операций на бедре. Повязка удобна при занятии спортом и при тяжелой физической нагрузке.

Модель 9912 – неопреновая повязка для фиксации икроножной мышцы.

Используется для реабилитации после ушибов и растяжений в области голени, при межмышечных гематомах, для облегчения состояния при варикозном расширении вен голени (для ходьбы), индивидуальном избыточном весе.

Рекомендуется для профилактики мышечных повреждений (спорт, физические нагрузки). Оказывает фиксирующее, согревающее, микромассажное воздействие; стимулирует кровообращение, снимет отеки.