



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «А-текстиль»

Шмакова М.Р.

«16» марта 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Одежда медицинская многократного использования»

по

ТУ 14.12.30-001-28238068-2018

Версия 001.2019

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Одежда медицинская многократного использования по ТУ 14.12.30-001-28238068-2018
(далее по тексту «одежда», «изделия»).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

I. Халат медицинский многократного использования:

1. Халат медицинский многократного использования женский «Астра» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70)
2. Халат медицинский многократного использования женский «Венеция» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66)
3. Халат медицинский многократного использования женский «Доктор» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66)
4. Халат медицинский многократного использования женский «Жасмин» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70)
5. Халат медицинский многократного использования женский «Медикал» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66)
6. Халат медицинский многократного использования женский «Профи» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70)
7. Халат медицинский многократного использования женский «Силуэт» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56)
8. Халат медицинский многократного использования женский «Элит» (размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
9. Халат медицинский многократного использования «Универсальный (Тип Б)» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70)
10. Халат медицинский многократного использования мужской «Стандарт» (размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68)
11. Халат медицинский многократного использования мужской «Форвард» (размеры: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68)

НАЗНАЧЕНИЕ

для применения медицинским персоналом и пациентами в медицинских учреждениях при оказании лечебно-профилактической помощи в качестве барьера для снижения риска перекрестного инфицирования

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стационарные, амбулаторные, лечебно-профилактические учреждения.

КРАТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Одежда относится к изделиям многократного применения.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Медицинские работники и пациенты

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия изготавливаются в нестерильном виде.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Снижения риска инфицирования медицинского персонала в процессе повседневной трудовой деятельности, и пациентов, а также соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается использовать изделия, если:

- истек срок годности;
- изделия имеют внешние дефекты в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции при наличии индивидуальной непереносимости используемых материалов.

ПОРЯДОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ

- Провести визуальный осмотр потребительской упаковки.
- Освободить изделие от потребительской упаковки.
- Проверить целостность изделия, методом визуального осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Изделия применяются в соответствии с их наименованием и функциональным назначением, должны одеваться поверх нижнего белья или одежды.

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

Изделие поверхностного контакта, вид контакта – кратковременный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки должно входить:

- одежда одного исполнения и типоразмера – от 1 до 100 шт;
- инструкция по применению – 1 экз.

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использовать до загрязнения.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура от +5 до +40 °С. Относительная влажность: 20– 80%.

ПОРЯДОК ПОДБОРА ТИПОРАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ

Порядок подбора типоразмера изделий представлен в таблицах №1-2.

Таблица 1 – Подбор одежды (для женщин, в см)

Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	152	24,7±1,0	80±1,0	59,2±1,0	88±1,0
	158	24,7±1,0	80±1,0	59,2±1,0	88±1,0
	164	24,7±1,0	80±1,0	59,2±1,0	88±1,0
	170	24,7±1,0	80±1,0	59,2±1,0	88±1,0
	176	24,7±1,0	80±1,0	59,2±1,0	88±1,0
42	152	26,1±1,0	84±1,0	63,4±1,0	92±1,0
	158	26,1±1,0	84±1,0	63,4±1,0	92±1,0
	164	26,1±1,0	84±1,0	63,4±1,0	92±1,0
	170	26,1±1,0	84±1,0	63,4±1,0	92±1,0
	176	26,1±1,0	84±1,0	63,4±1,0	92±1,0
44	152	27,5±1,0	88±1,0	67,6±1,0	96±1,0
	158	27,5±1,0	88±1,0	67,6±1,0	96±1,0
	164	27,5±1,0	88±1,0	67,6±1,0	96±1,0
	170	27,5±1,0	88±1,0	67,6±1,0	96±1,0
	176	27,5±1,0	88±1,0	67,6±1,0	96±1,0
46	152	28,9±1,0	92±1,0	71,8±1,0	100±1,0
	158	28,9±1,0	92±1,0	71,8±1,0	100±1,0
	164	28,9±1,0	92±1,0	71,8±1,0	100±1,0
	170	28,9±1,0	92±1,0	71,8±1,0	100±1,0
	176	28,9±1,0	92±1,0	71,8±1,0	100±1,0
48	152	30,3±1,0	96±1,0	76±1,0	104±1,0
	158	30,3±1,0	96±1,0	76±1,0	104±1,0
	164	30,3±1,0	96±1,0	76±1,0	104±1,0
	170	30,3±1,0	96±1,0	76±1,0	104±1,0
	176	30,3±1,0	96±1,0	76±1,0	104±1,0
50	152	31,7±1,0	100±1,0	80,2±1,0	108±1,0

Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
	158	31,7±1,0	100±1,0	80,2±1,0	108±1,0
	164	31,7±1,0	100±1,0	80,2±1,0	108±1,0
	170	31,7±1,0	100±1,0	80,2±1,0	108±1,0
	176	31,7±1,0	100±1,0	80,2±1,0	108±1,0
52	152	33,1±1,0	104±1,0	84,4±1,0	112±1,0
	158	33,1±1,0	104±1,0	84,4±1,0	112±1,0
	164	33,1±1,0	104±1,0	84,4±1,0	112±1,0
	170	33,1±1,0	104±1,0	84,4±1,0	112±1,0
	176	33,1±1,0	104±1,0	84,4±1,0	112±1,0
54	152	34,2±1,0	108±1,0	88,6±1,0	116±1,0
	158	34,2±1,0	108±1,0	88,6±1,0	116±1,0
	164	34,2±1,0	108±1,0	88,6±1,0	116±1,0
	170	34,2±1,0	108±1,0	88,6±1,0	116±1,0
	176	34,2±1,0	108±1,0	88,6±1,0	116±1,0
56	152	35,3±1,0	112±1,0	94±1,0	120±1,0
	158	35,3±1,0	112±1,0	94±1,0	120±1,0
	164	35,3±1,0	112±1,0	94±1,0	120±1,0
	170	35,3±1,0	112±1,0	94±1,0	120±1,0
	176	35,3±1,0	112±1,0	94±1,0	120±1,0
58	152	36,4±1,0	116±1,0	98,8±1,0	124±1,0
	158	36,4±1,0	116±1,0	98,8±1,0	124±1,0
	164	36,4±1,0	116±1,0	98,8±1,0	124±1,0
	170	36,4±1,0	116±1,0	98,8±1,0	124±1,0
	176	36,4±1,0	116±1,0	98,8±1,0	124±1,0
60	152	37,5±1,0	120±1,0	103,6±1,0	128±1,0
	158	37,5±1,0	120±1,0	103,6±1,0	128±1,0
	164	37,5±1,0	120±1,0	103,6±1,0	128±1,0
	170	37,5±1,0	120±1,0	103,6±1,0	128±1,0
	176	37,5±1,0	120±1,0	103,6±1,0	128±1,0
62	152	38,2±1,0	124±1,0	108,8±1,0	132±1,0
	158	38,2±1,0	124±1,0	108,8±1,0	132±1,0
	164	38,2±1,0	124±1,0	108,8±1,0	132±1,0
	170	38,2±1,0	124±1,0	108,8±1,0	132±1,0
	176	38,2±1,0	124±1,0	108,8±1,0	132±1,0
64	152	39±1,0	128±1,0	114,2±1,0	136±1,0
	158	39±1,0	128±1,0	114,2±1,0	136±1,0
	164	39±1,0	128±1,0	114,2±1,0	136±1,0
	170	39±1,0	128±1,0	114,2±1,0	136±1,0
	176	39±1,0	128±1,0	114,2±1,0	136±1,0
66	152	39,8±1,0	132±1,0	119,6±1,0	140±1,0
	158	39,8±1,0	132±1,0	119,6±1,0	140±1,0
	164	39,8±1,0	132±1,0	119,6±1,0	140±1,0
	170	39,8±1,0	132±1,0	119,6±1,0	140±1,0
	176	39,8±1,0	132±1,0	119,6±1,0	140±1,0
68	152	40,6±1,0	136±1,0	125±1,0	144±1,0
	158	40,6±1,0	136±1,0	125±1,0	144±1,0
	164	40,6±1,0	136±1,0	125±1,0	144±1,0
	170	40,6±1,0	136±1,0	125±1,0	144±1,0
	176	40,6±1,0	136±1,0	125±1,0	144±1,0
70	152	41,4±1,0	140±1,0	129,2±1,0	148±1,0
	158	41,4±1,0	140±1,0	129,2±1,0	148±1,0
	164	41,4±1,0	140±1,0	129,2±1,0	148±1,0
	170	41,4±1,0	140±1,0	129,2±1,0	148±1,0
	176	41,4±1,0	140±1,0	129,2±1,0	148±1,0

Таблица 2 – Подбор одежды (Для мужчин, в см)

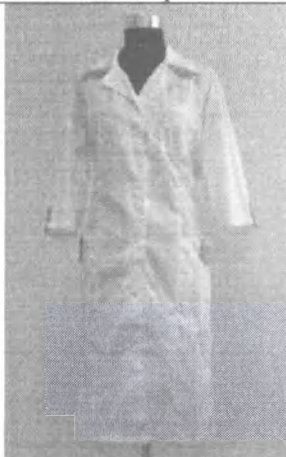
Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	158	24,70±1,0	80±1,0	58±1,0	84±1,0
	164	24,70±1,0	80±1,0	58±1,0	84±1,0
	170	24,70±1,0	80±1,0	58±1,0	84±1,0
	176	24,70±1,0	80±1,0	58±1,0	84±1,0
	182	24,70±1,0	80±1,0	58±1,0	84±1,0
	188	24,70±1,0	80±1,0	58±1,0	84±1,0
42	158	26,2±1,0	84±1,0	64±1,0	88±1,0
	164	26,2±1,0	84±1,0	64±1,0	88±1,0
	170	26,2±1,0	84±1,0	64±1,0	88±1,0
	176	26,2±1,0	84±1,0	64±1,0	88±1,0
	182	26,2±1,0	84±1,0	64±1,0	88±1,0
	188	26,2±1,0	84±1,0	64±1,0	88±1,0
44	158	27,7±1,0	88±1,0	70±1,0	92±1,0
	164	27,7±1,0	88±1,0	70±1,0	92±1,0
	170	27,7±1,0	88±1,0	70±1,0	92±1,0
	176	27,7±1,0	88±1,0	70±1,0	92±1,0
	182	27,7±1,0	88±1,0	70±1,0	92±1,0
	188	27,7±1,0	88±1,0	70±1,0	92±1,0
46	158	29,2±1,0	92±1,0	76±1,0	96±1,0
	164	29,2±1,0	92±1,0	76±1,0	96±1,0
	170	29,2±1,0	92±1,0	76±1,0	96±1,0
	176	29,2±1,0	92±1,0	76±1,0	96±1,0
	182	29,2±1,0	92±1,0	76±1,0	96±1,0
	188	29,2±1,0	92±1,0	76±1,0	96±1,0
48	158	30,7±1,0	96±1,0	82±1,0	100±1,0
	164	30,7±1,0	96±1,0	82±1,0	100±1,0
	170	30,7±1,0	96±1,0	82±1,0	100±1,0
	176	30,7±1,0	96±1,0	82±1,0	100±1,0
	182	30,7±1,0	96±1,0	82±1,0	100±1,0
	188	30,7±1,0	96±1,0	82±1,0	100±1,0
50	158	32,2±1,0	100±1,0	88±1,0	104±1,0
	164	32,2±1,0	100±1,0	88±1,0	104±1,0
	170	32,2±1,0	100±1,0	88±1,0	104±1,0
	176	32,2±1,0	100±1,0	88±1,0	104±1,0
	182	32,2±1,0	100±1,0	88±1,0	104±1,0
	188	32,2±1,0	100±1,0	88±1,0	104±1,0
52	158	33,7±1,0	104±1,0	94±1,0	108±1,0
	164	33,7±1,0	104±1,0	94±1,0	108±1,0
	170	33,7±1,0	104±1,0	94±1,0	108±1,0
	176	33,7±1,0	104±1,0	94±1,0	108±1,0
	182	33,7±1,0	104±1,0	94±1,0	108±1,0
	188	33,7±1,0	104±1,0	94±1,0	108±1,0
54	158	35,2±1,0	108±1,0	100±1,0	111,6±1,0
	164	35,2±1,0	108±1,0	100±1,0	111,6±1,0
	170	35,2±1,0	108±1,0	100±1,0	111,6±1,0
	176	35,2±1,0	108±1,0	100±1,0	111,6±1,0
	182	35,2±1,0	108±1,0	100±1,0	111,6±1,0
	188	35,2±1,0	108±1,0	100±1,0	111,6±1,0
56	158	36,7±1,0	112±1,0	106±1,0	115,6±1,0
	164	36,7±1,0	112±1,0	106±1,0	115,6±1,0
	170	36,7±1,0	112±1,0	106±1,0	115,6±1,0
	176	36,7±1,0	112±1,0	106±1,0	115,6±1,0
	182	36,7±1,0	112±1,0	106±1,0	115,6±1,0
	188	36,7±1,0	112±1,0	106±1,0	115,6±1,0

Размер	Рост	Обхват плеча	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
58	158	38,2±1,0	116±1,0	112±1,0	119,6±1,0
	164	38,2±1,0	116±1,0	112±1,0	119,6±1,0
	170	38,2±1,0	116±1,0	112±1,0	119,6±1,0
	176	38,2±1,0	116±1,0	112±1,0	119,6±1,0
	182	38,2±1,0	116±1,0	112±1,0	119,6±1,0
	188	38,2±1,0	116±1,0	112±1,0	119,6±1,0
60	158	39,7±1,0	120±1,0	118±1,0	123,6±1,0
	164	39,7±1,0	120±1,0	118±1,0	123,6±1,0
	170	39,7±1,0	120±1,0	118±1,0	123,6±1,0
	176	39,7±1,0	120±1,0	118±1,0	123,6±1,0
	182	39,7±1,0	120±1,0	118±1,0	123,6±1,0
	188	39,7±1,0	120±1,0	118±1,0	123,6±1,0
62	158	41,2±1,0	124±1,0	124±1,0	127,6±1,0
	164	41,2±1,0	124±1,0	124±1,0	127,6±1,0
	170	41,2±1,0	124±1,0	124±1,0	127,6±1,0
	176	41,2±1,0	124±1,0	124±1,0	127,6±1,0
	182	41,2±1,0	124±1,0	124±1,0	127,6±1,0
	188	41,2±1,0	124±1,0	124±1,0	127,6±1,0
64	158	42,7±1,0	128±1,0	130±1,0	131,6±1,0
	164	42,7±1,0	128±1,0	130±1,0	131,6±1,0
	170	42,7±1,0	128±1,0	130±1,0	131,6±1,0
	176	42,7±1,0	128±1,0	130±1,0	131,6±1,0
	182	42,7±1,0	128±1,0	130±1,0	131,6±1,0
	188	42,7±1,0	128±1,0	130±1,0	131,6±1,0
66	158	44,2±1,0	132±1,0	136±1,0	135,6±1,0
	164	44,2±1,0	132±1,0	136±1,0	135,6±1,0
	170	44,2±1,0	132±1,0	136±1,0	135,6±1,0
	176	44,2±1,0	132±1,0	136±1,0	135,6±1,0
	182	44,2±1,0	132±1,0	136±1,0	135,6±1,0
	188	44,2±1,0	132±1,0	136±1,0	135,6±1,0
68	158	45,7±1,0	136±1,0	142±1,0	139,6±1,0
	164	45,7±1,0	136±1,0	142±1,0	139,6±1,0
	170	45,7±1,0	136±1,0	142±1,0	139,6±1,0
	176	45,7±1,0	136±1,0	142±1,0	139,6±1,0
	182	45,7±1,0	136±1,0	142±1,0	139,6±1,0
	188	45,7±1,0	136±1,0	142±1,0	139,6±1,0
70	158	47,2±1,0	140±1,0	148±1,0	143,6±1,0
	164	47,2±1,0	140±1,0	148±1,0	143,6±1,0
	170	47,2±1,0	140±1,0	148±1,0	143,6±1,0
	176	47,2±1,0	140±1,0	148±1,0	143,6±1,0
	182	47,2±1,0	140±1,0	148±1,0	143,6±1,0
	188	47,2±1,0	140±1,0	148±1,0	143,6±1,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

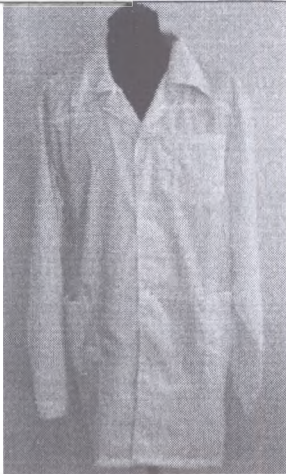
Изделия по внешнему виду и технологии изготовления должны соответствовать требованиям технической документации.

Описание внешнего вида

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Халат медицинский многократного использования женский «Астра» представляет собой изделие на запах, пояса по линии талии. Рукав 3/4. Воротник «шалька». Два боковых кармана.	 (арт. ХМЖ5Н, арт. ХМЖ1Н, арт. ХМЖ2Н, арт. ХМЖ3Н)
Халат медицинский многократного использования женский «Венеция» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, удлиненный. С фигурной отделкой контрастного цвета. Центральная застежка на пуговицах, рельефы на полочке и спинке из плечевых швов. Воротник английский, отложной с цветной отделкой. Один нагрудный карман и два нижних боковых кармана с цветной отделкой «хлястики». В боковой шов вшит пояс для регулировки объема по линии талии, в боковых швах разрезы. Рукав втачной, одношовный, с цветной отделкой «хлястик» по низу, длина s.	 (арт. ХМЖ1Б, арт. ХМЖ2Б, арт. ХМЖ3Б, арт. ХМЖ5Б)
Халат медицинский многократного использования женский «Доктор» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, удлиненный. Центральная застежка на пуговицах, рельефы на полочке и спинке из плечевых швов. Воротник английский отложной. Один нагрудный карман и два нижних боковых кармана. В боковых швах два полупояса с застежкой на две пуговицы. Разрезы по боковым швам. Рукав втачной, одношовный длинный.	 (арт. ХМЖ1Б, арт. ХМЖ2Б, арт. ХМЖ3Б, арт. ХМЖ5Б)

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Халат медицинский многократного использования женский «Жасмин» представляет собой цветное изделие на запах, пояса по линии талии. Рукав короткий. Воротник «шалька». Два боковых кармана.	 (арт. ХМЖ13, арт. ХМЖ23, арт. ХМЖ33, арт. ХМЖ53)
Халат медицинский многократного использования женский «Медикал» представляет собой цветное изделие полуприлегающего силуэта, удлинённый с отделкой. Центральная застежка на пуговицах, рельефы на полочке и спинке из плечевых швов. Воротник английский отложной из отделочной ткани двух цветов. Два нижних боковых кармана с контрастной отделкой. В боковых швах два полупояс на завязках. Разрезы по боковым швам. Рукав втачной, одношовный короткий с контрастной отделкой.	 (арт. ХМЖ1С, арт. ХМЖ2С, арт. ХМЖ3С, арт. ХМЖ5С)
Халат медицинский многократного использования женский «Профи» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта, с отделкой. Центральная застежка на пуговицах, рельефы на полочке, спинка со средним швом. По среднему шву спинки шлица. Без воротника с V-образным вырезом. Один нагрудный карман с контрастной отделкой и два нижних боковых кармана так же с контрастной отделкой. На спинке пояс по линии талии. Рукав втачной, одношовный длина 3/4.	 (арт. ХМЖ1Б, арт. ХМЖ2Б, арт. ХМЖ3Б, арт. ХМЖ5Б)

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Халат медицинский многократного использования женский «Силуэт» представляет собой изделие укороченного, приталенного силуэта, с отделкой. Центральная застежка на молнии, рельефы на полочке и спинка из плечевого шва отстрочены отделочной строчкой на 0,1 см. Без воротника с О-образным вырезом обработан контрастной отделочной тканью. На полочке двойной нагрудный карман из отделочной контрастной ткани и два нижних боковых кармана так же из отделочной контрастной ткани. На спинке пояс по линии талии на завязках. Рукав втачной, одношовный длина s с фигурной манжетой.	 (арт. ХМЖ1Б, арт. ХМЖ2Б, арт. ХМЖ3Б, арт. ХМЖ5Б)
Халат медицинский многократного использования женский «Элит» представляет собой изделие полуприлегающего силуэта. Центральная застежка на пуговицах, рельефы на полочке и спинке выходящие из кокетки. По кокетке и рельефам проложена отделочная строчка на 0,1 см. Воротник английский отложной. Два нижних боковых кармана с контрастной отделкой. В боковой шов вшит пояс для регулировки объема по линии талии. Рукав втачной, одношовный, длина s.	 (арт. ХМЖ1Б, арт. ХМЖ2Б, арт. ХМЖ3Б, арт. ХМЖ5Б)
Халат медицинский многократного использования «Универсальный (Тип Б)» представляет собой изделие прямого силуэта. Длина изделия по спинке не менее 118 см. Спинка с застежкой на 5 пар завязок, на полочке один нагрудный карман слева и два нижних накладных кармана. Рукав длинный втачной, одношовный рукав с регулированием внизу по обхвату руки за счет завязок. Горловина окантована косой бейкой.	 (арт. ХХ3Б)

Описание внешнего вида	Общий вид медицинского изделия
Халат медицинский многократного использования мужской «Стандарт» представляет собой изделие удлиненного, прямого силуэта. Центральная застежка на пуговицах. Отложной английский воротник. Спинка со средним швом. По среднему шву спинки шлица. На спине по линии талии пояс на двух пуговицах для регулировки объема. На полочке один нагрудный карман и два боковых кармана. Рукав одношовный длинный с манжетой на пуговице.	 (арт. ХММ1Б, арт. ХММ2Б, арт. ХММ3Б)
Халат медицинский многократного использования мужской «Форвард» представляет собой изделие укороченное, прямого силуэта с отделочной двойной строчкой. Центральная застежка на пуговицах. Отложной английский воротник. По воротнику и подбортам проложена отделочная двойная строчка. Полочка и спинка с кокеткой. По кокетке двойная отстрочка. По боковым швам разрезы. На спине по линии талии пояс на двух пуговицах для регулировки объема. На полочке один фигурный нагрудный карман и два боковых фигурных кармана. По карманам проложена отделочная двойная строчка. Рукав одношовный, длинный с манжетой на пуговице.	 (арт. ХММ1Б, арт. ХММ2Б, арт. ХММ3Б)

Сырье и материалы

- Материалы и сырье, применяемые при изготовлении одежды представлены в таблице ниже.

Материал	Состав
1. Ткань Смесовая из полиэфино-хлопковых волокон «Тиси» (плотность 120 г/м ² , ±5%)	35 % хлопок, 65 % полиэфир
2. Ткань Смесовая из полиэфино-хлопковых волокон «Сантория» (плотность 150 г/м ² , ±5%)	35 % хлопок, 65 % полиэфир
3. Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые отбеленные и набивные бязевой и миткалевой группы (плотность 140 г/м ² , ±5%)	100 % хлопок
4. Ткани готовые хлопчатобумажные бытовые: ворсовой группы (фланель) (плотность 180 г/м ² , ±5%)	100% хлопок

Требования к изготовлению

- Строчки изделий должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

- Изделия не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.
- Фурнитура (пуговицы, кнопки, молнии) не должны иметь химических или механических повреждений.
- Изделия выпускаются в нестерильном виде

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия имеют полностью законченную конструкцию и не требуют в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Одежду из цветных тканей рекомендуется стирать без замачивания, отдельно от изделий белого цвета с использованием специальных моющих средств для цветных изделий, предварительно вывернув на изнаночную сторону.
- Перед стиркой одежды необходимо удостовериться в том, что фурнитура надежно закреплена и не повредилась при носке. Если есть молнии, пуговицы, кнопки – застегнуть.
- Выберите температурный режим стирки. Перед началом ознакомьтесь с изображениями на ярлыке изделия, чтобы правильно выбрать температуру.

Рекомендуемые температуры для стирки:

- Смесовые Ткани «Тиси» (65% полиэфир, 35 % хлопок) – 30 °С
- Смесовые Ткани «Сантория» (65% полиэфир, 35 % хлопок) – 30 °С
- Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые отбеленные и набивные бязевой и миткалевой группы 100% хлопок - 40 °С
- Ткани готовые хлопчатобумажные бытовые: ворсовой группы (фланель), 100% хлопок - 40 °С
- Отбеливание одежды из цветных тканей – запрещено (за исключением одежды из белой ткани).
- Сушить одежду рекомендуется в расправленном виде, расположив на вешалке и застегнув все пуговицы, кнопки и молнии. НЕ сушить в стиральной машине.
- Гладить с изнанки при температуре не более 150°С, с использованием пара.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта.
- Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.
- Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
- Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5°С до +40°С

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям ТУ 14.12.30-001-19119258-2018 (устойчивость окраски тканей к поту, сухому трению, стирке) при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации.
- Гарантийный срок использования одежды – не менее 12 мес. с даты продажи, в пределах срока годности.
- Гарантийный срок годности изделий - 5 лет с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Одежда, загрязненная кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса Б.
- Упаковка, одежда с истекшими сроками годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса А.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «А-текстиль» (ООО «А-текстиль»), 620098, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, дом №104, кв. 146 (*Адрес места производства*: 620098, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 2А, литер К, помещение №4, №5, №6).

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии по поводу качества медицинского изделия направляются в ООО «А-текстиль», 620098, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, дом №104, кв. 146
Телефон/факс: 8 (343) 3613363. Адрес электронной почты: info@a-service.biz

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ



- Максимальная температура стирки 40°C, мягкий режим;



- Не отбеливать (кроме белого);



- Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 110°C, без пара



- Сухая чистка запрещена;



- Сушка на веревке или вешалке после стирки без отжима.

СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ



Беречь от влаги



Верх

Каждая потребительская упаковка должна быть снабжена этикеткой, на которой печатным способом должно быть указано:

—наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и контактные данные (телефон, адрес электронной почты);

—товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

—наименование варианта исполнения изделия;

—условное обозначение изделия (артикул) в соответствии с внутренней нумерацией предприятия-изготовителя;

—размер изделия;

—рост (при наличии);

—обозначение настоящих технических условий;

—состав ткани;

—количество изделий в упаковке (для изделий более 1 шт);

—номер партии (при наличии);

—дата изготовления (год);

—штриховой код товара (при наличии);

—номер регистрационного удостоверения;

—надпись «Сделано в России»;

—условия хранения;

—знак сертификации (при наличии)

—символы по уходу за изделием в соответствии с ГОСТ ISO 3758: «Максимальная температура стирки 40°C, мягкий режим», «Не отбеливать (кроме белого)», «Глажение

при максимальной температуре подошвы утюга 110°C, без пара», «Сухая чистка запрещена»; «Сушка на веревке или вешалке после стирки без отжима»

На вшивном ярлыке указана следующая информация:

- размер;
- рост;

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ

- ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;
- ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий (часть 1, 5,10);
- ГОСТ ISO 10993-12-2015 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»;
- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;
- ГОСТ 24760-81 «Халаты медицинские женские. Технические условия»;
- ГОСТ 25194-82 «Халаты медицинские мужские. Технические условия».

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

13 (тринадцать))
листах

Ген. директор И.И. Иванов
МП
«А-ТЕКСТИЛЬ»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 6686105598
ОГРН 1186658029821