

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Концептгрупп»
_____ Хафизова М.В.
«27» июля 2009 г.
М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению хирургических перчаток марки Epsoce

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие используют для защиты от вирусов, инфекций и заражения медицинского персонала и пациентов при проведении хирургических вмешательств в стерильных условиях.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Принцип действия

Перчатки являются барьерной защитой от проникновения вредоносных организмов от пациента к медицинскому персоналу и наоборот. Поэтому являются необходимой и непременной частью любой хирургической операции.

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТКАМИ

Перчатки следует асептически вскрыть, надеть на простерилизованные руки и использовать в течение операции. При длительных операциях рекомендуется менять перчатки раз в 2-3 часа. Так же следует немедленно сменить перчатку в случае повреждения ее острым инструментом или каким-либо другим способом. Использованные перчатки следует утилизировать как любые другие медицинские отходы, зараженные телесными жидкостями пациента.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт содержит натуральный латекс, способный вызвать аллергическую реакцию. Не хранить вблизи от озона. Использовать только один раз. Повреждение упаковки нарушает стерильность перчаток.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25С вдали от солнечных лучей

Генеральный директор
ООО Концептгрупп
Хафизова М.В.



_____. Ф.И.О

Генеральный директор
ООО «Цирми»
Хадиева И.В.

