

предназначен для оказания реанимационной помощи на догоспитальном этапе.

Область применения: службы скорой медицинской помощи, амбулаторной медицины, медицины катастроф, ГО и ЧС, военной и экстремальной медицины.

Набор выпускается: в сумке реанимационной СР-03, в упаковке врача скорой помощи УМСП-01-П или УМСП-01-Пм.

Основные технические характеристики набора :

Табл.1.

	В сумке СР-03	В упаковке УМСП-01-П	В упаковке УМСП-01-Пм
Габаритные размеры, мм	685x425x430	520x310x390	440x252x330
Масса набора с вложениями, не более, кг	13	15	14
Номинальная нагрузка, не более, кг	14	16	15
Средний срок службы	не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.		
Условия эксплуатации:	- температура окружающего воздуха от -40 до +40°C - относительная влажность окружающего воздуха до 100% при температуре 25 °С.		

Комплект поставки:

1. Набор вложений (согласно Табл. 2)
2. Сумка реанимационная СР-03 или упаковка УМСП-01-П или УМСП-01-Пм.
3. Ремонтный комплект*.
4. Руководство по эксплуатации

* при поставке изделия в УМСП-01-П или УМСП-01-Пм.

Описание изделия:

Набор изделий для оказания реанимационной помощи УМСП-01-«Медплант-М» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному персоналу оказывать реанимационную помощь на догоспитальном этапе детям от 6 лет и взрослым пациентам. Набор упакован в сумку реанимационную СР-03 или упаковку врача скорой помощи УМСП-01-П или УМСП-01-Пм.

Сумка СР-03 имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, а дно сумки выполнено из непромокаемого прорезиненного материала. В стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолона ППЭ.

На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим кол-вом 54 места) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняет ремень от сминания.

Корпус упаковки врача скорой помощи УМСП-01-П и УМСП-01-Пм изготовлен из холодо- и теплостойкого ударопрочного пищевого АБС пластика, ложемент для ампул и флаконов выполнен из изолона ППЭ. Наборы в упаковках поставляются с ремонтным комплектом.

Укладка УМСП-01-П (520x310x390) имеет основной отсек для размещения вложений (бинтов, шприцов, инструментов и т.д.) и два лотка с ложементами для размещения ампул и флаконов-антисептиков.

Укладка УМСП-01-Пм (440x252x330) имеет в одном лотке ложемент для ампул и флаконов-антисептиков, другой лоток разделен перегородками для удобства размещения

левого лотка.

Правила эксплуатации:

- 1) Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты (линнки ларингоскопа, катетеры отсасывателя, маски, воздуховоды, ротаторасширитель, языкодержатель, зажимы) должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.
- 2) Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских приборов, входящих в состав набора (ларингоскоп, дыхательный мешок, аспиратор).
- 3) Сумка набора и упаковки УМСП-01-П и УМСП-01-Пм имеют жёсткий каркас и защищают элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов набора и нарушению стерильности вложений. Чтобы исключить повреждение сумки и футляра не нагружайте их более чем на 14 кг – сумку, 16 кг – упаковку УМСП-01-П, 15 кг – упаковку УМСП-01-Пм. Бережное отношение и аккуратная работа с набором продлевает срок его службы.
- 4) После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в сумку и упаковку. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. Своевременно пополняйте состав расходных материалов, помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.
- 5) При необходимости дезинфекция сумки и упаковок УМСП-01-Пм и УМСП-01-П производится 2-х кратным протиранием салфеткой, смоченной в 3 %-ном растворе хлорамина, с интервалом 15 мин. и выдержкой после этого 60 мин. (по МУ287-113).

Обработка сумки спиртосодержащими растворами и термическим способом (кипячение, автоклавирование и т.п.) не допускается!!!

Транспортирование и длительное хранение:


1. Транспортирование наборов может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
2. Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С.
3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на вложения (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия производства сторонних организаций). При необходимости дополнительного сервисного обслуживания упаковки и получения запасных элементов конструкции (винтов, пластмассовых втулок и т.д.) обращайтесь к изготовителю по адресу и телефонам, указанным на титульном листе настоящего руководства и на этикетке, наклеенной на упаковку.

Замена тяги упаковки УМСП-01-П и УМСП-01-Пм с использованием ремонтного комплекта:

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4x1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

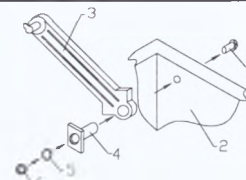

обозначения на рисунке:

- 1 – винт;
- 2 – корпус укладки, внутренняя сторона
- 3 – тяга
- 4 – втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 – гайка

2.	52777873-2007 Аппарат ИВЛ «ДАР-07» или аналогичный* ТУ АМИЕ.941622.012	1 комплект
3.	Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1* ТУ 9444-004-52777873-2007	1 шт.
4.	Пульсоксиметр портативный «Окситест-1»* ТУ 9441-011-18585567-2004	1 шт.
5.	Набор трахеостомический*	1 шт.
6.	Шприц типа Жане однократного применения стерильный ТУ 9432-125-12517820-02	1 шт.
7.	Ларингоскоп для скорой медицинской помощи Лсп-01-«Мединт-М» ТУ 9442-008-18585567-2003	1 шт.
8.	Зонд желудочный № 15	1 шт.
9.	Воздуховоды (набор универсальный) ТУ 64-1-648-80	1 набор
10.	Трубка эндотрахеальная однократного применения ТУ 64-2-68-82	3 шт.
11.	Проводник (стилент) для интубации одноразовый ГОСТ 50580-93	1 шт.
12.	Роторасширитель ТУ 64-1-782-77	1 шт.
13.	Языкодержатель ТУ 64-1-522-77	1 шт.
14.	Зажим медицинский кровоостанавливающий ТУ 64-1-3220-79Е	2 шт.
15.	Трубка медицинская резиновая (жгут для в/в инъекций) ГОСТ 3399-76	2 шт.
16.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
17.	Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения ТУ 9444-046-12517820-96	2 шт.
18.	Канюля для периферических вен ГОСТ Р ИСО 10993.1-99	4 шт.
19.	Ампульница	1 шт.
20.	Держатели инфузионных флаконов на 200 и 400 мл. ТУ 9398-006-18585567-2003	2 шт.
21.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см. х 14 см. ГОСТ 16427-93	2 упаковки
22.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м. х 7 см. или 5 м. х 10 см. ГОСТ 1172-93	2 шт.
23.	Перчатки хирургические стерильные ТУ 2514-003-36534160-01	2 пары
24.	Пакет полиэтиленовый ГОСТ 10354-82	5 шт.

Свидетельство о приёме : Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-«Мединт-М» в упаковке врача скорой медицинской помощи УМСП-01-П или УМСП-01-Пм, в сумке реанимационной СР-03 (ненужное зачеркнуть) соответствует ТУ 9437-010-18585567-2004 изм.3 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Дата продажи

Штамп ОТК

Подпись продавца

Р/с 40702810538290105077, Московский банк СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО Г. МОСКВА, К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7718156134, КПП 771801001, ОГРН 1027739753953 ОКПО 52777873

ОКП 943790
ТУ 9437-010-18585567-2004 изм.3
Рег. уд. № ФС 02262004/0321-04 от 27.04.04
Деклар. о соотв. РОСС RU.ИМ18.Д00693

**НАБОР ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ от 6 лет НРСР-01-«МЕДИНТ-М» в трех
исполнениях: УМСП-01-П, УМСП-01-Пм и в сумке из синтетической
ткани**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.943704.001 РЭ



Перед началом работы с набором
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.



Сделано в России