

Фото 1. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018 в потребительской упаковке (полимерный флакон с укупорочным средством: крышка «Бушон» (белая))

Лицевая сторона



Оборотная сторона


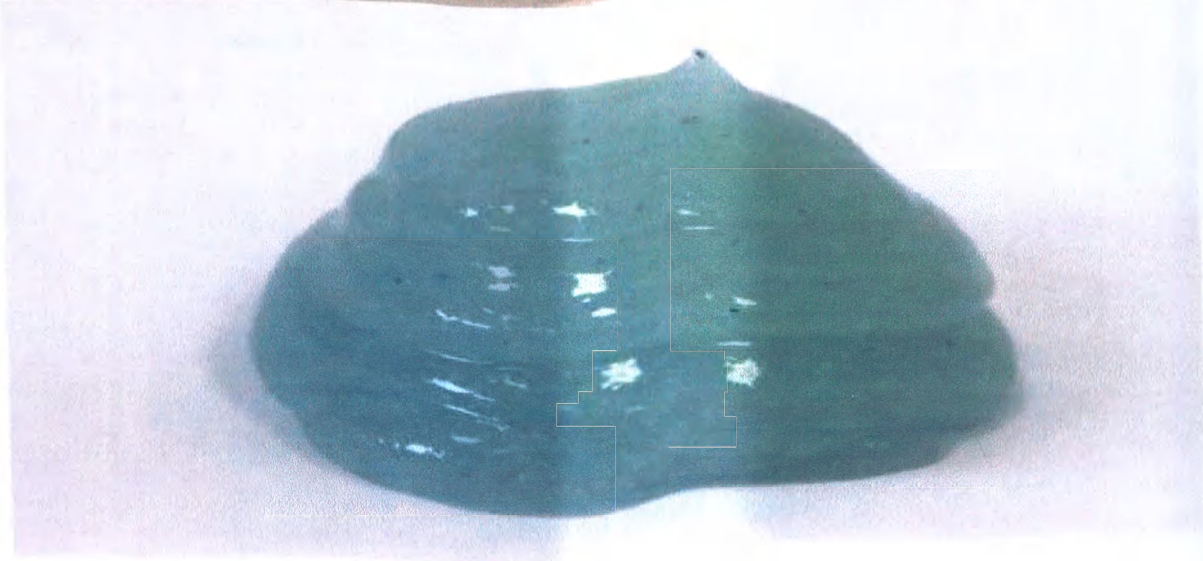


Фото 2. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018 в потребительской упаковке (полимерный флакон с укупорочным средством: крышка «Бушон» (бирюзовая))

Лицевая сторона



Оборотная сторона

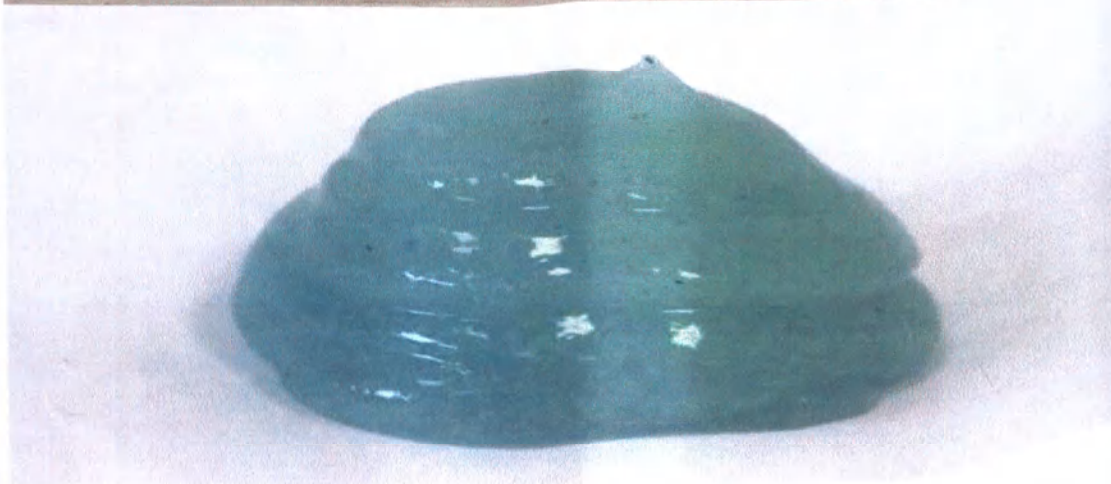


Гель

Фото 3. Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018 в потребительской упаковке (полимерный флакон с укупорочным средством: крышка «флип-топ»)

Лицевая сторона

Оборотная сторона

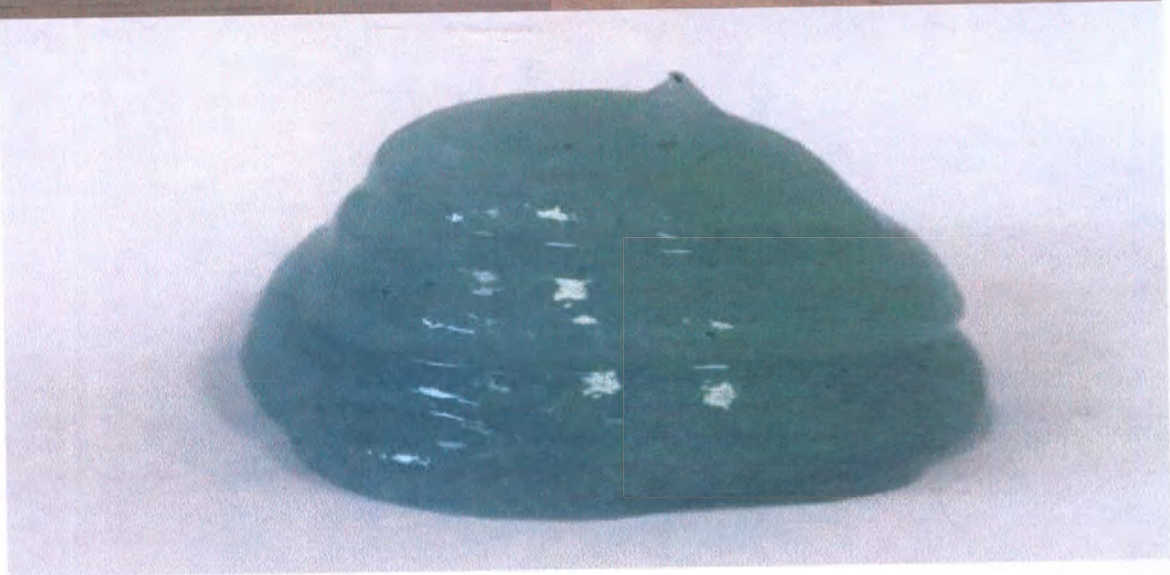

Гель

Сшито и заверено печатью 3
(три) лист а

Генеральный директор
ООО «Гельтек-Медика»
Шанин Д.О.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Гельтек-Медика»

Шанин Д.О.

мая 2019 г.



Проект этикетки

медицинского изделия:

Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб»

по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018

2019

Макет этикетки

Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018



Гель абразивный проводящий для подготовки кожи «Унискраб» по ТУ 21.20.23-026-76063983-2018

Предназначен для уменьшения сопротивления (импеданса) и обезжиривания кожи при подготовке к электрофизиологическим исследованиям (электроэнцефалография (ЭЭГ), длительное ЭЭГ-мониторирование, полисомнография, вызванные потенциалы (ВП), стресс-тесты ЭКГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру) в условиях клиник, больниц, диагностических центров.

Способ применения: Перед применением взболтать флакон, нанести небольшое количество геля на ватный или марлевый тампон, сделать 4-5 круговых движений с небольшим усилием на зоне применения, размером, с диаметр используемого электрода. После обработки кожи следует удалить остатки геля сухим ватным (марлевым) тампоном, затем наложить электроды. После использования геля плотно закрыть флакон.

Состав: вода очищенная, пемза, сополимер акриловой кислоты, пропиленгликоль, консерванты, дисодиум ЭДТА, краситель.

Гель может вызвать временное раздражение или покраснение кожи, особенно у пациентов с чувствительной кожей, если массажные движения при проведении процедуры осуществляются слишком сильно или длительно. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав геля.

Производитель: ООО «Гельтек-Медика»,
Россия, 115201, г. Москва,
1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8;
тел.: +7 (495) 956-93-66

Партия, дата изг., годен до: см. упаковку.

ТУ 21.20.23-026-76063983-2018

Рег. уд. № ... от xx.xx.xxxx г.


Условия хранения от + 5 °С до + 40 °С.

Условия транспортирования от -40°С до +40°С.

Утилизация по классу А (СанПиН 2.1.7.2790-10).

Место для штрих-кода

Сшито и заверено печатью 2
(два) лист а

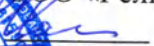Генеральный директор
ООО «Гельтек-Медика»
 Шанин Д.О.

