

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «ИНТЕРЛИН»

Колесников А.С.

» мая 2019 г.

Фотографические изображения

Бандажи ортопедические поддерживающие
по ТУ 32.50.22-009-11533047-2018 производства ООО
«ИНТЕРЛИН»

для вариантов исполнения:

1. Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки спины без фиксатора (код вида 183500);
 - 1.1. Инструкция по эксплуатации.
2. Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки спины с фиксаторами и утяжками (код вида 183500);
 - 2.1. Инструкция по эксплуатации.
3. Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки спины с ребрами жесткости без утяжек (код вида 183500);
 - 3.1. Инструкция по эксплуатации.
4. Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки спины с ребрами жесткости с утяжками и фиксатором (код вида 183500);
 - 4.1. Инструкция по эксплуатации.
5. Бандаж-воротник для фиксации шейного отдела позвоночника (код вида 182800);
 - 5.1. Инструкция по эксплуатации.


INTERLIN

Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки спины без фиксатора

SL B01

Бандаж ортопедический поддерживающий по ТУ 32.50 22-009-11533047-2018 в варианте исполнения –
Бандаж пояснично-крестцовый для поддержки спины компании ООО «Интерлин»


Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, Лит. У.У1, эт. 2, помещение №2/01. Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт интерлин.рф, e-mail: ask@interline-k.ru Претензии направлять: ООО «ИНТЕРЛИН» 140000, РФ, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, Лит. У.У1, эт. 2, помещение №2/01. Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт интерлин.рф, e-mail: ask@interline-k.ru Будем благодарны за ваш отзыв о продукции на prod@interline-k.ru. Изделия предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для индивидуального пользования.

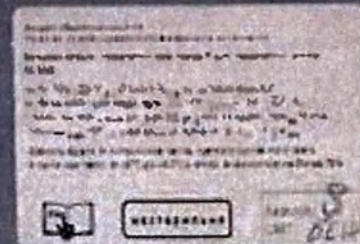


Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки спины без фиксатора



Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины без фиксатора

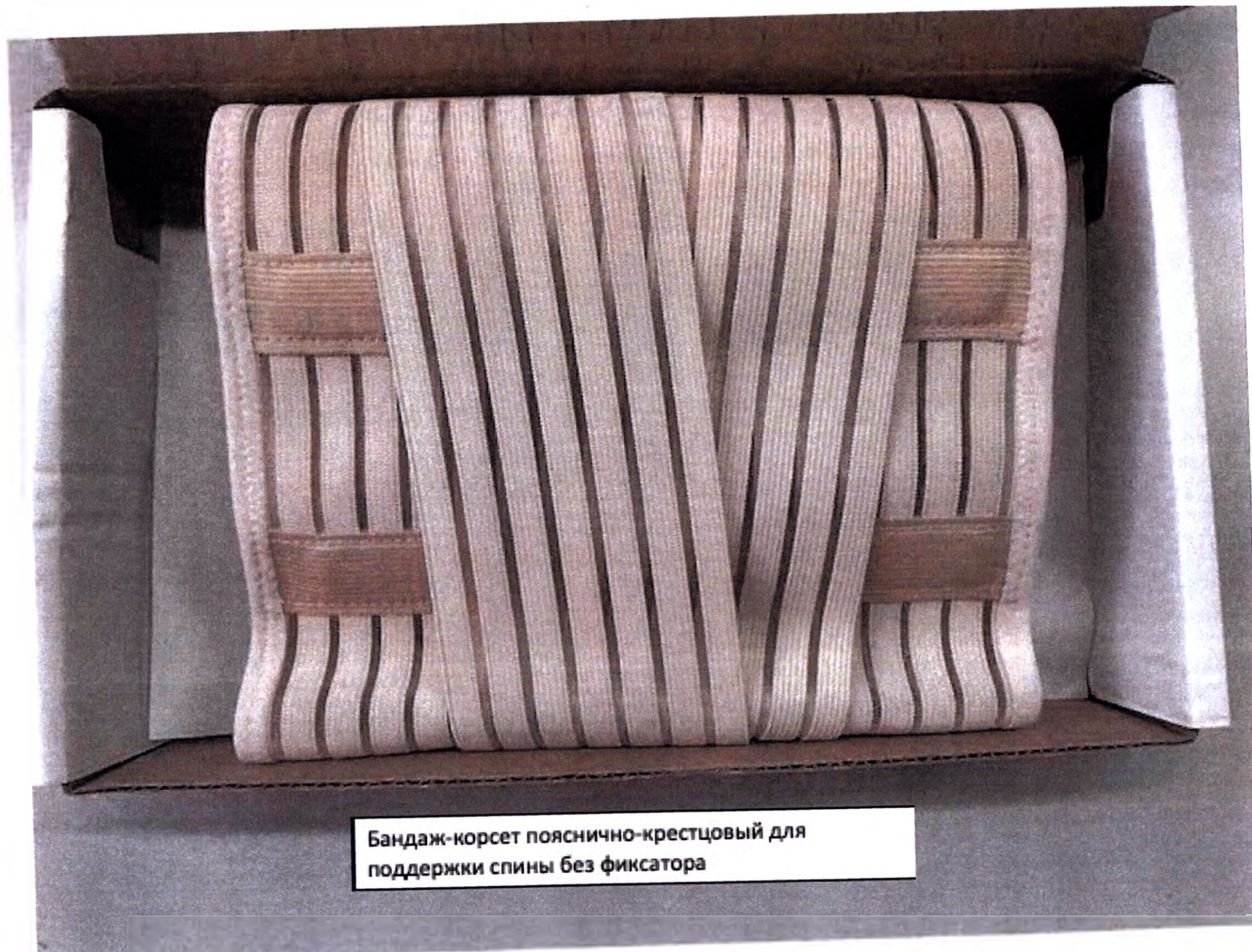

Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины без фиксатора

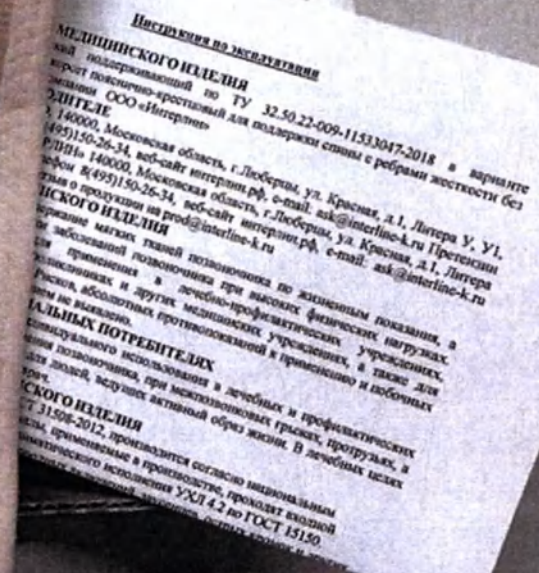

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



INTERLIN

Видео-информация по
телефону 80 33 005-1183307-2018 в магазине интерлин
Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки
спины с фиксаторами и утяжками SL B02
по ТУ 80.30.33-009-153-0001-2018 по № "0001-2332/001"
от 08.08.2008 разработчик ООО "Интерлин" ИНН 50/121471,
г. Тюмень, Индустриальный пр., д. 204, к. 2, 3 этаж 68 АЗС при въезде
Магистральный БП, г. Тюмень, г. Тюмень, д. 1, лит. 2, 3 этаж
Корпус 44/45 от исторического здания, принадлежащего ООО
"Интерлин" ИНН 50/121471, г. Тюмень, г. Тюмень, д. 1, лит. 2, 3 этаж


НОСТЕРИЛЬНО

РАЗМЕР/
ЦВЕТ

Дата изготовления:
нояб. 2018


Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с фиксаторами и утяжками

SL B02

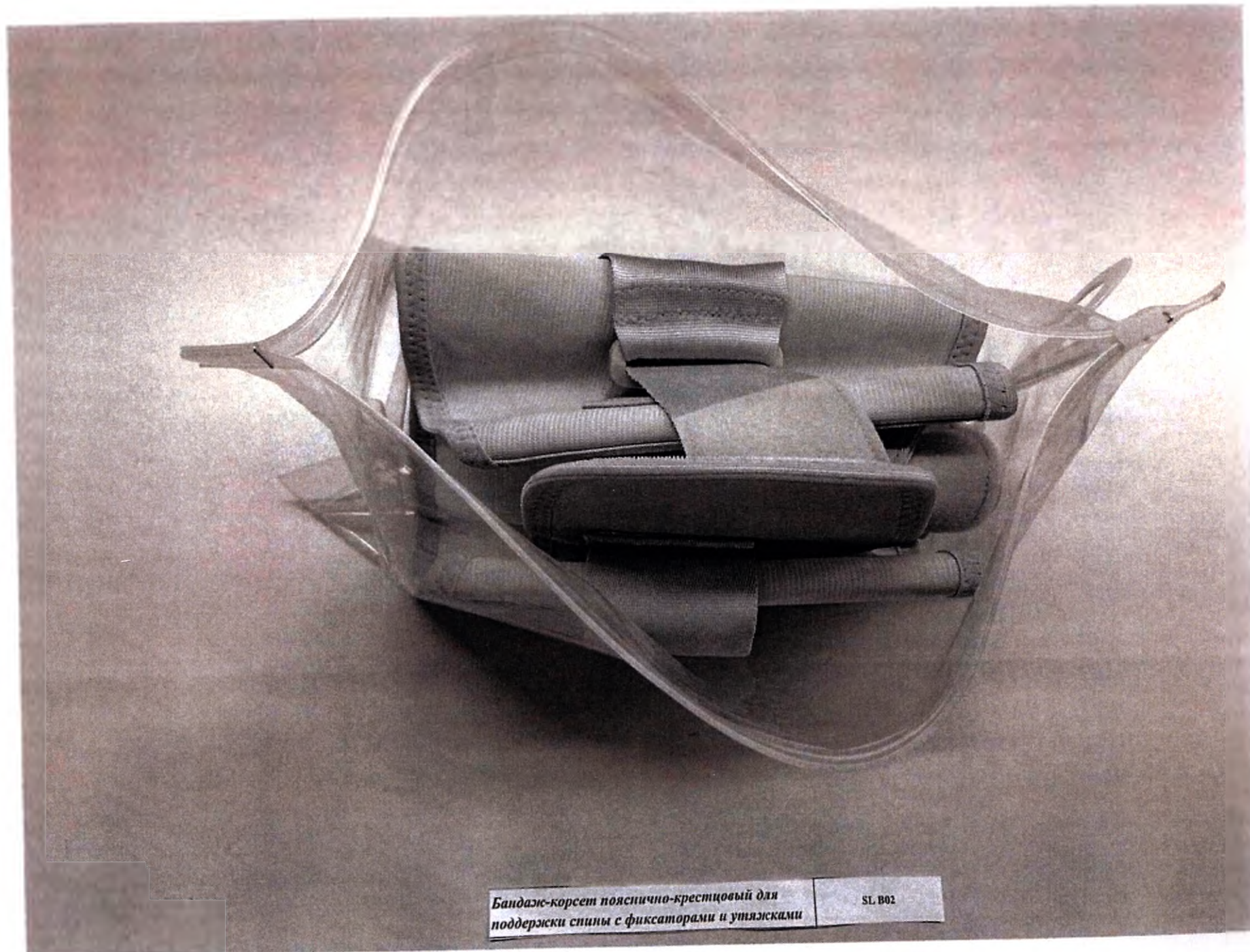

Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с фиксаторами и утяжками

SL B02

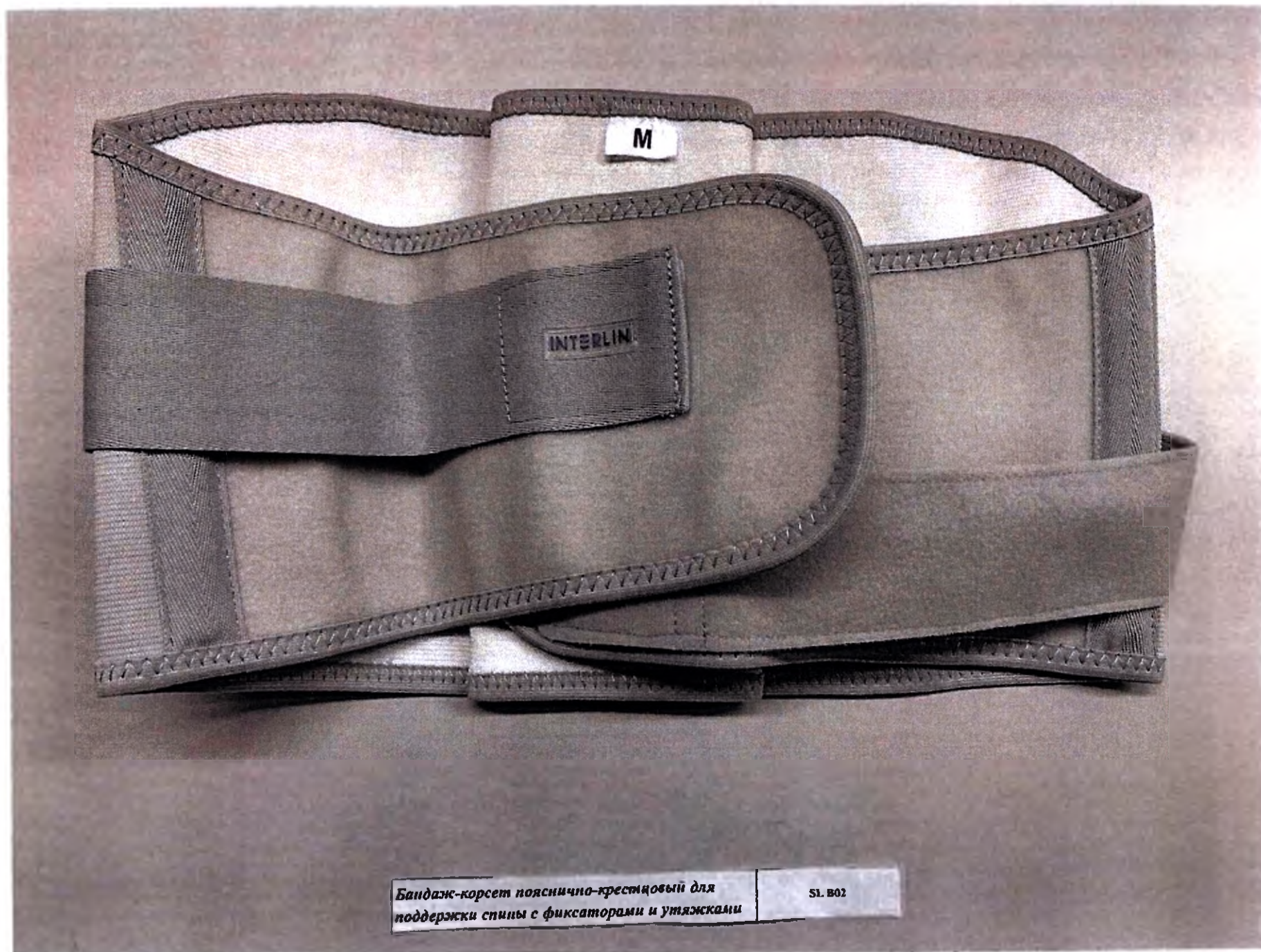

Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с фиксаторами и утяжками

SL B02



Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с фиксаторами и утяжками

SL B02

INTERLIN

БАНДАЖ-КОРСЕТ



**ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ СПИНЫ БЕЗ
УТЯЖЕК**

SL B03



Бандаж ортопедический поддерживающий по ТУ 32 50-22-009-11533047-2018 в варианте исполнения —
Бандаж пояснично-крестцовый для поддержки спины компании ООО «Интерлин»

Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», 140000, РФ Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, Лит. У.У.1, эт. 2, помещение №2/01. Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interlin-k.ru. Претензии направлять ООО «ИНТЕРЛИН» 140000, РФ, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, Лит. У.У.1, эт. 2, помещение №2/01. Телефон 8(495)150-26-34, веб-сайт interlin.ru, e-mail: ask@interlin-k.ru. Будем благодарны за ваш отзыв о продукции на prod@interlin-k.ru. Изделия предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных центрах, поликлиниках и других медицинских учреждениях, а также для индивидуального пользования.

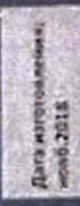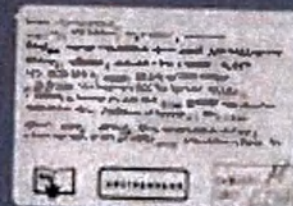


**Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с ребрами жесткости без
утяжек**

SL B03



Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с ребрами жесткости без
упругих

SL B03

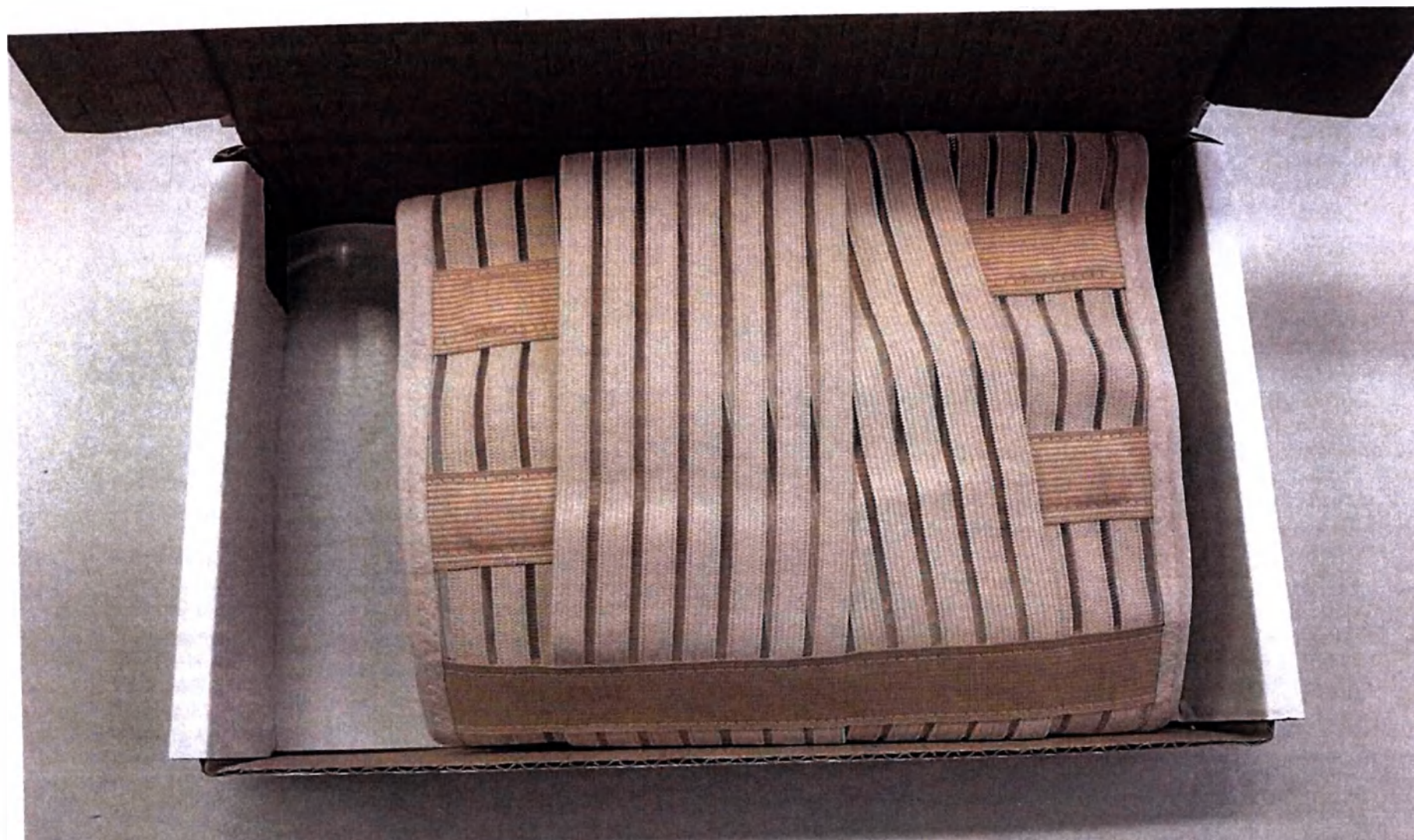

Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с ребрами жесткости без
натяжек

SL B03




Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для поддержки
спины с ребрами жесткости и фиксатором из войлока
№ 10-12 (10-12) 10-12 (10-12) 10-12 (10-12) 10-12 (10-12)
№ 10-12 (10-12) 10-12 (10-12) 10-12 (10-12) 10-12 (10-12)
1. Материал: войлок, эластичная ткань, фиксатор из войлока
2. Материал: войлок, эластичная ткань, фиксатор из войлока
3. Материал: войлок, эластичная ткань, фиксатор из войлока
4. Материал: войлок, эластичная ткань, фиксатор из войлока

Дата изготовления:
NOV. 2018


Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с ребрами жесткости с
утяжками и фиксатором

SL B04

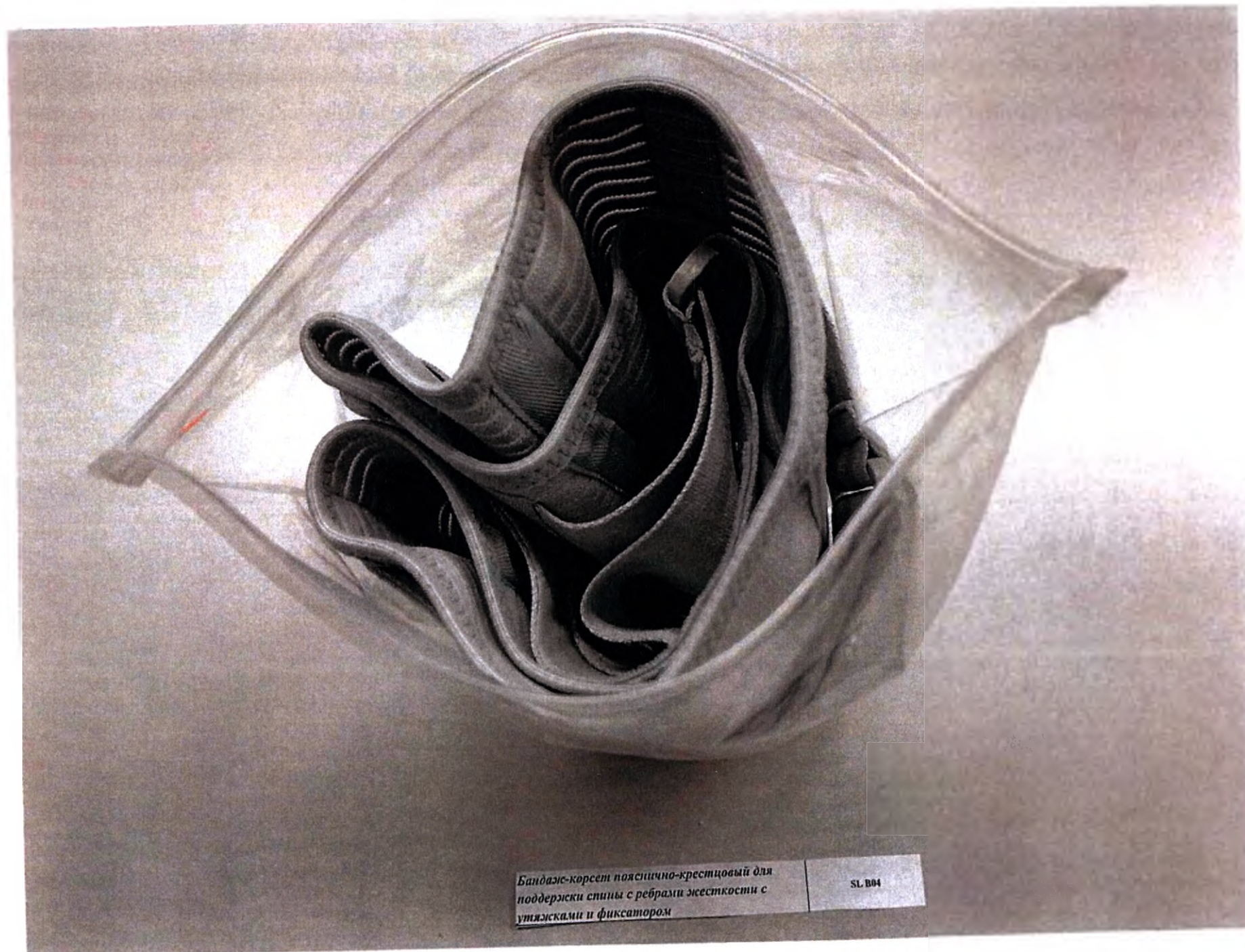

Бандаж-корсет пояснично-крестцовый для
поддержки спины с ребрами жесткости с
утяжками и фиксатором


SL B04

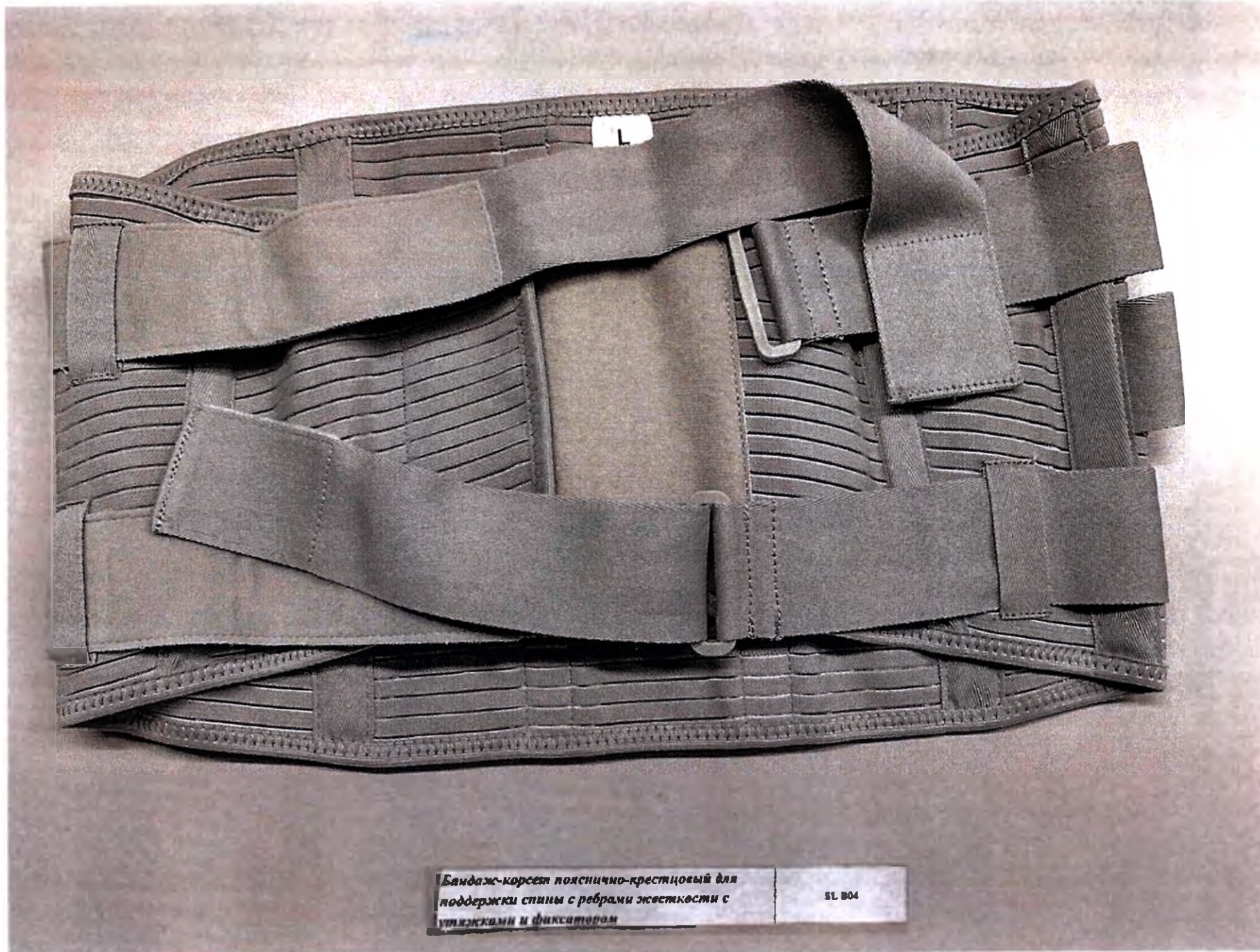

INTERLIN

**БАНДАЖ-ВОРОТНИК для
фиксации шейного отдела
позвоночника**

ML HB-1

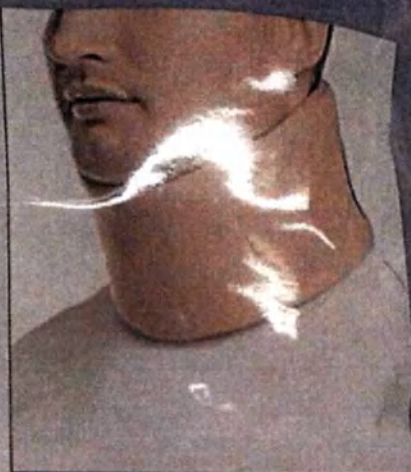

Исходное изделие по ТУ 32-50-72-009-11533047-2015 в соответствии с техническим описанием. Бандаж-воротник для фиксации шейного отдела позвоночника производится в соответствии с ГОСТ 15150-2003.


Производитель: ООО «ИНТЕРЛИН», г. Москва, ул. Давыдовская, д. 15, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 150-20-34, факс: 8 (495) 150-20-35, e-mail: info@interlin.ru.
Почтовый адрес: 125040, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 15, стр. 1, ящик № 1.
Телефон: 8 (495) 150-20-34, факс: 8 (495) 150-20-35, e-mail: info@interlin.ru.
Бандаж-воротник предназначен для фиксации шейного отдела позвоночника и используется в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний шейного отдела позвоночника, а также для фиксации шейного отдела позвоночника.

Бандаж-воротник для фиксации шейного отдела позвоночника ML HB-1
по ТУ 32-50-72-009-11533047-2015 в соответствии с техническим описанием
г. Москва, ул. Давыдовская, д. 15, стр. 1, ящик № 1
Адрес: 125040, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 15, стр. 1, ящик № 1
Дата изготовления: 05.05.2015

Дата изготовления:
05.05.2015

Бандаж-воротник для фиксации шейного
отдела позвоночника

ML HB-1

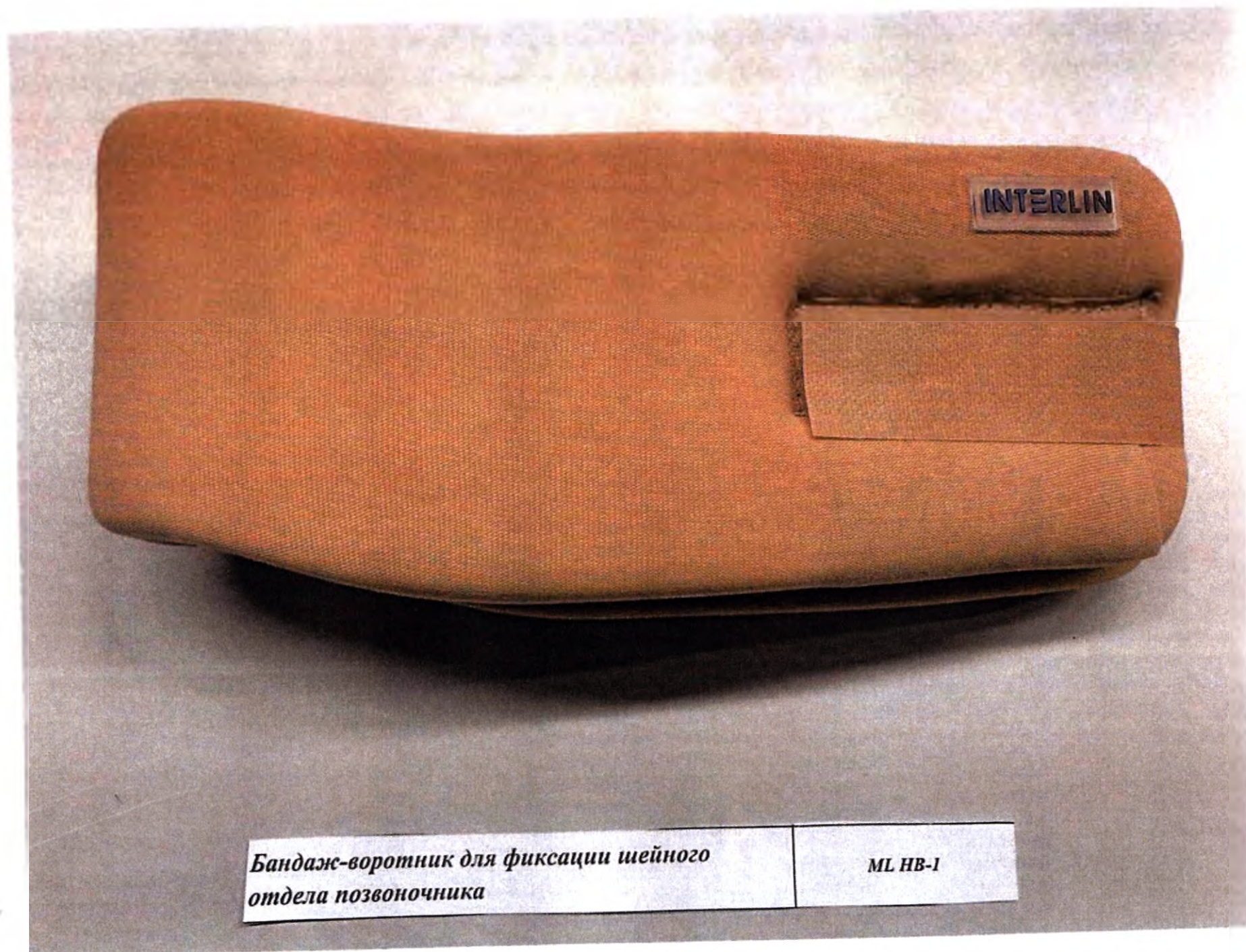

*Бандаж-воротник для фиксации шейного
отдела позвоночника*

ML HB-1



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕДИЦИНСКИЙ ЦИРМИ"
ОГРН 1045000000000, ОГРНИП 1045000000000
Юридический адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литер У-У/1
Фактический адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литер У-У/1
Телефон: 8 (495) 156-26-34, веб-сайт: www.cirm.ru, e-mail: info@cirm.ru
ИНН 50/0000000000, КПП 50/0000000000
Почтовый адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литер У-У/1
Почтовый индекс: 140000
Банковские реквизиты: 40702838938010000000, 40702838938010000000, 40702838938010000000
ОГРН 1045000000000, ОГРНИП 1045000000000
Юридический адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литер У-У/1
Фактический адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литер У-У/1
Телефон: 8 (495) 156-26-34, веб-сайт: www.cirm.ru, e-mail: info@cirm.ru
ИНН 50/0000000000, КПП 50/0000000000
Почтовый адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, литер У-У/1
Почтовый индекс: 140000
Банковские реквизиты: 40702838938010000000, 40702838938010000000, 40702838938010000000
ОГРН 1045000000000, ОГРНИП 1045000000000

Бандаж-воротник для фиксации шейного
отдела позвоночника

ML HB-1

Прощаю 4
Сиренко 20
неделю

