

«УТВЕРЖДАЮ»



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Подгузники для больных, страдающих недержанием TENA Flex Plus medium, large, extra large; TENA Pants Plus small, medium, large; TENA Flex Super medium, large, extra large; TENA Slip Super small, medium, large; TENA Slip Plus extra small, small, medium, large, TENA Slip Extra Small, TENA Pants Basic medium, large, TENA Pants Plus extra small, small, medium, large, extra large

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Поясные дышащие подгузники ТЕНА – универсальный тип подгузников, предназначены как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи.

2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

- Двойной впитывающий слой целлюлозно-волоконной основы с абсорбирующим полимером.
- Специальный трансфер слой (инновационная технология FeelDry™) с системой воронок-клапанов и оптимальное использование суперабсорбента обеспечивает высокую скорость впитывания и сухость.
- Тщательно выверенное расположение впитывающей прокладки внутри подгузника позволяет получить максимальную впитываемость влаги в рабочей зоне.
- Суперабсорбент и распушенная целлюлоза позволяют влаге равномерно распределяться внутри подгузника, не скапливаясь в одном месте.
- Внутренняя поверхность подгузника, соприкасающаяся с кожей, остается сухой на протяжении всего периода использования.
- Высокие влагонепроницаемые барьерчики по бокам предотвращают подтекание мочи и фекалий в покое и при движении.
- Наличие 3-х мягких изогнутых эластичных резинок в зоне анатомических выемок обеспечивают более плотное прилегание в области промежности.
- Анатомические выемки в области промежности обеспечивают максимальный комфорт.
- Многоразовые расширенные застежки-липучки.
- Эластичные боковинки подгузника обеспечивают плотное прилегание и защищают от подтекания при нахождении пациента в горизонтальном положении.

- Общая площадь подгузника минимальна с тем, чтобы не покрывать "лишние" участки кожи, максимально освобождать наружную часть бедра, обеспечивая тем самым лучшую аэрацию.
- Анатомическая форма подгузников адаптирована под любые конституционные особенности, не зависимо от пола, возраста, комплекции.
- Хорошо заметный индикатор (3 желтые полосы на внешней поверхности подгузника), окрашивающийся в синий цвет при необходимости замены подгузника.
- Система нейтрализации запаха (Odour neutralizer).
- Наружный слой состоит из материалов, пропускающих воздух.
- Изготовлен из экологически чистых материалов в соответствии с требованиями ЕЭС.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть и зафиксировать подгузник, зафиксировать застежками – липучками многоцветного крепления. Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Генеральный директор _____

Соколенко Т.Г.

(подпись)

