



Общество с ограниченной ответственностью

г.Москва, ул. Вольная, д. 25, корпус 3
КБ "ЛОКО-банк" (ЗАО), г.Москва.
Р/счет 40702810700090572002
БИК 0445855151
ИНН 7719178003

тел.: 8 (495) 365 41 74

Руководство по эксплуатации медицинского изделия

Обувь ортопедическая на протез

1. Описание

Обувь ортопедическая на протезы (далее обувь) предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) всех половозрастных групп, пользующихся протезами нижних конечностей.

Обувь при односторонней ампутации назначается инвалидам в зависимости от сохранившейся конечности:

- при деформации или дефекте стопы - с целью восстановления или компенсации статико-динамической функции стопы;
- при отсутствии деформации стопы – для профилактики развития статических деформаций стопы.

Обувь при двусторонней ампутации нижних конечностей назначается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы.

Обувь изготавливается повседневной (летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная) и домашней.

2. Рекомендации по эксплуатации

- Всегда правильно подбирайте обувь по размеру и полноте, учитывайте сезонность.
- Новую обувь следует пропитать специальными средствами и почистить сразу после покупки.
- Помните, кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. она не является непромокаемой (как, например, резиновая)
- Не оставляйте на хранение обувь в грязном состоянии, т.к. это может стать причиной изменения цвета, а также привести к деформации обуви.
- Грязную обувь сначала следует очистить специальной щеткой, влажной салфеткой или губкой, не давая грязи впитаться в кожу. Лишь потом можно ухаживать за кожей.
- Никогда не сушите мокрую обувь на нагретых поверхностях, или вблизи открытого огня. Сушите обувь при комнатной температуре, используя специальные распорки, или предварительно плотно набив её бумагой. Просушивайте съёмные вкладные стельки.
- Чистите обувь, по крайней мере, раз в неделю.
- Обувь из нубука и замши следует чистить в сухом состоянии с помощью специальной щётки.
- Кожаную обувь очищают от пыли и грязи при помощи влажной салфетки, смоченной в мыльном растворе.

- После просушивания обувь необходимо обработать. Кожаную обувь обрабатывайте кремом, обувь из нубука и замши - спреем с водоотталкивающим эффектом.
- Не рекомендуется ходить в обуви по гравию, щебню, поверхностям, где имеется техническая соль, избегайте воздействия на материал верха обуви щелочей, кислот и других активных растворителей.
- Не допускайте чрезмерных механических нагрузок, ударов, порезов, которые, как правило, приводят к отрыву подошвы, фурнитуры.
- При обувании обязательно расшнуровывайте шнурки, застёжки и всегда пользуйтесь рожек для обуви, никогда не снимайте обувь, наступая на задник.
- Не надевайте закрытую обувь на голую ногу, т.к. это не гигиенично и может быть причиной появления мозолей, дефектов кожи и мелких ран
- Изменение цвета верха обуви при попадании воды не является дефектом
- Следует учитывать, что при повышенной потливости ног или при намокании, обувь может незначительно краситься изнутри.

3. Требования охраны окружающей среды

Изделие не подлежит обязательной утилизации.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью

2 лист а

«18» декабря 2013
Ген. директор ООО «ЖТП»
А.Н. Ермаков

