



Общество с ограниченной ответственностью

420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Галеева 12 Тел./факс: (843)272-10-04
ИНН 1660033075 КПП 166001001 ОКПО 48675428 ОКОНХ 19320
Р/счет: 40702810962190100997 в банке «Татарстан» № 8610 СБ РФ г. Казани БИК 049205603
К/счет: 30101810600000000603 СОСБ № 6669/0000 СБ РФ г. Казани.

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
ШТОПОРОВ Ю. В.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ОПОРА»

Штопоров Ю. В.



Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный БН6 – 65 Памятка по пользованию

Бандаж на голеностопный сустав полуразъемный БН6 – 65 изготавливается по ТУ 9396-083-55220088-2006 (далее бандаж).

Бандаж предназначен для поддержания и фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после травм связочного аппарата при нестабильности голеностопного сустава.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж изготавливается из ткани «Ортопрен» или башмачной резины с фиксирующими застежками «Контакт».

Бандаж может быть изготовлен из одной или нескольких деталей.

Бандаж в области голени полуразъемный с застежкой «Молния» или застежкой текстильной «Контакт», циркулярный в области плюсны и имеет отверстие для пятки.

Фиксация бандажа на нижней конечности потребителя должна осуществляться с помощью застежки текстильной «Контакт».

Бандаж имеет дополнительное усиление лентой от голени к стопе.

НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНДАЖОМ

Бандаж надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажный носок.

Фиксация бандажа на нижней конечности осуществляется с помощью застежки текстильной «Контакт» в области голени.