



ОПОРА

Общество с ограниченной ответственностью

420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б.Галеева, 12 Тел./факс: (843) 272-10-04

E-mail: opora_kazan@mail.ru ИНН 1660033075 КПП 166001001 ОКПО 48675428 ОКОНХ 19320

Р/счет: 40702810962190100997 в Банке «Татарстан» №8610 СБ РФ г. Казани БИК 049205603

К/счет: 30101810600000000603 СОСБ №6669/0000 СБ РФ г. Казань

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Опора»

Ю.В.Штопоров

«29» мая 2009 г.

Памятка по пользованию



Петля для вытяжения шейных и грудных позвонков (Петля Глиссона)

Петля для вытяжения шейных и грудных позвонков (Петля Глиссона) изготавливается по ТУ 9396-005-48675428-2009 (далее Петля Глиссона).

Петля Глиссона предназначена для вытяжения шейных и грудных позвонков при лечении заболеваний и переломов позвоночника, при наложении гипсовых

корсетов или снятия гипсовых слепков для изготовления

ортопедических корсетов, входит в состав тренажеров и аппаратов для проведения осевого дозированного вытяжения, используется в комплексе упражнений лечебной физкультуры.

Петля Глиссона изделие массового изготовления и может применяться в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150 от 01.01.71.

Петля Глиссона соответствует требованиям ТУ 9396-005-48675428-2009.

Конструкция

Петля Глиссона изготовлена из трех слоев материала, сшитых между собой в затылочной и подбородочных частях и окантованных по всему контуру хлопчатобумажной тесьмой. Наружные слои петли Глиссона изготовлены из ткани плащевой, внутренний слой из бязи. Верхняя часть петли Глиссона имеет два полукольца, к которым прикладывается усилие вытяжения.

Затылочная и подбородочная части имеют штрипки и пряжки для фиксации петли Глиссона на голове. Пряжки и полукольца пришиты к изделию при помощи капроновых лент.

Надевание и пользование бандажом

Петлю Глиссона надевают на пациента и фиксируют в положении «стоя» или «сидя» таким образом, чтобы штрипки и пряжки соединяли подбородочную и затылочную части по боковым поверхностям головы. Верхняя часть Петли Глиссона с двумя полукольцами, в зависимости от методики вытяжения, крепится к подвесному устройству или к специальному устройству в составе аппаратов и тренажеров для скелетного вытяжения, к которым прикладывается усилие вытяжения. Петля Глиссона плотно прилегает к голове, не оказывая болезненного давления и не смещается относительно головы. Конструкция Петли Глиссона обеспечивает удобство пользования, надевания и снятия. Петля Глиссона выдерживает нагрузку вытяжения и время ее приложения по медицинским показаниям.

Уход за изделием

При пользовании Петлей Глиссона следует оберегать ее от механических повреждений. В случае загрязнения стирать вручную в теплой воде 40 °С с добавлением нейтральных моющих средств, не содержащих хлора или детским мылом. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла, не гладить.

Ремонт Петли Глиссона

ООО «Опора» гарантирует соответствие качества Петли Глиссона требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Петли Глиссона - один месяц со дня выдачи пользователю. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие изготовитель производит замену изделия бесплатно.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Петля Глиссона – 1 шт.;
- памятка по пользованию-1 экз.
- упаковка-1 шт.

Директор  В. И. Мещеряков
ООО «Опора»