

Избегайте использования загрязненных инструментов и аппаратуры.

После использования тщательно закупоривайте контейнеры.

При культуральных работах не допускается прием пищи, питье или курение.

Тщательно промывайте загрязненные руки и одежду.

В случае проливания или просыпания поступайте в соответствии с указаниями по мерам безопасности.

При воздействии реактива на организм немедленно обратитесь за медицинской помощью, оказав пострадавшему первую помощь, и наблюдайте за ним до прихода врача.

Описание и характеристики.

1. Набор реагентов *in vitro* для проточной цитометрии Бурсттест (Bursttest).



Набор реагентов для количественного определения активности окислительного взрыва моноцитов и гранулоцитов в гепаринизированной цельной крови человека.

Набор реагентов содержит флуорогенный субстрат, стимуляторы и реагенты для проведения 100 тестов

Состав набора

1) 1 флакон (2 мл) стабилизированной и опсонизированной суспензии *E.coli*, однократный раствор, готовый к использованию, 1×10^9 в мл.