

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Медснаб-Груп»

Г.Э. Хайрулин

2012 г.




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ

«МСГ»

по ТУ 9452-001-56718502-2012

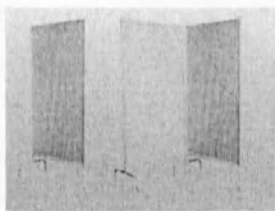

Производства ООО «Медснаб-Груп», Россия.

Содержание

Ширмы медицинские.....	1
Односекционные ширмы.....	1
Двухсекционные ширмы.....	2
Трехсекционные ширмы.....	2 - 3
Схема сборки.....	3
Инструкция по сборке.....	3
Штативы для длительных вливаний.....	4 - 5
Схема сборки.....	5
Инструкция по сборке.....	5
Столики инструментальные.....	6 - 10
Схема сборки.....	10
Инструкция по сборке.....	10
Транспортировка и хранение.....	10
Чистка и дезинфекция.....	10
Гарантийные обязательства.....	10 - 11

Оборудование медицинское для кабинетов и палат «МСГ» (в дальнейшем – столики, штативы, ширмы, оборудование), предназначенное для оснащения медицинских учреждений.

Оборудование предназначено для использования в процедурных кабинетах, реанимационных палатах, на постах медсестер и др. кабинетах медицинских учреждений.

Перечень видов и исполнений оборудования выпускаемый ООО «Медснаб-Груп»:


Ширмы медицинские.

Масса одной секции не более 3 кг.

Средний срок службы ширмы 8 лет.

Односекционные ширмы

Ширма медицинская стационарная ШМ-01-«МСГ» без колес.

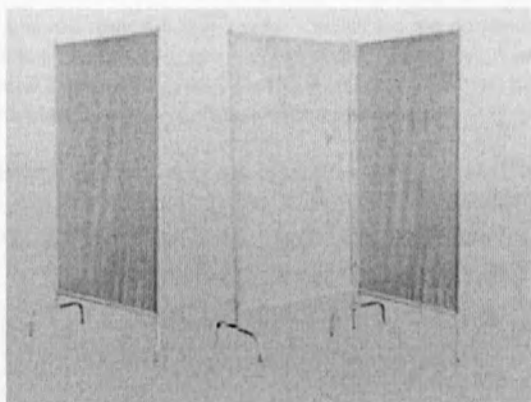

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 740 мм.


Высота: 1800 мм.

Наличие колес: без колес.

Полотнище: ПВХ.

Ширма медицинская стационарная односекционная ШМ-01-«МСГ» изготовлена из стальной профильной трубы с полимерным покрытием. Ширма медицинская стационарная односекционная ШМ-01-«МСГ» выпускается на полиэтиленовых заглушках. Полотнище ширмы изготовлено из пленки ПВХ, легко поддается обработке.

Ширма медицинская передвижная ШМ-01П-«МСГ», на колесах.

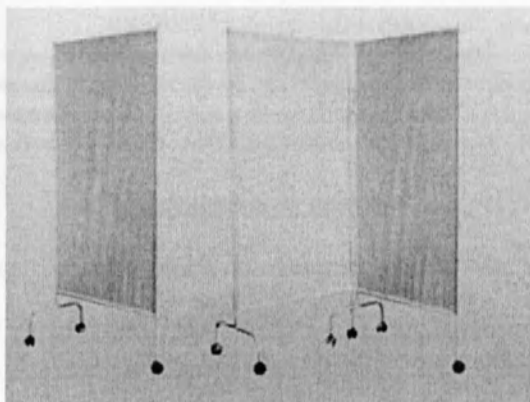

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 740 мм.

Высота: 1800 мм.

Наличие колес: на колесах.


Диаметр колес: 50 мм.

Полотнище: ПВХ

Ширма медицинская передвижная, односекционная, на колесах ШМ-01П-«МСГ» изготовлена из стальной профильной трубы с полимерным покрытием. Ширма медицинская односекционная ШМ-01П-«МСГ» выпускается на прорезиненных колесах, не оставляющих следов на полу. Колеса ширмы ШМ-01П-«МСГ» снабжены тормозным устройством. Полотнище ширмы изготовлено из пленки ПВХ, легко поддается обработке.

Двухсекционные ширмы

Ширма медицинская стационарная ШМ-02-«МСГ» без колес.

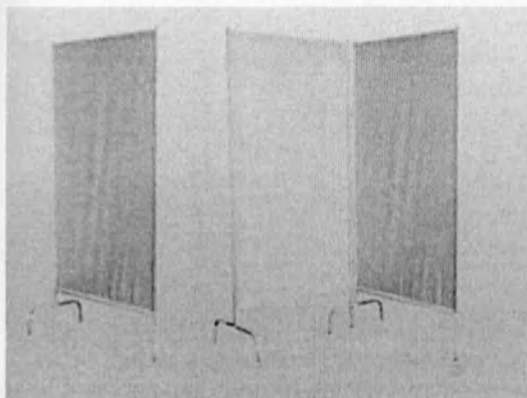

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 1480 мм.


Высота: 1800 мм.

Наличие колес: без колес.

Полотнище: пленка ПВХ.

Ширма медицинская стационарная двухсекционная ШМ-02-«МСГ» изготавливается с применением каркаса из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия. Секции ширмы ШМ-02-«МСГ» соединяются между собой обжимными муфтами. Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции. Ширма медицинская двухсекционная ШМ-02-«МСГ» выпускается на полиэтиленовых заглушках. Полотно ширмы изготовлено из пленки ПВХ (поливинилхлорид). Поддается дезинфекции.

Ширма медицинская передвижная ШМ-02П-«МСГ», на колесах.

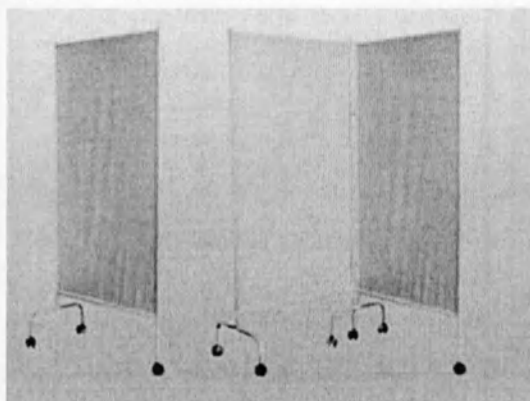

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 1480 мм.

Высота: 1800 мм.

Наличие колес: на колесах.


Диаметр колес: 50 мм.

Полотнище: пленка ПВХ.

Ширма медицинская передвижная, двухсекционная, на колесах ШМ-02П-«МСГ» изготавливается с применением каркаса из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия. Секции ширмы ШМ-02П-«МСГ» соединяются между собой обжимными муфтами. Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции. Ширма медицинская двухсекционная ШМ-02П-«МСГ» выпускается на прорезиненных колесах, не оставляющих следов на полу. Колеса ширмы ШМ-02П-«МСГ» снабжены тормозным устройством. Полотно ширмы изготовлено из пленки ПВХ (поливинилхлорид).

Трехсекционные ширмы

Ширма медицинская стационарная ШМ-03-«МСГ» без колес

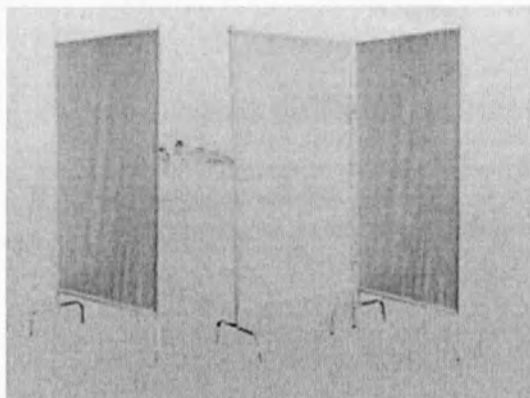

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 2220 мм.


Высота: 1800 мм.

Наличие колес: без колес.

Полотнище: пленка ПВХ.

Ширма медицинская стационарная трехсекционная ШМ-03-«МСГ» изготавливается с применением каркаса из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия. Секции ширмы ШМ-03-«МСГ» соединяются между собой обжимными муфтами. Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции. Ширма медицинская трехсекционная ШМ-03-«МСГ» выпускается на полиэтиленовых заглушках. Полотно ширмы изготовлено из пленки ПВХ (поливинилхлорид). Поддается дезинфекции.

Ширма медицинская передвижная ШМ-03П-«МСГ», на колесах.

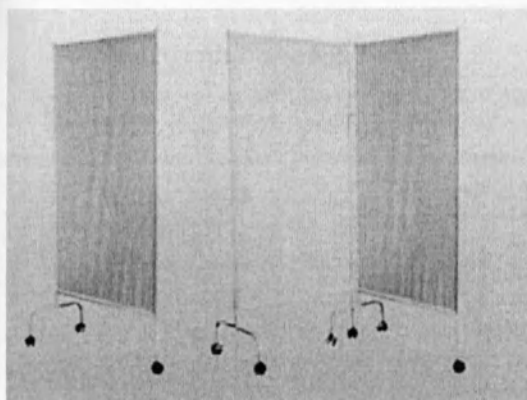

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина: 2220 мм.

Высота: 1800 мм.


Наличие колес: на колесах.

Диаметр колес: 50 мм.

Полотнище: пленка ПВХ.

Ширма медицинская передвижная, трехсекционная, на колесах ШМ-03П-«МСГ» изготавливается с применением каркаса из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия. Секции ширмы ШМ-03П-«МСГ» соединяются между собой обжимными муфтами. Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции. Ширма медицинская трехсекционная ШМ-03П-«МСГ» выпускается на прорезиненных колесах, не оставляющих следов на полу. Колеса ширмы ШМ-03П-«МСГ» снабжены тормозным устройством. Полотно ширмы изготовлено из пленки ПВХ (поливинилхлорид).

Схема сборки.

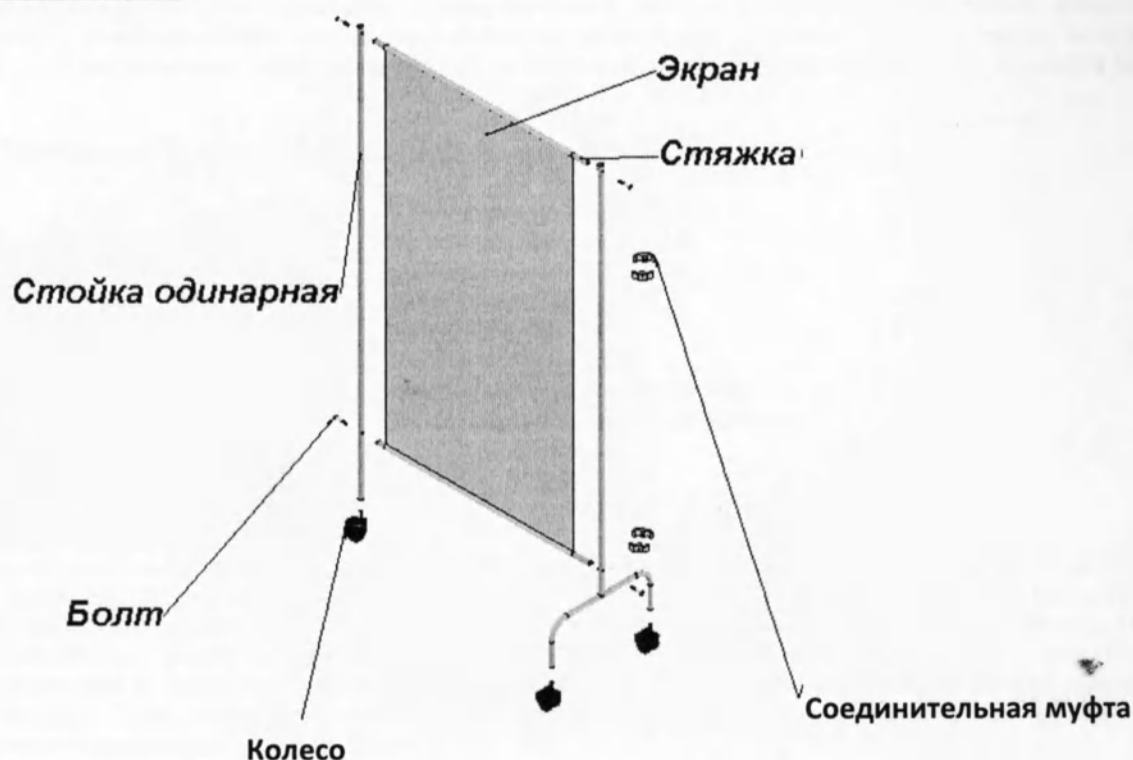

Инструкция по сборке ширмы медицинской.

1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. Прикрепить колеса к стойкам.
4. Соединить секции при помощи соединительных муфт.

Штативы медицинские.

Масса не более 2,3 кг.

Средний срок службы штатива 7 лет.

Штатив для длительных вливаний стационарный ШДВ-02-«МСГ», без колес.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид позиции: фиксированный.

Диаметр основания: 700 мм.

Длина ножек: 300 мм.

Высота: 1800 мм.


Основание: пятиопорное.

Колеса: без колес, на полиэтиленовых заглушках.

Тип конструкции: конструкция разборная.

Штатив медицинский для длительных вливаний, стационарный ШДВ-2 «МСГ», предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур двум пациентам одновременно. Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки, основания и флаконодержателя. Флаконодержатель можно устанавливать на удобной для проведения процедур высоте, по средству фиксации его на стойки с помощью ослабления и затягивания фиксирующей гайки. Держатель флакона перемещается по всей стойке.

Штатив для длительных вливаний передвижной ШДВ-03-«МСГ», на колесах.

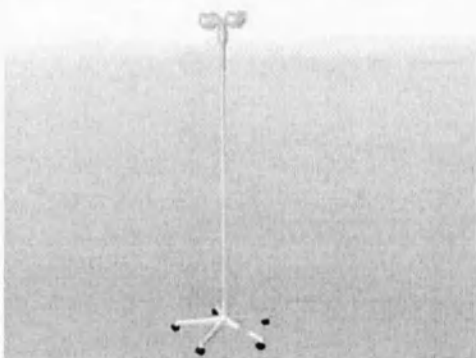

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид позиции: фиксированный

Диаметр основания: 700 мм.

Длина ножек: 300 мм.

Высота: 1850 мм.


Основание: пятиопорное.

Колеса: на колесах, диаметр 50 мм.

Тип конструкции: конструкция разборная

Штатив медицинский для длительных вливаний, передвижной ШДВ-3 «МСГ», предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур двум пациентам одновременно. Основание штатива оборудовано самоориентирующимися колесами. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством. Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки, основания и флаконодержателя. Флаконодержатель можно устанавливать на удобной для проведения процедур высоте, по средству фиксации его на стойки с помощью ослабления и затягивания фиксирующей гайки. Держатель флакона перемещается по всей стойке.

Штатив для длительных вливаний стационарный телескопический ШДВ-02Т-«МСГ», без колес.

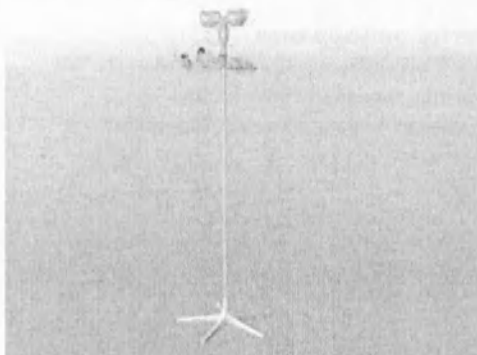

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид позиции: телескопический.

Диаметр основания: 700 мм.

Длина ножек: 300 мм.

Высота: 2000 мм.

Основание: пятиопорное.


Колеса: без колес, на полиэтиленовых заглушках.

Тип конструкции: конструкция разборная.

Штатив для длительных вливаний стационарный телескопический ШДВ-02Т-«МСГ», предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур двум пациентам одновременно. Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки, основания и флаконодержателя. Флаконодержатель можно устанавливать на удобной для проведения процедур высоте, по средству фиксации его на стойки с помощью ослабления и затягивания фиксирующей гайки.

Телескопическое устройство стойки позволяет регулировать высоту от 1800 до 2000 мм.

Штатив для длительных вливаний передвижной телескопический ШДВ-03Т-«МСГ», на колесах.

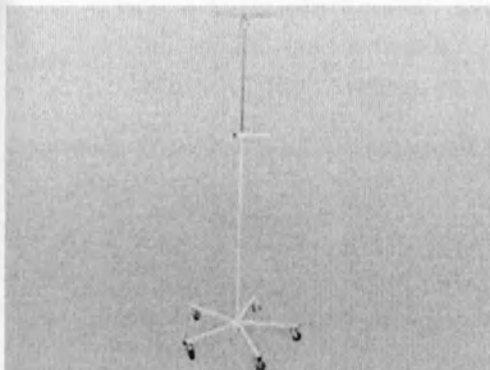


Вид позиции: телескопический.
Диаметр основания: 700 мм.
Длина ножек: 300 мм.
Высота: 2050 мм.
Основание: пятиопорное.
Колеса: на колесах, диаметр 50 мм.
Тип конструкции: конструкция разборная.

Штатив медицинский для длительных вливаний, передвижной ШДВ-ЗТ «МСГ», предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур двум пациентам одновременно. Основание штатива оборудовано самоориентирующимися колесами. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством. Штатив представляет сборно-разборную конструкцию, состоящую из стойки, основания и флакодержателя. Флакодержатель можно устанавливать на удобной для проведения процедур высоте, по средству фиксации его на стойки с помощью ослабления и затягивания фиксирующей гайки.

Телескопическое устройство стойки позволяет регулировать высоту от 1800 до 2050 мм.

Схема сборки.

Общий вид штатива приведен на рисунке 1.

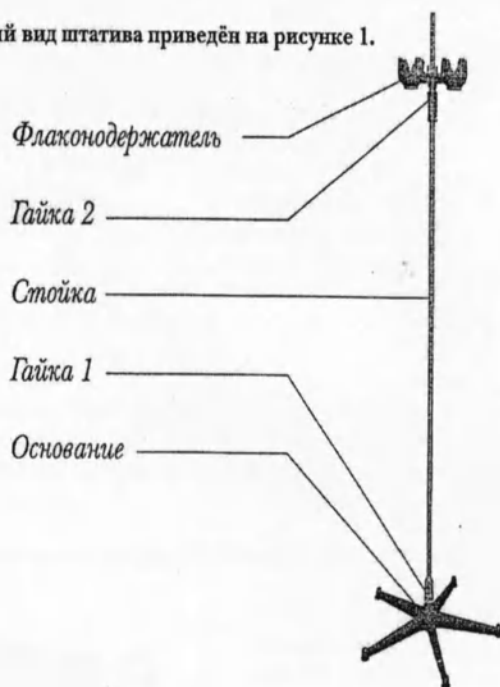


Инструкция по сборке штатива для длительных вливаний.

1. Вставьте стойку в основание и зафиксируйте с усилием гайкой 1.
 2. Наденьте сверху флакодержатель и зафиксируйте гайкой 2 на необходимой высоте.
- При необходимости можно ослабить гайку 2 и переместить флакодержатель на нужную высоту.

Столики инструментальные.

Все инструментальные столики массой не более 16 кг, в зависимости от модели. Максимальная нагрузка на полку – 10 кг. Средний срок службы – 8 лет.

Столик инструментальный стационарный СИ-071-«МСГ», без колес.

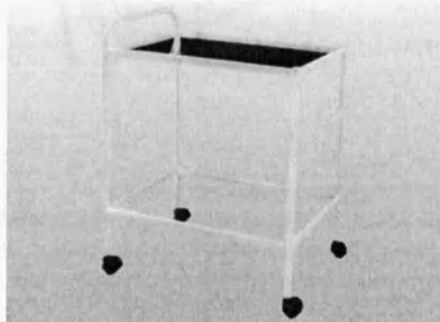

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 1200 мм.
Ширина: 600 мм.
Высота: 900 мм.
Полки: металл.
Количество полок: 1.
Количество ручек: 1.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: нет.

Столик инструментальный стационарный СИ-071-«МСГ», без колес, с одной металлической полкой. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полка столика инструментального стационарного СИ-071-«МСГ» изготавливаются из нержавеющей стали. Столик инструментальный стационарный СИ-071-«МСГ» выпускается на полиэтиленовых заглушках.

Столик инструментальный передвижной СИ-01-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: стекло.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-01-«МСГ», на колесах, с двумя стеклянными полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-01-«МСГ» изготавливаются из стекла. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-02-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: стекло/нержавеяка.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 1.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-02-«МСГ», на колесах, с двумя полками со стеклянной и металлической полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-02-«МСГ» изготавливаются из стекла и нержавеющей стали. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-04-«МСГ», на колесах.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: нержавейка.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 1.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-04-«МСГ», на колесах, с двумя металлическими полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-04-«МСГ» изготавливаются из нержавеющей стали. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-051-«МСГ», на колесах.

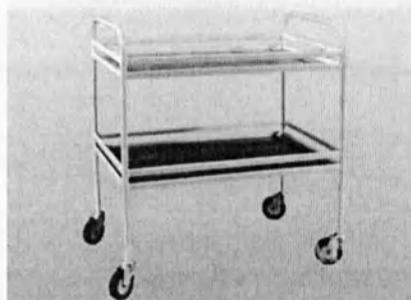


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 800 мм.
Ширина: 500 мм.
Высота: 900 мм.
Полки: стекло.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: по всему периметру.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-051-«МСГ», на колесах, с двумя стеклянными полками с бортиками. Каркас столика сварной, выполнен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-051-«МСГ» изготавливаются из стекла. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-052-«МСГ», на колесах.

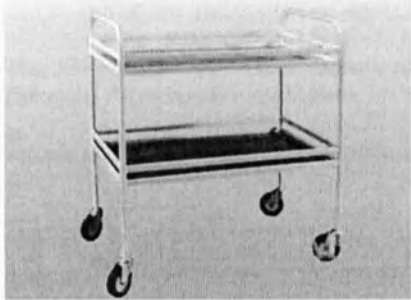


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 800 мм.
Ширина: 500 мм.
Высота: 900 мм.
Полки: стекло / нержавейка.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: по всему периметру.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-052-«МСГ», на колесах, с двумя полками, стеклянной и металлической, с бортиками. Каркас выполнен из тонкостенной трубы, с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-052-«МСГ» изготовлены из нержавеющей стали и стекла. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-053-«МСГ», на колесах.

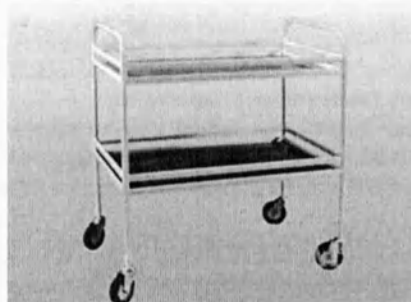

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 800 мм.
Ширина: 500 мм.
Высота: 900 мм.
Полки: нержавейка.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: по всему периметру.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-053-«МСГ» с двумя металлическими полками, с бортиками. Каркас столика сварной, выполнен из тонкостенной трубы, с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального

передвижного СИ-053-«МСГ» изготовлены из нержавеющей стали. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный стационарный СИ-072-«МСГ», без колес.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 1200 мм.
Ширина: 600 мм.
Высота: 900 мм.
Полки: нержавейка.
Количество полок: 2.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: нет.

Столик инструментальный стационарный СИ-072-«МСГ», без колес, с двумя металлическими полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального стационарного СИ-072-«МСГ» изготовлены из нержавеющей стали. Столик инструментальный стационарный СИ-072-«МСГ» выпускается на полиэтиленовых заглушках.

Столик инструментальный передвижной СИ-031-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: стекло.
Количество полок: 3.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-031-«МСГ», на колесах, с тремя стеклянными полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-031-«МСГ» изготавливаются из стекла. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-032-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: стекло / стекло / нержавейка.
Количество полок: 3.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-032-«МСГ», на колесах, с тремя полками, двумя стеклянными и одной металлической. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-032-«МСГ» изготавливаются из стекла и нержавеющей стали. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-033-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: стекло / нержавейка / нержавейка.
Количество полок: 3.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-033-«МСГ», на колесах, с тремя полками, одной стеклянной и двумя металлическими. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-033-«МСГ» изготавливаются из стекла и нержавеющей стали. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-034-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 740 мм.
Ширина: 450 мм.
Высота: 830 мм.
Полки: нержавейка.
Количество полок: 3.
Количество ручек: 2.
Наличие бортика: нет.
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-034-«МСГ», на колесах, с тремя металлическими полками. Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полки столика инструментального передвижного СИ-034-«МСГ» изготавливаются из нержавеющей стали. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу, снабжены тормозным устройством.

Столик инструментальный передвижной СИ-06-«МСГ», на колесах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 630 мм.
Ширина: 410 мм.
Высота: регулируемая 900-1200 мм.
Полки: нержавейка.
Количество полок: 1 (типа «Гусь»)
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-06-«МСГ», на колесах, с одной металлической полкой, типа «Гусь». Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полка столика инструментального передвижного СИ-06-«МСГ» изготавливается из нержавеющей стали. Столик имеет три колёсные опоры, одна из которых с тормозом. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу.

Столик инструментальный передвижной, поворотный СИ-06П-«МСГ», на колесах.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 630 мм.
Ширина: 410 мм.
Высота: 900 мм.
Полки: нержавейка.
Количество полок: 1 (типа «Гусь»)
Диаметр колес: 50 мм.

Столик инструментальный передвижной СИ-06П-«МСГ» поворотный, на колесах, с одной металлической полкой, типа «Гусь». Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением полимерного покрытия. Полка столика инструментального передвижного СИ-06П-«МСГ» изготавливается из нержавеющей стали. Столик имеет три колёсные опоры, одна из которых с тормозом. Колеса ошипованы темной резиной, не оставляющей следов на полу.

Схема сборки.

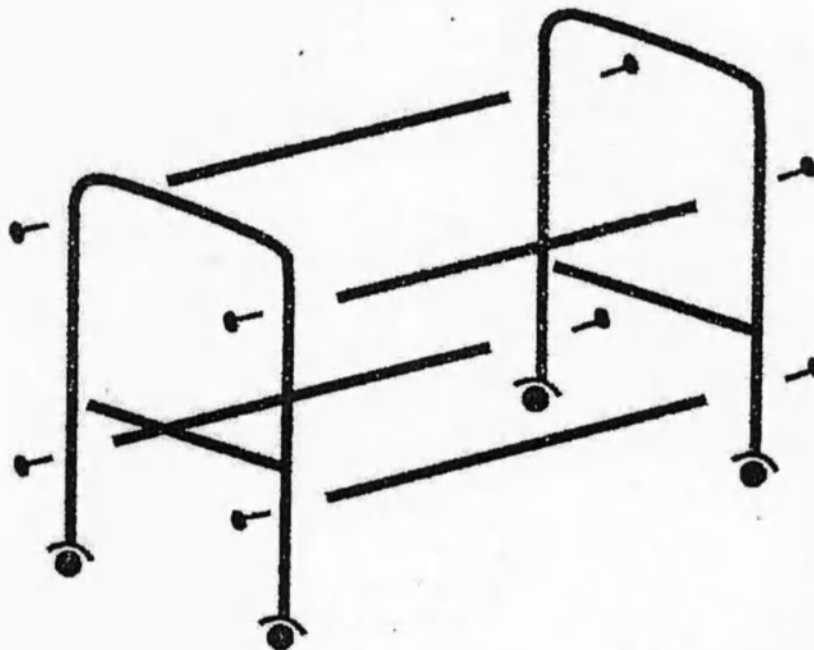

Инструкция по сборке столика инструментального.

1. Совместите верхние отверстия одной из стоек с отверстиями поперечин и наживите винтами.
2. Повторите операцию с другой стороны.
3. Также зафиксируйте нижние поперечины.
4. Затяните с достаточным усилием все винты.
5. Снимите защитную пленку с полок.
6. Вложите полки в рамки, образовавшиеся в процессе сборки.

Транспортировка и хранение.

Оборудование транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования оборудования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Оборудование должно храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Чистка и дезинфекция.

Наружные поверхности оборудования должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% р-ром хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 24 месяцев при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем, но не позднее полугода с даты изготовления.

Замечания о дефектах, обнаруженных во время эксплуатации изделия, а также пожелания по усовершенствованию его конструкции, просим сообщать по адресу: ООО «Медснаб-Груп», 105523, Москва, Щелковское шоссе, д.100.



Генеральный директор
ООО "Медснаб-Групп"
Г.З. Кабуллин

