

«УТВЕРЖДАЮ»
Ген. директор ООО «Фирма» «ВИПС-МЕД»
Губин М.М.
«23» «мая» 2009 г.



Инструкция по применению концентрата проявителя "Ренмед-К"

Концентрат проявителя "Ренмед-К" предназначен для приготовления рабочего раствора проявителя, применяемого для ручной обработки медицинских радиографических и флюорографических пленок.

Для приготовления и хранения раствора проявителя, а также проведения в нем обработки пленок следует использовать емкости из коррозионно-стойких материалов.

Инструкция по приготовлению рабочего раствора

В емкость для приготовления раствора наливают водопроводную воду с температурой 20-40°C в количестве 1/2 объема, указанного на упаковке, и вливают концентрат из канистры. Если на дне канистры имеется осадок, его необходимо полностью растворить в небольшом количестве теплой воды и добавить вготавливаемый раствор. После этого доводят объем раствора водой до значения, указанного на упаковке, и тщательно перемешивают. Приготовленный раствор должен быть прозрачным и почти бесцветным. Он может быть использован для работы сразу после приготовления.

Инструкция по использованию

Обработку пленок в проявителе можно проводить при температуре раствора от 17 до 28°C. Оптимальное время проявления медицинских радиографических и флюорографических пленок при 20°C составляет от 4 до 6 минут, при 17°C - от 6 до 9 минут, при 24°C - от 2 до 3 минут, при 28°C - 1-2 минуты.

В 1 л раствора проявителя без применения восстановителя можно обработать до 1 м² пленки. При регулярном добавлении восстановителя в проявитель в 1 л рабочего раствора можно проявить не менее 2 м² пленки.


Неиспользованный раствор проявителя можно хранить в заполненной доверху и герметично закрытой емкости в затемненном месте при температуре от 5 до 25°C в течение 15 суток.

Требования безопасности

Все работы с концентратами и растворами рекомендуется проводить в резиновых перчатках и фартуках. При случайном попадании концентрата или раствора проявителя на кожу, слизистые оболочки глаз и носоглотки, пораженные участки необходимо промыть большим количеством воды.

Утилизация отработанных растворов

Отработанный раствор проявителя рекомендуется сдавать в соответствующую службу утилизации.

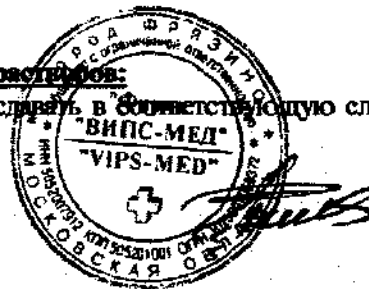

Инструкция по применению концентрата фиксажа "Ренмед-К"

Концентрат фиксажа "Ренмед-К" предназначен для приготовления рабочего раствора фиксажа, применяемого для ручной обработки медицинских радиографических и флюорографических пленок.

Для приготовления и хранения раствора фиксажа, а также проведения в нем обработки пленки следует использовать емкости из коррозионно-стойких материалов.

Инструкция по приготовлению рабочего раствора

В сосуд наливают водопроводную воду с температурой 20-40°C в количестве 1/2 объема, указанного на упаковке, и вливают концентрат фиксажа из канистры. Если на дне канистры имеется осадок, его необходимо полностью растворить в небольшом количестве теплой воды и добавить в приготавливаемый раствор. После этого доводят объем раствора водой до значения, указанного на упаковке и тщательно перемешивают. Приготовленный раствор должен быть прозрачным и почти бесцветным. Он может быть использован для работы сразу после приготовления.

Инструкция по использованию

Обработку пленок в фиксаже рекомендуется проводить при температуре раствора от 17 до 23°C. Время фиксирования в свежем растворе при 20°C составляет около 2 минут для маммографических и радиографических пленок общего назначения, около 3 минут для флюорографических пленок и около 4 минут для дентальных пленок. При понижении температуры раствора, а также по мере его истощения в процессе работы время обработки пленок следует увеличить.

В 1 л раствора фиксажа можно обработать до 2 м² пленки.

Неиспользованный раствор фиксажа можно хранить в закрытой емкости при температуре от 5 до 25°C в течение 30 суток.

Требования безопасности:

Все работы с концентратами и растворами рекомендуется проводить в резиновых перчатках и фартуках. При случайном попадании концентрата или раствора фиксажа на кожу, слизистые оболочки глаз и носоглотки, пораженные участки необходимо промыть большим количеством воды.

Утилизация отработанных растворов:

Отработанный раствор фиксажа следует сдавать в службу приема серебросодержащих отходов.



Ген. директор ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»



Губин М.М.

«23» «мая» 2009 г.

Инструкция по применению концентрата восстановителя проявителя "Ренмед-К"

Концентрат восстановителя проявителя "Ренмед-К" предназначен для приготовления раствора, восстанавливающего свойства проявителя "Ренмед-К" при ручной обработке медицинских радиографических и флюорографических плёнок.

Для приготовления и хранения раствора проявителя, а также проведения в нем обработки пленок следует использовать емкости из коррозионно-стойких материалов.

Инструкция по приготовлению рабочего раствора

В емкость для приготовления раствора наливают водопроводную воду с температурой 20-40°C в количестве 1/2 объема, указанного на упаковке, и вливают концентрат из канистры. Если на дне канистры имеется осадок, его необходимо полностью растворить в небольшом количестве теплой воды и добавить вготавливаемый раствор. После этого доводят объем раствора водой до значения, указанного на упаковке, и тщательно перемешивают. Приготовленный раствор должен быть прозрачным и почти бесцветным. Он может быть использован для работы сразу после приготовления.

Инструкция по использованию

Раствор восстановителя проявителя рекомендуется вводить в бак с проявителем "Ренмед-К" ежедневно по мере выноса последнего. Средняя норма расхода раствора восстановителя - 0,2 л на 1 м² пленки.

При регулярном добавлении восстановителя в проявитель в 1 л рабочего раствора можно обработать до 2 м² пленки.

Неиспользованный раствор восстановителя проявителя можно хранить в заполненной доверху и герметично закрытой емкости в затемненном месте при температуре от 5 до 25°C в течение 15 суток. Допускается хранение раствора в негерметичной посуде в течение 4-5 суток.

Требования безопасности:

Все работы с концентратами и растворами рекомендуется проводить в резиновых перчатках и фартуках. При случайном попадании концентрата или раствора восстановителя проявителя на кожу, слизистые оболочки глаз и носоглотки, пораженные участки необходимо промыть большим количеством воды.

