





Для укладки в положении "на спине" необходимы фигурные подушки-подголовники, например, типа ТИМО (сплошной вспененный пластик, подходят для облучения сверху-сбоку),



или SILVERMAN (формованные из тонкого листового пластика, подходят для облучения с любой стороны).

Для положений "на животе" и "на боку" применяются специальные базовые пластины и/или фигурные подушки (подголовники):

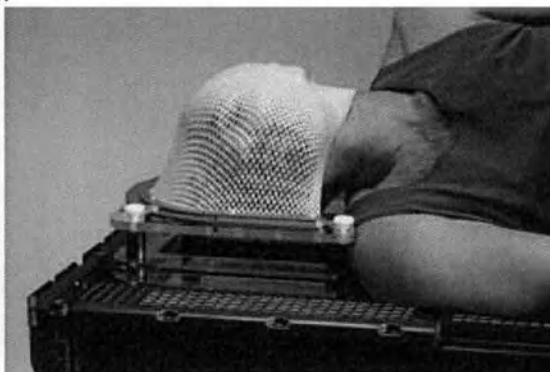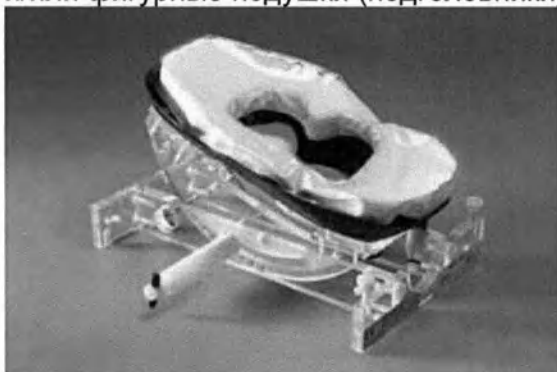

Порядок применения системы иммобилизации

Ниже описан порядок изготовления индивидуального термопластического фиксатора, с помощью которого пациент (часть его тела) может быть воспроизводимо зафиксирован относительно лечебного стола. Обратите внимание, что термопластические фиксаторы предназначены для использования только одним пациентом в течение его курса лечения, после чего фиксаторы подлежат утилизации в соответствии с действующими правилами. Многократно используемые компоненты системы (базовые пластины, прижимные рамки, фигурные подушки, матрасы, и др.) необходимо содержать в чистоте, регулярно проводите их очистку с использованием мягких моющих и антисептических средств. Не пользуйтесь щелочами и органическими растворителями!

Установите на лечебный стол требуемую базовую пластину, в соответствии с локализацией опухоли. При необходимости зафиксируйте базовую пластину на столе, например, с помощью фиксирующей планки, ремней, струбцин или т.п. Некоторые типы базовых пластин имеют специальные крепления, с помощью которых пластина жестко закрепляется на торце стола.

Уложите пациента на базовую пластину в нужном положении, при этом подберите соответствующий подголовник, подушку, подкладку и т.п. В целях гигиены, возможно использование индивидуальных или одноразовых простыней, салфеток, прокладок и т.п. При необходимости, применяйте по своему усмотрению рукоятки и опоры для отведения рук, подкладывайте фигурные подушки и индивидуальные матрасы под