


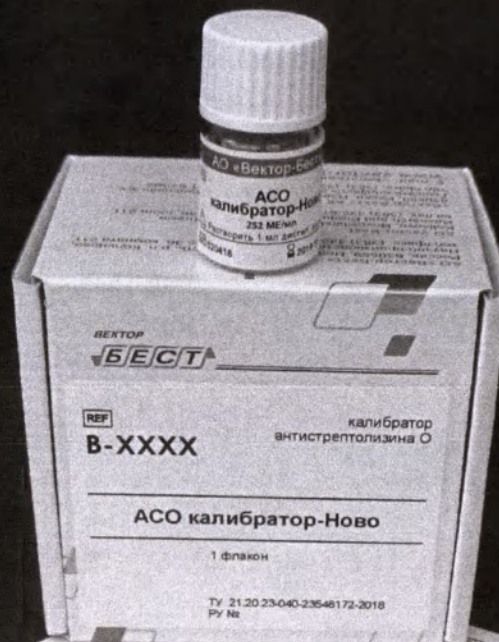

ИНСТРУКЦИЯ

по применению калибратора антистрептолизина О
(АСО калибратор-Ново) фирм...

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Калибратор антистрептолизина О «АСО калибратор-Ново» (далее по тексту – калибратор) предназначен для проведения калибровки при определении антистрептолизина в крови и методе плазмы набором калибраторов О-Ново (латекс)» в одном флаконе.

Калибратор, серия 020418

Хранить при температуре 2-8 °С.
Допускается транспортирование при температуре 2-8 °С.
25 °С не более 10 суток.

Технические характеристики

Наименование показателя	Внешний вид
Растворимость калибратора в дистиллированной воде при температуре от 18 до 25 °С, мин, не более	30
Соответствие концентрации АСО в калибраторе аттестованному значению, %, в пределах	95-105

Аттестованное значение

Дополнительная информация

Лиофильно высушенная масса белого или светло-желтого цвета, 1 фл.

ПАСПОРТ № 2

АСО калибратор-Ново

Калибратор антистрептолизина О

ТУ 21.20.23-040-23548172-2018

Хранить при температуре 2-8 °С.
Допускается транспортирование при температуре 2-8 °С.
25 °С не более 10 суток.

Калибратор, серия 020418

Технические характеристики

Наименование показателя	Внешний вид
Растворимость калибратора в дистиллированной воде при температуре от 18 до 25 °С, мин, не более	30
Соответствие концентрации АСО в калибраторе аттестованному значению, %, в пределах	95-105

Аттестованное значение

Дополнительная информация

Лиофильно высушенная масса белого или светло-желтого цвета, 1 фл.

Характеристика и нормы

Номер серии	Дата изготовления	Дата выдачи паспорта	Срок годности наборов до
020418	2018-04	2018-04-04	2019-10

Результаты

Лиофильно высушенная масса светлого цвета, 1 фл.	Соответствие
30	95-105

АО «Вектор-Бест»

Новосибирская обл., г. Новосибирск, а/я 482

Производственная зона, корпус 36, к. 211.

Приемная: тел. (383)-227-60-30.
Факс (383)-332-94-44

www.vektorbest.ru
vbobik@vektorbest.ru

БЕСТ

калибратор
антистрептолизина О


B-XXXX

АСО калибратор-Ново

1 флакон

TY 21.20.23-040-23548172-2018

Py No


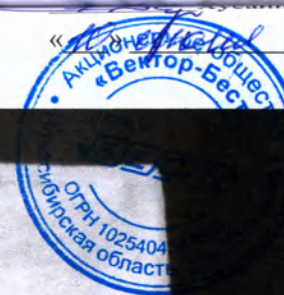


REF

B-XXXX

LOT




020418

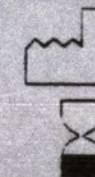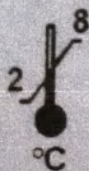

2018-04

2019-10


АСО калибратор-Ново

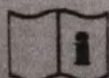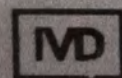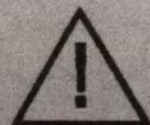



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

*Калибратор инаktivирован
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют*

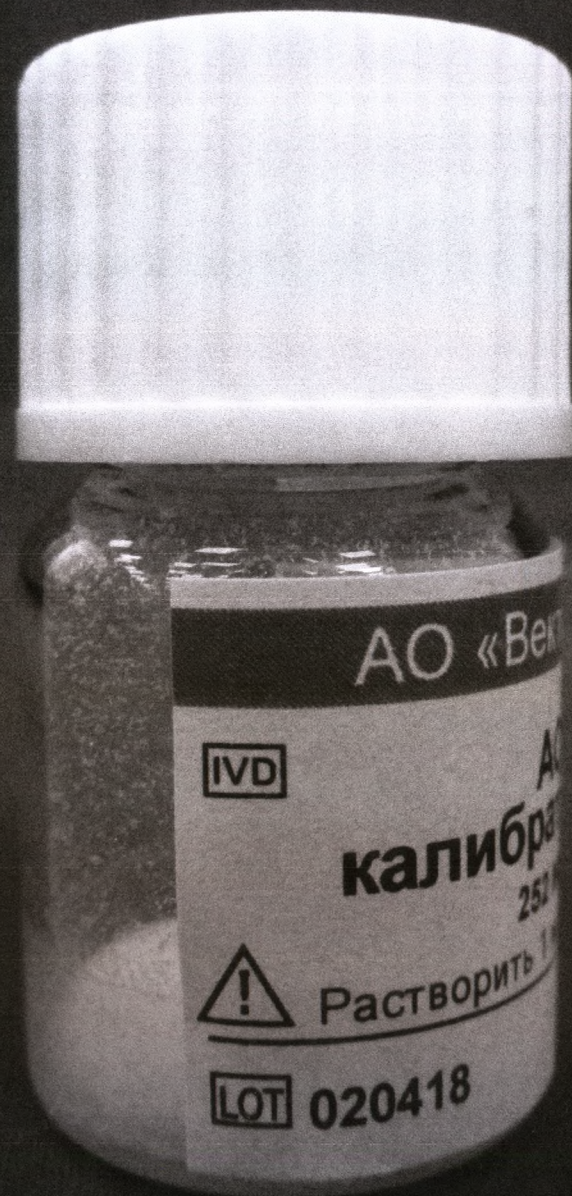


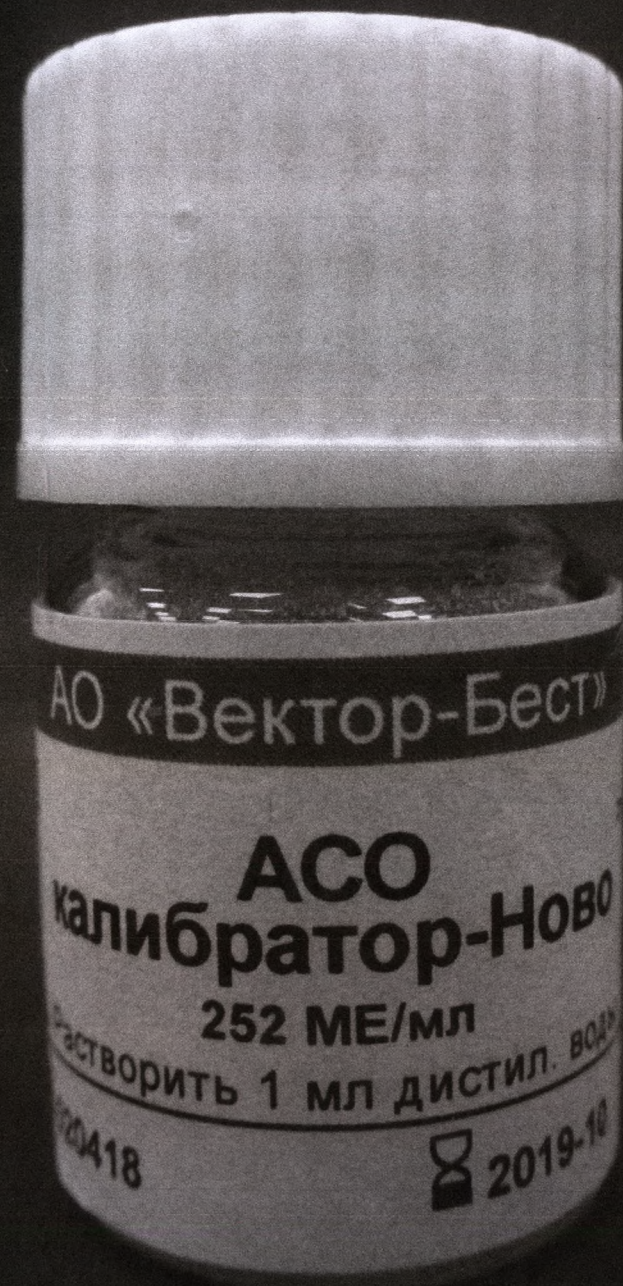

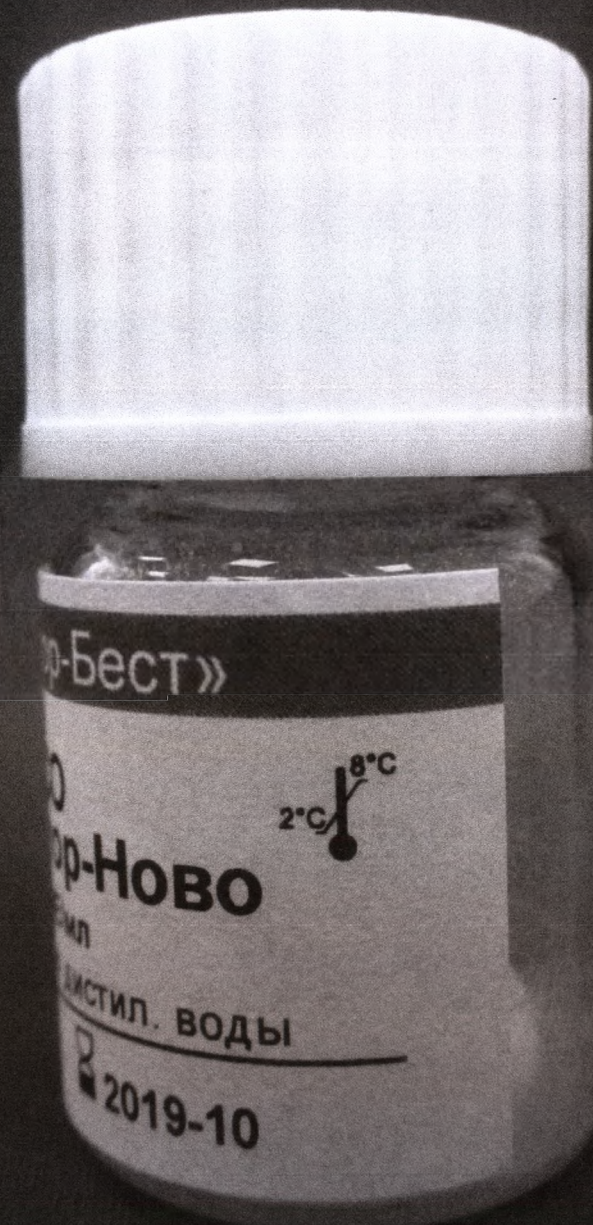



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 листов

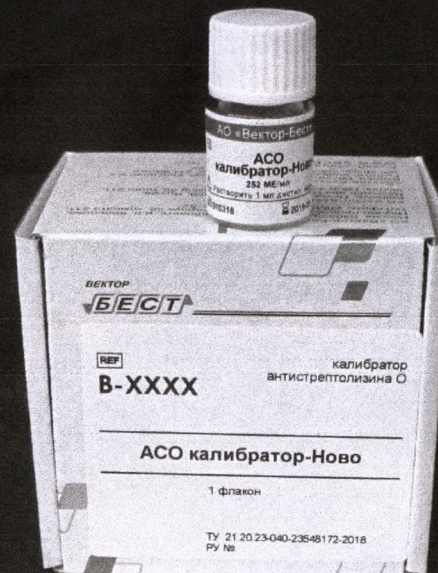


ИНСТРУКЦИЯ

по применению калибратора антистрептолизина О
(АСО калибратор-Ново)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Калибратор антистрептолизина О «АСО калибратор-Ново» (далее по тексту – калибратор) предназначен для проведения калибровки при определении концентрации антистрептолизина О в сыворотке и плазме крови методом турбидиметрическим и методом накаливания. Калибратор выпускается в одной упаковке на основе натрия калиб-...

ПАСПОРТ № 1 калибратор антистрептолизина О		АО «Вектор-Бест» www.vector-best.ru vbobik@vector-best.ru	
ТУ 21.20.23-040-23548172-2018		Дата изготовления 2018-03	
Хранить при температуре 2-8 °С.		Дата выдачи паспорта 2018-03-20	
Транспортировать при температуре 2-8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток.		Срок годности наборов до 2019-09	
Наименование показателя		Номер серии 010318	
Внешний вид		Дата изготовления 2018-03	
Калибратор, серия 010318		Дата выдачи паспорта 2018-03-20	
Технические характеристики		Срок годности наборов до 2019-09	
Растворимость калибратора в дистиллированной воде при температуре от 18 до 25 °С, мин. не более		Характеристика и нормы	
Соответствие концентрации АСО в калибраторе аттестованному значению, %, в пределах		Лиофильно высушенная масса белого или светло-желтого цвета, 1 фл.	
Аттестованное значение		Дополнительная информация	
30		Концентрация АСО, МЕ/мл	
95-105		Аттестованное значение концентрации АСО в калибраторе прослеж...	
28 (соответствует)		Лиофильно высушен...	
96,3 (соответствует)		масса светло-желто...	
		цвета, 1 фл.	
		(соответствует)	


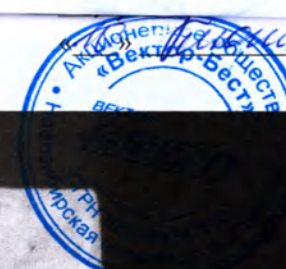


REF

B-XXXX

LOT


010318

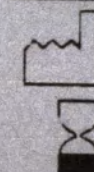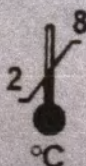


2018-03

2019-03

АСО калибратор-Ново

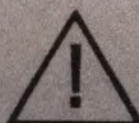

MD

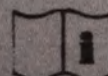

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

*Калибратор инактивирован
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С
и HBsAg отсутствуют*



ВЕКТОР
БЕСТ

REF


B-XXXX

калибратор
антистрептолизина О


АСО калибратор-Ново

1 флакон

ТУ 21.20.23-040-23548172-2018
ПУ №

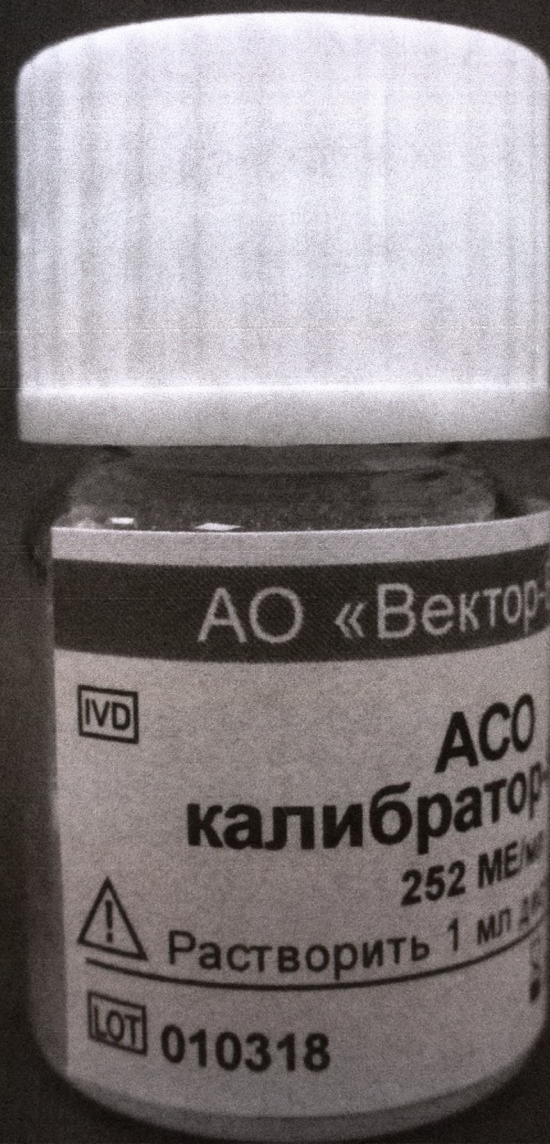



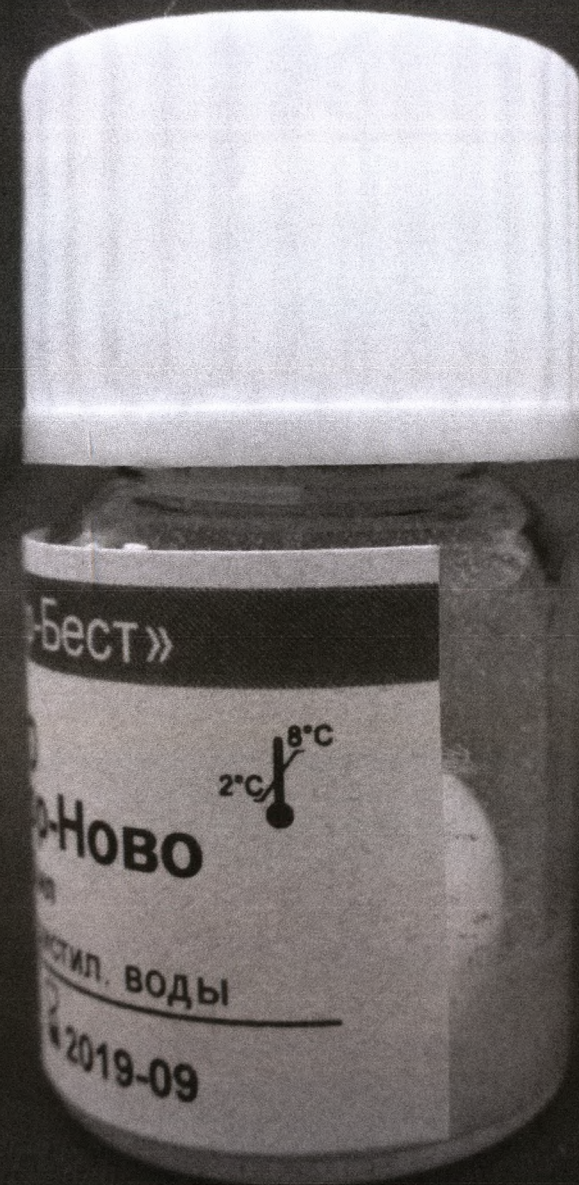



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 листов

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов

«10» июня 2019 г.




Образцы маркировки на Калибратор антистрептолизина О
(АСО калибратор-Ново)

1. Образец этикетки на флакон «АСО калибратор-Ново»

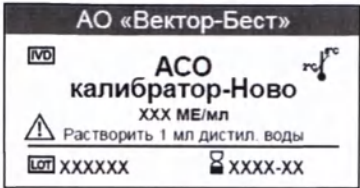
Наименование компонента	Этикетка
«АСО калибратор-Ново»	
Калибратор	

2. Образцы этикеток на коробке «АСО калибратор-Ново»

2.1. Верхняя этикетка.

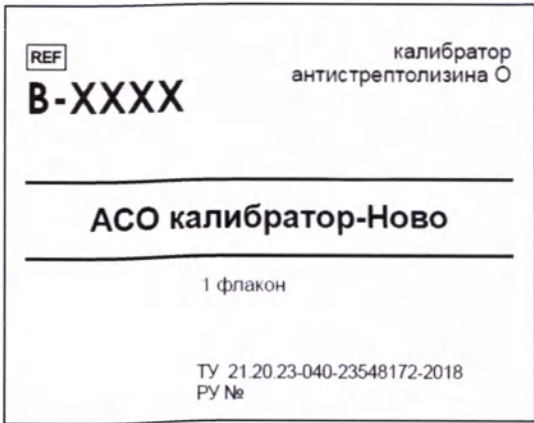«АСО калибратор-Ново»	
-----------------------	--

2.2. Боковая этикетка.

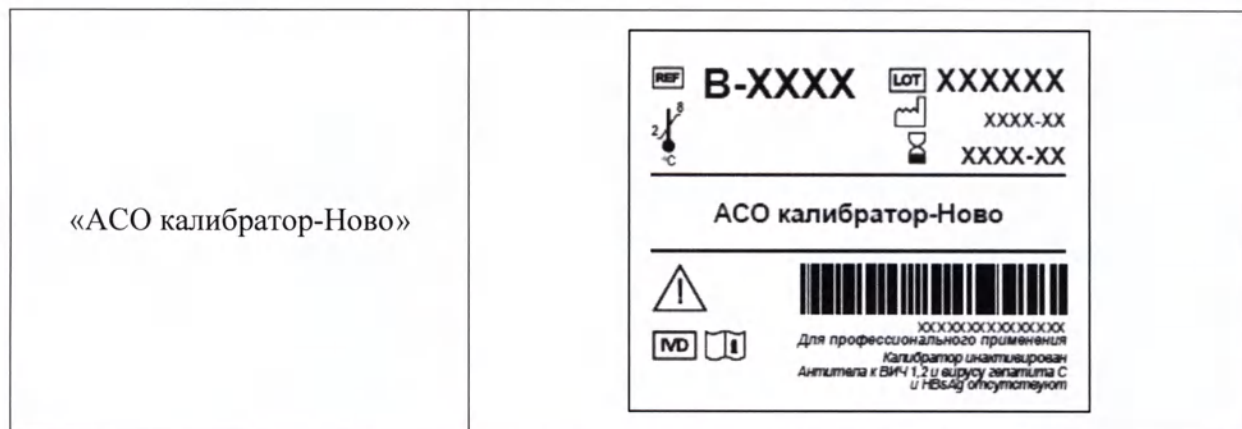


Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

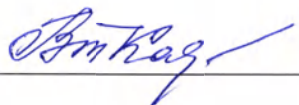

В.К. Ткачев
«20» мая 2019 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
2019 г.