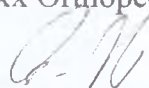


APPROVED BY

CEO
Maxx Orthopedics Inc.,

 Ashesh Shah
"28" OCTOBER 2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эндопротезы коленного сустава Freedom Total Knee System
(Maxx Orthopedics, Inc.(«Макс Ортопедикс, Инк.»),США)

2014

maxx

orthopedics

Наименование изделия

«Эндопротезы коленного сустава Freedom Total Knee System».

Производитель: Maxx Orthopedics, Inc.(«Макс Ортопедикс, Инк.»), США.
531 Plymouth Road, Suite 526, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, USA.

Место производства:

Maxx Orthopedics, Inc.(«Макс Ортопедикс, Инк.»), США.

531 Plymouth Road, Suite 526, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, USA.

Изделие производится в соответствии со стандартами ISO 13485:2003 (номер сертификата: 422727 MP2012, идентификационный номер бланка – 170579906, дата выдачи – 18/11/2013, дата истечения действия – 17/11/2016, нотифицированный орган: DQS Medizinprodukte GmbH) и имеет маркировку CE (номер сертификата: 422727 MRA, идентификационный номер бланка – 170567041, дата выдачи – 19/03/2013, дата истечения действия – 12/04/2015, нотифицированный орган: DQS Medizinprodukte GmbH).

Код изделия по Общероссийскому классификатору продукции ОК-005-93: 94 3800.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н - 26.

Классификация изделия в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н – 600 02 03 30.

Вид контакта с организмом человека – постоянный (пожизненный) контакт.

Условия применения: лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения, только по назначению врача-специалиста.

Область применения.

Изделия применяются в травматологии и ортопедии для замены поврежденного коленного сустава искусственным аналогом при помощи цементного и бесцементного способа установки в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Характеристики изделия.

Эндопротезы коленного сустава Freedom Total Knee System – это набор компонентов, Эндопротезы коленного сустава Freedom Total Knee System – это набор компонентов, которые предназначены для замены суставных поверхностей бедренной кости, большеберцовой кости и надколенника в коленном суставе. Компоненты доступны в широком ассортименте стилей и размеров и изготавливаются из различных типов металлов и неметаллических материалов. Стиль, размер, совместимость и конкретный тип материала компоненты указаны на этикетке наружной поверхности картонной упаковки. Все имплантируемые компоненты рассчитаны только на одноразовое применение.

Информация по подбору изделия:

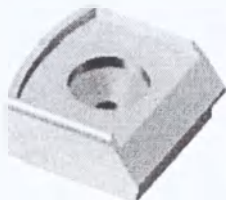
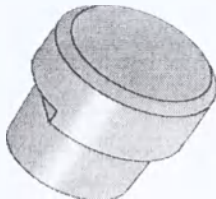
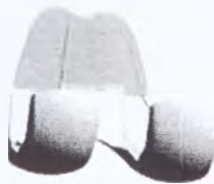
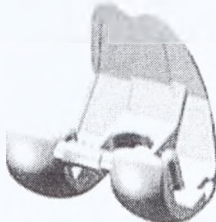
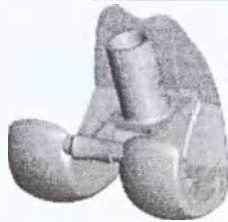
- Совместимость компонентов обеспечивается при совместимости суставного компонента и бедренного компоненты (по буквенному обозначению размера и стилю крепления) и совместимости суставного компонента и большеберцовой основы (по числовому обозначению размера). Например, суставной компонент с обозначением размера **B1-2 PS** (PS – Posterior Stabilized – задняя стабилизация) совместим с бедренным компонентом, размер которого обозначен как **B PS**, и совместим с пластиной большеберцовой основы размера 1 или 2.
Несовместимость может привести к плохому контакту поверхности и вызывать боли, снижение износоустойчивости, создавать нестабильность имплантата или иным образом сокращать срок службы имплантата.
- Допускается использование инструментов и пробников, которые предназначены для применения с этим изделием. Это позволяет обеспечить точное хирургическое моделирование, баланс мягких тканей и оценку функции коленного сустава.
- Выбор исполнений различных компонентов изделия осуществляет врач, исходя из требуемых физических характеристик.
- Без возможности извлечения.
- Полированные поверхности трения бедренных/большеберцовых компонентов ($Ra < 0.05 \mu m$).
- Гладкие поверхности трения полимерных вкладышей ($Ra < 1 \mu m$).

Таблица 1. Описание изделия

#	Наименование	Описание	Материал	Изображение
1.	Винт	Предназначен для крепления вставки большеберцовой и других элементов.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	
2.	Винт конусный	Предназначен для крепления удлинителя ножки эндопротеза или переходника со смещением к остальным частям эндопротеза.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	
3.	Вставка большеберцовая Freedom Total Knee System	Вставка крепится к дистальной поверхности большеберцового плато в случаях значительной потери кости. Разработана для наращивания и крепления при помощи элементов крепления.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	

maxx

orthopedics

	Наименование	Описание	Материал	Изображение
4.	Вставка бедренная дистальная Freedom Total Knee System	Предназначена для крепления винтами к дистальной части бедренного компонента бесцементной фиксации.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	
5.	Вставка бедренная проксимальная Freedom Total Knee System	Предназначена для крепления винтами к проксимальной части бедренного компонента бесцементной фиксации.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	
6.	Заглушка конусная	Заглушка конусная предназначена для заполнения полости на дистальном конце плата большеберцового бесцементной фиксации или на проксимальном конце бедренного компонента бесцементной фиксации. Заглушку убирают при установке удлинителя ножки эндопротеза.	UHMWPE.	
7.	Компонент бедренный Freedom Total Knee System	Предназначен для замещения поверхности дистальной части бедренной кости в ходе операционного вмешательства при помощи цементного способа фиксации.	Co ₂₈ Cr ₆ Mo	3.1 Тип CR:  3.2 Тип PS: 
8.	Компонент бедренный бесцементной фиксации Freedom Total Knee System	Предназначен для замещения поверхности дистальной части бедренной кости в ходе операционного вмешательства при помощи бесцементного способа фиксации.	Co ₂₈ Cr ₆ Mo	

maxx

orthopedics

	Наименование	Описание	Материал	Изображение
9.	Компонент большеберцовый Freedom Total Knee System	Компонент предназначен для замещения проксимальной поверхности большеберцовой кости, крепится к большеберцовому плато.	UHMWPE.	
10.	Компонент большеберцовый Freedom Total Knee System All Poly	Компонент предназначен для замещения проксимальной поверхности большеберцовой кости, крепится к большеберцовому плато. Предназначен для применения с компонентами Freedom Total Knee System All Poly.	UHMWPE.	
11.	Переходник со смещением Freedom Total Knee System	Переходник со смещением изготовлен из титан-алюминий-ванадиевого сплава и предназначен для применения с большеберцовым плато бесцементной фиксации для того, чтобы обеспечить дополнительное угловое смещение на 4 или 6 мм между компонентом бесцементной фиксации и большеберцовой костью. Переходник прикрепляют к большеберцовой кости пациента и компоненту бесцементной фиксации при помощи элемента конического перехода. Переходник со смещение поставляется с винтом, который обеспечивает дополнительную фиксацию.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	
12.	Плато большеберцовое бесцементной фиксации Freedom Total Knee System	Предназначено для применения с компонентами большеберцовыми для замещения искусственной поверхностью проксимальной части большой берцовой кости в ходе операционного вмешательства бесцементным методом фиксации.	Co ₂₈ Cr ₆ Mo	

	Наименование	Описание	Материал	Изображение
		Обеспечивает усиленное крепление к дистальной поверхности большеберцовой кости с одной стороны и крепление к выступающей части большеберцового компонента с другой как напрямую, так и через переходник со смещением.		
13.	Плато большеберцовое Freedom Total Knee System	Предназначено для цементной фиксации для замещения поверхности проксимальной части берцовой кости в ходе операционного вмешательства при помощи цементного способа фиксации. Все исполнения изделия имеют специальный вид крепления с другими элементами.	Co ₂₈ Cr ₆ Mo	
14.	Прокладка для отверстия большеберцовой вставки Freedom Total Knee System	Прокладка применяется для механического закрытия полости на медиальном и латеральном концах проксимальной стороны плато большеберцового бесцементной фиксации. Удаляется во время крепления винта.	UHMWPE	
15.	Прокладка центральная Freedom Total Knee System	Применяется для закрытия отверстия под винт в центре проксимальной части плато большеберцового бесцементной фиксации. Удаляется при установке компонента большеберцового, так как отверстие используется для крепления стержня.	UHMWPE	
16.	Стержень Freedom Total Knee System	Применяется в качестве крепления плато большеберцового и компонента большеберцового (для дополнительной фиксации).	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	
17.	Удлинитель ножки эндопротеза Freedom Total Knee System	Удлинитель ножки эндопротеза представлен в нескольких исполнениях, изготовлен из титан-алюминий-ванадиевого сплава и предназначен для применения с большеберцовым плато бесцементной фиксации.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI	

#	Наименование	Описание	Материал	Изображение
18.	Эндопротез коленный Freedom Total Knee System	Предназначено для крепления к бедренному компоненту, имитирует надколенник.	UHMWPE	

. Техническая спецификация

Материалы:

Наименование изделия	Материал
Компонент бедренный Freedom Total Knee System, компонент бедренный бесцементной фиксации Freedom Total Knee System, плато большеберцовое бесцементной фиксации Freedom Total Knee System, плато большеберцовое Freedom Total Knee System	Co ₂₈ Cr ₆ Mo (соответствует требованиям стандартов: F75 Standard Specification для литья; UNS R30075).
Винт, винт конусный, вставка большеберцовая Freedom Total Knee System, вставка бедренная дистальная Freedom Total Knee System, вставка бедренная проксимальная Freedom Total Knee System, переходник со смещением Freedom Total Knee System, стержень Freedom Total Knee System, удлинитель ножки эндопротеза Freedom Total Knee System.	Ti ₆ Al ₄ Vn ELI (соответствует требованиям стандартов: F136 Standard Specification для ковкого сплава; UNS R56401).
Заглушка конусная, компонент большеберцовый Freedom Total Knee System, компонент большеберцовый Freedom Total Knee System All Poly, прокладка для отверстия большеберцовой вставки Freedom Total Knee System, прокладка центральная Freedom Total Knee System, эндопротез коленный Freedom Total Knee System.	Полиэтилен с ультравысокой молекулярной массой и готовой формы для хирургических имплантатов (соответствует спецификации стандарта F648 Standard Specification) – UHMWPE.

Вид контакта с организмом:

Постоянный (пожизненный) контакт с внутренней средой организма.

Конструкция и габаритные размеры изделия

Конструкторская документация приведена в Технической документации на изделие (см. Приложении 1 Технического документа, далее – Приложение 1).

Таблица 2 Технические характеристики изделия

maxx

orthopedics

	Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
1.	Винт:	RRUUX407-RK	Винт 5 мм
		RRUUX412-RK	Винт 10 мм
		RRUUX417-RK	Винт 15 мм
2.	Винт конусный:	RCUUX403-RK	См. Прил.1.
3.	Вставка большеберцовая Freedom Total Knee System:	RAUUX000-RK	Большеберцовая вставка размер 0
		RAUUX100-RK	Большеберцовая вставка размер 1
		RAUUX200-RK	Большеберцовая вставка размер 2
		RAUUX300-RK	Большеберцовая вставка размер 3
		RAUUX400-RK	Большеберцовая вставка размер 4
		RAUUX500-RK	Большеберцовая вставка размер 5
		RAUUX600-RK	Большеберцовая вставка размер 6
		RAUUX700-RK	Большеберцовая вставка размер 7
		RAUUX800-RK	Большеберцовая вставка размер 8
4.	Вставка бедренная дистальная Freedom Total Knee System:	RGPSDA00-RK	Дистальная феморальная вставка размер А
		RGPSDB00-RK	Дистальная феморальная вставка размер В
		RGPSDC00-RK	Дистальная феморальная вставка размер С
		RGPSDD00-RK	Дистальная феморальная вставка размер D
		RGPSDE00-RK	Дистальная феморальная вставка размер E
		RGPSDF00-RK	Дистальная феморальная вставка размер F
		RGPSDG00-RK	Дистальная феморальная вставка размер G
		RGPSDH00-RK	Дистальная феморальная вставка размер H
5.	Вставка бедренная проксимальная Freedom Total Knee System:	RGPSPA00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер А
		RGPSPB00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер В
		RGSPC00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер С
		RGSPD00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер D

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	RGPSPE00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер E
	RGPSPF00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер F
	RGPSPG00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер G
	RGPSPH00-PK	Проксимальная феморальная вставка размер H
6. Заглушка конусная:	RNUUXX00-RK	См. Прил.1.
7. Компонент бедренный Freedom Total Knee System:	UFCRLA00-K	размер A, CR, левый
	UFCRLB00-K	размер B, CR, левый
	UFCRLC00-K	размер C, CR, левый
	UFCRLD00-K	размер D, CR, левый
	UFCRLE00-K	размер E, CR, левый
	UFCRLF00-K	размер F, CR, левый
	UFCRLG00-K	размер G, CR, левый
	UFCRLH00-K	размер H, CR, левый
	UFCRRA00-K	размер A, CR, правый
	UFCRRB00-K	размер B, CR, правый
	UFCRRC00-K	размер C, CR, правый
	UFCRRD00-K	размер D, CR, правый
	UFCRRE00-K	размер E, CR, правый
	UFCRRF00-K	размер F, CR, правый
	UFCRRG00-K	размер G, CR, правый
	UFCRRH00-K	размер H, CR, правый
	UFPSLA00-K	размер A, PS, левый
	UFPSLB00-K	размер B, PS, левый
	UFPSLC00-K	размер C, PS, левый
	UFPSLD00-K	размер D, PS, левый
	UFPSLE00-K	размер E, PS, левый
	UFPSLF00-K	размер F, PS, левый
	UFPSLG00-K	размер G, PS, левый
	UFPSLH00-K	размер H, PS, левый
	UFPSRA00-K	размер A, PS, правый
	UFPSRB00-K	размер B, PS, правый
	UFPSRC00-K	размер C, PS, правый
	UFPSRD00-K	размер D, PS, правый
	UFPSRE00-K	размер E, PS, правый
	UFPSRF00-K	размер F, PS, правый
	UFPSRG00-K	размер G, PS, правый
	UFPSRH00-K	размер H, PS, правый
8. Компонент бедренный бесцементной фиксации Freedom Total Knee System:	RFPSLA00-RK	размер A, PCK, левый
	RFPSLB00-RK	размер B, PCK, левый
	RFPSLC00-RK	размер C, PCK, левый
	RFPSLD00-RK	размер D, PCK, левый

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	RFPSLE00-RK	размер E, PCK, левый
	RFPSLF00-RK	размер F, PCK, левый
	RFPSLG00-RK	размер G, PCK, левый
	RFPSLH00-RK	размер H, PCK, левый
	RFPSRA00-RK	размер A, PCK, правый
	RFPSRB00-RK	размер B, PCK, правый
	RFPSRC00-RK	размер C, PCK, правый
	RFPSRD00-RK	размер D, PCK, правый
	RFPSRE00-RK	размер E, PCK, правый
	RFPSRF00-RK	размер F, PCK, правый
	RFPSRG00-RK	размер G, PCK, правый
	RFPSRH00-RK.	размер H, PCK, правый
9. Компонент большеберцовый Freedom Total Knee System:	MLCRXA109-K	Большеберцовый компонент CR, размер A1-2 9 мм
	MLCRXA111-K	Большеберцовый компонент CR, размер A1-2 11 мм
	MLCRXA114-K	Большеберцовый компонент CR, размер A1-2 14 мм
	MLCRXA117-K	Большеберцовый компонент CR, размер A1-2 17 мм
	MLCRXB109-K	Большеберцовый компонент CR, размер B1-2 9 мм
	MLCRXB111-K	Большеберцовый компонент CR, размер B1-2 11 мм
	MLCRXB114-K	Большеберцовый компонент CR, размер B1-2 14 мм
	MLCRXB117-K	Большеберцовый компонент CR, размер B1-2 17 мм
	MLCRXC109-K	Большеберцовый компонент CR, размер C1-2 9 мм
	MLCRXC111-K	Большеберцовый компонент CR, размер C1-2 11 мм
	MLCRXC114-K	Большеберцовый компонент CR, размер C1-2 14 мм
	MLCRXC117-K	Большеберцовый компонент CR, размер C1-2 17 мм
	MLCRXC309-K	Большеберцовый компонент CR, размер C3-4 9 мм
	MLCRXC311-K	Большеберцовый компонент CR, размер C3-4 11 мм
	MLCRXC314-K	Большеберцовый компонент CR, размер C3-4 14 мм
	MLCRXC317-K	Большеберцовый компонент CR, размер C3-4 17 мм
	MLCRXD109-K	Большеберцовый компонент

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		CR, размер D1-2 9 мм
	MLCRXD111-K	Большеберцовый компонент CR, размер D1-2 11 мм
	MLCRXD114-K	Большеберцовый компонент CR, размер D1-2 14 мм
	MLCRXD117-K	Большеберцовый компонент CR, размер D1-2 17 мм
	MLCRXD309-K	Большеберцовый компонент CR, размер D3-4 9 мм
	MLCRXD311-K	Большеберцовый компонент CR, размер D3-4 11 мм
	MLCRXD314-K	Большеберцовый компонент CR, размер D3-4 14 мм
	MLCRXD317-K	Большеберцовый компонент CR, размер D3-4 17 мм
	MLCRXE309-K	Большеберцовый компонент CR, размер E3-4 9 мм
	MLCRXE311-K	Большеберцовый компонент CR, размер E3-4 11 мм
	MLCRXE314-K	Большеберцовый компонент CR, размер E3-4 14 мм
	MLCRXE317-K	Большеберцовый компонент CR, размер E3-4 17 мм
	MLCRXE509-K	Большеберцовый компонент CR, размер E5-6 9 мм
	MLCRXE511-K	Большеберцовый компонент CR, размер E5-6 11 мм
	MLCRXE514-K	Большеберцовый компонент CR, размер E5-6 14 мм
	MLCRXE517-K	Большеберцовый компонент CR, размер E5-6 17 мм
	MLCRXF309-K	Большеберцовый компонент CR, размер F3-4 9 мм
	MLCRXF311-K	Большеберцовый компонент CR, размер F3-4 11 мм
	MLCRXF314-K	Большеберцовый компонент CR, размер F3-4 14 мм
	MLCRXF317-K	Большеберцовый компонент CR, размер F3-4 17 мм
	MLCRXF509-K	Большеберцовый компонент CR, размер F5-6 9 мм
	MLCRXF511-K	Большеберцовый компонент CR, размер F5-6 11 мм
	MLCRXF514-K	Большеберцовый компонент CR, размер F5-6 14 мм

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	MLCRXF517-K	Большеберцовый компонент CR, размер F5-6 17 мм
	MLCRXF709-K	Большеберцовый компонент CR, размер F7-8 9 мм
	MLCRXF711-K	Большеберцовый компонент CR, размер F7-8 11 мм
	MLCRXF714-K	Большеберцовый компонент CR, размер F7-8 14 мм
	MLCRXF717-K	Большеберцовый компонент CR, размер F7-8 17 мм
	MLCRXG509-K	Большеберцовый компонент CR, размер G5-6 9 мм
	MLCRXG511-K	Большеберцовый компонент CR, размер G5-6 11 мм
	MLCRXG514-K	Большеберцовый компонент CR, размер G5-6 14 мм
	MLCRXG517-K	Большеберцовый компонент CR, размер G5-6 17 мм
	MLCRXG709-K	Большеберцовый компонент CR, размер G7-8 9 мм
	MLCRXG711-K	Большеберцовый компонент CR, размер G7-8 11 мм
	MLCRXG714-K	Большеберцовый компонент CR, размер G7-8 14 мм
	MLCRXG717-K	Большеберцовый компонент CR, размер G7-8 17 мм
	MLCRXH709-K	Большеберцовый компонент CR, размер H7-8 9 мм
	MLCRXH711-K	Большеберцовый компонент CR, размер H7-8 11 мм
	MLCRXH714-K	Большеберцовый компонент CR, размер H7-8 14 мм
	MLCRXH717-K	Большеберцовый компонент CR, размер H7-8 17 мм
	MLPSXA109-K	Большеберцовый компонент PS, размер A1-2 9 мм
	MLPSXA111-K	Большеберцовый компонент PS, размер A1-2 11 мм
	MLPSXA114-K	Большеберцовый компонент PS, размер A1-2 14 мм
	MLPSXA117-K	Большеберцовый компонент PS, размер A1-2 17 мм
	MLPSXB109-K	Большеберцовый компонент PS, размер B1-2 9 мм
	MLPSXB111-K	Большеберцовый компонент

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		PS, размер B1-2 11 мм
	MLPSXB114-K	Большеберцовый компонент PS, размер B1-2 14 мм
	MLPSXB117-K	Большеберцовый компонент PS, размер B1-2 17 мм
	MLPSXC109-K	Большеберцовый компонент PS, размер C1-2 9 мм
	MLPSXC111-K	Большеберцовый компонент PS, размер C1-2 11 мм
	MLPSXC114-K	Большеберцовый компонент PS, размер C1-2 14 мм
	MLPSXC117-K	Большеберцовый компонент PS, размер C1-2 17 мм
	MLPSXC309-K	Большеберцовый компонент PS, размер C3-4 9 мм
	MLPSXC311-K	Большеберцовый компонент PS, размер C3-4 11 мм
	MLPSXC314-K	Большеберцовый компонент PS, размер C3-4 14 мм
	MLPSXC317-K	Большеберцовый компонент PS, размер C3-4 17 мм
	MLPSXD109-K	Большеберцовый компонент PS, размер D1-2 9 мм
	MLPSXD111-K	Большеберцовый компонент PS, размер D1-2 11 мм
	MLPSXD114-K	Большеберцовый компонент PS, размер D1-2 14 мм
	MLPSXD117-K	Большеберцовый компонент PS, размер D1-2 17 мм
	MLPSXD309-K	Большеберцовый компонент PS, размер D3-4 9 мм
	MLPSXD311-K	Большеберцовый компонент PS, размер D3-4 11 мм
	MLPSXD314-K	Большеберцовый компонент PS, размер D3-4 14 мм
	MLPSXD317-K	Большеберцовый компонент PS, размер D3-4 17 мм
	MLPSXE309-K	Большеберцовый компонент PS, размер E3-4 9 мм
	MLPSXE311-K	Большеберцовый компонент PS, размер E3-4 11 мм
	MLPSXE314-K	Большеберцовый компонент PS, размер E3-4 14 мм
	MLPSXE317-K	Большеберцовый компонент PS, размер E3-4 17 мм

MAXX

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	MLPSXE509-K	Большеберцовый компонент PS, размер E5-6 9 мм
	MLPSXE511-K	Большеберцовый компонент PS, размер E5-6 11 мм
	MLPSXE514-K	Большеберцовый компонент PS, размер E5-6 14 мм
	MLPSXE517-K	Большеберцовый компонент PS, размер E5-6 17 мм
	MLPSXF309-K	Большеберцовый компонент PS, размер F3-4 9 мм
	MLPSXF311-K	Большеберцовый компонент PS, размер F3-4 11 мм
	MLPSXF314-K	Большеберцовый компонент PS, размер F3-4 14 мм
	MLPSXF317-K	Большеберцовый компонент PS, размер F3-4 17 мм
	MLPSXF509-K	Большеберцовый компонент PS, размер F5-6 9 мм
	MLPSXF511-K	Большеберцовый компонент PS, размер F5-6 11 мм
	MLPSXF514-K	Большеберцовый компонент PS, размер F5-6 14 мм
	MLPSXF517-K	Большеберцовый компонент PS, размер F5-6 17 мм
	MLPSXF709-K	Большеберцовый компонент PS, размер F7-8 9 мм
	MLPSXF711-K	Большеберцовый компонент PS, размер F7-8 11 мм
	MLPSXF714-K	Большеберцовый компонент PS, размер F7-8 14 мм
	MLPSXF717-K	Большеберцовый компонент PS, размер F7-8 17 мм
	MLPSXG509-K	Большеберцовый компонент PS, размер G5-6 9 мм
	MLPSXG511-K	Большеберцовый компонент PS, размер G5-6 11 мм
	MLPSXG514-K	Большеберцовый компонент PS, размер G5-6 14 мм
	MLPSXG517-K	Большеберцовый компонент PS, размер G5-6 17 мм
	MLPSXG709-K	Большеберцовый компонент PS, размер G7-8 9 мм
	MLPSXG711-K	Большеберцовый компонент PS, размер G7-8 11 мм
	MLPSXG714-K	Большеберцовый компонент

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		PS, размер G7-8 14 мм
	MLPSXG717-K	Большеберцовый компонент PS, размер G7-8 17 мм
	MLPSXH709-K	Большеберцовый компонент PS, размер H7-8 9 мм
	MLPSXH711-K	Большеберцовый компонент PS, размер H7-8 11 мм
	MLPSXH714-K	Большеберцовый компонент PS, размер H7-8 14 мм
	MLPSXH717-K	Большеберцовый компонент PS, размер H7-8 17 мм
	RLPSXA111-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 11 мм
	RLPSXA114-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 14 мм
	RLPSXA117-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 17 мм
	RLPSXA120-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 20 мм
	RLPSXA123-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 23 мм
	RLPSXA127-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 27 мм
	RLPSXA131-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер A1-2 31 мм
	RLPSXB111-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 11 мм
	RLPSXB114-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 14 мм
	RLPSXB117-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 17 мм
	RLPSXB120-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 20 мм
	RLPSXB123-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 23 мм
	RLPSXB127-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 27 мм
	RLPSXB131-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер B1-2 31 мм
	RLPSXC111-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер C1-2 11 мм
	RLPSXC114-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер C1-2 14 мм
	RLPSXC117-RK	Большеберцовый компонент PCK, размер C1-2 17 мм

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	RLPSXC120-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C1-2 20 мм
	RLPSXC123-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C1-2 23 мм
	RLPSXC127-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C1-2 27 мм
	RLPSXC131-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C1-2 31 мм
	RLPSXC311-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 11 мм
	RLPSXC314-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 14 мм
	RLPSXC317-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 17 мм
	RLPSXC320-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 20 мм
	RLPSXC323-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 23 мм
	RLPSXC327-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 27 мм
	RLPSXC331-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер C3-4 31 мм
	RLPSXD111-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 11 мм
	RLPSXD114-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 14 мм
	RLPSXD117-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 17 мм
	RLPSXD120-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 20 мм
	RLPSXD123-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 23 мм
	RLPSXD127-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 27 мм
	RLPSXD131-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D1-2 31 мм
	RLPSXD311-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 11 мм
	RLPSXD314-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 14 мм
	RLPSXD317-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 17 мм
	RLPSXD320-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 20 мм
	RLPSXD323-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 23 мм

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		РСК, размер D3-4 23 мм
	RLPSXD327-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 27 мм
	RLPSXD331-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер D3-4 31 мм
	RLPSXE311-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 11 мм
	RLPSXE314-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 14 мм
	RLPSXE317-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 17 мм
	RLPSXE320-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 20 мм
	RLPSXE323-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 23 мм
	RLPSXE327-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 27 мм
	RLPSXE331-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E3-4 31 мм
	RLPSXE511-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 11 мм
	RLPSXE514-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 14 мм
	RLPSXE517-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 17 мм
	RLPSXE520-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 20 мм
	RLPSXE523-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 23 мм
	RLPSXE527-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 27 мм
	RLPSXE531-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер E5-6 31 мм
	RLPSXF311-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 11 мм
	RLPSXF314-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 14 мм
	RLPSXF317-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 17 мм
	RLPSXF320-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 20 мм
	RLPSXF323-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 23 мм
	RLPSXF327-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 27 мм

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	RLPSXF331-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F3-4 31 мм
	RLPSXF511-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 11 мм
	RLPSXF514-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 14 мм
	RLPSXF517-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 17 мм
	RLPSXF520-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 20 мм
	RLPSXF523-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 23 мм
	RLPSXF527-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 27 мм
	RLPSXF531-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F5-6 31 мм
	RLPSXF711-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 11 мм
	RLPSXF714-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 14 мм
	RLPSXF717-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 17 мм
	RLPSXF720-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 20 мм
	RLPSXF723-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 23 мм
	RLPSXF727-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 27 мм
	RLPSXF731-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер F7-8 31 мм
	RLPSXG511-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 11 мм
	RLPSXG514-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 14 мм
	RLPSXG517-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 17 мм
	RLPSXG520-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 20 мм
	RLPSXG523-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 23 мм
	RLPSXG527-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 27 мм
	RLPSXG531-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G5-6 31 мм
	RLPSXG711-RK	Большеберцовый компонент

maxx

orthopedics

Наименование		Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
			РСК, размер G7-8 11 мм
		RLPSXG714-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G7-8 14 мм
		RLPSXG717-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G7-8 17 мм
		RLPSXG720-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G7-8 20 мм
		RLPSXG723-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G7-8 23 мм
		RLPSXG727-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G7-8 27 мм
		RLPSXG731-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер G7-8 31 мм
		RLPSXH711-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 11 мм
		RLPSXH714-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 14 мм
		RLPSXH717-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 17 мм
		RLPSXH720-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 20 мм
		RLPSXH723-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 23 мм
		RLPSXH727-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 27 мм
		RLPSXH731-RK	Большеберцовый компонент РСК, размер H7-8 31 мм
10	Компонент большеберцовый Freedom Total Knee System All Poly:	ALCRXA109-K	CR, размер A1 9 мм
		ALCRXA111-K	CR, размер A1 11 мм
		ALCRXA114-K	CR, размер A1 14 мм
		ALCRXA117-K	CR, размер A1 17 мм
		ALCRXA120-K	CR, размер A1 20 мм
		ALCRXB209-K	CR, размер B2 9 мм
		ALCRXB211-K	CR, размер B2 11 мм
		ALCRXB214-K	CR, размер B2 14 мм
		ALCRXB217-K	CR, размер B2 17 мм
		ALCRXB220-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер B2 20 мм
		ALCRXC209-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C2 9 мм
		ALCRXC211-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C2 11 мм
		ALCRXC214-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C2 14 мм
		ALCRXC217-K	Большеберцовый компонент

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		All Poly CR, размер C2 17 мм
	ALCRXC220-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C2 20 мм
	ALCRXC309-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C3 9 мм
	ALCRXC311-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C3 11 мм
	ALCRXC314-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C3 14 мм
	ALCRXC317-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C3 17 мм
	ALCRXC320-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер C3 20 мм
	ALCRXD209-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D2 9 мм
	ALCRXD211-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D2 11 мм
	ALCRXD214-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D2 14 мм
	ALCRXD217-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D2 17 мм
	ALCRXD220-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D2 20 мм
	ALCRXD309-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D3 9 мм
	ALCRXD311-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D3 11 мм
	ALCRXD314-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D3 14 мм
	ALCRXD317-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D3 17 мм
	ALCRXD320-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D3 20 мм
	ALCRXD409-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D4 9 мм
	ALCRXD411-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D4 11 мм
	ALCRXD414-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D4 14 мм
	ALCRXD417-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D4 17 мм
	ALCRXD420-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер D4 20 мм
	ALCRXE409-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E4 9 мм

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	ALCRXE411-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E4 11 мм
	ALCRXE414-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E4 14 мм
	ALCRXE417-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E4 17 мм
	ALCRXE420-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E4 20 мм
	ALCRXE509-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E5 9 мм
	ALCRXE511-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E5 11 мм
	ALCRXE514-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E5 14 мм
	ALCRXE517-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E5 17 мм
	ALCRXE520-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер E5 20 мм
	ALCRXF509-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер F5 9 мм
	ALCRXF511-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер F5 11 мм
	ALCRXF514-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер F5 14 мм
	ALCRXF517-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер F5 17 мм
	ALCRXF520-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер F5 20 мм
	ALCRXG709-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер G7 9 мм
	ALCRXG711-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер G7 11 мм
	ALCRXG714-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер G7 14 мм
	ALCRXG717-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер G7 17 мм
	ALCRXG720-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер G7 20 мм
	ALCRXH709-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер H7 9 мм
	ALCRXH711-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер H7 11 мм
	ALCRXH714-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер H7 14 мм
	ALCRXH717-K	Большеберцовый компонент

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		All Poly CR, размер H7 17 мм
	ALCRXH720-K	Большеберцовый компонент All Poly CR, размер H7 20 мм
	ALPSXA109-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер A1 9 мм
	ALPSXA111-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер A1 11 мм
	ALPSXA114-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер A1 14 мм
	ALPSXA117-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер A1 17 мм
	ALPSXA120-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер A1 20 мм
	ALPSXB209-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер B2 9 мм
	ALPSXB211-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер B2 11 мм
	ALPSXB214-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер B2 14 мм
	ALPSXB217-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер B2 17 мм
	ALPSXB220-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер B2 20 мм
	ALPSXC209-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C2 9 мм
	ALPSXC211-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C2 11 мм
	ALPSXC214-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C2 14 мм
	ALPSXC217-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C2 17 мм
	ALPSXC220-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C2 20 мм
	ALPSXC309-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C3 9 мм
	ALPSXC311-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C3 11 мм
	ALPSXC314-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C3 14 мм
	ALPSXC317-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C3 17 мм
	ALPSXC320-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер C3 20 мм
	ALPSXD209-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D2 9 мм

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
	ALPSXD211-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D2 11 мм
	ALPSXD214-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D2 14 мм
	ALPSXD217-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D2 17 мм
	ALPSXD220-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D2 20 мм
	ALPSXD309-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D3 9 мм
	ALPSXD311-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D3 11 мм
	ALPSXD314-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D3 14 мм
	ALPSXD317-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D3 17 мм
	ALPSXD320-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D3 20 мм
	ALPSXD409-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D4 9 мм
	ALPSXD411-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D4 11 мм
	ALPSXD414-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D4 14 мм
	ALPSXD417-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D4 17 мм
	ALPSXD420-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер D4 20 мм
	ALPSXE409-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E4 9 мм
	ALPSXE411-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E4 11 мм
	ALPSXE414-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E4 14 мм
	ALPSXE417-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E4 17 мм
	ALPSXE420-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E4 20 мм
	ALPSXE509-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E5 9 мм
	ALPSXE511-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E5 11 мм
	ALPSXE514-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E5 14 мм
	ALPSXE517-K	Большеберцовый компонент

maxx

orthopedics

Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		All Poly PS, размер E5 17 мм
	ALPSXE520-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер E5 20 мм
	ALPSXF509-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер F5 9 мм
	ALPSXF511-K,	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер F5 11 мм
	ALPSXF514-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер F5 14 мм
	ALPSXF517-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер F5 17 мм
	ALPSXF520-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер F5 20 мм
	ALPSXG709-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер G7 9 мм
	ALPSXG711-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер G7 11 мм
	ALPSXG714-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер G7 14 мм
	ALPSXG717-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер G7 17 мм
	ALPSXG720-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер G7 20 мм
	ALPSXH709-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер H7 9 мм
	ALPSXH711-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер H7 11 мм
	ALPSXH714-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер H7 14 мм
	ALPSXH717-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер H7 17 мм
	ALPSXH720-K	Большеберцовый компонент All Poly PS, размер H7 20 мм
11	Переходник со смещением Freedom Total Knee System:	RJPSX400-RK Переходник со смещением 4 мм
		RJPSX600-RK Переходник со смещением 6 мм
12	Плато большеберцовое бесцементной фиксации Freedom Total Knee System:	RTUUX100-RK Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 1
		RTUUX200-RK Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 2
		RTUUX300-RK Большеберцовое плато бесцементной фиксации

maxx

orthopedics

Наименование		Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
			размер 3
		RTUUX400-RK	Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 4
		RTUUX500-RK	Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 5
		RTUUX600-RK	Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 6
		RTUUX700-RK	Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 7
		RTUUX800-RK	Большеберцовое плато бесцементной фиксации размер 8
13	Плато большеберцовое Freedom Total Knee System:	MTUUX100-K	Большеберцовое плато размер 1
		MTUUX200-K	Большеберцовое плато размер 2
		MTUUX300-K	Большеберцовое плато размер 3
		MTUUX400-K	Большеберцовое плато размер 4
		MTUUX500-K	Большеберцовое плато размер 5
		MTUUX600-K	Большеберцовое плато размер 6
		MTUUX700-K	Большеберцовое плато размер 7
		MTUUX800-K	Большеберцовое плато размер 8
14	Прокладка для отверстия большеберцовой вставки Freedom Total Knee System:	RMUUX00-RK	См. Прил.1.
15	Прокладка центральная Freedom Total Knee System:	REUUX00-RK	См. Прил.1.
16	Стержень Freedom Total Knee System:	RDUUX00-RK	См. Прил.1.
17	Удлинитель ножки эндопротеза Freedom Total Knee System:	RSUU2075-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 7,5 x 75 мм
		RSUU3075-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 7,5 x 100 мм
		RSUU4075-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 7,5 x 150 мм

	Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		RSUU1090-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 9 x 40 мм
		RSUU2090-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 9 x 75 мм
		RSUU3090-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 9 x 100 мм
		RSUU4090-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 9 x 150 мм
		RSUU2105-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 10,5 x 75 мм
		RSUU3105-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 10,5 x 100 мм
		RSUU4105-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 10,5 x 150 мм
		RSUU1120-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 12 x 40 мм
		RSUU2120-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 12 x 75 мм
		RSUU3120-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 12 x 100 мм
		RSUU4120-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 12 x 150 мм
		RSUU2135-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 13,5 x 75 мм
		RSUU3135-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 13,5 x 100 мм
		RSUU4135-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 13,5 x 150 мм
		RSUU1150-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 15 x 40 мм
		RSUU2150-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 15 x 75 мм
		RSUU3150-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 15 x 100 мм
		RSUU4150-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 15 x 150 мм
		RSUU2165-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 16,5 x 75 мм
		RSUU3165-RK	Удлинитель ножки эндопротеза 16,5 x 100 мм
		RSUU4165-RK.	Удлинитель ножки эндопротеза 16,5 x 150 мм
18	Эндопротез коленный Freedom Total Knee System:	UPUUX825-K	25 мм
		UPUUX828-K	28 мм
		UPUUX831-K	31 мм

#	Наименование	Код для заказа (Артикул)	Технические характеристики
		UPUUX834-K	34 мм
		UPUUX837-K	37 мм
		UPUUX840-K	40 мм

Комплект поставки:

- Эндопротез коленного сустава Freedom Total Knee System – 1 шт *

* Компоненты эндопротеза коленного сустава поставляются в индивидуальной стерильной упаковке по 1 шт. с руководством по эксплуатации

Информация о стерильности изделия.

Все изделия поставляются в стерильном состоянии в защитной упаковке с уровнем надежности стерилизации SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶.

Метод стерилизации указан на этикетке наружной картонной упаковки. Компоненты, стерилизуемые путем облучения, подвергают воздействию гамма-излучения в дозе минимум 25 кГр.

Упаковка всех стерильных изделий перед вскрытием должны быть осмотрена на предмет дефектов стерильного барьера. В случае выявления такого дефекта изделие должно быть возвращено в нестерильном виде. Следует применять пробные модели компонентов, чтобы избежать необходимости вскрывать какой-либо элемент стерильной упаковки до непосредственного использования компонентов.

Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить загрязнение компонента. В случае загрязнения изделие следует утилизировать в соответствии с правилами, указанными в данном документе.

Если упаковка вскрыта, но изделие не использовано, компонент нельзя стерилизовать повторно. Его необходимо выбросить или вернуть поставщику.

Условия хранения и транспортировки.

Условия транспортирования: температура воздуха от +5°C до +42°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия хранения и эксплуатации: температура воздуха от +5°C до +42°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном

давлении 500 – 1060 гПа.

Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на этикетке каждого изделия.

Рекомендации врачу-специалисту.

Показания:

- Тяжелый болевой синдром в коленном суставе, потеря подвижности, инвалидность вследствие ревматоидного артрита, остеоартроза, травматического артрита, полиартрита.
- Коррекция функциональных деформаций.
- Посттравматическая потеря контура коленного сустава, в особенности при наличии пателло-фemorальной эрозии, дисфункции, или состояния после пателлэктомии.
- Умеренная вальгусная, варусная деформация или флексионная травма.
- Переломы коленного сустава, не поддающиеся лечению другими методами.
- Ревизионное хирургическое вмешательство при достаточном количестве костной ткани и целостности мягких тканей.

Противопоказания:

- Инфекция поврежденного сустава в анамнезе, которая может повлиять на функцию имплантируемого протеза.
- Менее, чем оптимальное количество костной ткани на бедренной или большеберцовой поверхностях (вследствие перенесенного заболевания, инфекции или предшествующих хирургических процедур), не обеспечивающее достаточной поддержки для имплантата.
- Сниженное количество скелетной костной ткани.
- Невропатическое заболевание, которое нежелательным образом влияет на протезируемый сустав.
- Остеопороз или дефицит мускулатуры, ухудшающие состояние пораженной конечности.
- Безболезненный стабильный артродез в адекватном функциональном положении.
- Нестабильность коленного сустава вследствие нарушения целостности коллатеральной связки.
- Пациенты, у которых масса тела, возраст или уровень активности могут вызвать чрезмерные нагрузки и раннюю несостоятельность системы.

Потенциальные осложнения:

- Длительный отек или инфекция.
- Отсутствие улучшения в объеме движений.
- Невропатические расстройства.

- Вывихи, переломы костей и\или нестабильность сустава.
- По литературным данным существует вероятность, что износ полиэтиленовых компонентов может привести к резорбции и разрежению костной ткани и связанной с этим инфекции.
- Возможность реакции чувствительности на металл.
- Венозный тромбоз.
- Длительный или чрезмерный болевой и\или воспалительный синдром в суставе.
- Асептическое расшатывание имплантата.

Меры предосторожности

- Перед клиническим применением хирург должен тщательно изучить все аспекты хирургической процедуры и ограничения используемого изделия. Пациентов также следует проинформировать об ограничениях изделия, включая,, но не ограничиваясь влиянием массы тела пациента и физическую активность, и обучить контролировать свою физическую активность надлежащим образом.
- Протез коленного сустава не восстановит функции суставов до уровня, который ожидается от нормальной здоровой кости, поэтому пациенту следует сдерживать свои ожидания до реалистичного уровня.
- Как и при использовании любых других протезных имплантатов, долговечность компонентов зависит от многочисленных биологических, биомеханических и других внешних факторов, которые могут ограничивать срок службы протеза. Выполнение функций по показаниям, противопоказаниям, мерам предосторожности и предупреждениям касательно этого изделия критически важно для максимизации срока службы.

Указания по применению

Вероятность возникновения осложнений и\или несостоятельности результатов эндопротезирования повышается в случаях, когда физическое и клиническое состояние пациента (например, масса тела или другие заболевания) неблагоприятно для протезирования, когда цели пациента в отношении функциональных результатов превышает разумно допустимые возможности, когда ожидания пациента в отношении функции коленного сустава не соответствуют реальным возможностям, и\или когда пациент проходит недостаточное количество реабилитационных мероприятий после хирургической операции. Чрезмерная физическая активность и травма могут привести к расшатыванию, износу и\или поломке протеза коленного сустава. Пациента следует проинструктировать в отношении всех послеоперационных ограничений, в частности, связанных с профессиональной и спортивной деятельностью, а также о возможности, что эндопротез, или его отдельные компоненты, могут изнашиваться, стать несостоятельными или потребовать замену

Предупреждения:

- Это изделие предназначено для использования только у одного пациента. никогда не используйте имплантат повторно, даже если он выглядит неповрежденным.
- Все поврежденные имплантаты должны быть утилизированы в соответствии с правилами утилизации, которые приведены в данном документе.
- Полированные области сочленения не должны соприкасаться с твердыми или абразивными поверхностями.
- Области сочленения не должны быть загрязнены посторонними частицами. Их необходимо тщательно очистить перед сборкой протеза.
- Контурирование или сгибание имплантата может снижать его устойчивость к усталостным нагрузкам и привести к ранней несостоятельности под нагрузкой.
- Полностью полиэтиленовые большеберцовые пластины основы следует ограничить использованием у пациентов с низкой требовательностью (то есть небольшой массой тела и уровнем активности) и хорошим качеством костной ткани.
- Все упаковки с дефектами необходимо возвращать поставщику без повреждения стерильного барьера. Повторная стерилизация изделия запрещена.

Технический ремонт и обслуживание.

Технический ремонт и гарантийное обслуживание изделие не подлежит. Замена эндопротезов в связи с истечением срока службы не предусмотрена.

Маркировка изделия.

Каждое изделие упаковано индивидуально в блистер из полиэтилена и материала Tyvek (упаковка валидирована для финишной стерилизации радиационным методом), а также картонную коробку (Рис.5.3 Упаковка изделия

). Изделия поставляются стерильными, при условии, что упаковка не была открыта, повреждена или срок ее годности не истек.

Маркировка изделия содержит следующую информацию:

- Информация о компании-представителе (товарный знак компании MERIL LIFE SCIENCE INDIA PRIVATE LIMITED),
- Артикул (номер для заказа),
- Серийный номер изделия.

Маркировка упаковки изделия (упаковки для финишной стерилизации) содержит следующую информацию (Рис.5.2 Маркировка внутреннего слоя упаковки

):

maxx

orthopedics

- Информация о производителе,
- Информация о том, что изделие поставляется стерильным,
- Символ «перед применением ознакомьтесь с инструкцией»,

Маркировка упаковки изделия (картонной коробки) содержит следующую информацию (Рис. 5.4. Маркировка коробки изделия

):

- Информация о производителе,
- Информация о представителе на территории Европейского союза,
- CE маркировка,
- Информация о том, что изделие поставляется стерильным,

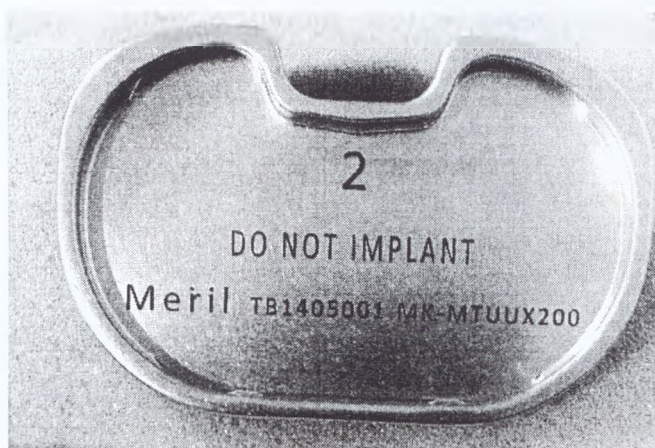
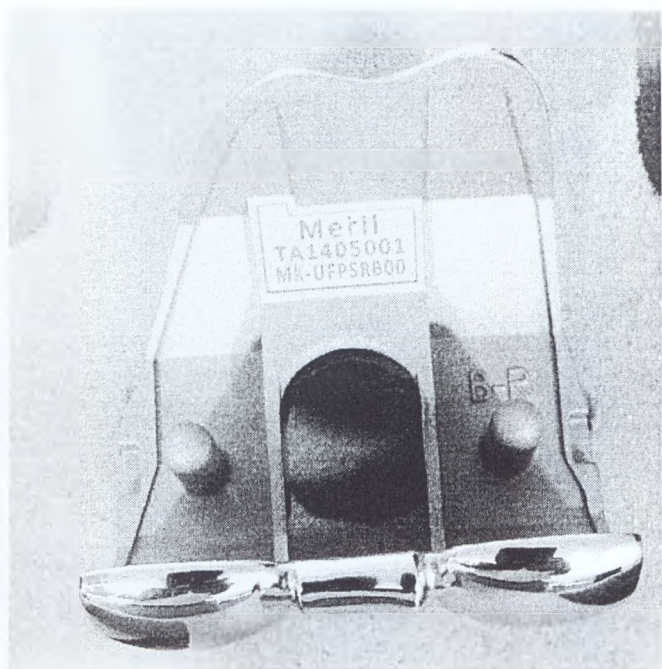


Рис.5.1 Маркировка изделия

maxx

orthopedics



Рис.5.2 Маркировка внутреннего слоя упаковки

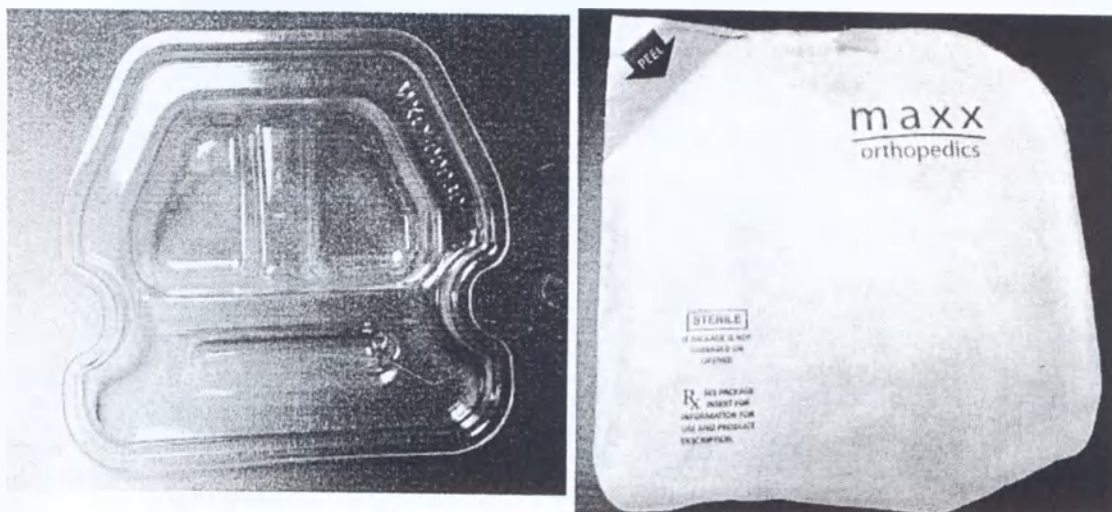


Рис.5.3 Упаковка изделия

maxx

orthopedics



Рис. 5.4. Маркировка коробки изделия

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

maxx

orthopedics

Гарантии

Гарантийный срок хранения – 5 лет, срок сохранения стерильности – 5 лет.

Адрес для приема рекламаций:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Элмас" (ООО "Элмас")

Юридический адрес: 141190, г. Фрязино, Заводской пр-д д. 4,

Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 40, стр. 2а, оф. 103

ИНН 5052001759, КПП 505201001, ОКПО 31848333.

Maxx Orthopedics, Inc. («Макс Ортопедикс, Инк.»), США.

531 Plymouth Road, Suite 526, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, USA.

Адрес для приема рекламаций:

Maxx Orthopedics, Inc. («Макс Ортопедикс, Инк.»), США.

531 Plymouth Road, Suite 526, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, USA.

Приложение 1. Ассортимент изделия

I. Эндопротезы коленного сустава Freedom Total Knee System, в составе:

1. Винт: RRUUX407-RK, RRUUX412-RK, RRUUX417-RK.

2. Винт конусный: RCUUX403-RK.

3. Вставка большеберцовая Freedom Total Knee System: RAUUX000-RK, RAUUX100-RK, RAUUX200-RK, RAUUX300-RK, RAUUX400-RK, RAUUX500-RK, RAUUX600-RK, RAUUX700-RK, RAUUX800-RK.

4. Вставка бедренная дистальная Freedom Total Knee System: RGPSDA00-RK, RGPSDB00-RK, RGPSDC00-RK, RGPSDD00-RK, RGPSDE00-RK, RGPSDF00-RK, RGPSDG00-RK, RGPSDH00-RK.

5. Вставка бедренная проксимальная Freedom Total Knee System: RGPSPA00-PK, RGPSPB00-PK, RGSPC00-PK, RGPSPD00-PK, RGPSPE00-PK, RGPSPF00-PK, RGPSPG00-PK, RGPSPH00-PK.

6. Заглушка конусная: RNUUX00-RK.

7. Компонент бедренный Freedom Total Knee System: UFCRLA00-K, UFCRLB00-K, UFCRLC00-K, UFCRLD00-K, UFCRLE00-K, UFCRLF00-K, UFCRLG00-K, UFCRLH00-K, UFCRRA00-K, UFCRRB00-K, UFCRRC00-K, UFCRRD00-K, UFCRRE00-K, UFCRRF00-K, UFCRRG00-K, UFCRRH00-K, UFPSLA00-K, UFPSLB00-K, UFPSLC00-K, UFPSLD00-K, UFPSLE00-K, UFPSLF00-K, UFPSLG00-K, UFPSLH00-K, UFPSRA00-K, UFPSRB00-K, UFPSRC00-K, UFPSRD00-K, UFPSRE00-K, UFPSRF00-K, UFPSRG00-K, UFPSRH00-K.

8. Компонент бедренный бесцементной фиксации Freedom Total Knee System: RFPSLA00-RK, RFPSLB00-RK, RFPSLC00-RK, RFPSLD00-RK, RFPSLE00-RK, RFPSLF00-RK, RFPSLG00-RK, RFPSLH00-RK, RFPSRA00-RK, RFPSRB00-RK, RFPSRC00-RK, RFPSRD00-RK, RFPSRE00-RK, RFPSRF00-RK, RFPSRG00-RK, RFPSRH00-RK.

9. Компонент большеберцовый Freedom Total Knee System: MLCRXA109-K, MLCRXA111-K, MLCRXA114-K, MLCRXA117-K, MLCRXB109-K, MLCRXB111-K, MLCRXB114-K, MLCRXB117-K, MLCRXC109-K, MLCRXC111-K, MLCRXC114-K, MLCRXC117-K, MLCRXC309-K, MLCRXC311-K, MLCRXC314-K, MLCRXC317-K, MLCRXD109-K, MLCRXD111-K, MLCRXD114-K, MLCRXD117-K, MLCRXD309-K, MLCRXD311-K, MLCRXD314-K, MLCRXD317-K, MLCRXE309-K, MLCRXE311-K, MLCRXE314-K, MLCRXE317-K, MLCRXE509-K, MLCRXE511-K, MLCRXE514-K, MLCRXE517-K, MLCRXF309-K, MLCRXF311-K, MLCRXF314-K, MLCRXF317-K, MLCRXF509-K, MLCRXF511-K, MLCRXF514-K, MLCRXF517-K, MLCRXF709-K, MLCRXF711-K, MLCRXF714-K, MLCRXF717-K, MLCRXG509-K, MLCRXG511-K, MLCRXG514-K, MLCRXG517-K, MLCRXG709-K, MLCRXG711-K, MLCRXG714-K, MLCRXG717-K, MLCRXH709-K, MLCRXH711-K, MLCRXH714-K, MLCRXH717-K, MLPSXA109-K, MLPSXA111-K, MLPSXA114-K, MLPSXA117-K, MLPSXB109-K, MLPSXB111-K, MLPSXB114-K, MLPSXB117-K, MLPSXC109-K, MLPSXC111-K, MLPSXC114-K, MLPSXC117-K, MLPSXC309-K, MLPSXC311-K, MLPSXC314-K, MLPSXC317-K, MLPSXD109-K, MLPSXD111-K, MLPSXD114-K, MLPSXD117-K, MLPSXD309-K, MLPSXD311-K, MLPSXD314-K, MLPSXD317-K, MLPSXE309-K, MLPSXE311-K, MLPSXE314-K, MLPSXE317-K, MLPSXE509-K, MLPSXE511-K, MLPSXE514-K, MLPSXE517-K, MLPSXF309-K, MLPSXF311-K, MLPSXF314-K, MLPSXF317-K, MLPSXF509-K, MLPSXF511-K, MLPSXF514-K, MLPSXF517-K, MLPSXF709-K, MLPSXF711-K, MLPSXF714-K, MLPSXF717-K, MLPSXG509-K, MLPSXG511-K, MLPSXG514-K, MLPSXG517-K, MLPSXG709-K, MLPSXG711-K, MLPSXG714-K, MLPSXG717-K, MLPSXH709-K, MLPSXH711-K, MLPSXH714-K, MLPSXH717-K, RLPSXA111-RK, RLPSXA114-RK, RLPSXA117-RK, RLPSXA120-RK, RLPSXA123-RK, RLPSXA127-RK, RLPSXA131-RK, RLPSXB111-RK, RLPSXB114-RK, RLPSXB117-RK, RLPSXB120-RK, RLPSXB123-RK, RLPSXB127-RK, RLPSXB131-RK, RLPSXC111-RK, RLPSXC114-RK, RLPSXC117-RK, RLPSXC120-RK, RLPSXC123-RK, RLPSXC127-RK, RLPSXC131-RK, RLPSXC311-RK, RLPSXC314-RK, RLPSXC317-RK, RLPSXC320-RK, RLPSXC323-RK, RLPSXC327-RK, RLPSXC331-RK, RLPSXD111-RK, RLPSXD114-RK, RLPSXD117-RK, RLPSXD120-RK, RLPSXD123-RK, RLPSXD127-RK, RLPSXD131-RK, RLPSXD311-

RK, RLPSXD314-RK, RLPSXD317-RK, RLPSXD320-RK, RLPSXD323-RK, RLPSXD327-RK, RLPSXD331-RK, RLPSXE311-RK, RLPSXE314-RK, RLPSXE317-RK, RLPSXE320-RK, RLPSXE323-RK, RLPSXE327-RK, RLPSXE331-RK, RLPSXE511-RK, RLPSXE514-RK, RLPSXE517-RK, RLPSXE520-RK, RLPSXE523-RK, RLPSXE527-RK, RLPSXE531-RK, RLPSXF311-RK, RLPSXF314-RK, RLPSXF317-RK, RLPSXF320-RK, RLPSXF323-RK, RLPSXF327-RK, RLPSXF331-RK, RLPSXF511-RK, RLPSXF514-RK, RLPSXF517-RK, RLPSXF520-RK, RLPSXF523-RK, RLPSXF527-RK, RLPSXF531-RK, RLPSXF711-RK, RLPSXF714-RK, RLPSXF717-RK, RLPSXF720-RK, RLPSXF723-RK, RLPSXF727-RK, RLPSXF731-RK, RLPSXG511-RK, RLPSXG514-RK, RLPSXG517-RK, RLPSXG520-RK, RLPSXG523-RK, RLPSXG527-RK, RLPSXG531-RK, RLPSXG711-RK, RLPSXG714-RK, RLPSXG717-RK, RLPSXG720-RK, RLPSXG723-RK, RLPSXG727-RK, RLPSXG731-RK, RLPSXH711-RK, RLPSXH714-RK, RLPSXH717-RK, RLPSXH720-RK, RLPSXH723-RK, RLPSXH727-RK, RLPSXH731-RK.

10. Компонент большеберцовый Freedom Total Knee System All Poly: ALCRXA109-K, ALCRXA111-K, ALCRXA114-K, ALCRXA117-K, ALCRXA120-K, ALCRXB209-K, ALCRXB211-K, ALCRXB214-K, ALCRXB217-K, ALCRXB220-K, ALCRXC209-K, ALCRXC211-K, ALCRXC214-K, ALCRXC217-K, ALCRXC220-K, ALCRXC309-K, ALCRXC311-K, ALCRXC314-K, ALCRXC317-K, ALCRXC320-K, ALCRXD209-K, ALCRXD211-K, ALCRXD214-K, ALCRXD217-K, ALCRXD220-K, ALCRXD309-K, ALCRXD311-K, ALCRXD314-K, ALCRXD317-K, ALCRXD320-K, ALCRXD409-K, ALCRXD411-K, ALCRXD414-K, ALCRXD417-K, ALCRXD420-K, ALCRXE409-K, ALCRXE411-K, ALCRXE414-K, ALCRXE417-K, ALCRXE420-K, ALCRXE509-K, ALCRXE511-K, ALCRXE514-K, ALCRXE517-K, ALCRXE520-K, ALCRXF509-K, ALCRXF511-K, ALCRXF514-K, ALCRXF517-K, ALCRXF520-K, ALCRXG709-K, ALCRXG711-K, ALCRXG714-K, ALCRXG717-K, ALCRXG720-K, ALCRXH709-K, ALCRXH711-K, ALCRXH714-K, ALCRXH717-K, ALCRXH720-K, ALPSXA109-K, ALPSXA111-K, ALPSXA114-K, ALPSXA117-K, ALPSXA120-K, ALPSXB209-K, ALPSXB211-K, ALPSXB214-K, ALPSXB217-K, ALPSXB220-K, ALPSXC209-K, ALPSXC211-K, ALPSXC214-K, ALPSXC217-K, ALPSXC220-K, ALPSXC309-K, ALPSXC311-K, ALPSXC314-K, ALPSXC317-K, ALPSXC320-K, ALPSXD209-K, ALPSXD211-K, ALPSXD214-K, ALPSXD217-K, ALPSXD220-K, ALPSXD309-K, ALPSXD311-K, ALPSXD314-K, ALPSXD317-K, ALPSXD320-K, ALPSXD409-K, ALPSXD411-K, ALPSXD414-K, ALPSXD417-K, ALPSXD420-K, ALPSXE409-K, ALPSXE411-K, ALPSXE414-K, ALPSXE417-K, ALPSXE420-K, ALPSXE509-K, ALPSXE511-K, ALPSXE514-K, ALPSXE517-K, ALPSXE520-K, ALPSXF509-K, ALPSXF511-K, ALPSXF514-K, ALPSXF517-K, ALPSXF520-K, ALPSXG709-K, ALPSXG711-K, ALPSXG714-K, ALPSXG717-K, ALPSXG720-K, ALPSXH709-K, ALPSXH711-K, ALPSXH714-K, ALPSXH717-K, ALPSXH720-K.

11. Переходник со смещением Freedom Total Knee System: RJPSX400-RK, RJPSX600-RK.

12. Плато большеберцовое бесцементной фиксации Freedom Total Knee System: RTUUX100-RK, RTUUX200-RK, RTUUX300-RK, RTUUX400-RK, RTUUX500-RK, RTUUX600-RK, RTUUX700-RK, RTUUX800-RK.

13. Плато большеберцовое Freedom Total Knee System: MTUUX100-K, MTUUX200-K, MTUUX300-K, MTUUX400-K, MTUUX500-K, MTUUX600-K, MTUUX700-K, MTUUX800-K.

14. Прокладка для отверстия большеберцовой вставки Freedom Total Knee System: RMUUX00-RK.

15. Прокладка центральная Freedom Total Knee System: REUUX00-RK.

16. Стержень Freedom Total Knee System: RDUUX00-RK.

17. Удлинитель ножки эндопротеза Freedom Total Knee System: RSUU2075-RK, RSUU3075-RK, RSUU4075-RK, RSUU1090-RK, RSUU2090-RK, RSUU3090-RK, RSUU4090-RK, RSUU2105-RK, RSUU3105-RK, RSUU4105-RK, RSUU1120-RK, RSUU2120-RK, RSUU3120-RK, RSUU4120-RK, RSUU2135-RK, RSUU3135-RK, RSUU4135-RK, RSUU1150-RK, RSUU2150-RK, RSUU3150-RK, RSUU4150-RK, RSUU2165-RK, RSUU3165-RK, RSUU4165-RK.

18. Эндопротез коленный Freedom Total Knee System: UPUUX825-K, UPUUX828-K, UPUUX831-K, UPUUX834-K, UPUUX837-K, UPUUX840-K.

Содружество Пенсильвании)

) SS:

Округ Монтгомери)

Сегодня, 28 октября 2014 года ко мне, Лоррейн М. Ореник, нижеподписавшемуся нотариусу, явился Ашеш Шах, известный мне лично (или должным образом подтвердивший свою личность), чьим именем подписан настоящий документ и подтвердил мне, что он совершил вышеуказанные действия в рамках имеющихся у него полномочий.

ЗАВЕРЕНО моей подписью и печатью

подпись/

Лоррейн М. Ореник, Нотариус

Штамп:

СОДРУЖЕСТВО ПЕНСИЛЬВАНИИ

НОТАРИАЛЬНЫЙ ШТАМП

Лоррейн М. Ореник, Нотариус

Муниципалитет Уайтмарш, округ Монтгомери

Мои полномочия действительны до 23 июня 2018 г.

Maxx Orthopedics

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор

«Макс Ортопедикс Инк.» (Maxx Orthopedics Inc.)

/подпись/ Ашеш Шах

«28» октября 2014 г.

Тисненая печать: «Макс Ортопедикс Инк.» (Maxx Orthopedics Inc.) * 2006 * Содружество Пенсильвании

531 Плимут Роад, Сьюэт 526 Плимут Митинг, Пенсильвания 19462, тел.: +1.484.342.00921/70

Перевод с английского языка на русский язык выполнил переводчик Алфёров Арсений Дмитриевич. Достоверность перевода подтверждаю.

Город Москва, тринадцатого ноября две тысячи четырнадцатого года.

Алфёров Арсений Дмитриевич

Город Москва, тринадцатого ноября две тысячи четырнадцатого года.

Я, Дормидонтова Любовь Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Алфёровым Арсением Дмитриевичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-017

Взыскано по тарифу:

100 руб

Нотариус г.Москвы

Л.Ю.Дормидонтова

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 38 листов
Нотариус

Л.Ю.Дормидонтова

Всего проинформировано,
прокумеровано и скреплено
печатью 39 листов
Нотариус



Город Москва.

Четвертое

вектор 08-тысячи-лет-на-плато-года

Я, Дормидонтова Любовь Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую истинность этой копии с подлинником документа, последний документ, приписки, зачеркнутых слов и иных неогворенных исправлений или каких-либо особенностей и

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании истинности копии документа не подтверждается истинность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Нотариус



ва